

PHILIPS

HearLink



Kurzanleitung Philips HearLink 2 App mit der Apple Watch

So installieren, koppeln und steuern Sie HearLink 2 mit der Apple Watch

Mit der Apple Watch können Sie die Philips HearLink Hörgeräte steuern, d.h. Sie können die Lautstärke Ihrer Hörgeräte ändern, das Programm wechseln, die Hörgeräte stummschalten, die Fernmikrofon-Funktion nutzen, den Batteriestand prüfen und noch mehr. Und spezielle Funktionen mit dem Namen "Komplikationen" helfen, schnell über das Ziffernblatt auf die App zuzugreifen.

Erste Schritte

Bevor Sie die HearLink 2 App auf einer Apple Watch nutzen können, muss die App auf einem iPhone installiert sein. Und die Hörgeräte müssen mit dem iPhone gekoppelt sein.

Systemanforderung

Um die App mit der Apple Watch zu nutzen benötigen Sie:

- Apple Watch Series 4 oder höher
- watchOS 8 oder höher



Scannen Sie den QR Code, um die HearLink 2 App vom App Store zu laden



Installation der HearLink 2 auf der Apple Watch


So starten Sie mit HearLink 2 auf der Apple Watch



Zuerst laden Sie die **HearLink 2 App** aus dem App Store auf Ihr iPhone und koppeln die Hörgeräte mit dem iPhone.



Öffnen Sie die **Watch App** auf dem iPhone.

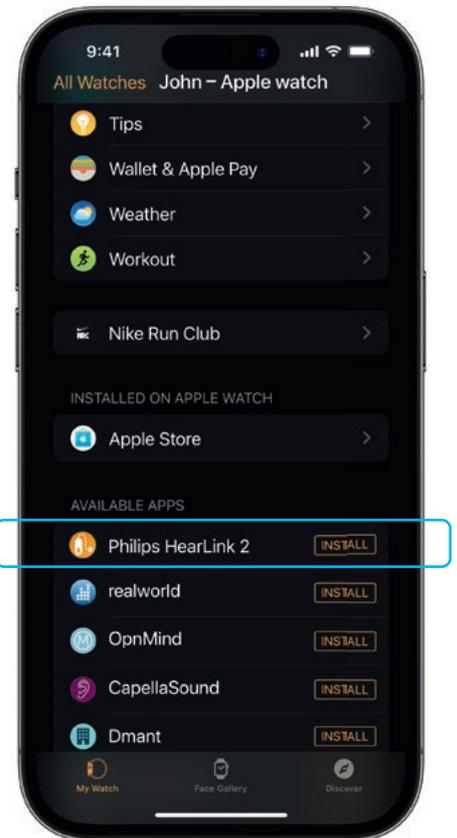

Scrollen Sie nach unten zu VERFÜGBARE APPS und klicken Sie rechts neben dem HearLink 2 Symbol auf **INSTALLIEREN**. Die App wird nun auf der Apple Watch installiert.

So bedienen Sie die Hauptfunktionen in HearLink 2 auf der Apple Watch

Öffnen Sie die App, indem Sie auf das **HearLink 2 App** Symbol tippen.



Prüfen des Batteriestatus

Den Batteriestatus sehen Sie, wenn Sie im Bereich Allgemein **nach rechts wischen**.



Allgemein

Im Bereich "Allgemein" ändern Sie das Programm, stellen die Lautstärke ein und schalten die Hörgeräte stumm.



Fernmikrofon

Wischen Sie im Bereich Allgemein **nach links**, um die Funktion Fernmikrofon des iPhone auszuschalten.

Den Bereich Programm öffnen Sie, wenn Sie auf das Programmsymbol (**P1**) tippen.


Scrollen Sie durch die Programme und **tippen Sie auf das Programm**, das Sie suchen.

Sie können auch mit der **Digitalcrone** durch die Programme blättern.



Einrichten der Apple Watch Komplikationen

Um schnell auf die App über das Zifferblatt zuzugreifen, können Sie eine Apple Watch Komplikation* einrichten. Dies ist eine nützliche Funktion der Apple Watch, die als Verknüpfung auf dem Ziffernblatt dient.

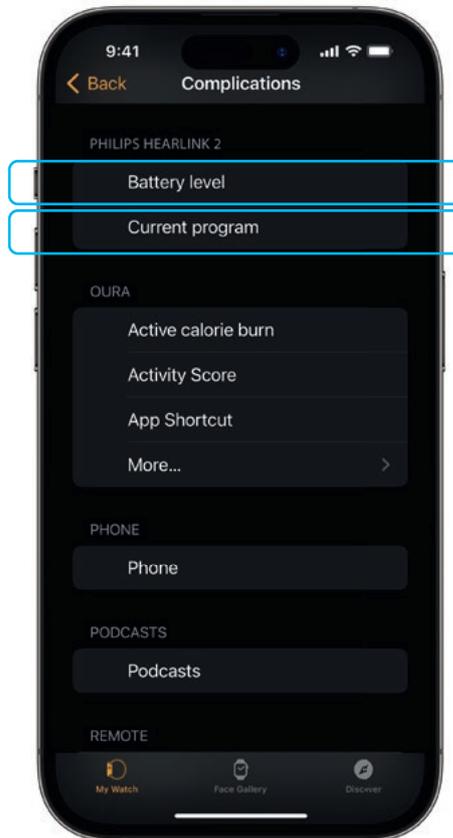

Wählen Sie das Ziffernblatt unter Meine Ziffernblätter und blättern Sie nach unten zu Komplikationen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Ziffernblätter das Hinzufügen von Komplikationen erlauben.

Tippen Sie **oben links** und wählen Sie eine Abkürzung.

* Wenn Komplikationen auf dem ausgewählten Ziffernblatt verfügbar sind.

Scrollen Sie im Bereich Komplikationen und wählen Sie den **Batteriestatus** in HearLink 2.

Wiederholen Sie den Schritt für **oben rechts** und wählen das **Aktuelle Program**.

Die Komplikationen werden jetzt auf der Apple Watch in den **oberen Ecken** angezeigt.



Philips und das Philips Shieldemblem sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V. u unterliegen einer Lizenz. Dieses Produkt wurde von oder im Auftrag von SBO Hearing A/S hergestellt und wird unter Verantwortung von SBO Hearing A/S verkauft. SBO Hearing A/S ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.