




## Übersicht


---

**WICHTIGER HINWEIS:** Machen Sie sich vor dem Gebrauch der Hörsysteme mit diesen Informationen und der Bedienungsanleitung vertraut.

### Vorn

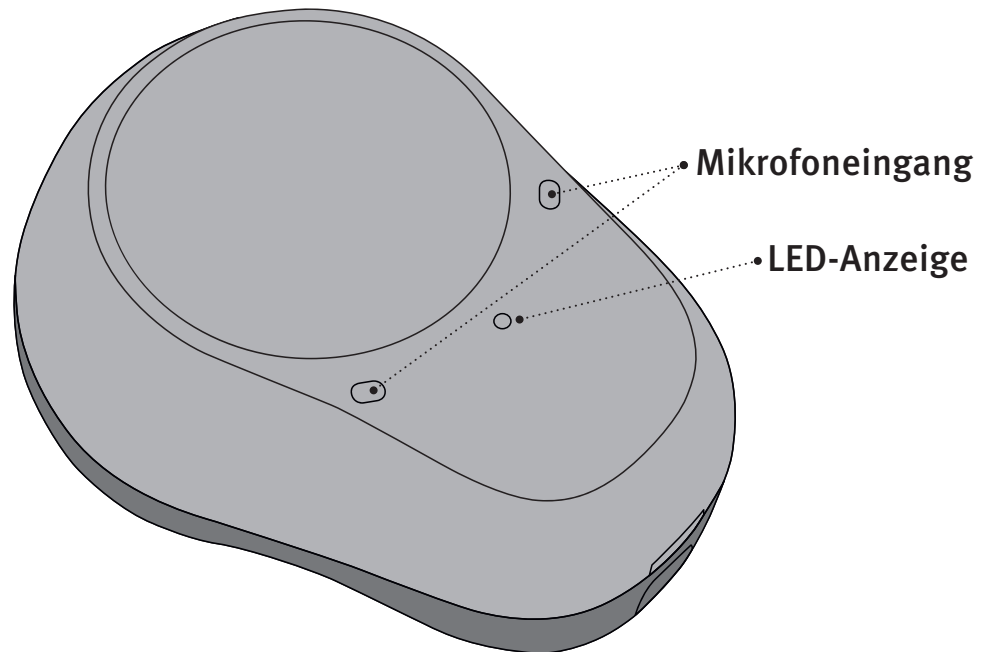

### Hinten

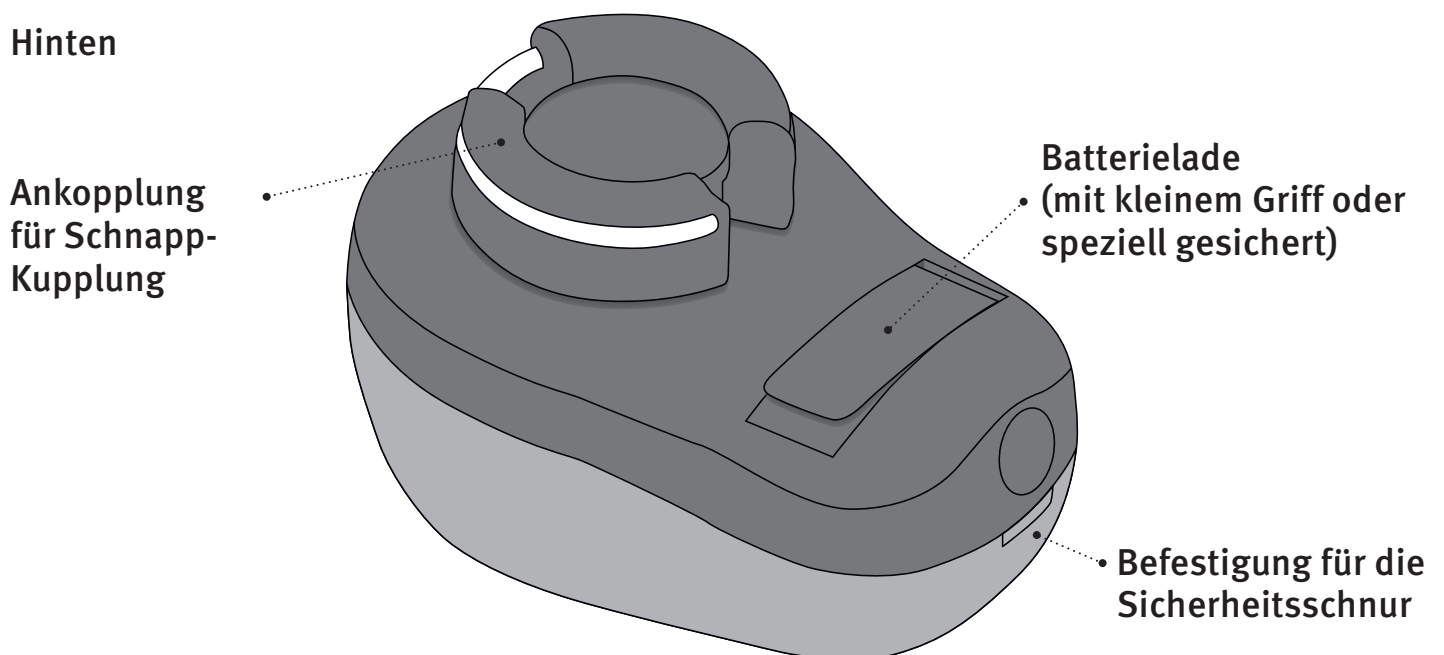




## Ein- und Ausschalten des Hörsystems

---

Die Batterielade dient auch zum Ein- und Ausschalten des Hörsystems. Um die Batterielevensdauer zu verlängern, vergewissern Sie sich, dass das Hörsystem ausgeschaltet ist, wenn Sie es nicht tragen.


### Einschalten

Schließen Sie die Batterielade mit eingelegerter Batterie.

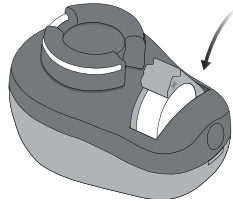

### Ausschalten





Öffnen Sie die Batterielade.

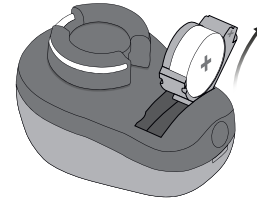

**WICHTIGER HINWEIS:** Verwenden Sie die Stummschaltfunktion nicht als Ausschaltfunktion, da das Hörsystem in diesem Modus dennoch Strom aus der Batterie verbraucht.

## Aufsetzen und Abnehmen des Systems

---

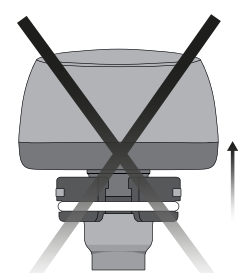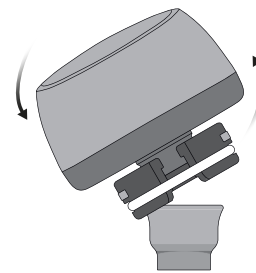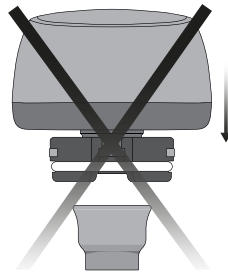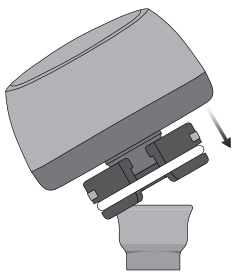

### Aufsetzen

Für ein sicheres und bequemes Verbinden des Hörprozessors müssen Sie ihn leicht kippen und vorsichtig über die Schnapp-Kupplung drücken. Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, Ihre Haare, während Sie den Hörprozessor mit der Schnapp-Kupplung verbinden, zur Seite zu halten.

### Abnehmen


Der Hörprozessor lässt sich sicher und bequem trennen, indem er vorsichtig von der Schnapp-Kupplung weggekippt wird.

## Tauschen der Batterie

---


Wenn es an der Zeit ist, die Batterie auszutauschen, hören Sie drei Info-Töne, die in mittellangen Abständen wiederholt werden, bis die Batterie endgültig leer ist.

### 1. Entfernen

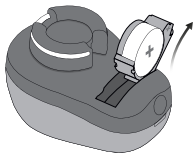

Öffnen Sie die Batterielade vollständig. Nehmen Sie die Batterie heraus.


### 2. Freilegen

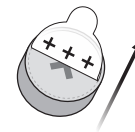

Ziehen Sie das Klebeetikett von der Plusseite (+) der neuen Batterie ab.


**TIPP:** Warten Sie für eine optimale Funktion 2 Minuten ab, damit die Batterie ausreichend Luftkontakt bekommt.

### 3. Einsetzen

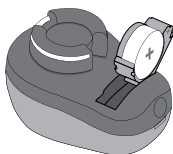


Setzen Sie die neue Batterie in die Batterielade ein. Achten Sie darauf, dass die Plusseite (+) nach unten zeigt.

### 4. Schließen

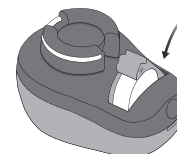

Schließen Sie die Batterielade. Das Hörgerät gibt eine Melodie über das Ohrstück wieder.

**TIPP:** Das Multifunktionswerkzeug kann zum Tauschen der Batterie genutzt werden. Verwenden Sie das magnetische Ende, um Batterien aus der Batterielade zu entfernen oder einzusetzen. Das Multifunktionswerkzeug können Sie bei Ihrem Hörakustiker beziehen.

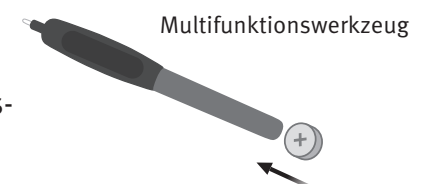

**WICHTIGER HINWEIS:** Das Multifunktionswerkzeug besitzt einen integrierten Magneten. Halten Sie das Multifunktionswerkzeug mindestens 30 cm von EC-Karten oder anderen magnetisch empfindlichen Objekten entfernt.



## Pflege des Hörprozessors

---

Die Außenseite des Hörprozessors kann mit einem trockenen Tuch oder mit einem Feuchttuch gereinigt werden. Besonders sorgfältig sollte dabei die Schnapp-Kupplung von Schmutz oder Haaren befreit werden.

Bitte beachten: Zum Reinigen des Hörprozessors dürfen keine Flüssigkeiten oder Wasser verwendet werden, da dieser nicht wasserdicht ist! Wenn der Hörprozessor versehentlich nass wird, öffnen Sie die Batterielade und lassen Sie den Hörprozessor trocknen.

Es ist wichtig, den Hörprozessor bei Friseurbesuchen und der Anwendung von Haarpflegeprodukten stets zu schützen oder abzunehmen. Sie können die spezielle mit Ihrem Hörprozessor mitgelieferte Abdeckung für die Schnapp-Kupplung verwenden, um diese zu schützen.

Der Hörprozessor ist für Sie persönlich programmiert und sollte daher nicht von anderen Personen verwendet werden.



## Fehlersuche und -behebung

<b>Häufige Probleme und mögliche Lösungen</b>		
<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Lösungen</b>
<b>Kein Ton</b>	Batterie leer	Batterie wechseln
	Der Hörprozessor ist im Standby-Modus (Stummschaltung)	Mit Remote control oder Oticon ON App kurz anwählen
<b>Zeitweilig aussetzender oder verringerter Ton</b>	Schmutz in der Schnapp-Kupplung oder in den Mikrofonen	Den Hörprozessor reinigen
	Feuchtigkeit	Die Batterielade öffnen und den Hörprozessor in seinem Etui trocknen lassen
	Batterie leer	Batterie wechseln
<b>Pfeifgeräusche</b>	Hörprozessor berührt etwas	Prüfen, ob der Hörprozessor korrekt aufgesetzt ist und nichts berührt/ keinen direkten Hautkontakt hat
<b>Kopplungsprobleme mit Apple-Gerät</b>	Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Entkoppeln Sie die Gerät(e) (Einstellungen→Allgemein→Bedienungshilfen→Hörgeräte→Geräte→Dieses Gerät vergessen).</li> <li>2) Schalten Sie Bluetooth aus und wieder ein.</li> <li>3) Öffnen und schließen Sie die Batterielade des Gerätes/der Geräte.</li> <li>4) Koppeln Sie die Geräte wieder (siehe Kapitel zum Koppeln von Hörgeräten mit iPhone).</li> </ol>
	Es kann nur ein Hörgerät gekoppelt werden	

Wenn keine der oben angegebenen Lösungen funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren Hörakustiker.