




Koppeln des ConnectClip mit Ihren Hörsystemen

1. Vergewissern Sie sich, dass der ConnectClip ausgeschaltet ist.




Drücken und halten Sie die Taste für etwa 6 Sekunden, bis die Betriebsanzeige AUS ist. ●

2. Schalten Sie die Systeme AUS.

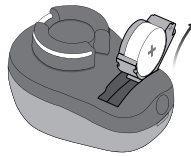

(Öffnen Sie die Batterielade.)

3. Schalten Sie die Systeme EIN.

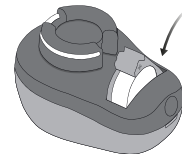

(Schließen Sie die Batterielade.)

4. Die Systeme sind nun bereit für eine erste Verbindung mit dem ConnectClip für etwa 3 Minuten.

5. Schalten Sie den ConnectClip ein.




Drücken und halten Sie die Taste für etwa 3 Sekunden, bis die Betriebsanzeige DURCHGÄNGIG grün leuchtet. ●

6. ConnectClip sucht nun nach Ihren Systemen.



Statusanzeige BLINKT GELB ●

7. Platzieren Sie den ConnectClip und die Systeme nahe beieinander

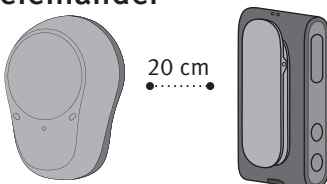

(max. 20 cm Abstand.)


8. Die mit den Systemen hergestellte Verbindung



wird durch eine DURCHGÄNGIG GELB leuchtende Statusanzeige angegeben. ●


Koppeln eines iPhone mit Ihren Systemen

1. Einstellungen

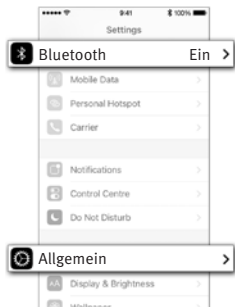


Öffnen Sie die iPhone-Einstellungen. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth eingeschaltet ist. Öffnen Sie dann das Register „Allgemein“.

2. Allgemein

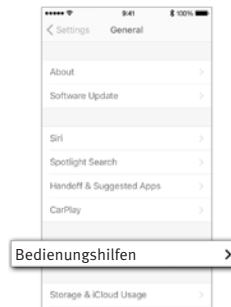


Wählen Sie im Bildschirm „Allgemein“ die Option „Bedienungshilfen“ aus.

3. Bedienungshilfen

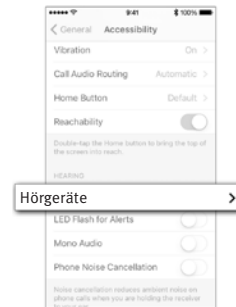


Wählen Sie im Bildschirm „Bedienungshilfen“ die Option „Hörgeräte“ aus.

4. Vorbereiten

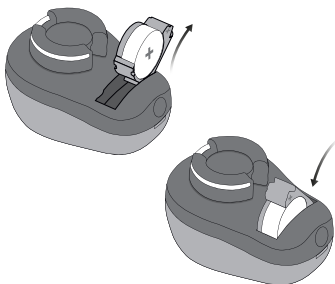


Öffnen und schließen Sie die Batterielade der Systeme und platzieren Sie sie in der Nähe des iPhones. Die Geräte bleiben für 3 Minuten im Kopplungsmodus.

5. Auswählen

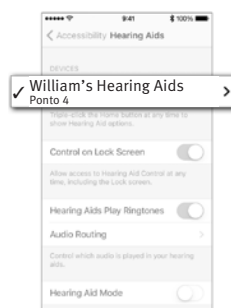

Das iPhone erkennt die zu koppelnden Systeme. Erkannte Systeme erscheinen in der iPhone-Liste. Wählen Sie Ihre Systeme aus.

6. Kopplung bestätigen

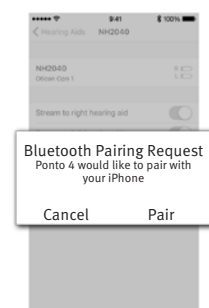


Bestätigen Sie die Kopplung. Bei zwei Systemen muss die Kopplung für jedes einzelne Gerät bestätigt werden.



Koppeln der Remote Control mit Ihren Systemen

1. Vorbereiten der Remote Control:

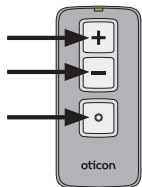


Drücken und halten Sie alle Tasten 5 Sekunden lang. Die Status-LED blinkt zweimal grün.

2. Bereit für Kopplung:




Die Status-LED leuchtet 10 Sekunden lang grün, um zu bestätigen, dass die Remote Control für die Kopplung bereit ist.

3. Schalten Sie die Systeme AUS.

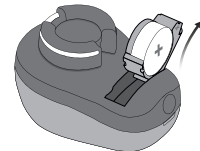


(Öffnen Sie die Batterielade.)

4. Schalten Sie die Systeme EIN.

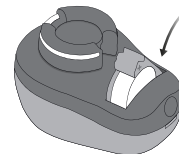


(Schließen Sie die Batterielade.)

5. Platzieren Sie die Remote Control und die Systeme nahe beieinander (max. Abstand 20 cm).

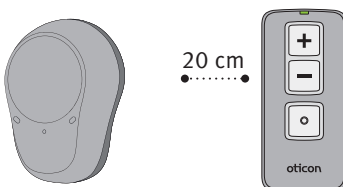


Die Systeme sind bereit für eine erste Verbindung mit der Remote Control für etwa 3 Minuten.

6. Koppeln der Remote Control mit Ihren Systemen:

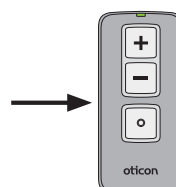

Drücken Sie kurz eine beliebige Taste auf der Remote Control, um sie automatisch mit den Systemen zu koppeln.

7. Verbindung mit Systemen hergestellt:

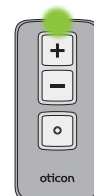


Nach Abschluss der Kopplung leuchtet die Statusleuchte 10 Sekunden lang grün auf.




Koppeln des TV Adapters mit Ihren Systemen

1. Vergewissern Sie sich, dass der TV Adapter eingeschaltet ist.

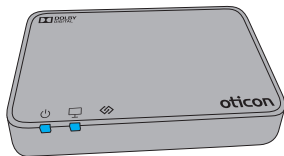


2. Schalten Sie die Systeme AUS.

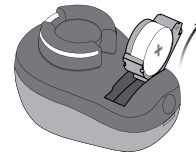

(Öffnen Sie die Batterielade.)


3. Schalten Sie die Systeme EIN.

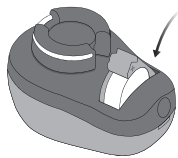

(Schließen Sie die Batterielade.)

4. Die Systeme sind nun bereit für eine erste Verbindung mit dem TV Adapter für etwa 3 Minuten.

5. Platzieren Sie die Systeme neben oder auf dem TV Adapter.

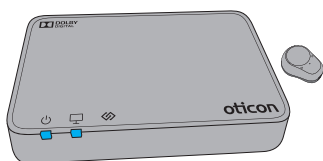

6. Verbindung mit Systemen hergestellt

TV Adapter	Beschreibung
	Kopplung abgeschlossen

Nach Abschluss der Kopplung leuchten die Betriebsanzeige und die TV-Anzeige für etwa 30 Sekunden blau auf.