

CHIRURGISCHER EINGRIFF, EINZEITIG

1. Den Bereich mithilfe des Operations-Indikators vorbereiten
2. Inzision und erste Hautreduktion
3. Inzision des Periosteums
4. Bohrung mit dem Führungsbohrer
5. Bohrung mit dem Versenkbohrer
6. Gewebereduktion
7. Einsetzen des Implantats
8. Schließen und vernähen
9. Aufsetzen des Heilungskäppchens und Verbands

Chirurgische Zubehörteile und Einweg-Instrumente

			
M50287 Führungsbohrer, 3-4 mm	M51122 "Wide" Versenkbohrer mit Stopp-Funktion für "wide" Implantat, 4 mm	M51136 4 mm "wide" Implantat und 6 mm Schnapp- Kupplung	M50821 Heilungskäppchen

Wiederverwendbare Instrumente

		
M50428 Operations-Indikator	M50535 Ampullenhalter	M50533 Einbringpfosten für Schnapp-Kupplung

BACKUP

Beim einzeitigen chirurgischen Eingriff sollten immer Backup-zubehörteile miteingeplant werden, sowie die notwendigen Instrumente zum Einsetzen eines 3 mm Implantats.

Ersatzteile und Instrumente

				
M51144 "Wide" Versenkbohrer mit Stopp-Funktion für "wide" Implantat, 3 mm	M51140 3 mm "wide" Implantat und 6 mm Schnapp- Kupplung	M51137 4 mm "wide" Implantat und 9 mm Schnapp- Kupplung	M50627 Dermatorklinge 25 mm zur Verwendung mit einem Dermatome	M50532 Halter für Schnapp- Kupplung

Diese Anleitung stellt keinen Ersatz für das chirurgische Handbuch für das Ponto System dar. Eine detailliertere Beschreibung des Verfahrens finden Sie im chirurgischen Handbuch für das Ponto Hörsystem.

CHIRURGISCHER EINGRIFF, ERSTE STUFE

1. Den Bereich mithilfe des Operations-Indikator vorbereiten
2. Inzision bis zum Periosteum mit der manuellen Schnittmethode
3. Inzision des Periosteums
4. Bohrung mit dem Führungsbohrer
5. Bohrung mit dem Versenkbohrer
6. Einsetzen des Implantats
7. Aufsatz der Deckschraube
8. Schließen und vernähen

1. STUFE

Chirurgische Zubehörteile und Einweg-Instrumente

			
M50287 Führungsbohrer, 3-4 mm	M51122 "Wide" Versenkbohrer mit Stopp-Funktion für "wide" Implantat, 4 mm	M51139 4 mm "wide" Implantat	M50098 Deckschraube

BACKUP STUFE 1

Ist die Knochentiefe ggf. nicht ausreichend für ein 4 mm Implantat, sollten die Instrumente und Komponenten zum Einsetzen von 3 mm Implantaten im Operationssaal verfügbar sein.

M51144 "Wide" Versenkbohrer 3 mm
M51144 "Wide" Implantat 3 mm

Wiederverwendbare Instrumente

					
M50428 Operations-Indikator	M50535 Ampullenhalter	M50386 Verbindungselement zum Handstück	M50532 Halter für Schnapp- Kupplung	M50534 Sechskant-Schrauben- dreher	M50437 Mit dem Schraubend- dreher verwenden

2. STUFE

Chirurgische Zubehörteile und Einweg-Instrumente

	
M50349 Schnapp-Kupplung, 6 mm	M50821 Heilungskäppchen

Wiederverwendbare Instrumente

					
M50535 Ampullenhalter	M50534 Sechskant-Schrauben- dreher	M50437 Mit dem Schrauben- dreher verwenden	M50384 Maschinen-Schrauben- dreher, 35 mm	M50532 Halter für Schnapp- Kupplung	M50230 Drehmomentschlüssel

CHIRURGISCHER EINGRIFF, ZWEITE STUFE

1. Inzision und erste Hautreduktion nach der manuellen Schnittmethode
2. Gewebereduktion
3. Abdeckschraube entfernen
4. Schnapp-Kupplung installieren
5. Schließen und vernähen
6. Aufsetzen des Heilungskäppchens und Verbands

Diese Anleitung stellt keinen Ersatz für das chirurgische Handbuch für das Ponto System dar. Eine detailliertere Beschreibung des Verfahrens finden Sie im chirurgischen Handbuch für das Ponto Hörsystem.