

| Ponto 3 lydprocessorer Brugervejledning



Ponto™ – Det benforankrede høresystem

Mange tak

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige dig tak for dit valg af en Ponto lydprocessor. Ponto 3 lydprocessorer er beregnede på at blive brugt til at forbedre hørelsen hos patienter med konduktivt og blandet høretab såvel som enkeltsidig døvhed. Den er designet til at kunne optimeres til hver enkelt bruger. Det betyder, at du får størst mulig fordel af din processor.

Brugervejledningen beskriver hvordan du bruger din nye processor.

Ved omhyggelig gennemlæsning af vejledningen, vil du kunne læse hvordan du får mest muligt ud af din nye processor. Læg ekstra mærke til advarslerne, den vigtige information og anvisningerne for hygiejne. Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, kan du kontakte klinikken.

Indhold


Ponto – det benforankrede høresystem	4	Tilbehør	23
Oversigt over lydprocessor	6	Oticon Medical Streamer	26
Håndtering af batteriet	8	Service og reparation	29
Tænd/sluk lydprocessoren eller sæt på standby	10	Kompatibilitetsguide	30
Tilslutning	12	Almindelige problemer og løsningsforslag	32
Frakobling	13	Producentens garanti	34
Korrekt position	14	Vigtig information	35
Volumenkontrol	16	Lovgivningsmæssige overensstemmelseserklæringer	37
Programmer	18	Advarsler	40
Vedligeholdelse af lydprocessor	20	Symbolforklaringer	43
Hygiejne	21		

Ponto – det benforankrede høresystem

Ponto 3 er designet til at forbedre hørelsen via direkte benledning. Lydprocessoren omdanner lyd til vibrationer, som transmitteres via abutment og implantat gennem kranieknoglen til det indre øre. Denne metode fungerer uafhængigt af øregangens og mellemørets funktion. Derfor er Ponto 3 en mulig løsning til høretab, hvor der er et problem i det ydre øre eller mellemøret, som hindrer, at lyden kan nå det indre øre.

Lydprocessoren kan også hente lyd fra én side og overføre den til det indre øre på den modsatte side. Det gør den velegnet til personer, som er døde på den ene side, men som har et fungerende indre øre på den anden side (også kaldet unilateralt, svært høretab eller enkeltsidig døvhed).


Lydprocessoren kan også bruges af børn med et softband eller til personer, hvor implantater ikke kan bruges.

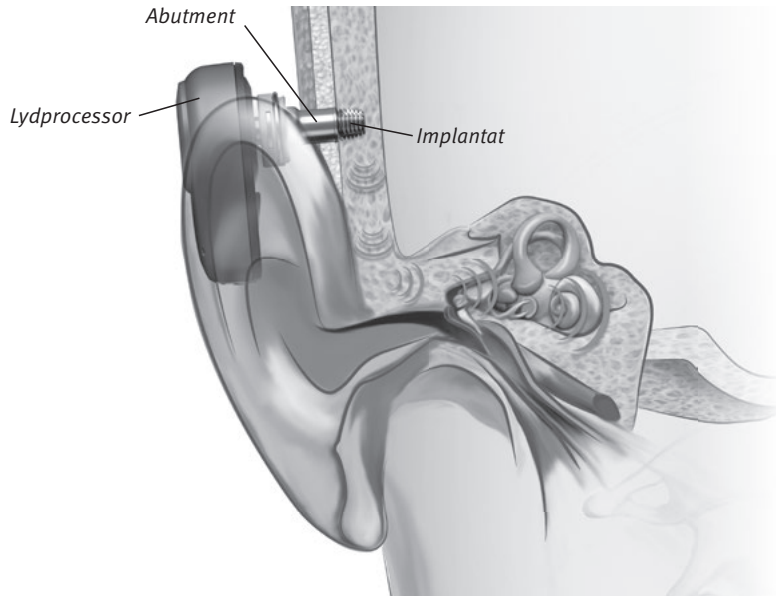

Oversigt over lydprocessor*

1. Trykknop til programmer og standby/mute
2. Volumenkontrol
3. Mikrofonindgange
4. Programmeringsstik
5. Batteriskuffe (tænd/sluk, børnesikret)
6. Kobling
7. Hul til sikkerhedssnor
8. Mærkning

Højre- eller venstresidig version: Ponto 3 lydprocessor fås i en venstresidig og en højresidig version. Hver lydprocessor er mærket med et L (left – venstre) eller R (right – højre) på batteriskuffen, så det nemt kan identificeres.

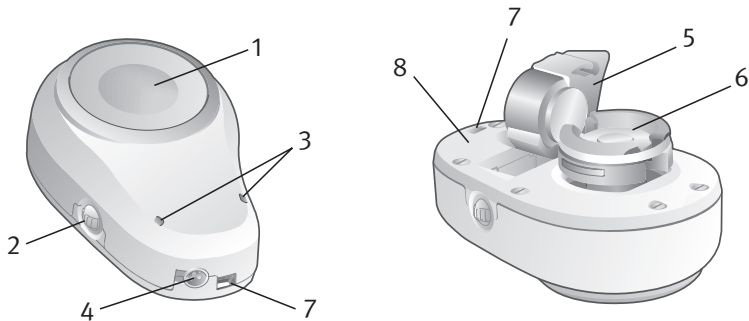

**) Billedet viser Ponto 3. Visningen af lydprocessoren er identisk for Ponto 3 Power og Ponto 3 SuperPower.*

⚠ ADVARSEL

Processoren indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsrisiko for små børn. Batterierne kan også være skadelige, hvis de sluges. Opbevar altid batterierne, således at små børn og personer med nedsat mental kapacitet ikke kan nå dem. Hvis et batteri sluges ved et uheld, skal der søges lægehjælp på nærmeste skadestue!

Håndtering af batteriet

Isætning af batteri

Åbn batteriskuffen, og sæt batteriet i, så plus-tegnet vender nedad på processoren. Det er meget vigtigt at sætte batteriet korrekt i for at undgå at beskadige batterikammeret.

Ponto 3: Brug kun zink-luftbatterier af høj kvalitet, type 13.

Ponto 3 Power: Brug kun zink-luftbatterier af høj kvalitet, type 675.

Ponto 3 Super Power: Brug kun zink-luftbatterier af høj kvalitet, type 675P, højtydende, og batterier til cochlear-implantatprocessorer.

Børnesikret batteriskuffe


Låsning af batteriskuffen: Kontrollér, at skuffen er helt lukket. Brug skruetrækkeren i batteriudtagningsværktøjet for at dreje den børnesikrede skrue til den låste position.



Oplåsning af batteriskuffen: Brug skruetrækkeren i batteriudtagningsværktøjet for at dreje den børnesikrede skrue til den ulåste position.



Batteriskuffen kan nu åbnes og lukkes som sædvanligt.

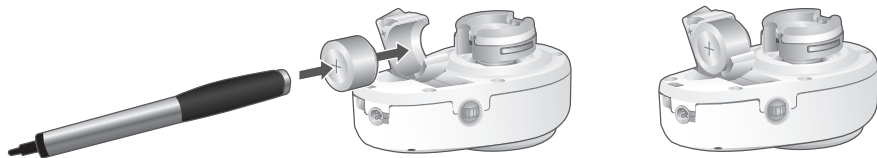

Indikator for lavt batteri

Din lydprocessor har en advarsel om lavt batteriniveau. Når det er tid til batteriskift, vil du høre to bip efter hinanden.

Når batteriet er helt udtjent, høres fire bip efter hinanden. Batteriets levetid afhænger af lyttemiljøet og den anvendte processor.

Udtagning af batteriet

Når batteriskuffen er åbnet, kan batteriet tages ud. Det lille magnetiske batteriudtagningsværktøj, der leveres sammen med lydprocessoren, kan gøre det lettere at tage batterier ud og sætte batterier i.

Tænd/sluk lydprocessoren eller sæt på standby

Tænd

Ponto 3 TÆNDES ved at lukke batteriskuffen. Efter en start-jingle er der et par sekunders forsinkelse, før lydprocessoren tændes. Forsinkelsen sørger for at undgå en hyletone, når processoren tilsluttes abutment.

Sluk

Ponto 3 SLUKKES ved at åbne batteriskuffen. Det er nok at åbne batteriskuffen halvt – så undgår du, at batteriet falder ud. Hvis processoren ikke skal bruges i længere tid, anbefales det at fjerne batteriet fra processoren.

Standby/mute

Hvis du ønsker at slukke for lydprocessoren i kortere perioder kan du bruge trykknappen og holde den nede indtil 2 bip høres, hvorefter knappen slippes. Processoren er nu i standby/mute-tilstand, og lydstyrken indstilles til nul.


For at høre lyd igen trykker du kort på trykknappen og slipper den, så processoren går tilbage til sin tidligere indstilling. Det anbefales ikke at anvende standbytilstand i længere perioder – fx mere end 5 timer – eftersom dette reducerer batteriets levetid.

Bemærk: Standby-egenskaben er valgfri og kan undertiden blive deaktiveret under tilpasningsproceduren. Kontakt din klinik, hvis du har spørgsmål.

Tænd



Sluk

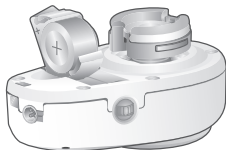

Standby/mute




– Holdes nedtrykket indtil 2 bip kan høres



Bemærk: Hvis du har to Ponto 3 lydprocessorer og binaural koordinering er aktiveret (standard), vil den binaurale koordinering, når standbytilstand er aktiveret i én processor, også aktivere standbytilstand i den anden processor. Binaural koordinering kan deaktiveres i Genie Medical.



Tilslutning

Lydprocessoren tilsluttes sikkert og bekvemt ved at vippe det let og forsigtigt skubbe det ned over abutment. Bemærk, at det er vigtigt at holde håret til side, når du tilslutter processoren til abutment.

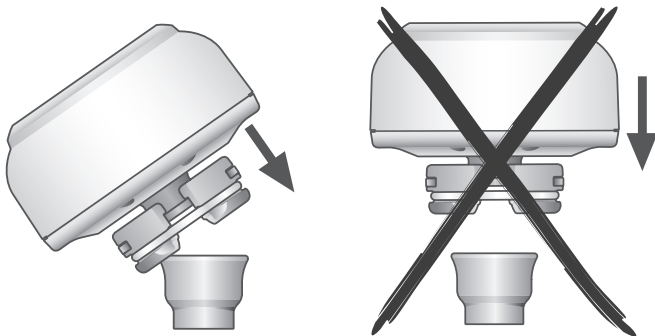

Frakobling


Lydprocessoren frakobles sikkert og bekvemt ved forsigtigt at vippe det væk fra abutment.

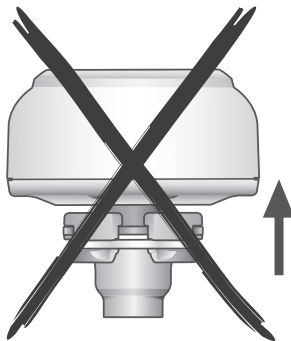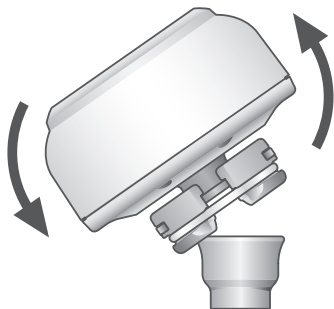

Korrekt position

For at opnå optimal funktion af retningsmikrofonsystemet skal processoren anbringes lodret med mikrofonerne i bunden, så volumenkontrollen vender bagud.

Det er meget vigtigt, at processoren ikke rører ved noget, fx øret, huden eller en hat. Dette kan forårsage tilbagekobling (en pibende lyd).

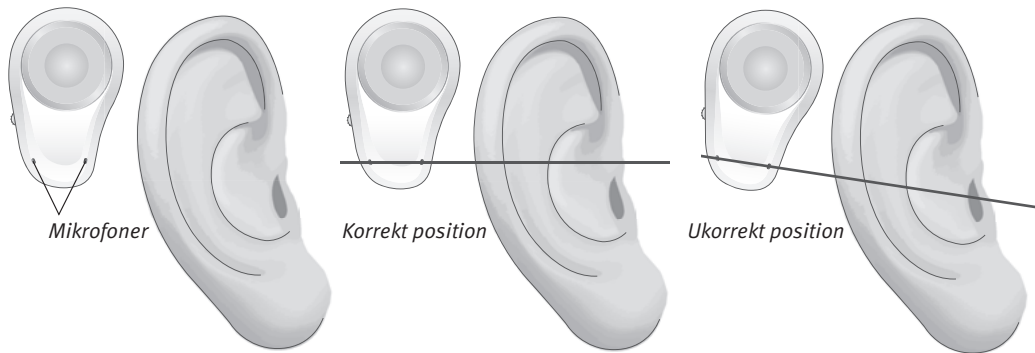

Volumenkontrol

Lydstyrken øges ved at dreje opad på volumenkontrollen og mindskes ved at dreje nedad. Når du drejer på volumenkontrollen, lyder der nogle bip, som angiver, at lydstyrken ændres. Når den maksimale eller minimale lydstyrke er nået, stopper bippene. Læg mærke til at det er muligt for det audiologiske personale at slå volumenkontrollen fra.

Når du overskrider standardlydstyrken, lyder der 2 bip. Hvis du har en Oticon Medical Streamer (side 26) kan du bruge den som fjernbetjening til at indstille volumen i lydprocessoren.

Bemærk: Hvis du har to Ponto 3 lydprocessorer og binaural koordinering er aktiveret (standard), vil volumen i den ene processor også påvirkes, når volumenkontrollen i den anden processor justeres. Binaural koordinering kan deaktiveres i Genie Medical.




Programmer





Med trykknappen kan du sætte din lydprocessor i standbytilstand eller skifte lytteprogrammet. Som standard har din processor ét program, det audiologiske personale kan definere flere.

For at skifte program trykker og slipper man trykknappen. Det næste program angives af det tilsvarende antal bip. Læg mærke til at processoren vil gå i standbytilstand, hvis trykknappen holdes nede i mere end 2 sekunder.

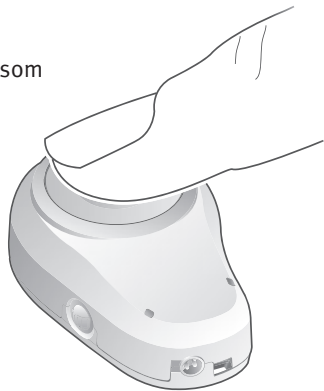Hvis du har en Oticon Medical Streamer, kan du bruge den som fjernbetjening til at skifte program i din processor.

Skift program – Hold kortvarigt knappen nedtrykket og slip den



Program	Bip-toner	Beskrivelse
1		
2		
3		
4		

Bed din klinik om information om programmer for at kunne udfylde dette programskema.

Bemærk: Hvis du har to Ponto 3 lydprocessorer og binaural koordinering er aktiveret (standard), vil et programsift ved hjælp af trykknappen på den ene processor også skifte programmet for den anden. Binaural koordinering kan deaktiveres i Genie Medical.

Vedligeholdelse af lydprocessor

Anvend en tør klud eller en vådserviet til babyer til at rengøre lydprocessoren udvendigt. Vær især grundig med at rense koblingen for snavs eller hår.

Brug ikke vand eller andre væsker, når du renser processoren – den er ikke vandtæt. Hvis processoren bliver våd ved et uheld, skal batteriskuffen åbnes, og lydprocessoren skal tørre.

Det er vigtigt at beskytte eller fjerne din processor under besøg hos frisøren, eller når du anvender hårprodukter. Du kan eventuelt bruge det specielle dæksel til abutment, der følger med din processor for at beskytte abutment.

Lydprocessoren er beregnet på at blive brugt af dig personligt og bør derfor ikke bruges af andre.

Hygiejne

Daglig rengøring

For at reducere risikoen for hudinfektioner omkring abutment er det vigtigt at have en god daglig rengøringsrutine.

Så længe huden endnu ikke er fuldstændig helet, kan der anvendes antibakteriel sæbe og alkoholfrie vådservietter til børn til at rense huden omkring abutment.

Når helingen er ved at være komplet kan man begynde at bruge en vatpind eller en blød børste. Anvend børsten dagligt sammen med sæbe og vand til forsigtigt at rengøre abutment på yder- og indersiden.

Børsten skal udskiftes cirka én gang hver 3. måned. Der må kun bruges meget bløde børster. Hvis du har to implanta-ter, skal du bruge to bløde rensbørster – én til hvert abutment. Bløde børste som vist her kan købes hos Oticon Medical. Bed om flere oplysninger hos din klinik.




Rengøring med nogle dages mellemrum

Ud over den daglige renserutine skal huden rengøres mere grundigt for at fjerne henfaldet væv mindst to gange ugentligt. Under hårvask blødgøres det henfaldne væv, som dermed er lettere at fjerne. Rensebørsten skal stadig anvendes med forsigtighed.

Hvis du har vedvarende problemer med ømhed omkring abutment, skal du kontakte høreklubben! Det er forældrenes eller plejepersonalets ansvar at opretholde en god hygiejne omkring barnets abutment.

Vær opmærksom på, at det er altafgørende at rengøre både inder- og ydersiden af abutment. Det er vigtigt for at undgå ophobning af henfaldet væv.

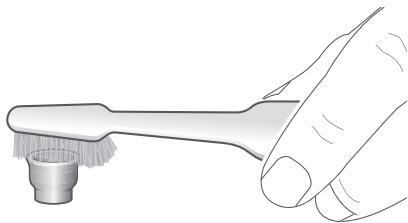


Tilbehør

Sikkerhedssnor

Sikkerhedssnoren er designet til at hjælpe dig med at undgå at tabe lydprocessoren under fysisk aktivitet eller i andre situationer, hvor der er risiko for, at processoren kan falde af.

For at du ikke skal tabe processoren i disse situationer, skal sikkerhedssnoren sættes fast på processoren og clipsen sættes fast på tøjet. Vi anbefaler desuden, at du bruger sikkerhedssnoren i starten, mens du vænner dig til at gå med lydprocessoren.

Kontrollér, at der ikke er noget, der trækker i sikkerhedssnoren, da det kan frakoble lydprocessoren fra abutment.

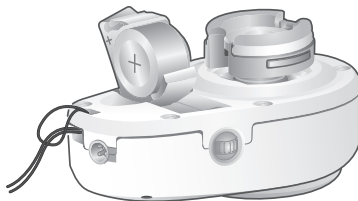


Dæksel til abutment

Dækslet kan sættes på abutment, når processoren ikke er i brug. Derved forhindrer man, at der kommer snavs i abutment, som samtidig skjules.



Teststav

Ved hjælp af teststaven kan du lytte til lydprocessoren uden at forbinde den til en abutment. Tilslut Ponto 3 til teststaven, og tryk den mod hovedet for at lytte til processoren. Dette kan være nyttigt, når du skal demonstrere og teste lydprocessoren for venner og familie. Din hånd må ikke røre processoren, når du holder teststaven, da det vil forårsage tilbagekobling (en pibende lyd).

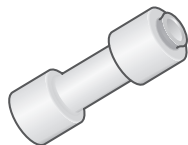

Mærkater

Mærkaterne giver dig mulighed for at ændre udseendet på din lydprocessor. Sådan påsættes og fjernes mærkaterne:

1. Placér det runde mærkat på trykknappen, så den klæber til trykknappområdet.
2. Placér den nedre del af mærkaten på processoren. Sørg for, at det ikke dækker mikrofonindgangene.

Den bedste måde at undgå luftbobler på er at starte i midten og trykke forsigtigt mod mærkatens yderkanter.

Brug fingerneglene til at fjerne mærkaten. Anvend ikke skarpe genstande, da de kan beskadige lydprocessoren.

Covers

Med et cover får du mulighed for at ændre din lydprocessors udseende. Sørg for at de er fastgjort sikkert, så de ikke dækker mikrofonindgangene og at volumenkontrollen kan betjenes frit. Der findes covers i en række farver. Bed om flere oplysninger hos din klinik.

Oticon Medical Streamer

Med Oticon Medical Streamer kan du trådløst tilslutte din Ponto 3 lydprocessor til forskellige lyd-kilder og sende lyden fra lyd-kilden til din lydprocessor.

Oticon Medical Streamer fungerer også som fjernbetjening til din processor. Den bæres rundt om halsen og har tre knapper til hovedformålene: telefon, tv og mikrofon.

Ponto 3 lydprocessorer er kompatible med Oticon Medical Streamer.

**Bemærk, at Oticon Medical Streamer og produkterne vist på side 26-28 er valgfrit tilbehør. Kontakt din klinik eller besøg www.oticonmedical.com/dk/connectline for mere information om Oticon Medical Streamer og dens muligheder.*





Mobiltelefon

Oticon Medical Streamer kan parres med en lang række mobiltelefoner med indbygget Bluetooth og kan derved trådløst overføre lyd fra mobiltelefonen til lydprocessoren. Herved omdannes lydprocessoren til et personligt trådløst headset. Der findes en liste over kompatible mobiltelefoner på www.oticonmedical.com/dk/connectline.



Musik

Man kan lytte til musik ved at slutte en MP3-afspiller til Oticon Medical Streamer enten ved brug af et kabel eller en trådløs Bluetooth-forbindelse.



Teleslynge

Oticon Medical Streamer har en indbygget telespole, der er designet til at forbedre lydkvaliteten og taleforståelsen i rum, hvor der er installeret en teleslynge. Mange offentlige bygninger har teleslyngefaciliteter, fx teatre, biografteater, foredragslokaler, skoler og lignende steder. Telespolen i Oticon Medical Streamer fanger signalet fra teleslyngen og sender lyden til Ponto 3.



Fjernbetjening

Oticon Medical Streamer fungerer også som fjernbetjening til din processor, så man nemt kan ændre program eller justere lydstyrken.



FM

Et FM-system består af en FM-modtager og en sender. Modtageren tilsluttes EURO-pin-stikket (FM) på Oticon Medical Streamer og anvendes til at opfange radiosignaler med lav effekt fra senderen. FM-systemer anvendes for eksempel i skoler til at hjælpe børn med nedsat hørelse.

Læreren bærer en FM-sender, som sender signaler direkte til Ponto 3 via FM-modtageren og Oticon Medical Streamer.



TV, fastnettelefon og mikrofon

Oticon Medical Streamer kan forbindes med forskellige ConnectLine produkter fra Oticon (ConnectLine TV, ConnectLine telefon, ConnectLine mikrofon) for at tilbyde dedikerede løsninger til at kunne se tv, bruge en fastnettelefon og lytte til andre via en mikrofon.



Service og reparation

Hvis din Ponto 3 ikke fungerer korrekt, skal du kontakte klinikken for at få lydprocessoren kontrolleret.

Kontaktperson hos høreklinikken – navn og kontaktoplysninger:

Kontaktperson hos øre-næse-hals-lægen – navn og kontaktoplysninger:

Kompatibilitetsguide

Beskrivelse	Produkt
Abutments i Oticon Medical Ponto implantatsystemer	Alle
Oticon Medical-tilbehør	Genie Medical (Tilpasningssoftware, version 2011.1 eller nyere)
	Ponto Softband
	SoundConnector
	Testbøjle
	Hovedbøjle
	Xpress
Oticon A/S-tilbehør	FM-modtager, Amigo R2BA (kun via Oticon Medical Streamer)
	Oticon Medical Streamer

Kompatibilitetsguide	
Beskrivelse	Produkt
Kompatible produkter fra Cochlear BAS	Baha® abutments (90305, 90410)
	Baha® implantater med abutment (90434, 90480)
	Baha® audioadapter (90065)
	Baha® telespoleenhed* (90185)
Inkompatible produkter fra Cochlear BAS	Baha® BA300-seriens abutments
	Baha® BA210-seriens abutments
	Baha® BA400-seriens abutments
Phonak AG-tilbehør	Phonak FM-system Inspiro-sender
	Phonak MixiBA-modtagere

Mulige problemer og løsningsforslag

Symptom	Mulige årsager
Ingen lyd	Udtjent batteri
	Lydprocessoren er på standby (mute)
Afbrudt eller reduceret lyd	Snavs i koblingen eller lydindgangen
	Fugt
	Udtjent batteri
Tilbagekobling	Lydprocessoren rører ved noget

Løsninger	
Skift batteri	side 8-9
Tryk på trykknappen	side 10-11
Rens lydprocessoren	side 20
Åbn batteriskuffen, og lad processoren tørre i dets æske	side 20
Skift batteri	side 8-9
Kontrollér, at lydprocessoren er korrekt tilsluttet og ikke rører ved noget	side 12-15

Hvis problemet ikke kan løses ved at anvende nogen af de ovenstående løsninger, skal du kontakte din klinik for at få hjælp.

Producentens garanti

Oticon Medicals lydprocessorer er dækket af en begrænset garanti udstedt af producenten i en periode på 12 måneder fra leveringsdatoen. Denne begrænsede garanti dækker fremstillings- og materialedefekter i selve lydprocessoren, men ikke batterier.

Problemer, der opstår på grund af ukorrekt håndtering eller omhu, urimelig anvendelse, uheld, reparationer foretaget af en uautoriseret part, brug i korroderende miljøer, beskadigelse forårsaget af indtrængende fremmedlegemer eller ukorrekte justeringer dækkes IKKE af den begrænsede garanti og kan gøre den ugyldig.

Ovennævnte garanti påvirker ikke lovfæstede rettigheder, som du måtte have i henhold til gældende national lovgivning, der gælder for salg af forbrugsvarer. Din klinik kan have udstedt en garanti, som går ud over bestemmelserne i denne begrænsede garanti. Du bedes kontakte klinikken for yderligere information.

Hvis du har kommentarer eller forslag i forbindelse med Oticon Medicals benforankrede høresystem, bedes du venligst kontakte os via e-mail. Adressen står sidst i vejledningen.

Vigtig information

- Det er vigtigt at følge retningslinjerne for hygiejne. Kontakt din høreklub, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget.
- Opbevar altid lydprocessoren i dens æske, når den ikke anvendes, så den er beskyttet mod støv og snavs. Hvis du anvender et cover, skal du sørge for at fjerne det, før du lægger lydprocessoren i æsken.
- Når lydprocessoren ikke er i brug, skal du sikre, at den er slukket ved at åbne batteriskuffen. Batteriskuffen skal være åben, så eventuel fugt i lydprocessoren kan tørre ud.
- Hvis du ikke bruger Oticon Medical Streamer, når du taler i telefon, skal du holde telefonrøret tæt på lydprocessoren. For at undgå tilbagekobling (en pibende lyd) skal du sikre, at telefonen ikke rører ved lydprocessoren. (For mere information om mulighederne med Oticon Medical Streamer, se side 26-28).
- Lydprocessorens forventede levetid er 5 år.

- For at undgå at aktivere metaldetektorer når du rejser, kan du frakoble lydprocessoren, før du passerer sikkerhedskontrollen.
- **Driftsforhold**
Temperatur: +1 °C til +40 °C
Relativ fugtighed: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende
- **Opbevarings- og transportforhold**
Temperatur og luftfugtighed bør ikke overskride følgende grænser i længere perioder under transport og opbevaring.
Temperatur: -25 °C til +55 °C
Relativ fugtighed: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende
- Strømkilden i lydprocessoren har utilstrækkelig energi til at forårsage en brand under normale brugsforhold. Lydprocessoren er ikke blevet testet for opfyldelse af internationale standarder ang. eksplosionsfarlige atmosfærer. Det anbefales ikke at bruge lydprocessoren på steder, hvor der er fare for eksplosion.

Lovgivningsmæssige overensstemmelseserklæringer

Driften er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
2. Denne enhed skal kunne modstå modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den overensstemmelsesansvarlige, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne.

Disse grænser er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boligområder. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation.

Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelser, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forholdene via en eller flere af følgende foranstaltninger:

- *Drej eller flyt modtagerantennen.*
- *Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.*
- *Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.*
- *Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.*

Den juridiske producent erklærer hermed, at dette Ponto 3 lydprocessor er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU om radioudstyr. Overensstemmelseserklæring fås hos: Oticon Medical AB



Udstyret
indeholder en
RF-sender



Ponto 3 indeholder en radiosender, der anvender korttrækkende magnetisk induktionsteknologi og fungerer ved 3,84 MHz. Den induktive senders magnetiske feltstyrke er $< -15 \text{ dB}\mu\text{A/m @ 10m}$.

Emissionseffekten fra Ponto 3 er under de internationale emissionsgrænser for eksponering af mennesker. Ponto 3 overholder internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet.

På grund af den begrænsede plads på selve enheden, findes mange af de relevante godkendelser i dette dokument.

FCC-ID: 2AHJWPONTO3

IC: 21199-PONTO3

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne og RSS-210 fra Industry Canada.

ADVARSLER

- Lydprocessoren, batterierne, dele og tilbehør er ikke legetøj og skal opbevares, så børn og andre, der måtte være i fare for at sluge disse genstande eller på anden måde forårsage skade på sig selv, ikke kan nå dem. Processoren indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningrisiko for små børn.
- Hvis du taber lydprocessoren skal du sikre dig at indkapslingen ikke er revnet eller at nogen dele i lydprocessoren er gået i stykker. Hvis der er noget galt med din lydprocessor, skal du kontakte Oticon Medical.
- Lydprocessoren, dets dele eller batterier må ikke bortskaffes ved afbrænding. Der er risiko for, at de kan eksplodere og forårsage alvorlige skader.
- Selvom høreapparatet har opnået IP57-klassificering, kaldes den vandafvisende ikke vandtæt. Frakobl altid lydprocessoren, før du tager brusebad eller bader/svømmer. Hvis lydprocessoren bliver våd ved et uheld, skal batteriskuffen åbnes, og batteriet tages ud, så lydprocessoren kan tørre.
- Undgå at udsætte lydprocessoren for ekstrem varme.



- Elektromagnetisk interferens kan forekomme i nærheden af udstyr med symbolet til højre. Bærbart kommunikationsudstyr der bruger RF (radiobølger) kan påvirke din processors ydeevne. Hvis din lydprocessoren er påvirket af elektromagnetisk interferens, skal du bevæge dig væk fra kilden for at reducere interferensen.
- Selvom det er usandsynligt, kan elektroniske enheder i nærheden påvirkes af din processor. I sådanne tilfælde fjernes lydprocessoren fra den påvirkede elektroniske enhed.
- Lydprocessoren er ikke MRI-sikkert. Hvis du har brug for at få taget en MRI-scanning skal lydprocessoren frakobles. Det er ikke nødvendigt at fjerne implantat og abutment. Når en MRI-scanning planlægges og foretages skal man sikre sig at lægen og klinikpersonalet ved at du bruger et benforankret høresystem. (For børn og mentalt svage personer er det forældrenes/plejepersonens opgave at sørge herfor).
- Lydprocessoren indeholder en magnet. Man skal være forsigtig med programmerbare CSF-shunts. Følg retningslinjerne for den nødvendige minimumsafstand, der anbefales af shunt-producenten.

Batteribrug

- Brug altid de batterier, der anbefales i denne manual. Batterier af lav kvalitet kan lække og medføre legemsskade.
- Batterierne kan være skadelige, hvis de sluges. Opbevar altid batterierne, således at små børn og personer med nedsat mental kapacitet ikke kan nå dem. Hvis et batteri sluges ved et uheld, skal der søges lægehjælp på nærmeste skadestue.






Afbrydelse i lydprocessorens funktion

- Lydprocessoren kan holde op med at virke, hvis batterierne for eksempel er løbet tør for strøm. Du bør være opmærksom på denne mulighed, især når du befinder dig i trafikken eller på anden måde er afhængig af advarselslyde.

Mulige bivirkninger

- De ellers ikke-allergene materialer, der anvendes i lydprocessorer, kan i sjældne tilfælde forårsage hudirritation. Søg læge, hvis du oplever nogen bivirkninger.

Symbolforklaringer	
	Referencenummer
	Serienummer
	Producent
	Fremstillingsdato
	Der henvises til brugervejledningen
	Advarsel. Se brugervejledningen vedr. advarsler og forholdsregler, der ikke findes i selve enheden
Kun Rx	Kun Rx Advarsel: Ifølge lovgivningen i USA må dette udstyr kun sælges af eller efter ordination af en læge
 0413	CE-mærke med bemyndiget organ-nummer

	Affald fra elektronisk udstyr skal håndteres i henhold til lokale regler.
	Type B ekstern del
	IP-koden klassificeret og normerer graden af beskyttelse mod indtrængen af massive dele (omfatter kroppsdele som hænder og fingre), støv, utilsigtet kontakt og vand i mekaniske huse og med elektriske indkapslinger
YY.XXXXXXXX	De første to cifre i serienummeret "YY" angiver fremstillingsåret.
	Loggivningmæssigt mærke for ACMA (Australian Communications and Media Authority)
	Opbevares utilgængeligt for små børn for at reducere risikoen for, at de sluger noget eller kvæles.

Kun gældende for USA: Ifølge føderal lovgivning må dette udstyr kun sælges af eller efter ordination af en læge.

En eventuel bruger af en benforankret lydprocessor skal altid have foretaget en medicinsk evaluering af en læge for at sikre, at alle tilstande, der kan påvirke hørelsen, og som kan behandles medicinsk er identificeret og behandlet, før der købes en processor.

CE 0413

Kontor i Danmark

Oticon Denmark A/S

Oticon Medical

Kongebakken 9

2765 Smørum

E-mail: info@oticonmedical.dk

Telefon: +45 39 17 71 00

Fax: +45 39 27 79 00

www.oticonmedical.dk



Producent:

Oticon Medical AB

Datavägen 37B

SE-436 32 Askim

Sverige

Telefon: +46 31 748 61 00

info@oticonmedical.com

M52615DK / 2021.01

oticon
MEDICAL

Because
sound matters



0000M5261500001

www.oticonmedical.com/dk