





Oversigt

VIGTIGT: Gør dig bekendt med både denne information og brugervejledningen, før du bruger lydprocessoren/-erne.

Forside

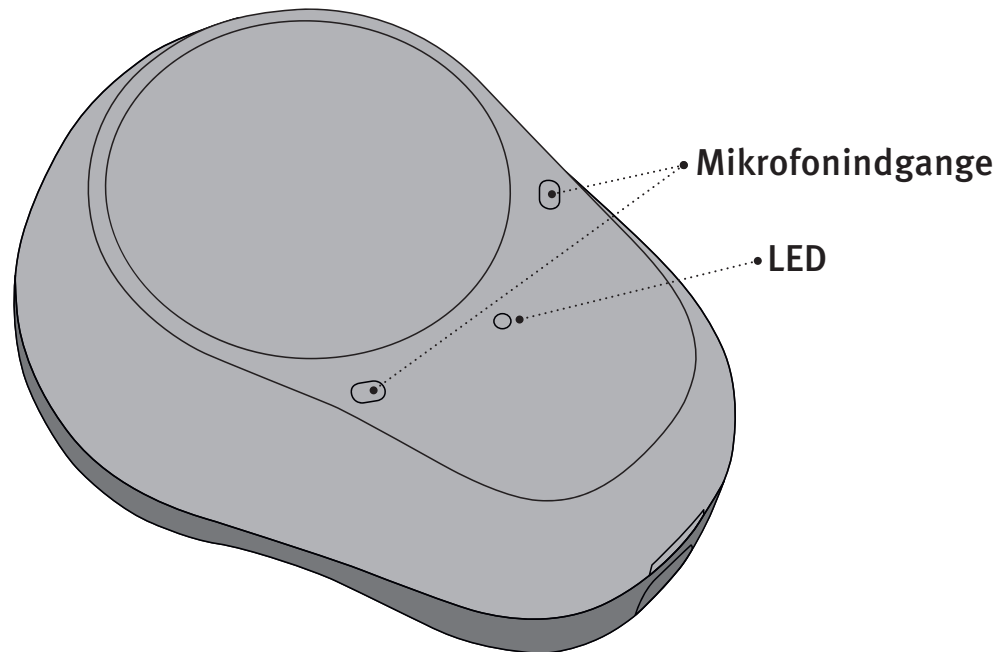

Bagside

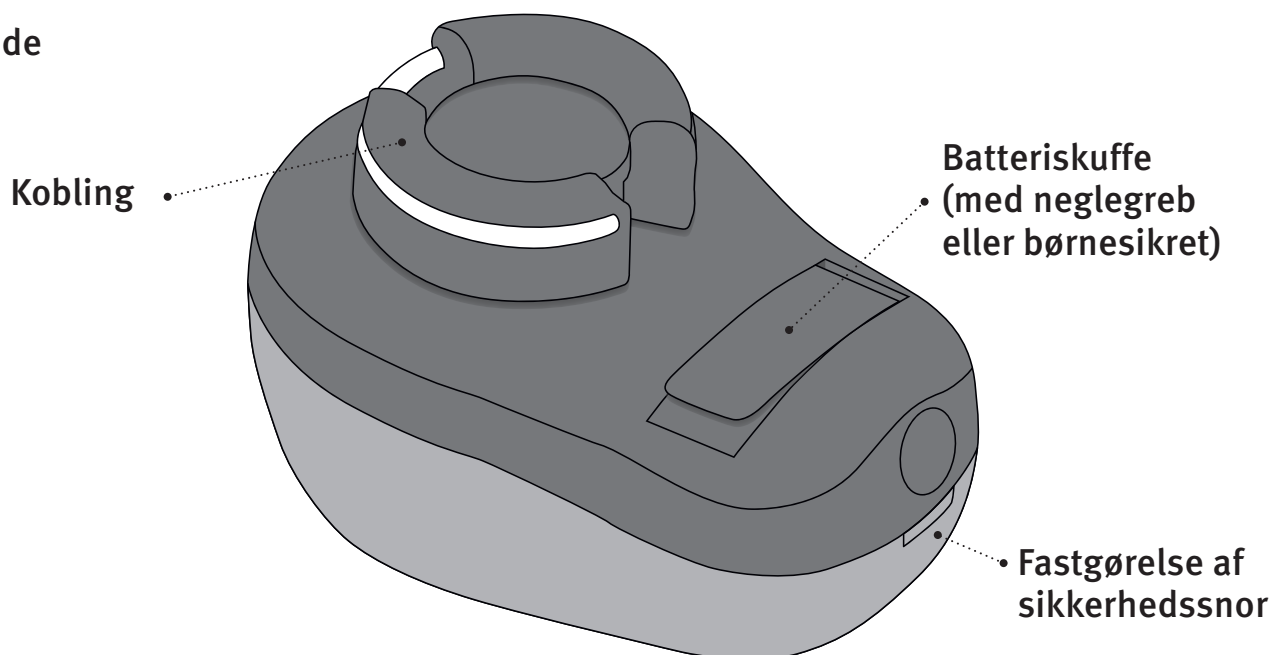




Tænd og sluk for lydprocessoren

Batteriskuffen bruges også til at tænde og slukke for lydprocessoren. Batteriet kan holde længere, hvis du sørger for at slukke for lydprocessoren, når du ikke har den på.


Tænd

Luk batteriskuffen med batteriet i.

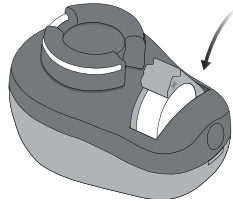





Sluk

Åbn batteriskuffen.

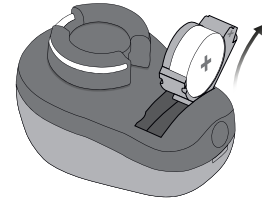

VIGTIGT: Du må ikke bruge standby (lydløs)-funktionen til at slukke for lydprocessoren, da den fortsat vil bruge strøm fra batteriet i den indstilling.

Tilslutning og frakobling af lydprocessoren

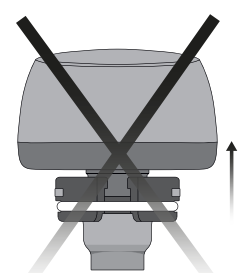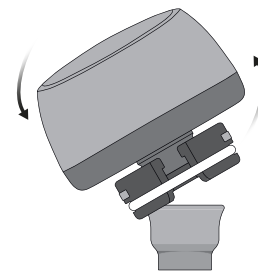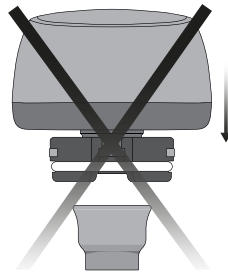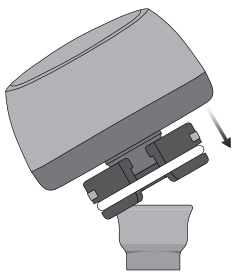

Tilslutning

Lydprocessoren tilsluttes sikkert og bekvemt ved at vippe det let og forsigtigt skubbe den ned over abutmentet. Det er vigtigt at holde håret til side, når du tilslutter lydprocessoren til abutmentet.

Frakobling


Lydprocessoren frakobles sikkert og bekvemt ved forsigtigt at vippe den væk fra abutmentet.



Udskiftning af batteriet


Når det er tid at udskifte batteriet, vil du høre tre bip gentagne gange med regelmæssige mellemrum, indtil batteriet løber tør.

1. Åbn

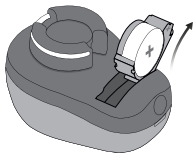

Åbn batteriskuffen helt.
Tag batteriet ud.


2. Fjern mærkaten

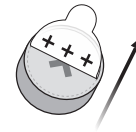

Fjern mærkaten fra + siden på det nye batteri.


TIP: Vent 2 minutter, så batteriet iltes for at sikre optimal funktion.

3. Sæt i

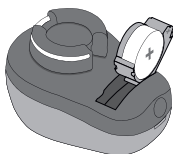

Sæt det nye batteri i batteriskuffen.
Sørg for, at + siden vender nedad.


4. Luk

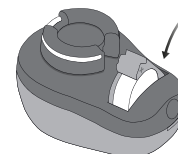

Luk batteriskuffen. Lydprocessoren vil afspille en jingle.

TIP: Multiværktøjet kan bruges til at skifte batteri. Brug den magnetiske ende til at tage batterier ud og sætte dem i. Multiværktøjet kan fås hos hørespecialisten.

VIGTIGT: Dit multiværktøj har en indbygget magnet. Hold multiværktøjet mindst 30 cm fra kreditkort og andre magnetisk følsomme enheder.

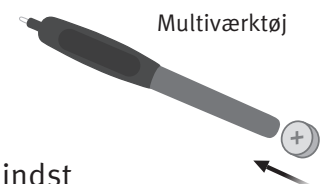



Vedligeholdelse af lydprocessoren

Anvend en tør klud eller en vådserviet til babyer til at rengøre lydprocessoren udvendigt. Vær især grundig med at rense koblingen for snavs eller hår.

Brug hverken vand eller andre væsker, når du renser lydprocessoren – den er ikke vandtæt. Hvis lydprocessoren bliver våd ved et uheld, skal batteriskuffen åbnes, og lydprocessoren lægges til tørre.

Det er vigtigt at beskytte eller fjerne din lydprocessor under besøg hos frisøren, eller når du anvender hårprodukter. Du kan eventuelt bruge det specielle cover til abutmentet, der følger med din lydprocessor, til at beskytte abutmentet.

Lydprocessoren er tilpasset, så den passer til dig personligt og bør derfor ikke bruges af andre.



Problemløsning

Mulige problemer og løsningsforslag		
Symptom	Mulige årsager	Løsninger
Ingen lyd	Opbrugt batteri	Skift batteri
	Lydprocessoren er på standby (lydløs)	Tryk på fjernbetjeningen, eller tjek på Oticon ON App
Afbudt eller reduceret lyd	Snavs i koblingen eller lydindgangen	Rens lydprocessoren
	Fugt	Åbn batteriskuffen, og lad lydprocessoren tørre i æsken
	Opbrugt batteri	Skift batteri
Tilbagekobling	Lydprocessoren rører ved noget	Se efter, om lydprocessoren er korrekt tilsluttet og ikke rører ved noget
Parringsproblem med Apple-enhed	Bluetooth-forbindelse svigtede	1) Slet parrede enheder parring (Indstillinger→Generelt→Tilgængelighed→Høreapparater→Enheder→Glem denne enhed). 2) Sluk for Bluetooth, og tænd igen. 3) Åbn og luk batteriskuffen på enheden/-erne. 4) Par enhederne igen (se kapitlet: "Parring af lydprocessoren med en iPhone").
	Kun en lydprocessor parret	

Hvis ingen af de ovenstående løsninger virker, skal du kontakte klinikken for at få hjælp.