




Parring af din ConnectClip med din/dine lydprocessor/-er

1. Sørg for, at ConnectClip er slukket.




Hold multiknappen inde i ca. 6 sek. indtil strømindikatorens viser, at den er slukket ●

2. Sluk lydprocessoren/-erne.

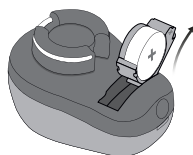

(åbn batteriskuffen)


3. Tænd lydprocessoren/-erne.

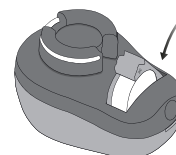

(luk skuffen)


4. Lydprocessoren/-erne er nu klar til at blive forbundet (første gang) med din ConnectClip i ca. 3 minutter

5. Tænd din ConnectClip.

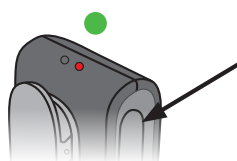


Hold multiknappen inde i ca. 3 sek. indtil strømindikatorens lyser KONSTANT GRØNT ●

6. Din ConnectClip vil nu søge efter din/dine lydprocessor/-er.

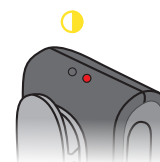

Statusindikatoren BLINKER GULT ●

7. Læg ConnectClip og lydprocessoren/-erne tæt på hinanden

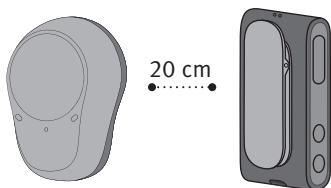

(maks. afstand 20 cm)


8. Forbindelse oprettet med høreapparatet/-erne



Dette angives ved at statusindikatoren lyser KONSTANT GULT ●


Parring af din iPhone med din/dine lydprocessor/-er

1. Indstillinger

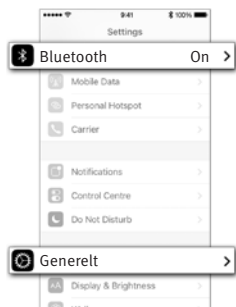


Gå til dine iPhone-indstillinger. Sørg for, at Bluetooth er slået til. Vælg derefter "Generelt".

2. Generelt

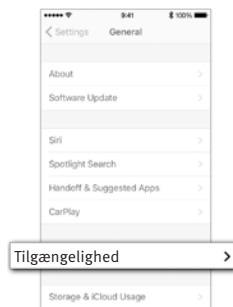


Vælg "Tilgængelighed" under "Generelt".

3. Tilgængelighed

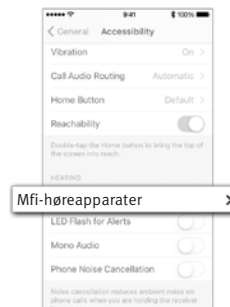


Vælg "Mfi-høreapparater" under "Tilgængelighed".

4. Klargør

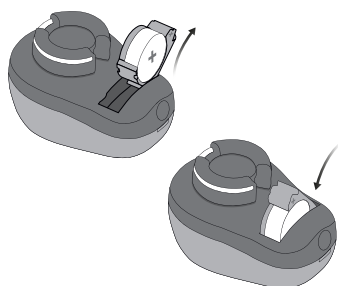


Åbn og luk batteriskuffen. Lydprocessoren/erne er nu i parringsindstilling i 3 minutter.

5. Vælg

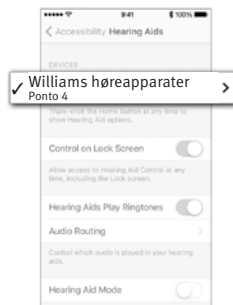

Din iPhone detekterer lydprocessoren/-erne til parring. Detekterede enheder vises på din iPhone. Vælg lydprocessoren/-erne.


6. Bekræft parring

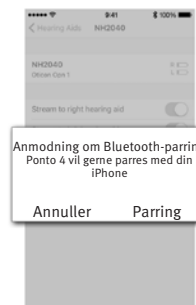

Bekræft parring. Hvis du har to lydprocessorer, skal parringen bekræftes for hver lydprocessor.

Parring af din Remote Control (fjernbetjening) med din/dine lydprocessor/-er

1. Gør fjernbetjeningen klar til parring

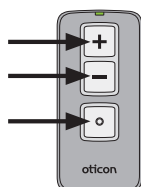


Hold alle knapperne inde i 5 sek. Statusindikatoren (LED) vil blinke grønt to gange.

2. Bekræftelse på, at enheden er klar




Statusindikatoren (LED) lyser grønt i ca. 10 sekunder for at bekræfte, at fjernbetjeningen er klar til parring.

3. Sluk lydprocessoren/-erne

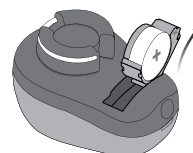


(åbn batteriskuffen)

4. Tænd lydprocessoren/-erne

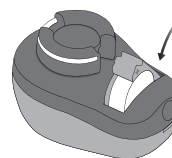


(luk batteriskuffen)

5. Læg fjernbetjeningen og lydprocessoren/-erne tæt ved hinanden (maks. afstand 20 cm)

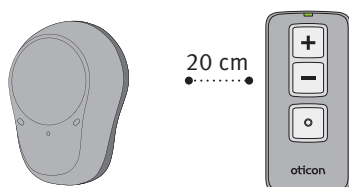

Lydprocessoren/-erne er nu klar til at blive parret med fjernbetjeningen i ca. 3 min.

6. Par fjernbetjeningen med lydprocessoren/-erne

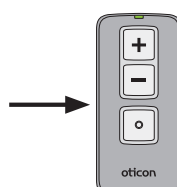

Tryk kort på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for automatisk at parre den med lydprocessoren/-erne.


7. Forbindelse er oprettet med lydprocessoren/-erne




Når parringen er gennemført lyser statusindikatoren grønt i ca. 10 sekunder.

Parring af din TV Adapter (tv-adapter) med din/dine lydprocessor/-er

1. Sørg for, at tv-adapteren er tændt

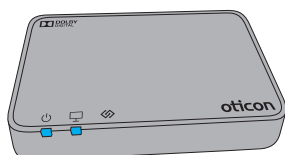


2. Sluk lydprocessoren/-erne

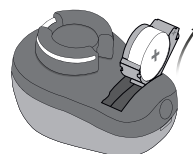

(åbn batteriskuffen)


3. Tænd lydprocessoren/-erne

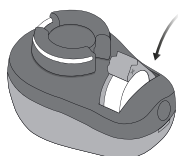


(luk batteriskuffen)

4. Lydprocessoren/-erne er nu klar til at blive parret (første gang) med tv-adapteren i ca. 3 minutter

5. Læg lydprocessoren/-erne tæt ved tv-adapteren

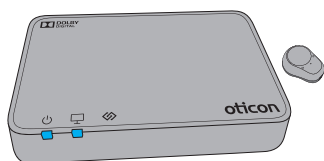

6. Forbindelse er oprettet med lydprocessoren/-erne

TV Adapter	Beskrivelse
	Parring færdig

Parringen er gennemført, når strømindikatoren og tv-indikatoren lyser blå i ca. 30 sekunder.