

PHILIPS

HearLink

Ανοικτού Τύπου
Ακουστικά
Βοηθήματα

miniRITE



Made for

 iPhone | iPad | iPod

Οδηγίες χρήσης

Λίγα λόγια για το μοντέλο

Αυτό το εγχειρίδιο αφορά τις ακόλουθες οικογένειες ακουστικών βαρηκοΐας:

Να συμπληρωθεί από τον ακοοπροθετιστή σας.

- HearLink 9010 MNR – HL 9010 MNR (HER9010)
GTIN: 05714464002818
- HearLink 7010 MNR– HL 7010 MNR (HER7010)
GTIN: 05714464002801
- HearLink 5010 MNR– HL 5010 MNR (HER5010)
GTIN: 05714464002795
- HearLink 3010 MNR– HL 3010 MNR (HER3010)
GTIN: 05714464003631
- HearLink 2010 MNR– HL 2010 MNR (HER2010)
GTIN: 05714464003648
- HearLink 3000 MNR– HL 3000 MNR (HER3000)
GTIN: 05714464002757
- HearLink 2000 MNR– HL 2000 MNR (HER2000)
GTIN: 05714464002740

Με NFMI και 2,4 GHz ραδιοφωνική λειτουργία.

Οι ακόλουθες ακουστικές επιλογές είναι διαθέσιμες για τις παραπάνω οικογένειες:

- Μεγάφωνο - 60
- Μεγάφωνο - 85
- Μεγάφωνο - 100 (Ισχυρό ακουστικό βαρηκοΐας)
- Μεγάφωνο - 100 με Power Mold
(Ισχυρό ακουστικό βαρηκοΐας)
- Μεγάφωνο - 105 με Power Mold
(Ισχυρό ακουστικό βαρηκοΐας)

Οι ρυθμίσεις του προσωπικού σας ακουστικού βαρηκοΐας

Επικσόπηση των ρυθμίσεων του ακουστικού βαρηκοΐας σας

Αριστερό			Δεξί	
<input type="checkbox"/> Ναι	<input type="checkbox"/> Όχι	Έλεγχος έντασης	<input type="checkbox"/> Ναι	<input type="checkbox"/> Όχι
<input type="checkbox"/> Ναι	<input type="checkbox"/> Όχι	Κουμπί Προγραμμάτων	<input type="checkbox"/> Ναι	<input type="checkbox"/> Όχι
<input type="checkbox"/> Ναι	<input type="checkbox"/> Όχι	Σίγαση	<input type="checkbox"/> Ναι	<input type="checkbox"/> Όχι

Ένδειξη ελέγχου έντασης ήχου

<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	Χτύπος σε ελάχιστη / μέγιστη ένταση	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	Κλικ όταν αλλάζετε ένταση	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	Μπιπ σε προτιμώμενη ένταση	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off

Δείκτες μπαταρίας

<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
-----------------------------	------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Πιστοποιητικό Εγγύησης

Όνομα ιδιοκτήτη:

Επαγγελματίας ακοής:

Διεύθυνση ακοοπροθετιστή:

Τηλέφωνο ακοοπροθετιστή:

Ημερομηνία Αγοράς:

Περίοδος Εγγύησης:

Μήνας:

Μοντέλο δεξιού ακουστικού:

Σειριακός Αρ.:

Μοντέλο αριστερού ακουστικού:

Σειριακός Αρ.:

Διεθνής εγγύηση

Το ακουστικό καλύπτεται από διεθνή περιορισμένη εγγύηση η οποία εκδόθηκε από τον κατασκευαστή και ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση καλύπτει τα ελαττώματα κατασκευής και υλικού της ίδιας της συσκευής, αλλά όχι εξαρτήματα όπως μπαταρίες, καλώδια, τροφοδοτικά κ.λπ. Τα προβλήματα που προκύπτουν από ακατάλληλο/εσφαλμένο χειρισμό ή φροντίδα, υπερβολική χρήση, ατυχήματα, επισκευές από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό, έκθεση σε διαβρωτικές συνθήκες, ζημιές που οφείλονται σε ξένα αντικείμενα που εισέρχονται στη συσκευή ή λανθασμένες ρυθμίσεις ΔΕΝ καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση και ενδέχεται να την ακυρώσουν. Η προαναφερθείσα εγγύηση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε νόμιμα δικαιώματα ενδέχεται να ισχύουν βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας που διέπει την πώληση καταναλωτικών αγαθών. Ο ακοοπροθετιστής σας ενδέχεται να έχει εκδώσει εγγύηση που υπερβαίνει τις ρήτρες αυτής της περιορισμένης εγγύησης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να τον/την συμβουλευέστε.

Αν χρειάζεστε επισκευή

Δώστε το ακουστικό βαρηκοΐας σας στον ακοοπροθετιστή / ακοολόγο σας ο οποίος μπορεί να κάνει μικρές επιδιορθώσεις και ρυθμίσεις αμέσως.

Εισαγωγή σε αυτό το εγχειρίδιο

Αυτό το έντυπο περιέχει οδηγίες χρήσης και συντήρησης για το καινούργιο σας ακουστικό βαρηκοΐας. Παρακαλείσθε να διαβάσετε όλο το περιεχόμενό του με προσοχή συμπεριλαμβανομένης και της ενότητας με τις προειδοποιήσεις. Θα σας βοηθήσει να επωφεληθείτε στο έπακρο από όλες τις δυνατότητες του ακουστικού σας.

Ο ακοοπροθετιστής σας έχει ρυθμίσει το ακουστικό βαρηκοΐας σας για να καλύψει τις ανάγκες της βαρηκοΐας σας. Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί του.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα hearingsolutions.philips.com.

Προβλεπόμενη χρήση

Προβλεπόμενη χρήση

Το ακουστικό βοήθημα προορίζεται για την ενίσχυση και τη μετάδοση του ήχου στο αυτί

Ενδείξεις χρήσης

Βαρηκοΐα που κυμαίνεται από ήπια μέχρι σοβαρή έως και πολύ σοβαρή απώλεια ακοής

Προβλεπόμενος χρήστης

Ενήλικες και παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης των 36 μηνών

Περιβάλλον χρήσης

Εσωτερικοί/Εξωτερικοί χώροι

Αντενδείξεις

Οι χρήστες ενεργών εμφυτευμάτων πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση του ακουστικού βοηθήματος. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την ενότητα "Προειδοποιήσεις".

Κλινικά οφέλη

Το ακουστικό βοήθημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει καλύτερη κατανόηση της ομιλίας συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της επικοινωνίας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Σημαντική σημείωση

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής που εκτελείται από τον επαγγελματία ακοής, η ενίσχυση του ήχου του ακουστικού βαρηκοΐας είναι ρυθμισμένη βάσει των δυνατοτήτων της ακοής σας.


Πίνακας Περιεχομένων

Αναγνωρίστε το ακουστικό βαρηκοΐας σας, το μεγάφωνο και τον τρόπο εφαρμογής	12
Το ακουστικό σας – Τι είναι	14
Τι κάνει	15
Ξεχωρίστε το αριστερό από το δεξί ακουστικό	16
Μπαταρία (μέγεθος 312)	17
Πολυεργαλείο για τον χειρισμό των μπαταριών και τον καθαρισμό	18
Ενεργοποιήστε / Απενεργοποιήστε το ακουστικό σας	19
Πότε γίνεται η αλλαγή της μπαταρίας	20
Αλλαγή της μπαταρίας	21
Εφαρμόστε το ακουστικό σας	23
Φροντίστε το ακουστικό σας	24
Τυπικά εκμαγεία: Θηλή ή Grip Tip	25
Αντικατάσταση κλασικών εκμαγείων	26
Φίλτρο ProWax miniFit	27
Αλλαγή φίλτρου ProWax miniFit	28
Εξατομικευμένα εκμαγεία	29

Micro Mold, Lite Tip, ή Poewer Mold	29
Καθαρισμός Μικροεκμαγείου, Lite Tip ή Power Mold	30
Αλλαγή φίλτρου ProWax	31
Λειτουργία πτήσης	32
Προαιρετικά χαρακτηριστικά και αξεσουάρ	33
Αλλαγή έντασης (προαιρετικό)	34
Αλλαγή Προγράμματος (προαιρετικό)	35
Βάλτε το ακουστικό σας σε λειτουργία σίγασης (προαιρετικό)	37
Λειτουργία γρήγορης επαναφοράς και σύζευξης	38
Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας με iPhone, iPad και iPod touch	39
Σύζευξη ακουστικού με iPhone	40
Επανασυνδέστε τα ακουστικά σας με τη συσκευή σας iPhone, iPad ή iPod touch	43
Εφαρμογή Philips HearLink	44
Ασύρματα αξεσουάρ (προαιρετικά)	46
Άλλες επιλογές (προαιρετικό)	47
Γενικές Προειδοποιήσεις	48
Συνήθη προβλήματα και λύσεις	56

Προστασία από το νερό και τη σκόνη	58
Συνθήκες χρήσης	59
Τεχνικές Πληροφορίες	60

Αναγνωρίστε το ακουστικό βαρηκοΐας σας, το μεγάφωνο και τον τρόπο εφαρμογής

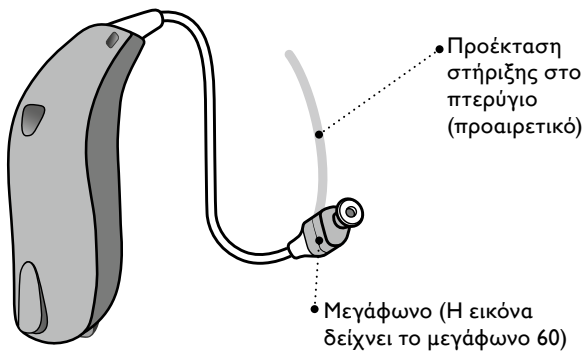




Μεγάφωνα

Το ακουστικό βαρηκοΐας miniRITE διατίθεται με 3 μεγάφωνα:

60-Μεγάφωνα

85-Μεγάφωνα

100-Μεγάφωνα

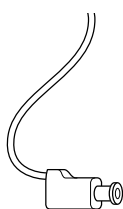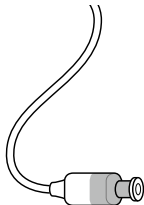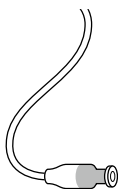

Τρόποι Εφαρμογής

Το μεγάφωνο χρησιμοποιεί τις ακόλουθες θηλές και τρόπους εφαρμογής:



Θηλή (φαίνεται η θηλή ανοιχτής εφαρμογής)*



Grip Tip*



VarioTherm® Micro Mold or Lite Tip




Micro Mold or Lite Tip

Μεγάφωνα με Power Mold

100-Μεγάφωνα

105-Μεγάφωνα

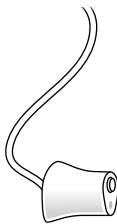

* Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες για την αντικατάσταση της θηλής ή του Grip Tip στην ενότητα: «Αντικαταστήστε τη θηλή ή το Grip Tip». Το VarioTherm® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Dreve.

Το ακουστικό σας – Τι είναι

Οπές μικροφώνου /
Είσοδος Ήχου

• Προέκταση στήριξης
στο περύγιο
(προαιρετικό)

• Φίλτρο
προστασίας
από το κερι

• Μεγάφωνο (Η εικόνα
δείχνει το μεγάφωνο 60)

• Πλήκτρο επιλογής

• Υποδοχή Μπαταρίας

Τι κάνει

Είσοδος ήχου

• Κρατάει το μεγάφωνο στην θέση του

• Προστασία
μεγαφώνου
από το κερί


• Έξοδος ήχου

• Αλλαγή προγράμματος έντασης και σίγαση του ακουστικού βαρηκοΐας

• Περιέχει την μπαταρία. Το καπάκι της μπαταριοθήκης είναι επίσης ο διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης

Ξεχωρίστε το αριστερό από το δεξί ακουστικό

Είναι σημαντικό να ξεχωρίζετε το αριστερό από το δεξί ακουστικό βαρηκοΐας μιας και μπορεί να έχουν προγραμματιστεί διαφορετικά. Μπορείτε να βρείτε έγχρωμη επιγραφή που δείχνει το αριστερό/δεξί στην υποδοχή μπαταρίας, ή πάνω στα μεγάφωνα 60 και 85. Οι επιγραφές μπορούν να βρεθούν και πάνω στα μεγάφωνα 100, και στα εκμαγεία.

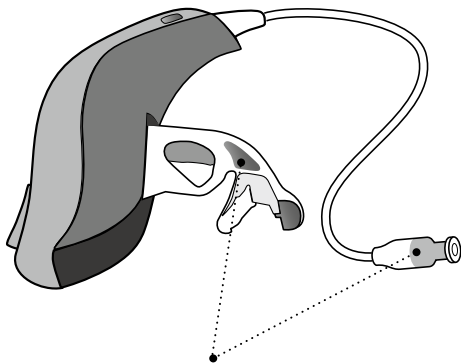


Η ΚΟΚΚΙΝΗ επιγραφή υποδεικνύει το ΔΕΞΙ ακουστικό βαρηκοΐας

Η ΜΠΛΕ επιγραφή υποδεικνύει το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ακουστικό βαρηκοΐας


Μπαταρία (μέγεθος 312)

Το ακουστικό βαρηκοΐας σας είναι μια μικρή ηλεκτρονική συσκευή που λειτουργεί με ειδικές μπαταρίες. Για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας, πρέπει να βάλετε μια καινούρια μπαταρία μέσα στην μπαταριοθήκη. Δείτε πώς, στην ενότητα "Αλλαγή μπαταρίας".

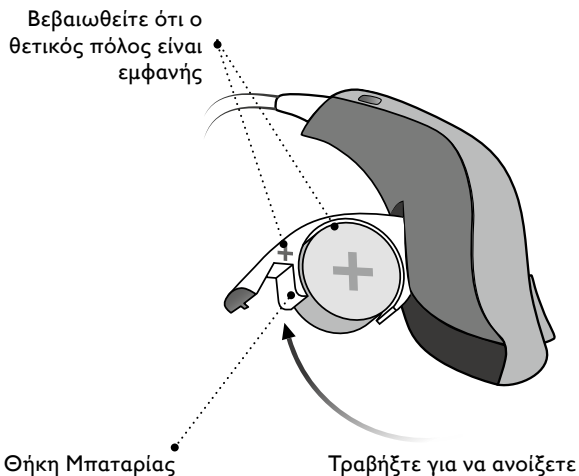

Πολυεργαλείο για τον χειρισμό των μπαταριών και τον καθαρισμό

Το πολυεργαλείο περιέχει έναν μαγνήτη ο οποίος διευκολύνει την αλλαγή της μπαταρίας στο ακουστικό βαρηκοΐας. Περιλαμβάνει επίσης ένα βουρτσάκι και ένα μεταλλικό κυκλικό σύρμα για τον καθαρισμό του κεριού από το ακουστικό βαρηκοΐας σας. Αν χρειάζεστε καινούργιο πολυεργαλείο, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον ακοοπροθετιστή σας.

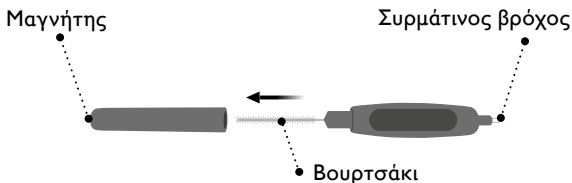

Σημαντική σημείωση


Το πολυεργαλείο σας έχει ενσωματωμένο έναν μαγνήτη. Το πολυεργαλείο θα πρέπει να φυλάσσεται 30 εκατοστά μακριά από πιστωτικές κάρτες και άλλα αντικείμενα ευαίσθητα στον μαγνητισμό.

Ενεργοποιήστε / Απενεργοποιήστε το ακουστικό σας

Το καπάκι της μπαταριοθήκης χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει το ακουστικό βαρηκοΐας. Για να εξοικονομήσετε μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό βαρηκοΐας είναι απενεργοποιημένο όταν δεν το φοράτε.


Ενεργοποίηση

Κλείστε την υποδοχή μπαταρίας με την μπαταρία στην σωστή της θέση

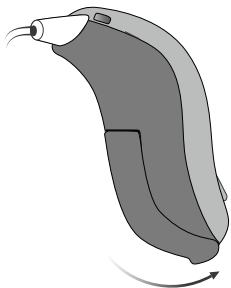

Απενεργοποίηση

Ανοίξτε την υποδοχή μπαταρίας

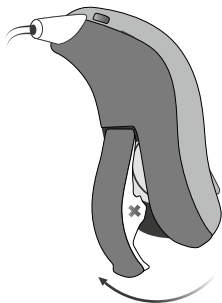

Πότε γίνεται η αλλαγή της μπαταρίας

Όταν πλησιάζει η ώρα της αλλαγής της μπαταρίας, θα ακούσετε τρία επαναλαμβανόμενα μπιπ μέχρι να τελειώσει η μπαταρία.



Τρία μπιπ*

= Η μπαταρία τελειώνει



Τέσσερα μπιπ

= Η μπαταρία τελείωσε

Συμβουλή

Για να είστε σίγουροι ότι το ακουστικό βαρηκοΐας θα λειτουργεί πάντα, να έχετε έξτρα μπαταρίες μαζί σας, ή αλλάξτε την μπαταρία πριν φύγετε από το σπίτι.

* Η λειτουργία Bluetooth® θα διακοπεί και δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασύρματα αξεσουάρ.


Η λέξη Bluetooth® και το λογότυπο είναι σήμα κατατεθέν το οποίο κατέχει η Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των συμβόλων από την Demant A/S γίνεται κατόπιν αδειοδότησης. Οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους εκάστοτε κατόχους τους.

Οι μπαταρίες θα χρειάζονται αλλαγή πιο συχνά αν ακούτε μουσική μέσω των ακουστικών βαρηκοΐας σας.

Αλλαγή της μπαταρίας

1. Αφαίρεση

Ανοίξτε πλήρως το καπάκι της μπαταριοθήκης. Αφαιρέστε την μπαταρία.

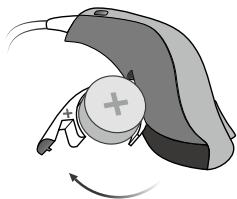


2. Ξεκολλήστε

Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από τον θετικό πόλο της μπαταρίας.

Συμβουλή:


Περιμένετε 2 λεπτά έτσι ώστε η μπαταρία να πάρει αέρα, για την καλύτερη λειτουργία της.

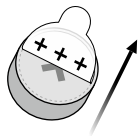

3. Εισαγωγή

Βάλτε την καινούργια μπαταρία στην υποδοχή μπαταρίας.


Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με το "+" κοιτάζει προς τα επάνω.

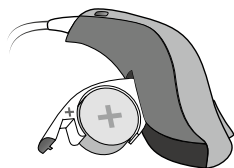

4. Κλείστε


Κλείστε την υποδοχή μπαταρίας. Το ακουστικό βαρηκοΐας θα παίξει έναν ήχο από το μεγάφωνο.

Φέρτε το κοντά στο αυτί σας για να ακούσετε αυτόν τον ήχο.

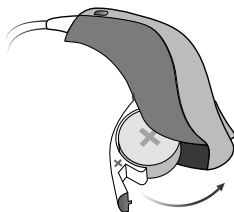

Συμβουλή

Το πολυεργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε την πλευρά του μαγνήτη για να αφαιρείτε και να τοποθετείτε τις μπαταρίες. Το πολυεργαλείο διατίθεται από τον ακοοπροθετιστή/ ακοολόγο σας.

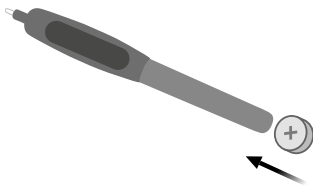

Εφαρμόστε το ακουστικό σας

Το μεγάφωνο μεταφέρει τον ήχο στο αυτί σας. Το μεγάφωνο θα πρέπει να εφαρμόζεται πάντα με κάποιο εκμαγείο/θηλή. Να χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά σχεδιασμένα για το ακουστικό βαρηκοΐας σας.

Αν το μεγάφωνό σας έχει προέκταση στήριξης στο πτερύγιο, τοποθετήστε την στο αυτί σας έτσι ώστε να ακολουθεί τις γραμμές του αυτιού σας (δείτε το βήμα 3).


Βήμα 1:

Τοποθετήστε το ακουστικό βαρηκοΐας σας πίσω από το αυτί σας.




Βήμα 2:

Κρατήστε την καμπύλη του καλωδίου του μεγαφώνου με τον δείκτη και τον αντίχειρά σας. Το εκμαγείο/θηλή θα πρέπει να "κοιτάει" προς τον ακουστικό πόρο.

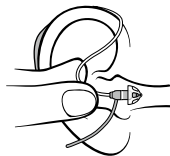

Βήμα 3:

Με ήπιο τρόπο πιέστε το μεγάφωνο μέσα στο αυτί σας, μέχρι το καλώδιο να εφαρμόξει στο πλάι το κεφαλιού σας.

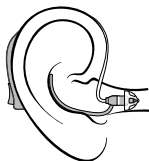


Φροντίστε το ακουστικό σας

Να χειρίζεστε το ακουστικό βαρηκοΐας σας πάνω από μια μαλακή επιφάνεια ώστε αν σας πέσει να μην πάθει κάποια ζημιά.

Καθαρίστε τις οπές του μικροφώνου

Βουρτσίστε με προσοχή σκόνη από τις οπές χρησιμοποιώντας ένα καθαρό βουρτσάκι. Βουρτσίστε ήπια την επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι το βουρτσάκι δεν πιέζει τις οπές.

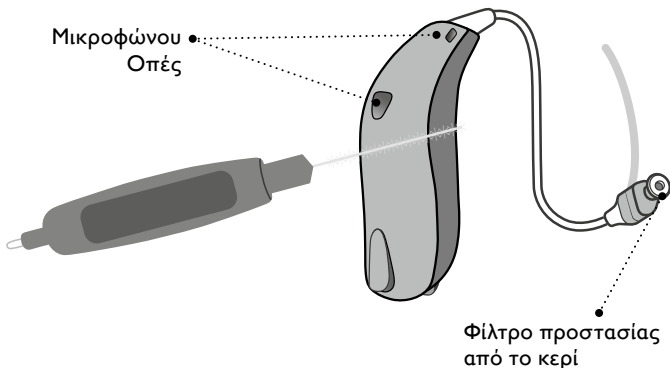

Σημαντική σημείωση

χρησιμοποιήστε ένα στεγνό και καθαρό πανί για να καθαρίσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας.

Δεν πρέπει να πλυθεί ή να βυθιστεί ποτέ στο νερό ή σε άλλα υγρά.

Τυπικά εκμαγεία: Θηλή ή Grip Tip

Τόσο οι θηλές όσο και το Grip Tip κατασκευάζονται από μαλακό καουτσούκ. Υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι θηλών. Ελέγξτε τον τύπο και το μέγεθος του ακουστικού σας.



Θηλή ανοιχτής εφαρμογής



Θηλή με μονό εξαερισμό



Θηλή με διπλό εξαερισμό



Θηλή κλειστής εφαρμογής



Grip Tip (διαθέσιμο σε μεγέθη small και large, αριστερό και δεξί, με ή χωρίς εξαερισμό)



5 mm*



6 mm



8 mm



10 mm



12 mm**

* μόνο σαν θηλή ανοιχτής εφαρμογής για το μεγάφωνο - 60

** όχι για τη θηλή ανοιχτής εφαρμογής

Σημαντική σημείωση

Αν το ακουστικό δεν βρίσκεται πάνω στο

μεγάφωνο όταν

αφαιρείται από το αυτί, το ακουστικό μπορεί να εξακολουθεί να βρίσκεται στον ακουστικό πόρο.


Για περαιτέρω οδηγίες συμβουλευτείτε τον ακοοπροθετιστή σας,

Αντικατάσταση κλασικών εκμαγείων

Η θηλή ή το Grip Tip δεν θα πρέπει να καθαρίζεται. Αν γεμίσει με κερί, τότε αντικαταστήστε την με καινούργια. Το Grip Tip θα πρέπει να αντικαθίσταται τουλάχιστον κάθε μήνα.


Βήμα 1:

Κρατήστε το μεγάφωνο και αφαιρέστε την θηλή.

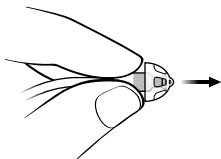


Βήμα 2:

Τοποθετήστε την άκρη του μεγαφώνου ακριβώς στην μέση της θηλής για να είναι σταθερή η ένωση.

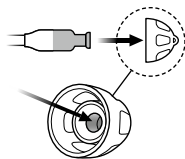

Βήμα 3:

Πιέστε αρκετά ώστε να βεβαιωθείτε ότι η θηλή έχει τοποθετηθεί καλά.

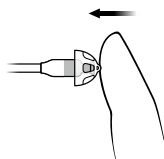

Φίλτρο ProWax miniFit

Το μεγάφωνο έχει προσαρτημένο ένα λευκό φίλτρο προστασίας από το κερί στο σημείο εφαρμογής με την θηλή. Το φίλτρο προστασίας αποτρέπει την καταστροφή του μεγαφώνου από κερί και άλλες ουσίες. Αν βουλώσει το φίλτρο, παρακαλείστε να το αλλάξετε (δείτε την ενότητα “Αντικατάσταση φίλτρου ProWax miniFit”) ή απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας.

Αφαιρέστε την θηλή από το μεγάφωνο πριν αλλάξετε το φίλτρο προστασίας.


Σημαντικη σημειωση

Να χρησιμοποιείτε πάντα τον ίδιο τύπο φίλτρου προστασίας με αυτόν που υπήρχε αρχικά στο ακουστικό βαρηκοΐας σας. Αν έχετε κάποια αμφιβολία σχετικά με την χρήση ή την αντικατάσταση των φίλτρων σας, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

Αλλαγή φίλτρου ProWax miniFit


1. Εργαλείο

Αφαιρέστε το εργαλείο από το κέλυφος. Το εργαλείο έχει δύο μυτερές άκρες, μια κούφια για την αφαίρεση του παλιού και μία με το καινούργιο φίλτρο προστασίας.

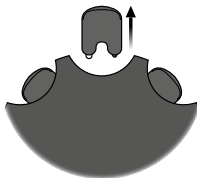

2. Αφαίρεση

Πιέστε την κούφια άκρη στο υπάρχον φίλτρο του μεγαφώνου και τραβήξτε το προς την αντίθετη φορά.

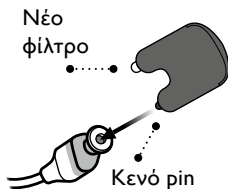

3. Εισαγωγή

Εισάγετε το καινούργιο φίλτρο προστασίας, χρησιμοποιώντας την άλλη μυτερή άκρη, αφαιρέστε το εργαλείο και πετάξτε το.



4. Τέλος

Το μεγαφώνο θα πρέπει να φαίνεται όπως στην φωτογραφία, όταν αντικαταστήσετε το φίλτρο.




Αν το ακουστικό βαρηκοΐας σας έχει εκμαγείο, τότε το φίλτρο θα πρέπει να αλλαχτεί από τον ακοοπροθετιστή σας.

Εξατομικευμένα εκμαγεία Micro Mold, Lite Tip, ή Power Mold

Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τύπου θηλών:

Micro Mold, Lite Tip και Power Mold.

Οι θηλές Micro Mold και Lite Tip είναι διαθέσιμες σε δύο διαφορετικά υλικά. Τα ακουστικά εξατομικεύονται για το αυτί σας.

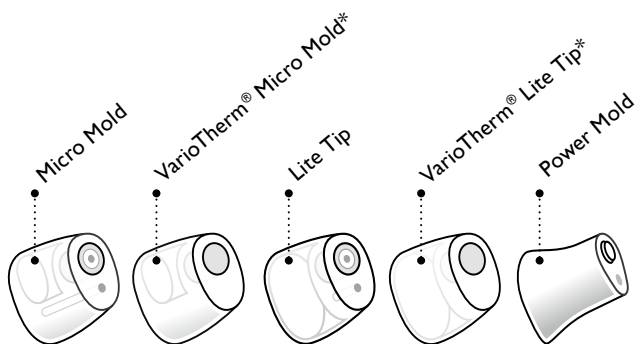

Τα εξατομικευμένα ακουστικά διαθέτουν ένα λευκό φίλτρο κεριού προσαρτημένο στην οπή ήχου. Ο τύπος φίλτρου που πρέπει να χρησιμοποιείται με αυτά τα ακουστικά είναι το ProWax. Για την αντικατάσταση του ProWax filter, βλ. ενότητα «Αντικατάσταση του φίλτρου ProWax».


* Το μικροεκμαγείο VarioTherm® και το Lite Tip δεν διαθέτουν φίλτρο κεριού.

Καθαρισμός Μικροεκμαγείου, Lite Tip ή Power Mold

Το εκμαγείο θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Το εκμαγείο περιέχει φίλτρο προστασίας απο το κερί. Το φίλτρο προφυλάσσει το μεγάφωνο από το κερί. Αντικαταστήστε το φίλτρο όταν είναι φραγμένο ή όταν το ακουστικό δεν ακούγεται όπως συνήθως.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή/ ακοολόγο σας.


- Η οπή εξαερισμού καθαρίζεται πιέζοντας το βουρτσάκι μέσα στην τρύπα, και στρέφοντας το ελαφρώς.

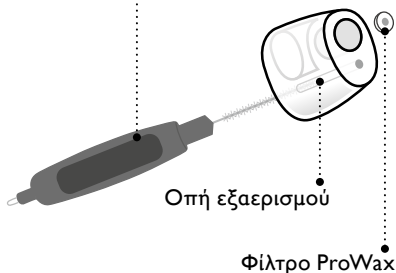

Αλλαγή φίλτρου ProWax


1. Εργαλείο

Αφαιρέστε το εργαλείο από το κέλυφος. Το εργαλείο έχει δύο μυτερές άκρες, μια κενή για την αφαίρεση του παλιού και μία με το καινούργιο φίλτρο προστασίας.

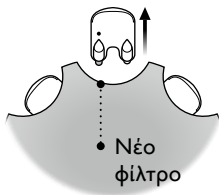

2. Αφαίρεση

Πιέστε την κούφια μυτερή άκρη στο φίλτρο προστασίας στο εκμαγείο και τραβήξτε το προς τα έξω.

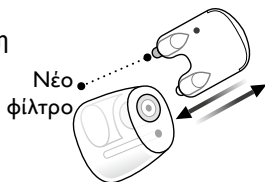


3. Εισαγωγή

Εισάγετε το καινούργιο φίλτρο προστασίας, πιέζοντας την άλλη μυτερή άκρη τραβήξτε το εργαλείο και πετάξτε το.



Λειτουργία πτήσης

Όταν επιβιβάζεστε σε ένα αεροπλάνο, ή εισέρχεστε σε μια περιοχή που απαγορεύεται να εκπέμπετε ραδιοκύματα θα πρέπει να ενεργοποιείτε την λειτουργία πτήσης. Το ακουστικό βαρηκοΐας θα εξακολουθήσει να λειτουργεί. Αρκεί να ενεργοποιήσετε την λειτουργία πτήσης στο ένα ακουστικό βαρηκοΐας.

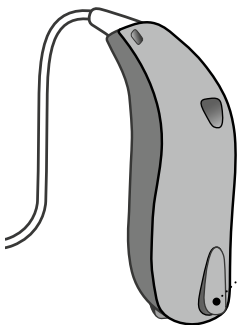

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την λειτουργία πτήσης

Πατήστε το κουμπί επιλογής για 7 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Ένας ήχος θα επιβεβαιώσει την ενέργειά σας.

Ανοίγοντας και κλείνοντας την υποδοχή μπαταρίας η λειτουργία πτήσης απενεργοποιείται. Δείτε την ενότητα “Γρήγορη επαναφορά ρυθμίσεων”.


Προαιρετικά χαρακτηριστικά και αξεσουάρ

Τα χαρακτηριστικά και τα αξεσουάρ που περιγράφονται στις επόμενες σελίδες είναι προαιρετικά. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον ακοοπροθετιστή/ακοολόγο σας για την διαμόρφωση του ακουστικού βαρηκοΐας σας. Αν κινήστε σε δύσκολα περιβάλλοντα ακρόασης, ένα ειδικό πρόγραμμα θα σας βοηθήσει. Ο ακοοπροθετιστής/ακοολόγος σας τα προγραμματίζει.

Να σημειώσετε τις περιπτώσεις στις οποίες θα χρειαστείτε βοήθεια.

□ Αλλαγή έντασης (προαιρετικό)

Το κουμπί επιλογής σάς δίνει την δυνατότητα να αλλάζετε την ένταση. Θα ακούσετε ένα κλικ όταν αλλάζετε την ένταση.

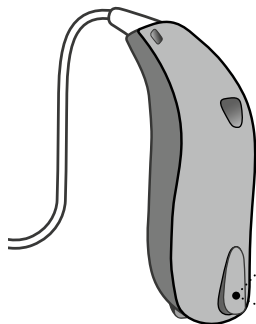

• Ένα σύντομο πάτημα στο ΔΕΞΙ ακουστικό βαρηκοΐας αυξάνει την ένταση


• Ένα σύντομο πάτημα στο ΑΡΙΣΤΕΡΟ ακουστικό βαρηκοΐας μειώνει την ένταση



Θα ακούσετε 2 μπιπ στην ένταση εκκίνησης.
θα ακούσετε 3 μπιπ στην Μέγιστη και στην Ελάχιστη.

□ Αλλαγή Προγράμματος (προαιρετικό)

Το ακουστικό βαρηκοΐας σας μπορεί να έχει μέχρι και 4 διαφορετικά προγράμματα, τα οποία προγραμματίζει ο ακοοπροθετιστής/ακοολόγος σας.

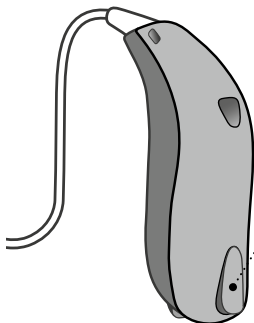

- Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε πρόγραμμα



Αν έχετε δύο ακουστικά βαρηκοΐας, το ΔΕΞΙ ακουστικό βαρηκοΐας αλλάζει προς τα πάνω, δηλαδή από το πρόγραμμα από το 1 στο 2, και το ΑΡΙΣΤΕΡΟ αλλάζει προς τα κάτω, δηλαδή από το 4 στο 3.

**Να συμπληρωθεί από τον ακοοπροθετιστή/
ακοολόγο σας**

Πρόγραμμα	Ήχος ενεργο- ποίησης	Πότε χρησιμο- ποιείται
1		
2		
3		
4		


Αλλαγή προγράμματος:

Σύντομο πάτημα

Παρατεταμένο πάτημα

□ Βάλτε το ακουστικό σας σε λειτουργία σίγασης (προαιρετικό)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία σίγασης αν χρειάζεται να θέσετε το ακουστικό σε σίγαση την ώρα που το φοράτε.

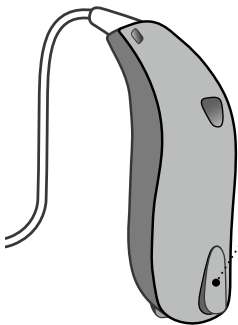

Πιέστε το κουμπί επιλογών για περίπου 4 δευτερόλεπτα για να θέσετε το ακουστικό σε σίγαση.

Για να το επαναφέρετε, πιέστε σύντομα το κουμπί επιλογών.


Σημαντική σημείωση

Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σίγασης για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά σας γιατί εξακολουθούν να λειτουργούν και να καταναλώνουν ενέργεια από την μπαταρία.


Λειτουργία γρήγορης επαναφοράς και σύζευξης

Αν θέλετε να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις από τον ακοοπροθετιστή/ ακοολόγο σας, του ακουστικού βαρηκοΐας απλά ανοίξτε και κλείστε την υποδοχή μπαταρίας. Ένας ήχος ακούγεται όταν το ακουστικό βαρηκοΐας επανέρχεται στις αρχικές του ρυθμίσεις.

Ανοίξτε

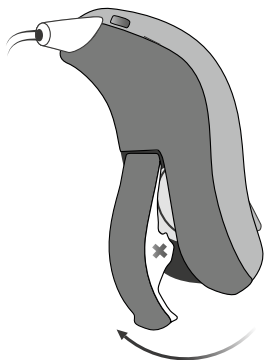

Κλείστε

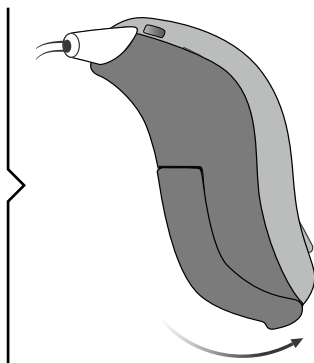

Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας με iPhone, iPad και iPod touch

Το ακουστικό βαρηκοΐας σας είναι φτιαγμένο για iPhone® και επιτρέπει την άμεση επικοινωνία και χειρισμό με iPhone®, iPad® ή iPod® touch.


Για βοήθεια σχετικά με την σύνδεση και τον παράλληλο χειρισμό του ακουστικού βαρηκοΐας με αυτά τα προϊόντα, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή/ακοολόγο σας ή επισκεφτείτε το site μας: www.hearingsolutions.philips.com

Για πληροφορίες συμβατότητας μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα www.hearingsolutions.philips.com/compatibility.

Μετάδοση ήχου με συσκευές Android™ μέσω του Philips AudioClip.

Σύζευξη ακουστικού με iPhone


1. Ρυθμίσεις

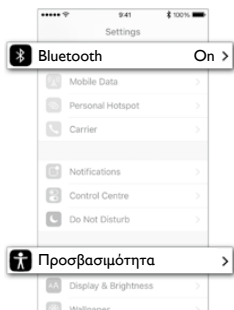

Ανοίξτε το iPhone σας και πηγαίνατε στο μενού “Ρυθμίσεις”.


Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth® είναι ενεργό. Έπειτα επιλέξτε “Προσβασιμότητα”.

2. Προσβασιμότητα

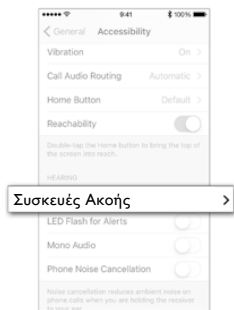


Στην οθόνη “Προσβασιμότητα”, επιλέξτε “Ακουστικά βαρηκοΐας”.

3. Προετοιμάστε

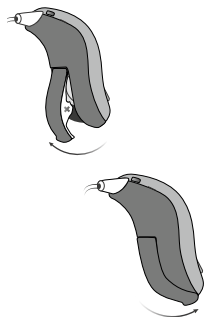

Ανοίξτε και κλείστε την υποδοχή μπαταρίας, και στα δύο ακουστικά βαρηκοΐας, αν έχετε δύο, και τοποθετήστε τα δίπλα στο iPhone σας. Το ακουστικό βαρηκοΐας παραμένει σε κατάσταση σύζευξης για 3 λεπτά.

4. Επιλέξτε

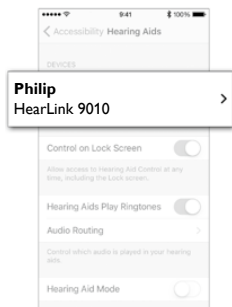

Το iPhone σας θα αναζητήσει το ακουστικό βαρηκοΐας σας για σύζευξη. Οι ανιχνευμένες συσκευές θα φανούν στην λίστα του iPhone σας. Επιλέξτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας.

5. Επιβεβαιώστε τη σύζευξη



Επιβεβαιώστε τη σύζευξη.
Αν έχετε δύο ακουστικά βαρηκοΐας, η επιβεβαίωση της ζεύξης χρειάζεται για κάθε ακουστικό βαρηκοΐας.

Επανασυνδέστε τα ακουστικά σας με τη συσκευή σας iPhone, iPad ή iPod touch

Όταν απενεργοποιείτε τα ακουστικά σας αποσυνδέονται και το iPhone, iPad ή iPod touch. Για να τα ξανασυνδέσετε, ενεργοποιήστε τα ακουστικά βαρηκοΐας ανοίγοντας και κλείνοντας την υποδοχή μπαταρίας. Τα ακουστικά βαρηκοΐας σας θα ξανασυνδεθούν με την Apple συσκευή σας.

Η χρήση του σήματος “Made for Apple” (Κατασκευασμένο για Apple) σημαίνει ότι το αξεσουάρ έχει κατασκευαστεί για να συνδέεται ειδικά με τα προϊόντα της Apple που προσδιορίζονται με το σήμα και έχουν πιστοποιηθεί από προγραμματιστή ότι πληρούν τα στάνταρ απόδοσης της Apple. Η Apple δε φέρει ευθύνη για τη λειτουργία της συγκεκριμένης συσκευής ούτε για τη συμμόρφωσή της με προδιαγραφές ασφαλείας και ρυθμιστικές προδιαγραφές.

Εφαρμογή Philips HearLink

Η εφαρμογή Philips HearLink για iPhone, iPad, iPod touch, και συσκευές Android, προσφέρουν ένα απλό και διακριτικό τρόπο για να ελέγξετε το ακουστικό σας. Η εφαρμογή Philips HearLink σας επιτρέπει επίσης να συνδέετε και να ελέγχετε ένα μεγάλο εύρος άλλων συσκευών κάνοντας σύνδεση με το IFTTT μέσω του διαδικτύου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα μεταβείτε στη διεύθυνση: www.hearingsolutions.philips.com/compatibility

Η εφαρμογή HearLink της Philips είναι διαθέσιμη στην Apple App Store® και στο Google Play™. Κατά τη λήψη της εφαρμογής Philips HearLink στο iPad, αναζητήστε εφαρμογές για iPhone στο Apple App Store®.

Μετάδοση ήχου με συσκευές Android μέσω του εξαρτήματος AudioClip της Philips.



Παρακαλώ βρείτε περισσότερες λεπτομέριες εδώ:
www.hearingsolutions.philips.com

Η Apple, το λογότυπο της Apple, το iPhone, το iPad, το iPod touch, και το Apple Watch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc. Android, Το Google Play και το λογότυπο του Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Ασύρματα αξεσουάρ (προαιρετικά)

Για να ενισχυθεί η εμπειρία σας με το ακουστικό βαρηκοΐας, διατίθενται και ασύρματα αξεσουάρ. Σας δίνουν την δυνατότητα να ακούτε και να επικοινωνείτε καλύτερα σε μια πληθώρα καθημερινών καταστάσεων.

AudioClip

Όταν αυτή η συσκευή έχει συντονιστεί με το κινητό σας τηλέφωνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά βαρηκοΐας σας όπως τα στερεοφωνικά ακουστικά. Το AudioClip μπορεί επίσης να λειτουργεί ως απομακρυσμένο μικρόφωνο και ως τηλεχειριστήριο.

TV Adapter

Ο TV Adapter είναι ένας ασύρματος πομπός ήχου από την τηλεόραση και τις ηλεκτρονικές συσκευές ήχου. Ο TV Adapter μεταδίδει απευθείας στο ακουστικό βαρηκοΐας σας.

Remote Control

Το Remote Control προσφέρει τη δυνατότητα αλλαγής προγραμμάτων, ρύθμιση της έντασης ήχου ή σίγαση του ακουστικού σας.

Εφαρμογή Philips HearLink


Η εφαρμογή προσφέρει έναν διαισθητικό και διακριτικό τρόπο ελέγχου των ακουστικών σας, με το iPhone, το iPad, το iPod touch και τις συσκευές Android.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον επαγγελματία ακοή σας ή επισκευθείτε: www.hearingsolutions.philips.com.

Άλλες επιλογές (προαιρετικό)

Αυτόματο τηλέφωνο (προαιρετικό για το HearLink 3000 και το 2000)

Το αυτόματο τηλέφωνο μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα ένα πρόγραμμα τηλεφώνου στο ακουστικό βαρηκοΐας, αν το τηλέφωνο σας διαθέτει ειδικό μαγνήτη. Ο μαγνήτης πρέπει να τοποθετηθεί επάνω στο τηλέφωνο δίπλα στην έξοδο ήχου.

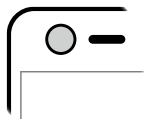

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον ακοοπροθετιστή/ακοολόγο σας.

⚠ Γενικές Προειδοποιήσεις

Θα πρέπει να εξοικειωθείτε πλήρως με τις ακόλουθες γενικές οδηγίες και προειδοποιήσεις πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας.

Τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν αποκαθιστούν πλήρως την ακοή και δεν αποτρέπουν την απώλεια ακοής η οποία προέρχεται από οργανικές συνθήκες. Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις, η μη συχνή χρήση ενός ακουστικού βαρηκοΐας δεν επιτρέπει στον βαρήκοο να επωφεληθεί πλήρως από αυτό.

Συμβουλευτείτε τον ακοοπροθετιστή/ακοολόγο σας αν το ακουστικό βαρηκοΐας σας λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο από ό,τι συνήθως.

Χρήση των Ακουστικών Βαρηκοΐας

- Τα ακουστικά βαρηκοΐας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις ρυθμίσεις του ακοοπροθετιστή/ακοολόγου σας. Κακή χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας μπορεί να προκαλέσει ξαφνική και μόνιμη απώλεια ακοής.
- Μην επιτρέψετε ποτέ σε άλλους να χρησιμοποιήσουν τα ακουστικά σας διότι αυτά έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με την δική σας βαρηκοΐα και πιθανόν να βλάψουν την ακοή άλλων προσώπων.

Κίνδυνος πνιγμού & κίνδυνος κατάποσης μπαταριών και άλλων μικρών μερών

- Τα ακουστικά βαρηκοΐας, τα εξαρτήματά τους και οι μπαταρίες πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά ή οποιονδήποτε ενδέχεται να καταπιεί αυτά τα αντικείμενα, ή σε άλλη περίπτωση να τραυματιστεί.
- Οι μπαταρίες μοιάζουν αρκετά χάπια οπότε υπάρχει κίνδυνος μπερδέματος. Για αυτόν τον λόγο να είστε προσεκτικοί πριν να καταπιείτε χάπια.
- Τα ακουστικά βαρηκοΐας μπορούν να διατεθούν και με μπαταριοθήκη ασφαλείας. Προτείνεται σε περιπτώσεις βρεφών, μικρών παιδιών και ανθρώπων με μαθησιακές δυσκολίες.
- Τα παιδιά που είναι μικρότερα από 36 μηνών θα πρέπει να έχουν πάντα θήκη μπαταρίας ασφαλείας. Συζητήστε με τον ακοοπροθετιστή/ ακοολόγο σας την πιθανότητα αυτής της επιλογής.

Εάν καταπιείτε μια μπαταρία, το ακουστικό ή κάποιο μικρό μέρος αυτού, επισκεφθείτε αμέσως έναν γιατρό.

Χρήση μπαταρίας

- Πάντα να χρησιμοποιείτε μπαταρίες οι οποίες προτείνονται από τον ακοοπροθετιστή/ακοολόγο σας. Χαμηλής ποιότητας μπαταρίες μπορεί να βγάλουν υγρά και να προκαλέσουν σωματικές βλάβες.
- Να μην προσπαθείτε ποτέ να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες σας ή να τις κάψετε. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης των μπαταριών.

⚠ Γενικές Προειδοποιήσεις

Δυσλειτουργία

- Να έχετε υπ' υπόψιν την πιθανότητα ότι το ακουστικό βαρηκοΐας σας μπορεί να σταματήσει χωρίς προειδοποίηση. Να το έχετε υπ' υπόψιν σας όταν ακούτε σε προειδοποιητικούς ήχους (π.χ. όταν είσαστε στον δρόμο). Τα ακουστικά βαρηκοΐας μπορεί να σταματήσουν να λειτουργούν αν οι μπαταρίες έχουν λήξει ή η σωλήνωση έχει φράξει από υγρασία ή κερι.

Ενεργά εμφυτεύματα

- Το ακουστικό βοήθημα έχει ελεγχθεί διεξοδικά και εγκριθεί για την ανθρώπινη υγεία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την έκθεση του ανθρώπου (SAR), την επαγόμενη ηλεκτρομαγνητική ισχύ και τις τάσεις στο ανθρώπινο σώμα. Οι τιμές έκθεσης είναι πολύ κατώτερες από τα διεθνώς αποδεκτά όρια ασφαλείας για την SAR, την επαγόμενη ηλεκτρομαγνητική ισχύ και τις τάσεις στο ανθρώπινο σώμα που ορίζονται στα πρότυπα για την ανθρώπινη υγεία και τη συνύπαρξη με ενεργά ιατρικά εμφυτεύματα, όπως βηματοδότες και καρδιακοί απινιδωτές.
- Ο μαγνήτης για την λειτουργία του αυτόματου τηλεφώνου ή το πολυεργαλείο (τα οποία έχουν ενσωματωμένο μαγνήτη) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 εκ. μακριά από το εμφύτευμα, πχ. μην τα κουβαλάτε σε τσέπη πουκαμίσου.

- Αν έχετε ένα ενεργό εμφύτευμα εγκεφάλου, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του εμφυτεύματός σας για πληροφορίες σχετικές με τον κίνδυνο διαταραχής της λειτουργίας του.

Ακτινογραφίες, Μαγνητικές, Αξονικές Τομογραφίες και Θεραπεία με Ηλεκτρόδια

- Μην χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας κατά την διάρκεια ακτινογραφιών, μαγνητικών ή αξονικών τομογραφιών ή χειρουργείων μιας και υπάρχει κίνδυνος βλάβης όταν αυτό εκτίθεται σε δυνατά πεδία.

Υψηλές θερμοκρασίες και χημικά

- Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν θα πρέπει ποτέ να εκτίθεται σε περιβάλλον με υπερβολική ζέστη, πχ. στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου.
- Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν θα πρέπει να αφυγραίνεται σε φούρνους μικροκυμάτων ή άλλους φούρνους.
- Τα χημικά που περιέχονται στα καλλυντικά,σπρέι, αρώματα, λοσιόν ξυρίσματος, στις αντιηλιακές κρέμες και στα εντομοαπώθητικά σπρέι μπορούν να βλάψουν το ακουστικό σας. Πάντα να αφαιρείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας προτού χρησιμοποιήσετε τέτοια προϊόντα.

Ακουστικά Βαρηκοΐας με Μεγάλη Ένταση

- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην εφαρμογή και χρήση ακουστικών βαρηκοΐας, των οποίων το μέγιστο επίπεδο ηχητικής πίεσης υπερβαίνει τα 132 ντεσιμπέλ (IEC 711), καθώς ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος βλάβης της υπάρχουσας ακοής του βαρήκοου.

⚠ Γενικές Προειδοποιήσεις

Πιθανές παρενέργειες

- Τα ακουστικά βαρηκοΐας, τα εκμαγεία και οι θηλές μπορεί να προκαλέσουν αυξημένη συσσώρευση κυψελίδας στον ακουστικό σας πόρο.
- Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις τα υποαλλεργικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εκμαγείων μπορεί να προκαλέσουν δερματικές ενοχλήσεις, ή άλλες παρενέργειες.

Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με έναν γιατρό αν προκύψουν τέτοιου είδους συμπτώματα.

Παρεμβολές

- Το ακουστικό βαρηκοΐας σας έχει δοκιμαστεί εξονυχιστικά, σύμφωνα με τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα. Εντούτοις, μπορεί να προκύψουν παρεμβολές μεταξύ του ακουστικού βαρηκοΐας και άλλων συσκευών (π.χ. ορισμένα κινητά τηλέφωνα, συστήματα ασφαλείας καταστημάτων και άλλα). Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αυξήστε την απόσταση μεταξύ του ακουστικού βαρηκοΐας και της συσκευής.

Χρήση μέσα σε αεροσκάφος

- Το ακουστικό βαρηκοΐας σας έχει Bluetooth®. Σε αεροσκάφος, πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία πτήσης ή να απενεργοποιηθεί το ακουστικό, εκτός εάν το Bluetooth® επιτρέπεται από το προσωπικό πτήσης.

Σύνδεση με εξωτερικές συσκευές

- Η ασφάλεια του ακουστικού βαρηκοΐας όταν συνδέεται σε εξωτερικό εξοπλισμό με βοηθητικό καλώδιο ή με καλώδιο usb ή/και απευθείας, καθορίζεται από την εξωτερική πηγή σήματος. Όταν συνδέεται σε εξωτερικό εξοπλισμό συνδεδεμένο σε πρίζα, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC-62368 (ή IEC-60065, IEC-60950 μέχρι τις 20 Ιουνίου 2019) ή με ισοδύναμα πρότυπα ασφαλείας.

Συμβουλευτείτε τον επαγγελματία της ακοής σας αν αντιμετωπίσετε απροσδόκητα ή σοβαρά συμβάντα με το ακουστικό σας κατά τη χρήση ή εξαιτίας αυτής. Ο επαγγελματίας ακοής σας θα σας βοηθήσει να χειριστείτε το πρόβλημα και εάν χρειάζεται, θα το αναφέρει στον κατασκευαστή ή / και τις εθνικές αρχές.

Το ακουστικό βαρηκοΐας καλύπτει μόνο ένα μέρος της αποκατάστασης της ακοής και μπορεί να χρειάζεται να συμπληρωθεί με ακουστική εκπαίδευση και διδασκαλία χειλεανάγνωσης.

Χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας μόνο σε περιοχές όπου επιτρέπεται η ασύρματη μετάδοση.

Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των ακουστικών βαρηκοΐας.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή θα ακυρώνουν την εγγύηση του εξοπλισμού.

Δεν παρέχονται μη συμβατά αξεσουάρ

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα, μετατροπείς ή καλώδια που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Μη συμβατά εξαρτήματα μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) της συσκευής σας.

Μπορεί να προκύψουν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

κοντά σε εξοπλισμό που φέρει το σύμβολο στα δεξιά.

Φορητά και κινητά RF (ραδιοσυχνότητα) μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του ακουστικού σας. Εάν το ακουστικό σας επηρεαστεί από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, απομακρυνθείτε από την πηγή για να μειωθεί η παρεμβολή.



Συνήθη προβλήματα και λύσεις

Συμπτώματα	Πιθανές αιτίες
	Νεκρή Μπαταρία
Καθόλου ήχος	Βουλωμένο εκμαγείο (θηλή, Grip Tip, Micro Mold ή Lite Tip)
Διακοπτόμενος ή μειωμένος ήχος	Βουλωμένη έξοδος ήχου Υγρασία Νεκρή Μπαταρία
Εξαιρετικά Οξύς θόρυβος	Το εκμαγείο δεν έχει μπει σωστά στο αυτί σας Ο ακουστικός πόρος έχει κερί
Μπιπ	Αν από το ακουστικό βαρηκοΐας σας ακούγονται 8 μπιπ, 4 φορές στην σειρά, τότε θα πρέπει να κάνετε σέρβις στο μικρόφωνό του
Πρόβλημα σύνδεσης με συσκευή της Apple	Η σύνδεση με το Bluetooth® διακόπηκε Μόνο ένα ακουστικό βαρηκοΐας συνδέθηκε

Λύσεις

Αλλαγή της μπαταρίας

Καθαρίστε το εκμαγείο

Αλλάξτε το φίλτρο προστασίας κεριού, θηλή ή το Grip Tip

Καθαρίστε το εκμαγείο ή αλλάξτε το φίλτρο προστασίας από το κεριό, την θηλή ή το Grip Tip

Σκουπίστε την μπαταρία με ένα στεγνό πανί

Αλλαγή της μπαταρίας

Ξαναβάλτε το εκμαγείο

Απευθυνθείτε σε έναν γιατρό για να εξετάσει το αυτί σας

Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή/ακοολόγο σας

1. Αποσυνδέστε τα ακουστικά βαρηκοΐας (Ρυθμίσεις → Προσβασιμότητα → Ακουστικά βαρηκοΐας → Συσκευές → Ξέχασε αυτήν την συσκευή).
 2. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε πάλι το Bluetooth®
 3. Ανοίξτε και κλείστε την υποδοχή μπαταρίας στα ακουστικά βαρηκοΐας.
 4. Ξεσυνδέστε τα ακουστικά βαρηκοΐας σας (δείτε την ενότητα “Σύζευξη του Ακουστικού Βαρηκοΐας με το iPhone”).
-

Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν λύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή/ακοολόγο σας.

Προστασία από το νερό και τη σκόνη

Το ακουστικό βαρηκοΐας σας είναι στεγανοποιημένο απέναντι στην σκόνη και προστατεύεται από την είσοδο νερού, που σημαίνει ότι είναι σχεδιασμένο για να φοριέται σε καθημερινές καταστάσεις. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τον ιδρώτα ή τη βροχή. Αν το ακουστικό βαρηκοΐας σας έρθει σε επαφή με το νερό και σταματήσει να δουλεύει, παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Με ήπιες κινήσεις σκουπίστε τυχόν υγρασία.
2. Ανοίξτε την υποδοχή μπαταρίας και αφαιρέστε την μπαταρία, και με ήπιες κινήσεις σκουπίστε τυχόν υγρασία μέσα στην υποδοχή.
3. Αφήστε το ακουστικό βαρηκοΐας να στεγνώσει με την υποδοχή μπαταρίας ανοιχτή για περίπου 30 λεπτά.
4. Τοποθετήστε μια καινούργια φρέσκια μπαταρία.

Σημαντική σημείωση

μην φοράτε τα ακουστικά βαρηκοΐας όταν είστε στο λουτρό ή συμμετέχετε σε σπορ στο νερό. Μην βυθίζετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας στο νερό ή σε άλλα υγρά.

Συνθήκες χρήσης

Συνθήκες Λειτουργίας

Θερμοκρασία
+1 °C έως +40 °C
Υγρασία:
5% έως 93%, μη συμπυκνωμένη

Συνθήκες
μεταφοράς και
αποθήκευσης

Η θερμοκρασία και η υγρασία δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα κάτωθι όρια για μεγάλα χρονικά διαστήματα μεταφοράς και αποθήκευσης:

Θερμοκρασία
-25 °C έως +60 °C
Υγρασία:
5% έως 93%, μη συμπυκνωμένη

Τεχνικές Πληροφορίες

Το ακουστικό βαρηκοΐας σας περιέχει δύο ραδιοτεχνολογίες οι οποίες περιγράφονται παρακάτω:

Το ακουστικό βαρηκοΐας περιέχει έναν ραδιομεταδότη ο οποίος χρησιμοποιεί τεχνολογία SRMI (short range magnetic induction) και δουλεύει στην συχνότητα 3,84 MHz. Η δύναμη του μαγνητικού πεδίου του πομπού είναι πολύ αδύναμη και είναι πάντα κάτω από -40 dBμΑ/m σε απόσταση 10 μέτρων.

Το ακουστικό βαρηκοΐας χρησιμοποιεί έναν πομποδέκτη Bluetooth® Χαμηλής Ισχύος (BLE) και έναν κοντινής απόστασης. Και οι δύο έχουν συχνότητα λειτουργίας 2,4 GHz. Ο ραδιοπομπός είναι αδύναμος και είναι πάντοτε κάτω από 3 mW ίσο με 4,8 dBm σε συνολική ακτινοβολούμενη ισχύ.

Το ακουστικό βαρηκοΐας είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ανθρώπινη έκθεση.

Λόγω του περιορισμένου μεγέθους του ακουστικού βαρηκοΐας, όλες οι σχετικές ενδείξεις έγκρισης παρουσιάζονται σε αυτό το έγγραφο.

Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις “Πληροφορίες προϊόντος” στην διεύθυνση **www.hearingsolutions.philips.com**.

ΗΠΑ και Καναδάς

Η παρούσα συσκευή περιέχει ραδιοδέκτη με τους ακόλουθους ID αριθμούς πιστοποίησης:

FCC ID: 2ACAH-AUMRTE

IC: 11936A-AUMRTE

Δήλωση Κατασκευαστή: Αυτό το ακουστικό βαρηκοΐας έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU.

Διατίθεται Δήλωση Συμμόρφωσης από τον Κατασκευαστή.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark

CE 0543



Ο χειρισμός των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία..

 Bluetooth®



IP68

Περιγραφή των συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το φυλλάδιο ή στην ετικέτα της συσκευασίας

	<p>Πρέπει να διαβάσετε το κείμενο που φέρει το σύμβολο σήμανσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.</p>
	<p>Το προϊόν παράγεται από τον κατασκευαστή του οποίου το όνομα και η διεύθυνση αναγράφονται δίπλα στο σύμβολο. Υποδεικνύει τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όπως ορίζεται στις οδηγίες 90/385 / ΕΕ, 93/42 / ΕΕΚ και 98/79 / ΕΚ.</p>
	<p>Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία περί ιατρικών συσκευών 93/42/ΕΕΚ. Ο τετραψήφιος αριθμός δηλώνει την ταυτότητα του κοινοποιημένου οργανισμού.</p>
	<p>Ανακυκλώστε τα ακουστικά, τα αξεσουάρ ή τις μπαταρίες σας σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ή επιστρέψτε τους στον επαγγελματία της ακοής σας για απόρριψη. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός που καλύπτεται από την οδηγία 2012/19 / ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα και τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (WEEE).</p>
	<p>Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις ηλεκτρικής ασφάλειας, EMC και ραδιοφάσματος για προϊόντα που παρέχονται στην αγορά της Αυστραλίας ή της Νέας Ζηλανδίας.</p>
	<p>Υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι συμβατή με iPod, iPhone και iPad</p>

	<p>IP πρωτόκολλο Αυτό το σύμβολο καταδεικνύει τον τύπο προστασίας ενάντια σε βλαβερές συνέπειες προερχόμενες από έκθεση σε νερό και διάφορα υλικά σύμφωνα με την οδηγία EN 60529:1991/ A1:2002. IP6X δηλώνει ολική προστασία από την σκόνη. Η οδηγία IPX8 υποδεικνύει προστασία ενάντια στις συνέπειες που προέρχονται από εμβάπτιση σε νερό.</p>
	<p>Bluetooth® λογότυπο Σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. του οποίου η οποιαδήποτε χρήση προϋποθέτει αδειοδότηση.</p>
	<p>Υδρόφοβο Υποδεικνύει ιατρική συσκευή που πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία.</p>
	<p>Σύμβολο προσοχής Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης για προειδοποιήσεις και σημεία που πρέπει να επιδείξετε προσοχή.</p>
	<p>Αριθμός καταλόγου Υποδεικνύει τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή, ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί η ιατρική συσκευή.</p>
	<p>Σειριακός αριθμός Δείχνει τον αύξοντα αριθμό του κατασκευαστή, ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί μια συγκεκριμένη ιατρική συσκευή.</p>
	<p>Ιατρική συσκευή Η συσκευή είναι ιατρική συσκευή.</p>
	<p>Εκπομπή ραδιοσυχνότητας (RF) Το ακουστικό βαρηκοΐας σας περιέχει έναν πομπό ραδιοσυχνότητας.</p>

GTIN

Αριθμός παγκόσμιου εμπορικού στοιχείου. Ένας παγκοσμίως μοναδικός 14ψήφιος αριθμός που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ιατρικής συσκευής συμπεριλαμβανομένων προϊόντων λογισμικού ιατρικών συσκευών. Το GTIN σε αυτό το φυλλάδιο σχετίζεται με το υλικολογισμικό των ιατρικών συσκευών (μέσα στο ακουστικό βαρηκοΐας). Το GTIN στη μόνιμη ετικέτα συσκευασίας σχετίζεται με το υλικό ιατρικών συσκευών (το ίδιο το ακουστικό βαρηκοΐας).

Δήλωση εναρμόνισης με κανονισμό REACH:

Ο κανονισμός REACH της ΕΕ απαιτεί από την Philips Hearing Solutions να παρέχει πληροφορίες χημικού περιεχομένου για τις Ουσίες Που Προκαλούν Πολύ Μεγάλη Ανησυχία (SVHC) εάν αποτελούν πάνω από το 0,1 % του βάρους του προϊόντος. Δεν υπάρχουν ουσίες της λίστας προϊόντων REACH SVHC που να χρησιμοποιούνται κατά τη κατασκευή του παρόντος προϊόντος. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο hearingsolutions.philips.com/REACH.

< >
8,15 mm



< 19 mm >

^
9,0 mm
v

< 15 mm >

hearingsolutions.philips.com



Η Philips και το έμβλημα Philips Shield είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από/για και πωλείται υπό την ευθύνη της SBO Hearing A/S, η οποία εγγυάται για αυτό.



0000220545000001