

# PHILIPS

## HearLink



# Guía rápida para la aplicación Philips HearLink 2 en Apple Watch

## Cómo instalar, emparejar y controlar HearLink 2 con tu Apple Watch

Con tu Apple Watch, puedes controlar el volumen, cambiar el programa, silenciar o reactivar el audio de los audífonos, apagar el micrófono remoto y verificar los niveles de la batería. También se pueden habilitar funciones especiales llamadas Complicaciones, que te permiten acceder rápidamente a la aplicación desde la esfera del reloj.

### Empezar

Antes de usar la aplicación HearLink 2 en tu Apple Watch, debes instalar la aplicación en tu iPhone y asegurarte de que los audífonos estén emparejados con tu iPhone.

### Requisitos del sistema

Para usar la app con Apple Watch, necesitas lo siguiente:

- Apple Watch Serie 4 o posterior
- watchOS 8 o posterior



Escanea el código QR para descargar la aplicación HearLink 2 desde la App Store



# Instalación de HearLink 2 en tu Apple Watch


Aquí se explica cómo comenzar con HearLink 2 en tu Apple Watch



Primero, descarga la aplicación **HearLink 2** de la App Store en tu iPhone y empareja tus audífonos con tu iPhone.



Abre la aplicación Watch en tu iPhone.

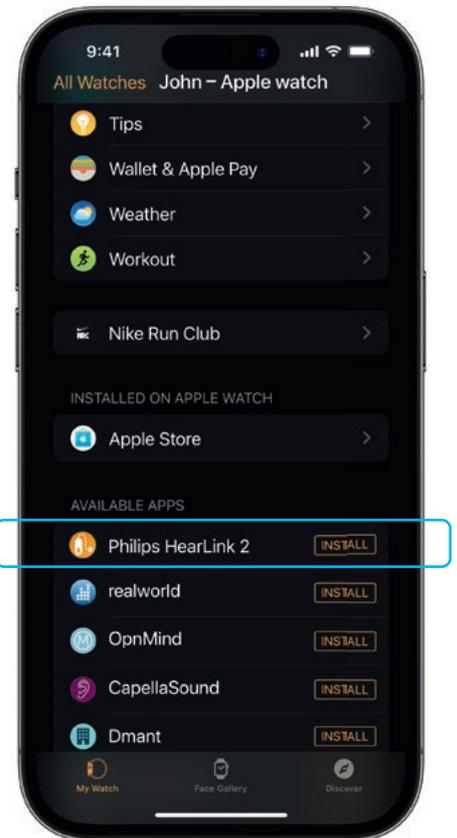

Desliza hacia abajo hasta **APLICACIONES DISPONIBLES** y haz clic en **INSTALAR** a la derecha del icono de **HearLink 2**. La aplicación ahora se instalará en tu Apple Watch.

# Uso de las principales características de HearLink 2 en el Apple Watch

Toca la aplicación **HearLink 2** en el Apple Watch para abrir la aplicación.



## Comprueba los niveles de batería

Desde General, desliza el dedo hacia la derecha para ver los niveles de batería de tu audífono.



## General

La pantalla general HearLink 2 se utiliza para cambiar el programa, ajustar el volumen y silenciar los audífonos.



## Micrófono remoto

Desde la pantalla General Philips HearLink 2, desliza el dedo hacia la izquierda para apagar el micrófono remoto.



Toca el icono del programa (**P1**) para entrar en la pantalla programa.



Desplázate por los programas y **toca el programa** que deseas seleccionar.

También puedes desplazarte por los programas girando el botón.



# Configurar las complicaciones de Apple Watch

Para acceder rápidamente a la aplicación desde la esfera del reloj, puedes configurar una complicación del Apple Watch\*. Esta es una función muy útil de Apple Watch, que sirve como un atajo en la esfera del reloj.

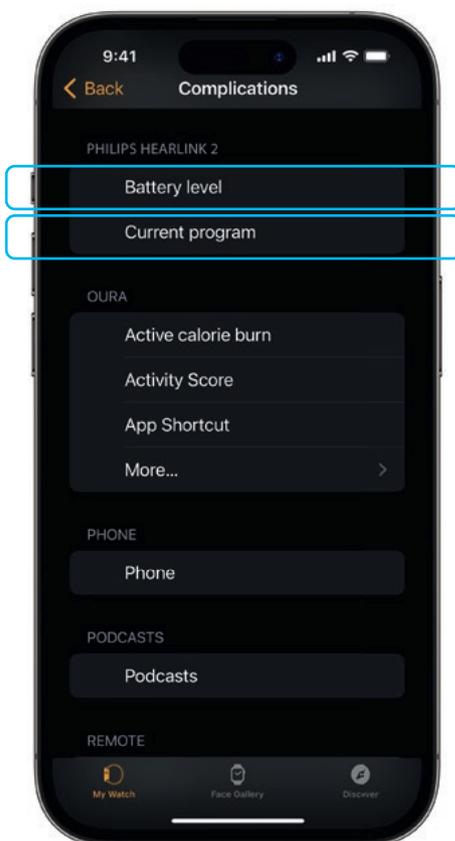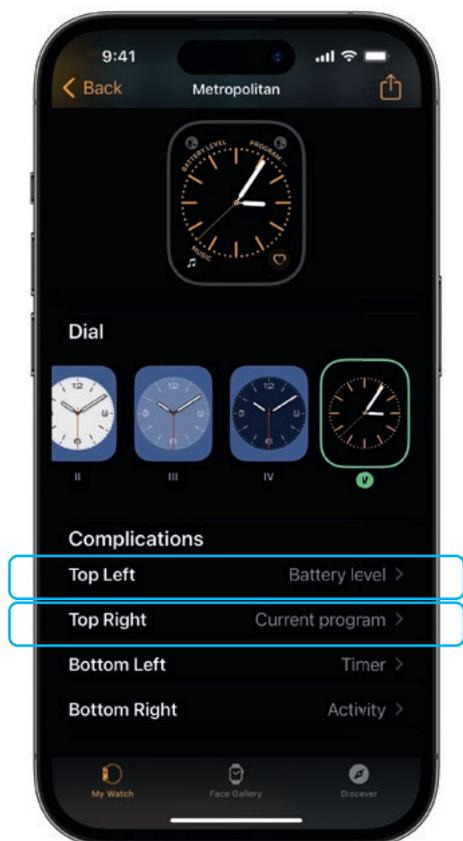

Selecciona la esfera del reloj y desplázate hacia abajo hasta Complicaciones. Ten en cuenta que no todas las esferas del reloj permiten agregar complicaciones y selecciona un atajo.

Desplázate por Complicaciones y selecciona **Nivel de batería** en HearLink 2.

Repite el proceso para la parte superior derecha y selecciona programa actual.

Las complicaciones ahora se muestran en la esfera del reloj en la esquina superior de la pantalla.

\* Si las complicaciones están disponibles en la esfera del reloj seleccionada.

