

# Mode d'emploi

ConnectClip



2.4 GHz

**oticon**  
PEOPLE FIRST

## **Introduction de ce mode d'emploi**

Ce mode d'emploi vous guide dans l'utilisation et l'entretien de votre nouveau ConnectClip. Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi, y compris la section Avertissements. Il décrit comment utiliser au mieux votre nouveau ConnectClip. Si vous avez des questions supplémentaires relatives à l'utilisation de votre ConnectClip, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Pour plus de facilité, ce mode d'emploi contient une barre de navigation qui vous aidera à vous repérer facilement dans les différentes sections.

## Usage prévu

Le ConnectClip fonctionne comme un récepteur et un émetteur sans fil entre les aides auditives et l'environnement ambiant. Il permet également de relier sans fil les appareils de synthèse vocale et les appareils audio électroniques. Le ConnectClip aide également les utilisateurs d'aide auditive à contrôler certaines fonctions de leur aide auditive.

Le ConnectClip est destiné à être utilisé par les adultes et les enfants (> 36 mois) avec leur solution auditive.

### IMPORTANT


Veuillez vous familiariser avec l'ensemble de ce mode d'emploi avant d'utiliser votre ConnectClip. Il contient des instructions et des informations importantes sur l'utilisation et la manipulation de votre ConnectClip.

## Introduction

Le ConnectClip peut être utilisé comme un kit mains libres pour les téléphones portables et comme un microphone distant.


### 1. Kit mains libres

Les sons de votre téléphone seront diffusés dans vos aides auditives via le ConnectClip (A). Votre voix est captée par le ConnectClip et envoyée au téléphone portable (B).

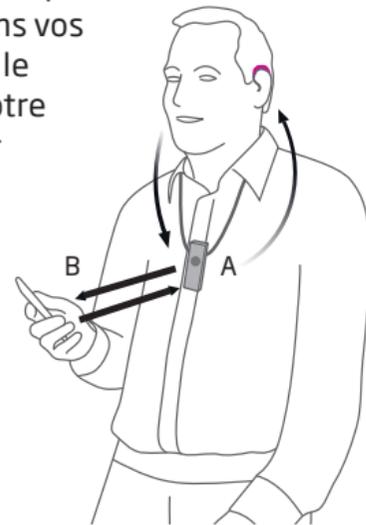

### 2. Microphone distant

La voix d'un interlocuteur choisi est transmise sans fil DEPUIS le ConnectClip VERS vos aides auditives.

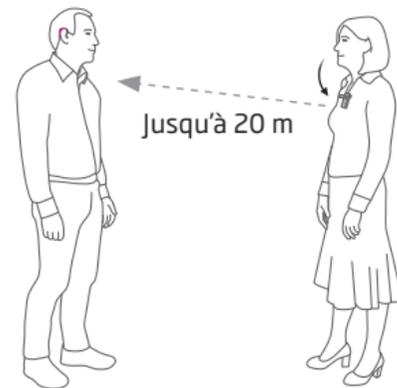

## Sommaire

Contenu de la boîte	9
Présentation - fonctions principales	10
Présentation - indications lumineuses	12
Pour bien commencer	14
<b>■ Configuration initiale</b>	
A. Appairer les aides auditives avec le ConnectClip	16
B. Appairer le téléphone portable avec le ConnectClip	18
<b>■ Utilisation quotidienne</b>	
Utilisation quotidienne : Marche/Arrêt	20
Utilisation quotidienne : En charge	22
<b>■ Utiliser le ConnectClip avec un téléphone portable</b>	
Utiliser le ConnectClip avec un téléphone portable	24
S'assurer que le ConnectClip est connecté au téléphone	25
Recevoir des appels	26
Passer des appels	28
Fonctions de casque avancées	29

<b>■ Écouter de la musique</b>	
Écouter de la musique	30
<b>■ Utiliser le ConnectClip comme microphone distant</b>	
Utiliser le ConnectClip comme microphone distant	32
Sélectionner le mode microphone distant	33
Activer/couper le son du microphone distant	34
Ajuster le niveau à partir du microphone distant	35
Activer/couper le son du microphone distant à l'aide de vos aides auditives	36
Nettoyer le ConnectClip	37
<b>■ Utiliser le ConnectClip comme télécommande pour les aides auditives</b>	
Utiliser le ConnectClip comme télécommande pour les aides auditives	38
Autres caractéristiques et fonctions	39
Avertissements	40
Informations techniques	46
Garantie internationale	49

## Contenu de la boîte

La boîte du ConnectClip contient les accessoires suivants :



ConnectClip




Tour de cou - long



Tour de cou - standard



Étui

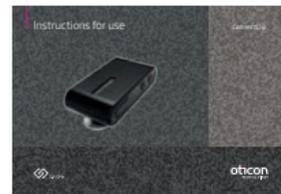

Ce Mode d'emploi



Chargeur secteur




Câble de chargeur USB





Étui de protection

## Présentation - fonctions principales

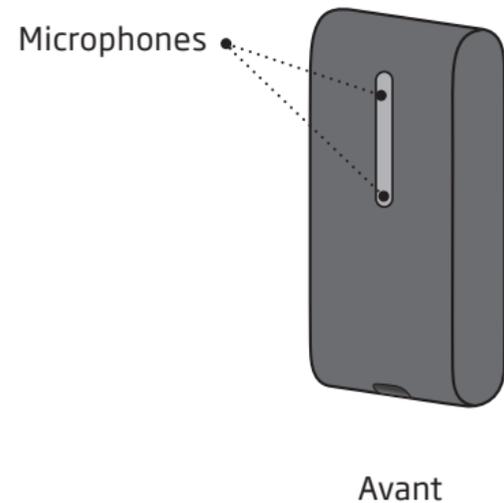

10

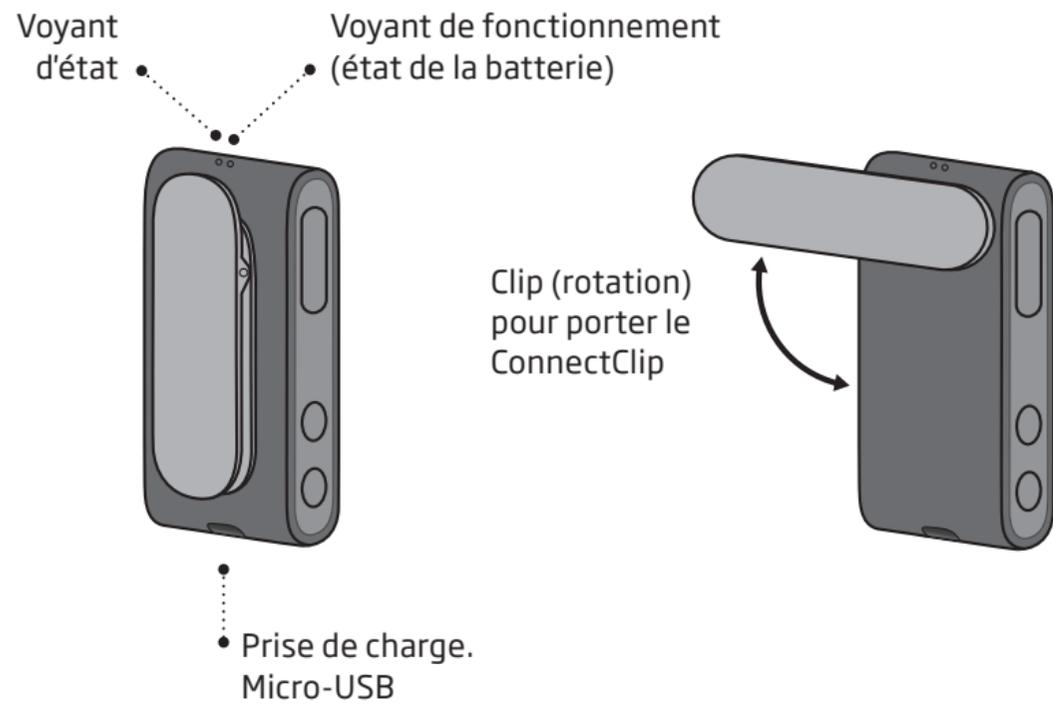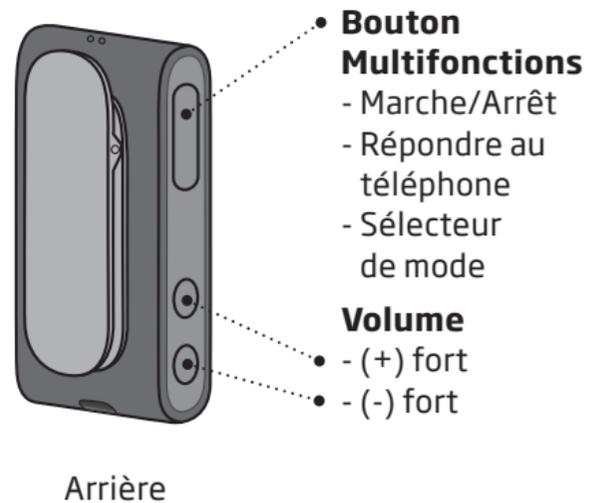

11

## Présentation - indications lumineuses


État	Description	
	Jaune clignotant	Recherche d'aides auditives
	Jaune fixe	Inactif. Aides auditives connectées, Non connecté à un téléphone
	Bleu clignotant	Recherche d'un téléphone portable (appairage)
	Bleu fixe	Connecté à un téléphone portable
	Vert fixe	Appel en cours. Casque mains libres (HFP) ; Portable
	Vert clignotant	Appel entrant
	Orange fixe	Musique ; Téléphone portable (A2DP)
	Magenta fixe	Mode microphone distant
	Magenta clignotant	Reconnexion du microphone distant

Etat	Description	
	Rouge fixe	Faible niveau de pile
	Vert fixe	Allumé
	Vert clignotant	Allumé - en charge
	Vert estompé	Allumé - charge terminée
	Orange clignotant	Éteint - en charge
	Orange fixe	Éteint - charge terminée

## Pour bien commencer

Avant de pouvoir utiliser le ConnectClip avec vos aides auditives, les aides auditives et le ConnectClip doivent être appairés/connectés. L'utilisation du ConnectClip avec un téléphone portable nécessite également que le ConnectClip soit appairé/connecté avec celui-ci.


### 1. Appairer les aides auditives avec le ConnectClip

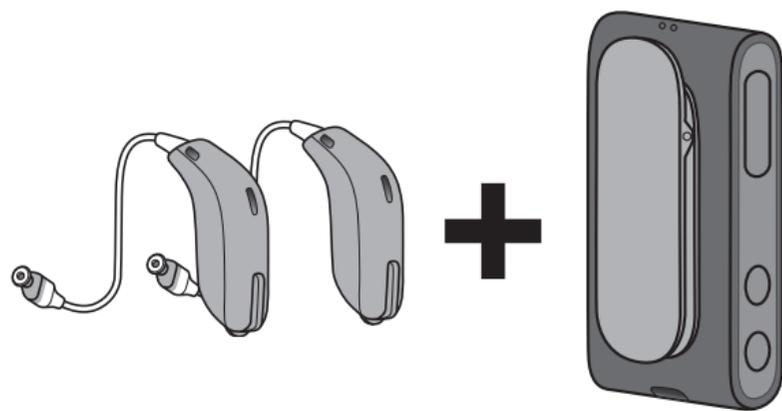

Voir page  
**16**

14

### 2. Appairer le ConnectClip avec le téléphone portable

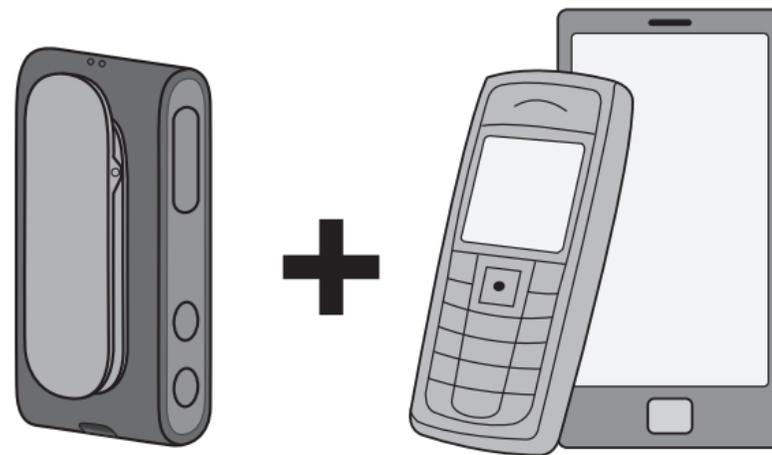


Voir page  
**18**

15

## A. Appairer les aides auditives avec le ConnectClip

**1. Assurez-vous que le ConnectClip est éteint**  
(voir page 20) Appuyez sur le bouton Multifonctions pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que le voyant de fonctionnement s'éteigne ●

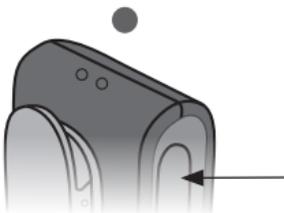


**2. Placez les aides auditives en mode appairage**  
Redémarrez les aides auditives pour activer le mode appairage. Veuillez consulter le mode d'emploi de vos aides auditives pour savoir comment éteindre vos aides auditives, puis les rallumer.

**3. Les aides auditives sont maintenant prêtes**  
pour une première connexion avec le ConnectClip.  
Vous avez maintenant 3 minutes pour terminer l'appairage.

**4. Allumez le ConnectClip**

Appuyez sur le bouton Multifonctions pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de fonctionnement soit VERT FIXE ●

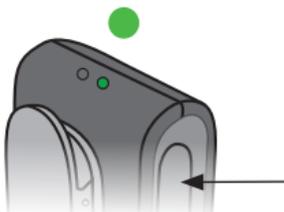

**5. Le ConnectClip va maintenant rechercher vos aides auditives.**  
Voyant d'état JAUNE CLIGNOTANT ●



**6. Placez le ConnectClip et les deux aides auditives à proximité l'une de l'autre** (distance max. 20 cm).




20 cm



**7. La connexion établie avec les aides auditives**  
est indiquée par un voyant d'état JAUNE FIXE ●




## B. Appairer le téléphone portable avec le ConnectClip

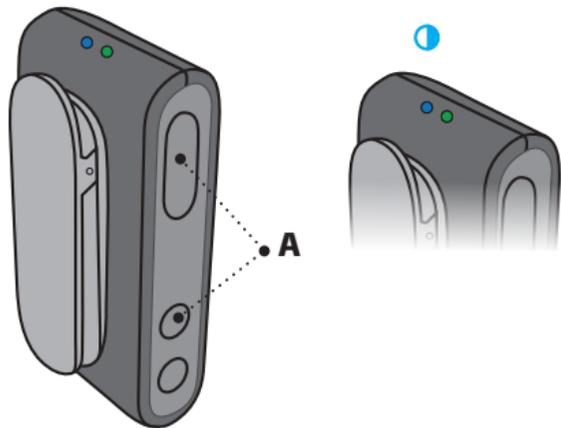

**Mettez le ConnectClip en mode appairage.**  
Appuyez sur le bouton Multifonctions ET le bouton Augmentation du volume pendant environ 6 secondes (A) jusqu'à ce que le voyant d'état CLIGNOTE EN BLEU

**Le ConnectClip reste en mode appairage pendant environ 3 minutes.**

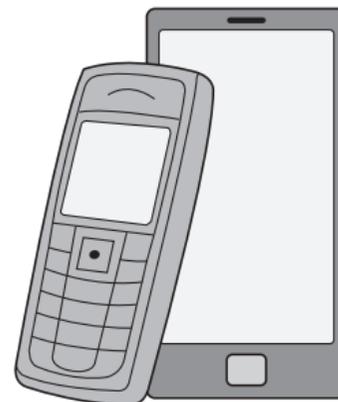

**Activez l'appairage sur le téléphone portable**  
Activez le Bluetooth. Recherchez et connectez/appairez le ConnectClip.

Ceci s'effectue normalement dans les réglages Bluetooth de votre téléphone.

**Saisissez le code PIN**  
Si votre téléphone demande un code PIN, saisissez 0000 (quatre zéros).




**Appairage actif**  
L'appairage terminé avec le téléphone portable est indiqué par le voyant d'état BLEU FIXE

## Utilisation quotidienne : Marche/Arrêt



### ● MARCHÉ ●

Appuyez sur le bouton Multifonctions pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de fonctionnement soit VERT FIXE.

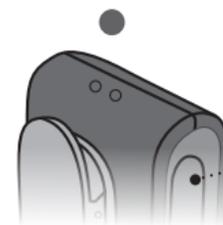

### ● ARRÊT ●

Appuyez sur le bouton Multifonctions pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que le voyant de fonctionnement s'éteigne.

Mode d'utilisation	Autonomie
Utilisation quotidienne typique	16 heures : Jusqu'à 2 heures de streaming de musique + 2 heures de téléphone + 12 heures en veille
Mode veille (allumé, pas de streaming)	Jusqu'à 36 heures
Musique ou micro distant	Jusqu'à 5 heures
Appels téléphoniques	Jusqu'à 6 heures


## Utilisation quotidienne : En charge



- **Niveau de batterie faible** ●  
Lorsqu'il reste environ 30 minutes de temps de diffusion audio, l'indicateur de fonctionnement devient ROUGE.



- **En charge** ●  
Branchez le chargeur fourni à la prise micro-USB situé au bas du ConnectClip.  
Le voyant de fonctionnement CLIGNOTE EN VERT ou EN ORANGE.

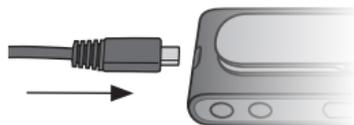

### Voyants de charge

En charge (ConnectClip allumé)	Clignotant	●
Charge terminée (ConnectClip allumé)	Estompé	●
En charge (ConnectClip éteint)	Clignotant	●
Charge terminée (ConnectClip éteint)	Fixe	●

Durée de charge :  
2 heures pour une charge complète en utilisant le bloc d'alimentation électrique fourni

### Avis important


Pendant la charge, les indicateurs de charge doivent être allumés comme décrit dans la section « Mode d'emploi ». Si aucun des indicateurs de charge n'est allumé, débranchez l'appareil du chargeur et consultez votre audioprothésiste.



### Avis important

Lors de la recharge du ConnectClip, utilisez le module d'alimentation électrique 5,0 V/1 A d'origine, certifié CE et sécurité.


## Utiliser le ConnectClip avec un téléphone portable

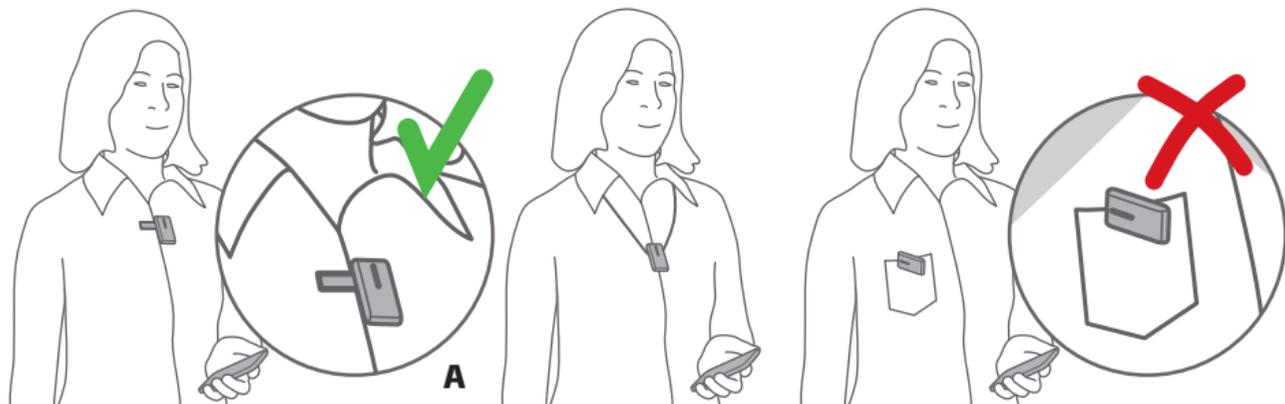

### IMPORTANT

Le ConnectClip doit être porté comme indiqué pour obtenir les meilleures performances possibles. Il est important que le microphone du ConnectClip soit dirigé vers votre bouche (A), et que le ConnectClip ne soit pas couvert par des vêtements, etc. Distance maximale entre le ConnectClip et le téléphone portable : 10 mètres.

## S'assurer que le ConnectClip est connecté au téléphone

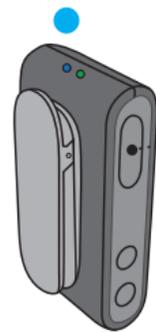

- **Sélectionnez le mode Téléphone**  
Appuyez sur le bouton Multifonction pendant environ 3 secondes pour changer de mode. Le changement de mode est confirmé par une indication sonore dans vos aides auditives.  
ÉTAT BLEU ●



État	Mode
●	Inactif Connecté à des aides auditives. Non connecté à un téléphone portable
●	Connecté à un téléphone portable
●	Mode microphone distant

## Recevoir des appels



### Téléphone connecté

Lorsque le ConnectClip est allumé et se situe dans la portée de votre téléphone portable, il se connecte automatiquement au téléphone portable.

Le voyant d'état est BLEU FIXE ●



### Téléphone qui sonne

Lorsque le téléphone sonne, vous entendez un indicateur sonore et, si disponible, la sonnerie (de votre téléphone) dans vos aides auditives.

Le voyant d'état CLIGNOTE EN VERT 📞



### Répondre à un appel

Cliquez sur le bouton Multifonctions brièvement (A) ou répondez à l'appel depuis votre téléphone portable.

Une fois l'appel démarré, le voyant d'Etat passe à VERT FIXE ●




### Terminer l'appel

Cliquez sur le bouton Multifonctions brièvement (A) ou terminez l'appel depuis votre téléphone portable.

Voyant d'état BLEU FIXE ●

## Passer des appels

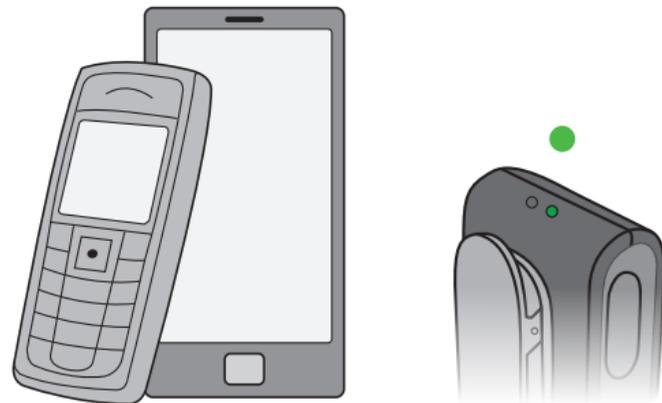

Pour appeler, il vous suffit d'utiliser le téléphone portable. L'appel est automatiquement transféré vers le ConnectClip.

Une fois l'appel connecté, l'état passe à VERT FIXE ●

## Fonctions de casque avancées

### Numérotation vocale

Une fois connecté à un téléphone portable, appuyez deux fois sur le bouton Multifonctions pour activer la numérotation vocale si elle est prise en charge par le téléphone.

### Rejeter l'appel


Une pression longue sur le bouton de diminution du volume, pendant que le téléphone sonne, permet de rejeter l'appel.

### Couper les microphones des aides auditives

Appuyez sur le bouton de diminution du volume pendant environ 3 secondes pour couper les microphones des aides auditives.

Une pression brève sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume désactive le mode silencieux des aides auditives

## Écouter de la musique

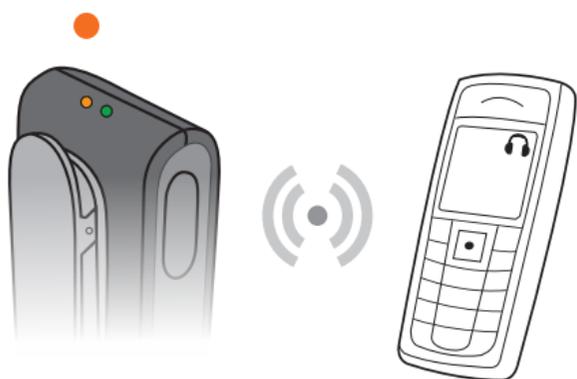

### Audio sans fil (A2DP)

Si le ConnectClip est connecté à un téléphone portable ou un autre appareil, via le Bluetooth, la musique lue sur le téléphone/appareil sera automatiquement diffusée dans vos aides auditives.

État ORANGE ●

**Vous n'avez pas à manipuler le ConnectClip.**


État	Description
●	Le ConnectClip est allumé - et la musique est diffusée vers les aides auditives

### Réglage du volume


Tout en écoutant de la musique, le niveau du signal audio diffusé peut être réglé à l'aide des boutons d'augmentation/de diminution du volume.

### Coupure du son du téléphone


Une pression brève sur le bouton Multifonctions permet de couper le son. Utilisez les commandes du téléphone pour activer le son.

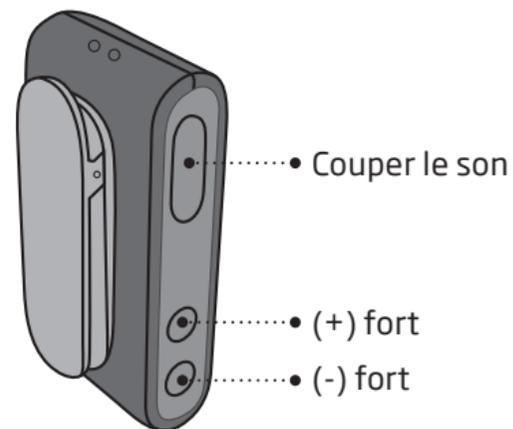

## Utiliser le ConnectClip comme microphone distant

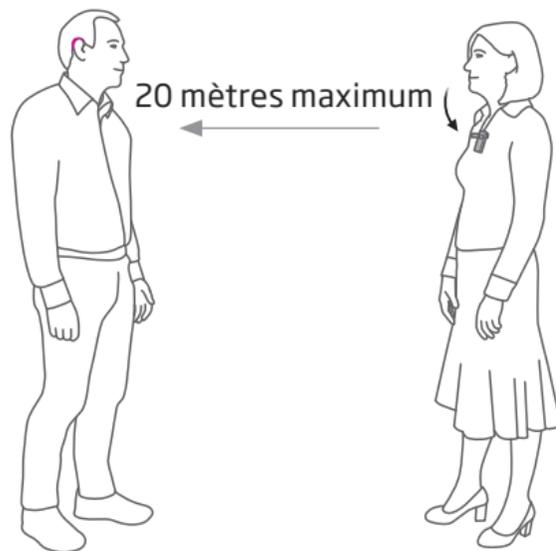


**Microphone distant**  
Dans ce mode, la voix de la personne qui porte le ConnectClip est diffusée directement dans vos aides auditives.

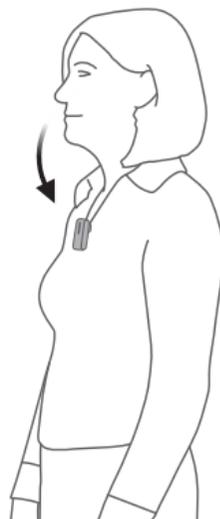

### IMPORTANT

Assurez-vous que le microphone est dirigé vers la bouche de l'orateur et qu'il n'est pas couvert par des vêtements, etc.

## Sélectionner le mode microphone distant

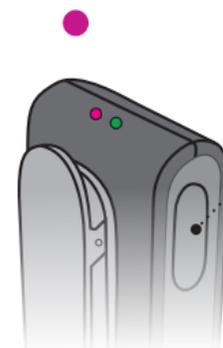

- **Sélectionnez le mode Microphone.** Appuyez sur le bouton Multifonctions pendant environ 3 secondes pour changer de mode. Le changement de mode est confirmé par une indication sonore dans vos aides auditives. État MAGENTA FIXE ●



État	Description
●	Le ConnectClip est allumé. En mode inactif, c'est-à-dire non connecté à un téléphone
●	Connecté à un téléphone portable
●	Le ConnectClip est allumé - et en mode microphone distant

## Activer/couper le son du microphone distant



### Couper le son du microphone

Appuyez sur le bouton Multifonctions (A) pendant environ 3 secondes pour couper le signal du microphone distant vers les aides auditives. Vous remettez les aides auditives sur leur programme normal.

Le voyant d'état passe au JAUNE ● ou BLEU ●

## Ajuster le niveau à partir du microphone distant


### Augmentation du volume ou diminution du volume

Le signal diffusé peut être réglé à l'aide des boutons d'augmentation/de diminution du volume.

### Coupez les microphones des aides auditives (le son du microphone distant uniquement).

Appuyez sur le bouton de diminution du volume pendant environ 3 secondes pour couper les microphones des aides auditives.

Une pression brève sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume désactive le mode silencieux des aides auditives.

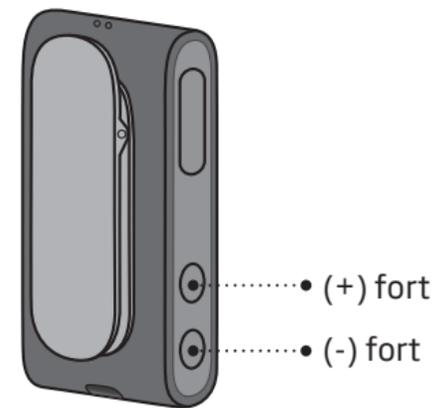

## Activer/couper le son du microphone distant à l'aide de vos aides auditives



**P1 --> P2 --> TV --> Microphone**

Une pression longue sur le bouton de l'aide auditive permet de passer au programme suivant dans les aides auditives.

Lorsque vous atteignez le programme du microphone distant, vous entendez l'indicateur sonore (bip) du programme de microphone distant.

Pour couper le son du microphone distant, revenez simplement au programme principal des aides auditives.

### **IMPORTANT**

Veillez vous référer au mode d'emploi de vos aides auditives pour en savoir plus sur leurs fonctionnalités.

## Nettoyer le ConnectClip

### **IMPORTANT**


Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le ConnectClip. Il ne doit jamais être lavé ni immergé dans l'eau ni aucun autre liquide.

## Utiliser le ConnectClip comme télécommande pour les aides auditives

Lorsque le ConnectClip ne diffuse pas de son, il fait office de télécommande pour vos aides auditives.



- **(+) fort**  
- pression brève
- **(-) fort**  
- pression brève

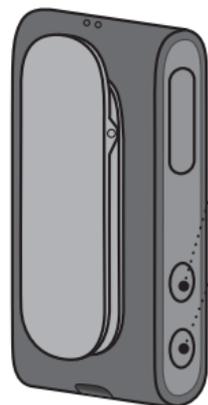

- **Programme suivant**  
- Appuyez pendant 3 secondes
- **Couper les microphones des aides auditives - pression longue**  
une pression brève sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume désactive le mode silencieux

### IMPORTANT

Distance maximale entre le ConnectClip et les aides auditives : 2 mètres.

## Autres caractéristiques et fonctions

### Une connexion à la fois

En cas d'appairage avec plusieurs appareils (maximum de huit), le ConnectClip ne se connecte qu'au premier téléphone disponible/dans la portée.

### Aucun appel lorsqu'il est utilisé comme microphone distant

Lorsque le ConnectClip est utilisé comme microphone distant, il n'y a aucune connexion avec le téléphone portable.

### Temporisation (hors de portée) en mode microphone

Si le ConnectClip est hors de la portée des aides auditives, celles-ci reviendront à leur programme initial au bout de 90 secondes.

### Supprimer les appairages Bluetooth

Appuyez sur les boutons Multifonctions, augmentation du volume et diminution du volume pendant 10 secondes pour supprimer tous les appairages Bluetooth. Le voyant d'état sera alors ROUGE CLIGNOTANT.

## **Avertissements**

Vous devez vous familiariser avec les avertissements à caractère général donnés ci-après et lire l'intégralité du contenu de ce mode d'emploi avant d'utiliser votre ConnectClip, afin de garantir votre sécurité personnelle et l'utilisation correcte de l'appareil. Consultez votre audioprothésiste si vous êtes confronté à des opérations ou des événements inattendus avec votre ConnectClip.

### **Risques d'étouffement et risque d'ingestion de petites pièces**

Votre ConnectClip et ses composants doivent être tenus hors de portée des enfants et de toute autre personne susceptible de les avaler ou de se blesser à leur contact. Si une petite pièce est avalée, veuillez consulter immédiatement un médecin.

### **Explosifs**

La source d'alimentation de votre ConnectClip n'a pas assez d'énergie pour provoquer un incendie dans des conditions normales d'utilisation. Le ConnectClip n'a pas été testé pour la conformité avec les normes internationales concernant les atmosphères explosives. Il est recommandé de ne pas utiliser votre ConnectClip dans les zones où il existe un danger d'explosion.

## **Avertissements**

### **Radiographie/tomodensitométrie/IRM/scanner TEP, électrothérapie et intervention chirurgicale**

Retirez votre ConnectClip avant les séances de radiographie, tomodensitométrie, IRM, scanner TEP et électrothérapie ainsi que pour les interventions chirurgicales pour éviter les dommages causés à votre ConnectClip par des champs électromagnétiques importants.

### **Chaleur et produits chimiques**

Le ConnectClip ne doit jamais être exposé à une température extrême, par exemple en le laissant dans une voiture garée en plein soleil. Le ConnectClip ne doit pas être séché dans un four à micro-ondes ou dans d'autres types de fours. Les produits chimiques contenus dans les produits de beauté, les laques, les parfums, les après-rasages, les crèmes solaires ou les produits insecticides peuvent abîmer le ConnectClip. Enlevez toujours votre ConnectClip avant d'utiliser ce genre de produits et attendez que ce produit sèche avant utilisation.

### **Interférences**

Le ConnectClip a fait l'objet de tests approfondis pour les interférences selon les normes internationales les plus rigoureuses. Cependant, des interférences entre le ConnectClip et d'autres appareils (par ex. certains téléphones portables, appareils à bande publique, systèmes d'alarme de magasins et autres appareils sans fil) peuvent se produire. Si cela se produit, augmentez la distance entre le ConnectClip et l'appareil concerné.

## **Avertissements**

### **Utilisation lors de la conduite**

Le fait d'utiliser le ConnectClip peut vous distraire. Soyez conscient de ce qui vous entoure lorsque vous utilisez le ConnectClip. Veuillez vous référer au code de la route national concernant l'utilisation des appareils de communication en conduisant.

### **Utilisation en avion**

Votre ConnectClip est doté du Bluetooth. Le ConnectClip ne doit pas être utilisé à bord d'un avion, sauf si le personnel naviguant l'a expressément autorisé.

### **Implants actifs**

Le ConnectClip a été complètement testé et caractérisé pour la santé humaine, conformément aux normes internationales pour l'exposition humaine (débit d'absorption spécifique (DAS)), la quantité d'énergie véhiculée par les ondes radiofréquences reçues par l'utilisateur d'un appareil radioélectrique.

Les valeurs d'exposition sont bien au-dessous des limites de sécurité de DAS reconnues internationalement, la quantité d'énergie véhiculée par les ondes radiofréquences reçues par le corps humain, définie dans les normes de la santé humaine et liée à l'utilisation d'implants médicaux actifs, tels que des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs cardiaques.

## **Avertissements**

### **Batterie rechargeable**

Ne tentez pas d'ouvrir le ConnectClip car cela pourrait endommager la batterie.

N'essayez jamais de remplacer la batterie. S'il est nécessaire de remplacer la batterie, veuillez renvoyer votre appareil au fournisseur. La garantie deviendra nulle en cas de présence de signes d'altération.

Le sécurité de la charge des batteries au moyen d'un connecteur USB est déterminé par la source extérieure des signaux. Lorsqu'il est raccordé à un équipement externe branché à une prise murale, cet équipement doit être conforme aux normes de sécurité IEC-62368 (or IEC-60065, IEC-60950 jusqu'au 20 juin 2019), ou à des normes équivalentes.

### **Connexion à un équipement externe**

La sécurité d'utilisation du ConnectClip lorsqu'il est connecté à un équipement externe (via un câble d'entrée auxiliaire, d'un câble USB ou d'un branchement direct) est déterminée par l'équipement externe. Lorsqu'il est raccordé à un équipement externe branché à une prise murale, cet équipement doit être conforme aux normes de sécurité IEC-62368 (or IEC-60065, IEC-60950 jusqu'au 20 juin 2019), ou à des normes équivalentes.

## **Avertissements**

### **Contrôle croisé**

Votre ConnectClip doit être maintenu hors de portée des enfants ou de toute personne susceptible de prendre le contrôle de sa fonctionnalité, afin de garantir votre sécurité personnelle et d'éviter toute utilisation incorrecte.

### **Utilisation du tour de cou**

Si le tour de cou s'accroche ou se prend accidentellement quelque part pendant que l'utilisateur le porte, il est conçu pour se rompre automatiquement. En conséquence, n'essayez jamais de le raccourcir ou de le modifier d'une façon qui n'est pas autorisée. Le tour de cou ne doit pas être utilisé par les enfants de moins de 36 mois.

### **Effets secondaires possibles**

Bien que les matières utilisées pour fabriquer votre ConnectClip soient hypoallergéniques, dans des cas très rares, elles peuvent provoquer une irritation de la peau ou d'autres effets secondaires. Veuillez consulter un médecin si ces effets se produisent.

## **Avertissements**

### **Compatibilité des téléphones portables**

Vous trouverez sur le site [www.oticon.fr](http://www.oticon.fr) une liste de téléphones portables qui ont été exhaustivement testés par Oticon et qui ont satisfait aux exigences minimum de compatibilité. Toutefois, Oticon décline toute responsabilité liée à une incompatibilité due à une éventuelle mise à jour ultérieure des téléphones mobiles, ou de toute circonstance d'incompatibilité qui n'aurait pas été soumise ou découverte lors de ces tests. Spécifiquement, Oticon ne sera pas responsable d'une incompatibilité résultant de futures mises à jour des téléphones portables, ni d'événements d'incompatibilité n'étant pas couverts par et/ou trouvés dans ces tests. Oticon ne prend aucune responsabilité financière, notamment celle du remboursement d'un téléphone mobile qui ne fonctionnerait pas comme escompté.

Veuillez consulter la liste mentionnée ci-dessus avant d'acheter un nouveau téléphone mobile.

## Informations techniques

### Conditions d'utilisation :

Conditions de transport et de stockage :

La température et l'humidité ne doivent pas excéder les limites ci-dessous pendant des périodes prolongées lors du transport et du stockage :

- Température : -20 à +60 °C
- Humidité : 15 à 93 %, sans condensation

Conditions de l'environnement opérationnel :

- Température : +5 à 40 °C
- Humidité : 15 à 93 %, sans condensation
- Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

Le ConnectClip est équipé d'un émetteur-récepteur radio utilisant le Bluetooth, BLE (Bluetooth Low Energy) et une technologie radio à ondes courtes propriétaire fonctionnant tous à 2,4 GHz (bande ISM). Les émetteurs radio GHz sont faibles et toujours inférieurs à 50 mW, soit 17 dBm e.i.r.p. en puissance rayonnée totale. Le ConnectClip est conforme aux normes internationales relatives aux émetteurs radio, à la compatibilité électromagnétique et à l'exposition humaine. En raison de l'espace disponible limité sur le ConnectClip, tous les marquages de certification sont présents dans cette brochure.

### États-Unis et Canada

Cet appareil contient un module radio portant les numéros d'ID de certification suivants :

FCC ID : 2ACAHAC01

IC : 11936A-AC01

Cet appareil est conforme à la Partie 15 du Règlement FCC et aux RSS exempts de licence d'Industrie Canada.

### Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne risque pas de causer d'interférences dommageables, et
- (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Avis :

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité est susceptible d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

Ce dispositif numérique de Catégorie B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

**Remarque :** *Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut provoquer des interférences nocives avec les radiocommunications. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nocives avec la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger les interférences en prenant l'une des mesures suivantes :*

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise électrique placée sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le fabricant ou un technicien radio/TV expérimenté pour une assistance.

## Garantie internationale

Votre ConnectClip bénéficie d'une garantie internationale limitée, assurée par le fabricant. Cette garantie est de 12 mois à partir de la date de livraison. Cette garantie est limitée aux défauts de fabrication et matériels de l'appareil à proprement parler. Elle ne porte pas sur les accessoires tels que la batterie, câbles, alimentations électriques, etc. Les problèmes provoqués par une manipulation ou un entretien inapproprié(e)/incorrect(e), une utilisation excessive, des accidents, des réparations effectuées par un tiers non agréé, une exposition à des conditions corrosives, des dommages dus à la pénétration de corps étrangers dans l'appareil ou des ajustements incorrects ne sont PAS couverts par la garantie limitée et peuvent l'annuler. La garantie expliquée ci-dessus n'affecte pas les droits juridiques dont vous bénéficiez peut-être, de par les législations nationales régissant la vente des biens de consommation. Votre audioprothésiste peut offrir une garantie plus large que celle qui est prévue par les dispositions de cette garantie limitée. Pour obtenir davantage d'informations, veuillez le consulter.

### Si vous avez besoin de services d'entretien

Prenez régulièrement rendez-vous avec votre audioprothésiste qui pourra entretenir, régler, et réparer votre ConnectClip tout au long de sa durée de vie.

Le fabricant certifie que ce ConnectClip (AC1A) est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité est disponible auprès du fabricant.



SBO Hearing A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danemark  
[www.oticon.com](http://www.oticon.com)



Durée de disponibilité garantie des pièces détachées :  
5 ans après la date d'achat. Décret 2014-1482 / Article L111-3 du code de la consommation.

Prodition S.A.S., Parc des Barbanniers, 3 allée des Barbanniers,  
92635 GENNEVILLIERS CEDEX - SIREN 301 689 790 R.C.S. NANTERRE



Les déchets  
électroniques doivent  
être traités selon la  
législation locale.



### Description des symboles utilisés dans ce livret

	<b>Avertissements</b> Le texte portant ce symbole d'avertissements doit être lu avant d'utiliser le produit.
	<b>Fabricant</b> Le produit est fabriqué par le fabricant dont le nom et l'adresse figurent à côté du symbole. Indique le fabricant du dispositif médical, tel que défini dans les directives de l'UE 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE.
	<b>Marquage CE</b> Le produit est conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE.
	<b>Déchets électroniques (DEEE)</b> Recyclez vos aides auditives, accessoires ou piles conformément aux réglementations locales ou retournez-les à votre audioprothésiste pour la mise au rebut. Équipements électroniques couverts par la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
	<b>Marque réglementaire de conformité (RCM)</b> Le produit est conforme aux exigences de sécurité électrique, CEM et spectre radio pour les produits fournis sur le marché australien ou néo-zélandais.
	<b>Logo Bluetooth</b> Marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dont l'utilisation nécessite une licence.

195100FR / 2019.01.14



#### Utilisation en intérieur

Indique que le produit est qualifié pour une utilisation à l'intérieur.



#### Double isolation

Indique que l'alimentation électrique du produit dispose d'une double isolation. Cela signifie qu'elle présente un très faible risque de défaillance unique échecs, c.-à-d. les défaillances à cause unique ne peuvent pas se produire.

### Description des symboles utilisés sur l'étiquette réglementaire de l'emballage



#### Tenir à l'abri de l'humidité

Indique un dispositif médical qui doit être protégé de l'humidité.



#### Symbole de mise en garde

Consultez le mode d'emploi pour prendre connaissance des avertissements et des mises en garde.



#### Numéro de référence

Indique le numéro de référence du produit afin d'identifier le type de dispositif médical.



#### Numéro de série

Indique le numéro de série du produit afin d'identifier le dispositif médical spécifique.

INPUT: 5.0V 0.4mA

(ex. 5.0V, 200mA)

#### Prise d'alimentation électrique

Indique la puissance électrique envoyée de la prise d'alimentation à votre appareil électrique.

195100FR / 2019.01.14

