

Adaptateur
téléphonique 2.0



Mode d'emploi

oticon
PEOPLE FIRST

Table des matières

Utilisation de l'adaptateur téléphonique ConnectLine	4
Appels entrants Streamer Pro	6
Appel sortant Streamer Pro	10
Appels entrants ConnectClip	14
Appel sortant ConnectClip	18
Nettoyage de l'adaptateur téléphonique	21
Garantie internationale	23
Informations complémentaires	24

Utiliser l'Adaptateur téléphonique ConnectLine

Cette solution de téléphonie permet de passer ou de recevoir des appels téléphoniques. Pendant un appel téléphonique, les aides auditives font office d'oreillettes et le microphone du Streamer ou du ConnectClip permet un fonctionnement mains libres.

Ce guide explique comment utiliser le Streamer Pro ou le ConnectClip pour converser par téléphone. Commencez par vous assurer que votre Adaptateur téléphonique est parfaitement installé en parcourant le Guide d'installation.

Pour pouvoir utiliser l'Adaptateur téléphonique, il faut que le Streamer Pro ou le ConnectClip et l'Adaptateur téléphonique soient reliés l'un à l'autre par une connexion sans fil. Cette connexion s'établit automatiquement lorsque le Streamer Pro et l'Adaptateur téléphonique sont couplés et à une portée maximum de 30 mètres (cf. Portée - page 13). Quand le voyant d'alimentation  de l'Adaptateur téléphonique est bleu et reste fixe après avoir clignoté, le Streamer Pro ou le ConnectClip et l'adaptateur téléphonique sont connectés.



Recevoir un appel avec le Streamer Pro


Comment répondre et mettre fin à un appel téléphonique

Assurez-vous de pouvoir parler dans le microphone du Streamer Pro.

Quand le téléphone fixe sonne à votre domicile, vous entendez une alerte d'appel dans vos aides auditives. Le voyant indicateur d'appel situé sur l'adaptateur téléphonique s'allume en vert et clignote. En même temps, la touche téléphone du Streamer Pro (A) ainsi que l'indicateur d'état s'allument en vert et clignent.

Appuyez brièvement sur la touche téléphone du Streamer Pro (A) pour répondre à l'appel. Vous entendez un petit bip de confirmation dans vos aides auditives. La touche téléphone et le voyant indicateur d'état situés sur le Streamer Pro ainsi que l'indicateur d'appel de l'Adaptateur téléphonique restent allumés en vert et deviennent fixes.

Pour mettre fin à la communication, il vous suffit d'appuyer brièvement sur la touche téléphone située sur le Streamer Pro. La touche téléphone verte située sur le Streamer Pro s'éteint.

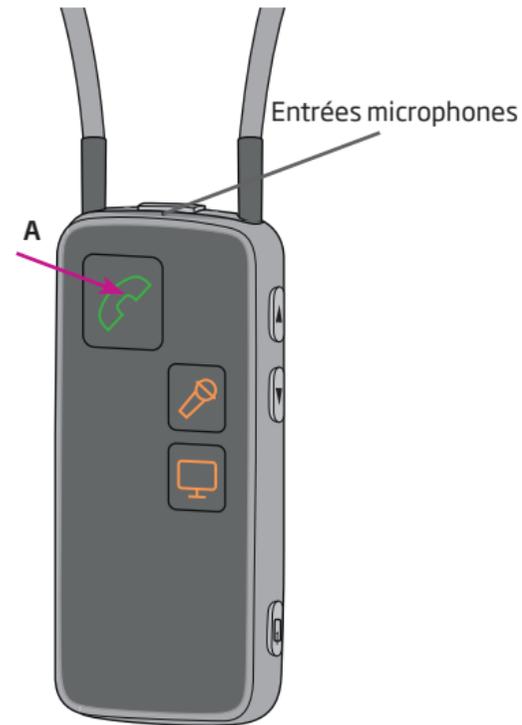

Recevoir un appel			
Etat	Face avant	Adaptateur téléphonique	Description
			Le Streamer Pro et l'Adaptateur téléphonique sont connectés.
			Le téléphone sonne. Le voyant indicateur d'appel téléphonique et le voyant indicateur d'état placé sur la tranche en haut du Streamer Pro s'allument en vert. Vous entendez une alerte d'appel dans vos aides auditives.
			Quand l'appel est connecté, vous entendez un bip indiquant que vous avez répondu à l'appel - vous pouvez maintenant entendre votre interlocuteur et converser avec lui.

 Fixe  Clignotant

Téléphoner Streamer Pro


Comment émettre un appel téléphonique

Assurez-vous de pouvoir parler dans le microphone du Streamer Pro.

1. Pour téléphoner, **appuyez brièvement sur la touche téléphone du Streamer Pro (A)**.
Le téléphone est opérationnel et vous entendez la tonalité d'invitation à numéroter dans vos aides auditives. La touche téléphone située sur la face du Streamer Pro et le voyant indicateur d'appel situé sur l'Adaptateur téléphonique s'allument en vert et restent fixes.
2. **Décrochez le combiné** de votre téléphone fixe (ou appuyez sur la touche «Appel» de votre téléphone portable) et **composez le numéro de téléphone (B)** comme vous le faites habituellement.
3. Vous entendez la tonalité d'appel dans vos aides auditives, indiquant que l'appel est connecté entre votre Streamer Pro et vos aides auditives.

Vous pouvez à présent **raccrocher le combiné** (ou appuyer sur « fin d'appel » sur un téléphone portable). Pour mettre fin à l'appel téléphonique, il suffit d'appuyer brièvement sur la touche téléphone située sur le Streamer Pro.

****Note :** assurez-vous de bien raccrocher le combiné sur le téléphone. Sinon, la ligne de téléphone bloquera les appels entrants.

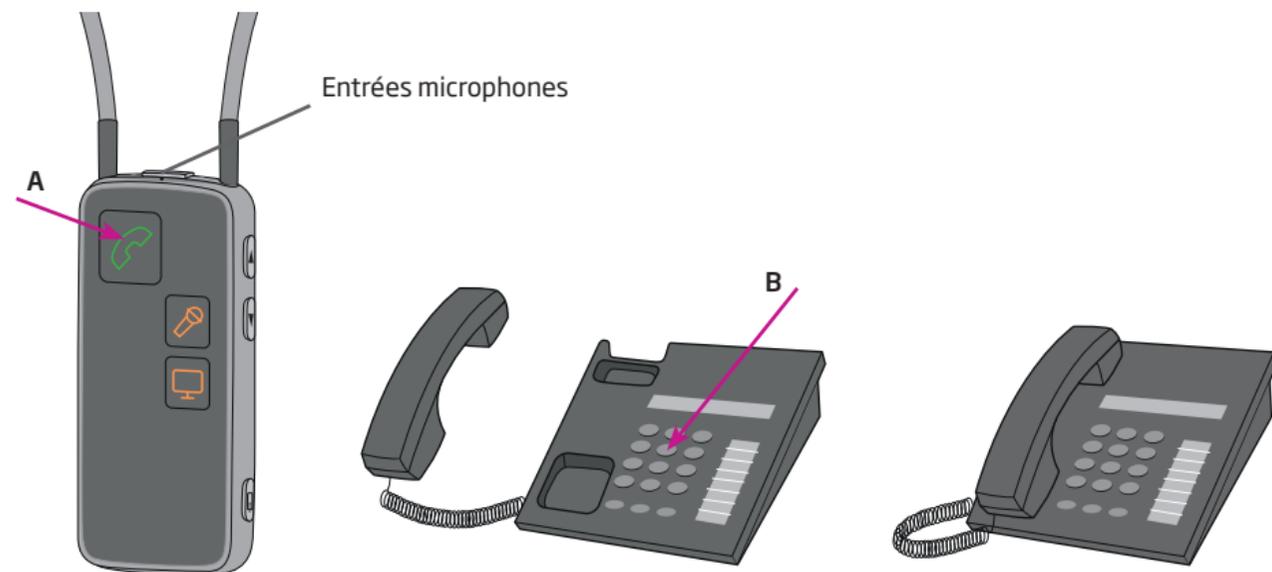

Emettre un appel			
Etat	Face avant	Adaptateur téléphonique	Description
			Le Streamer Pro et l'Adaptateur téléphonique sont connectés.
			Appuyez brièvement sur la touche téléphone du Streamer Pro. Vous entendez dans vos aides auditives une tonalité d'invitation à numéroté.

 Fixe
  Clignotant

Appels entrants **ConnectClip**

Comment passer un appel

Assurez-vous de pouvoir parler dans l'orifice d'entrée du microphone du ConnectClip (A).



Lorsque votre téléphone fixe sonne, vous entendez une alerte d'appel entrant dans vos aides auditives. L'indicateur du téléphone sur l'adaptateur téléphonique clignote en vert et l'indicateur d'état du **ConnectClip** clignote en vert en même temps (B).

Appuyez brièvement sur le bouton multifonction du ConnectClip (C) pour répondre à l'appel. Vous entendrez un petit bip de confirmation dans vos aides auditives. L'indicateur d'état du ConnectClip, ainsi que le voyant téléphone de l'adaptateur téléphonique, passeront alors au vert continu.

Pour mettre fin à l'appel, il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton multifonction du ConnectClip et l'indicateur d'état devient bleu.

REMARQUE IMPORTANTE

Le ConnectClip ne peut être appairé qu'à un seul appareil à la fois.
Pour obtenir des instructions sur l'appairage, voir la page 20 sur le guide d'installation.

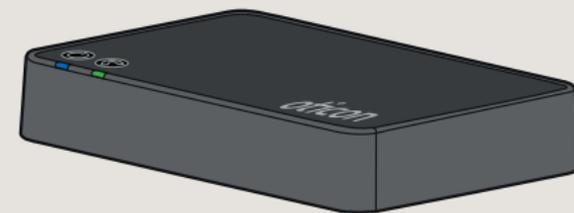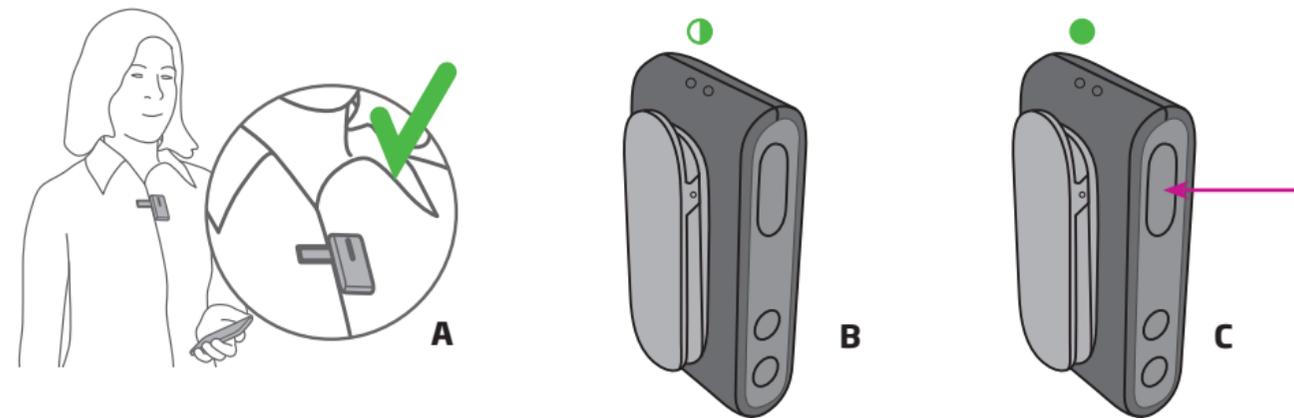

Recevoir un appel avec le ConnectClip

État du ConnectClip	Alimentation du ConnectClip	Adaptateur téléphonique	Description
			Le ConnectClip et l'adaptateur téléphonique sont connectés
			Téléphone qui sonne : L'indicateur du téléphone et d'état du ConnectClip clignote en vert. Vous entendrez une alerte d'appel entrant dans vos aides auditives.
			Quand vous répondez à l'appel, vous entendez un bip de confirmation - vous pouvez à présent entendre votre interlocuteur et converser avec lui.

 Fixe  Clignotant

Appels sortants avec le ConnectClip

Comment passer un appel



Assurez-vous de pouvoir parler dans l'orifice d'entrée du microphone du ConnectClip (A).

1. Pour passer un appel, **appuyez brièvement sur le bouton multifonction du ConnectClip (B)**. Le téléphone est maintenant décroché et vous entendez une tonalité dans les aides auditives. L'indicateur d'état du ConnectClip ainsi que le voyant téléphone de l'adaptateur téléphonique passeront alors au vert continu.
2. **Décrochez le combiné** de votre téléphone fixe (ou appuyez sur Appel sur votre téléphone portable) et **composez le numéro de téléphone (B)** comme vous le feriez normalement pour passer un appel.
3. Après quelques instants, vous entendrez la tonalité d'appel dans vos aides auditives vous indiquant que l'appel est maintenant connecté par le biais de votre ConnectClip et des aides auditives.

Vous pouvez maintenant **reposer le combiné** (ou appuyer sur « terminer l'appel » sur le téléphone portable).

Pour terminer l'appel, il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton multifonction situé sur le ConnectClip.

* Remarque : Veillez à reposer correctement le combiné sur le téléphone, sinon la ligne téléphonique risque de bloquer les appels entrants.

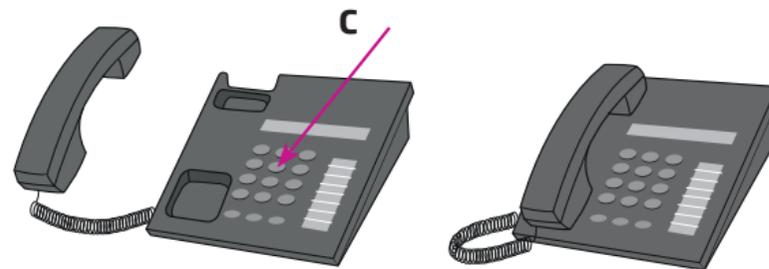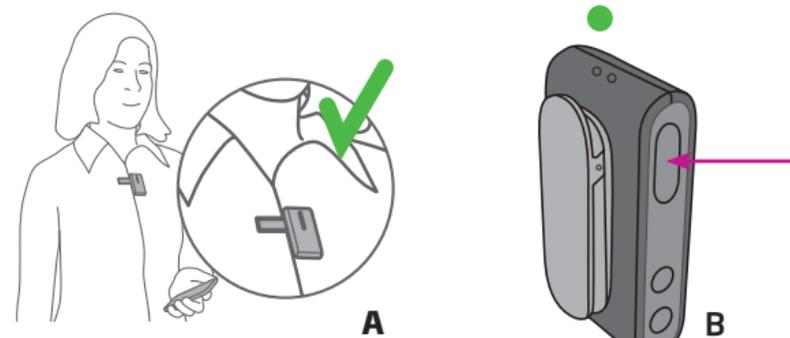

Emettre un appel téléphonique			
État du ConnectClip	Alimentation du ConnectClip	Adaptateur téléphonique	Description
		 	Le ConnectClip et l'adaptateur téléphonique sont connectés
		 	Appuyez brièvement sur le bouton multifonction du ConnectClip. Vous entendrez une tonalité dans les aides auditives.

 Fixe  Clignotant

Nettoyer l'Adaptateur téléphonique

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'Adaptateur téléphonique.

REMARQUE IMPORTANTE

L'Adaptateur téléphonique ne doit jamais être lavée ni immergée dans l'eau ni aucun autre liquide.

Pour des informations plus détaillées, nous vous invitons à consulter le mode d'emploi du Streamer.

Pour obtenir des instructions détaillées à l'attention de l'utilisateur du ConnectClip, veuillez vous reporter au mode d'emploi du ConnectClip

Pour une assistance supplémentaire ou des conseils, consultez les informations ConnectLine sur le site www.oticon.fr/connectline

REMARQUE IMPORTANTE

Nous vous invitons à vous reporter au mode d'emploi de vos aides auditives pour plus d'informations sur les fonctionnalités de votre aide auditive spécifique.

Garantie internationale

Votre Adaptateur téléphonique 2.0 bénéficie d'une garantie limitée internationale, assurée par le fabricant. Cette garantie est de 12 mois à partir de la date de livraison. Cette garantie est limitée aux défauts de fabrication et matériels de l'aide auditive à proprement parler. Elle ne porte pas sur les accessoires tels que les piles, câbles, alimentation électrique, etc. Les problèmes provoqués par une manipulation ou un entretien inapproprié(e), une utilisation excessive, des accidents, des réparations effectuées par un tiers non agréé, une exposition à des conditions corrosives, des changements physiques au niveau de votre oreille, des dommages dus à un corps étranger ou des ajustements incorrects ne sont PAS couverts par la garantie limitée et peuvent l'annuler. La garantie expliquée ci-dessus n'affecte pas les droits juridiques dont vous bénéficiez peut-être, de par les législations nationales régissant la vente des biens de consommation. Votre audioprothésiste peut offrir une garantie plus large que celle qui est prévue par les dispositions de cette garantie limitée. Pour obtenir davantage d'informations, veuillez le consulter.

Si vous avez besoin d'aide

Votre audioprothésiste pourra résoudre des problèmes mineurs ou réaliser des ajustements sur votre Adaptateur téléphonique immédiatement.

Informations complémentaires

Éteindre l'Adaptateur téléphonique

Si vous ne voulez pas recevoir d'appels par l'intermédiaire de votre Streamer Pro, éteignez l'Adaptateur téléphonique en le débranchant. Dans le cadre d'une utilisation normale, l'Adaptateur téléphonique ne consomme que très peu d'électricité, il n'est donc pas nécessaire de l'éteindre.

Portée

L'adaptateur téléphonique a une portée d'environ 30 mètres avec le Streamer Pro, et d'environ 20 mètres avec le ConnectClip, selon le mobilier et les murs. Avec cette portée, vous pouvez converser en mode mains libres avec une bonne qualité de son (c'est-à-dire sans « grésillements »).

Normalement, vous entendez une alerte d'appel dans vos aides auditives à une distance allant de 30 à 40 mètres, mais vous devez ensuite vous rapprocher de l'Adaptateur téléphonique pour entendre clairement la voix de votre interlocuteur. Cela peut être utile quand vous jardinez à l'extérieur, etc.

Commande du volume

Utilisez la touche volume du Streamer Pro ou du ConnectClip pour régler le volume du téléphone dans les aides auditives. Réglez le volume en appuyant sur la touche « moins » ou sur la touche « plus ». Réappuyez brièvement plusieurs fois de suite pour poursuivre le réglage.

Le niveau de volume du téléphone paramétré par le Streamer Pro est mémorisé. Cela signifie que la prochaine fois que vous recevrez un appel ou que vous téléphonerez, le niveau mémorisé sera maintenu. Cette fonction n'est pas disponible sur le ConnectClip.

Entendre le seul son du téléphone

Par défaut, les microphones de l'appareil auditif sont activés.

Cependant, les microphones de l'appareil auditif peuvent être éteints afin de vous aider à mieux entendre la conversation téléphonique. Appuyez sur le bouton de diminution du volume pendant 3 secondes (Streamer Pro et ConnectClip).

Appuyez sur le bouton de diminution du volume pendant environ 3 secondes (Streamer Pro et ConnectClip) au cours de la conversation pour réactiver les microphones de l'appareil auditif.



0000185565000001



Adaptateur
téléphonique 2.0



Guide d'installation

oticon
PEOPLE FIRST

Merci

Merci d'avoir choisi notre produit pour vous aider à gagner en qualité d'audition. Pour accompagner vos efforts, nous avons mis le plus grand soin à vous fournir un nouvel adaptateur de la plus haute qualité, facile à utiliser et à entretenir.

La solution de téléphonie ConnectLine (Adaptateur téléphonique) vous permet de profiter de conversations téléphoniques mains libres dans toute votre maison.

La description complète du système est fournie en ligne sur notre site www.oticon.fr/connectline. Vous trouverez également à cet endroit des présentations interactives, des vidéos instructives et une rubrique assistance comportant des questions fréquemment posées.

Nous vous invitons à lire attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser votre nouvel Adaptateur téléphonique afin de bénéficier pleinement de tous ses avantages. Si vous avez des questions portant sur l'utilisation ou l'entretien de votre Adaptateur téléphonique, veuillez contacter votre Audioprothésiste.

Usage prévu

Phone Adapter 2.0 est destiné à une utilisation avec Oticon ConnectClip ou Oticon Streamer Pro et les aides auditives sans fil Oticon.

L'Adaptateur Téléphonique 2.0 offre à l'utilisateur d'aides auditives la possibilité de communiquer sans fil avec un interlocuteur au moyen d'un téléphone fixe (Analogique/RTC).

ATTENTION

Veillez vous familiariser avec l'ensemble de ce manuel avant de vous servir de votre Adaptateur téléphonique. Il contient des instructions et des informations importantes sur l'utilisation et la manipulation de votre adaptateur téléphonique.

Table des matières

Contenu de la boîte	7
Schéma de l'Adaptateur téléphonique	8
Recommandations de sécurité	10
Installation	13
Brancher l'Adaptateur téléphonique à une prise électrique	14
Connecter l'appareil à la ligne téléphonique et au téléphone	16
Couplage du Streamer Pro à l'adaptateur téléphonique	18
Couplage du ConnectClip avec l'adaptateur téléphonique	20
Informations techniques	22
Définition des symboles utilisés sur l'étiquette de l'emballage réglementaire et sur l'étiquette du produit	26
Définition des symboles utilisés dans cette brochure	28

Contenu de la boîte

Adaptateur téléphonique 2.0 - Qu'y a-t-il dans la boîte ?

La boîte contient les éléments suivants :



Adaptateur téléphonique 2.0



Câble d'alimentation

(l'alimentation électrique peut varier d'un pays à l'autre)



Câble téléphonique




Deux manuels (guide d'installation et mode d'emploi)

Schéma de l'Adaptateur téléphonique



Etat	Voyant marche	Voyant téléphone
Allumé, aucune connexion avec le Streamer Pro		
Couplage avec le Streamer Pro		
Relié au Streamer Pro par connexion sans fil		
Appel entrant		
Conversation téléphonique		
Dysfonctionnement (Contactez votre audioprothésiste)		

○ Éteint ◐ Clignotant ● Fixe

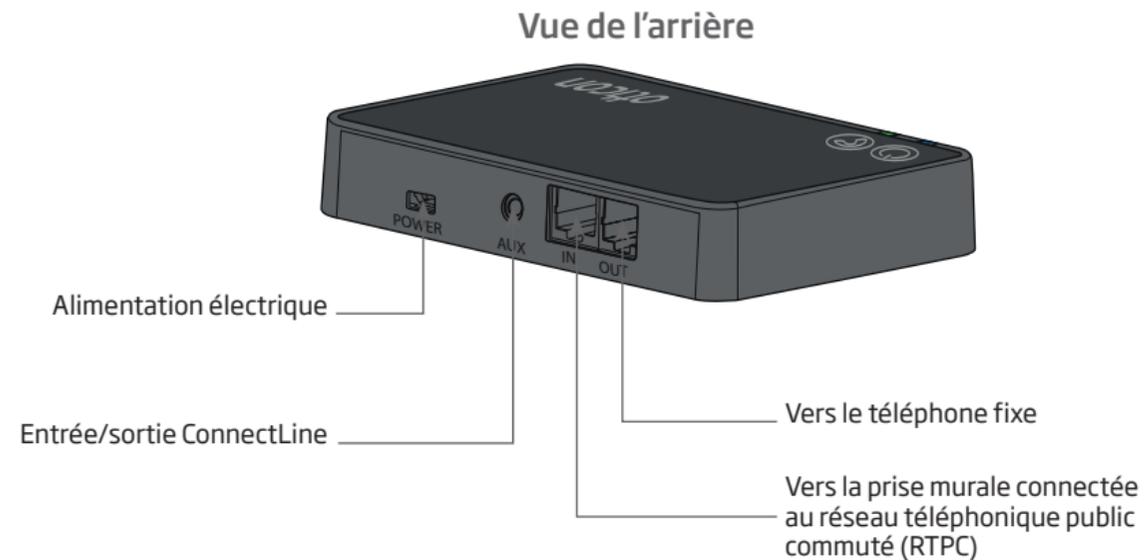

* Pour un complément d'informations, consultez le site : www.oticon.fr/connectline

Recommandations de sécurité

Il est indispensable de vous familiariser avec toutes les recommandations générales exposées ci-après et avec le contenu de ce manuel avant d'utiliser votre Adaptateur téléphonique. Consultez votre audioprothésiste si vous êtes confronté à des opérations ou des événements inattendus avec votre adaptateur téléphonique.

Connexion à un équipement externe

- La sécurité d'utilisation de l'Adaptateur téléphonique avec câble d'entrée auxiliaire dépend de la source extérieure de signaux. Quand ce câble d'entrée est raccordé à un équipement branché sur le secteur, cet équipement doit être conforme aux normes de sécurité IEC-60065, IEC-60601, IEC-60950 ou à des normes équivalentes.

Interférences

- L'adaptateur téléphonique a fait l'objet de tests approfondis pour les interférences selon les normes internationales les plus rigoureuses. Cependant, des interférences entre l'adaptateur téléphonique et d'autres appareils (par ex. certains téléphones portables, appareils à bande publique et autres appareils sans fil) peuvent se produire. Si cela se produit, augmentez la distance entre l'adaptateur téléphonique et l'appareil concerné.

Recommandations de sécurité

Risques d'incendie

- La source d'alimentation de votre adaptateur téléphonique 2.0 n'a pas assez d'énergie pour provoquer un incendie dans des conditions normales d'utilisation.

Installation

Mettre en service l'Adaptateur téléphonique pour la première fois

Pour pouvoir utiliser la solution de téléphonie fixe conjointement à vos aides auditives, vous devez brancher l'Adaptateur téléphonique à une prise électrique et à une prise téléphonique reliée au réseau téléphonique public commuté.


Voici un guide qui explique étape par étape comment installer l'Adaptateur téléphonique.

Tous les éléments nécessaires pour l'installer sont contenus dans la boîte.

Brancher l'Adaptateur téléphonique à une prise électrique

Utilisez le câble USB qui se trouve dans le casier 1 pour brancher l'appareil à la prise électrique.

1. Connectez la mini-prise USB du câble d'alimentation dans l'Adaptateur téléphonique (Power).
2. Branchez le câble d'alimentation dans une prise électrique murale ou à une autre source électrique.
3. Assurez-vous que l'appareil est alimenté en électricité.
4. Après quelques secondes, le voyant de fonctionnement  sur le devant de l'Adaptateur téléphonique deviendra vert.

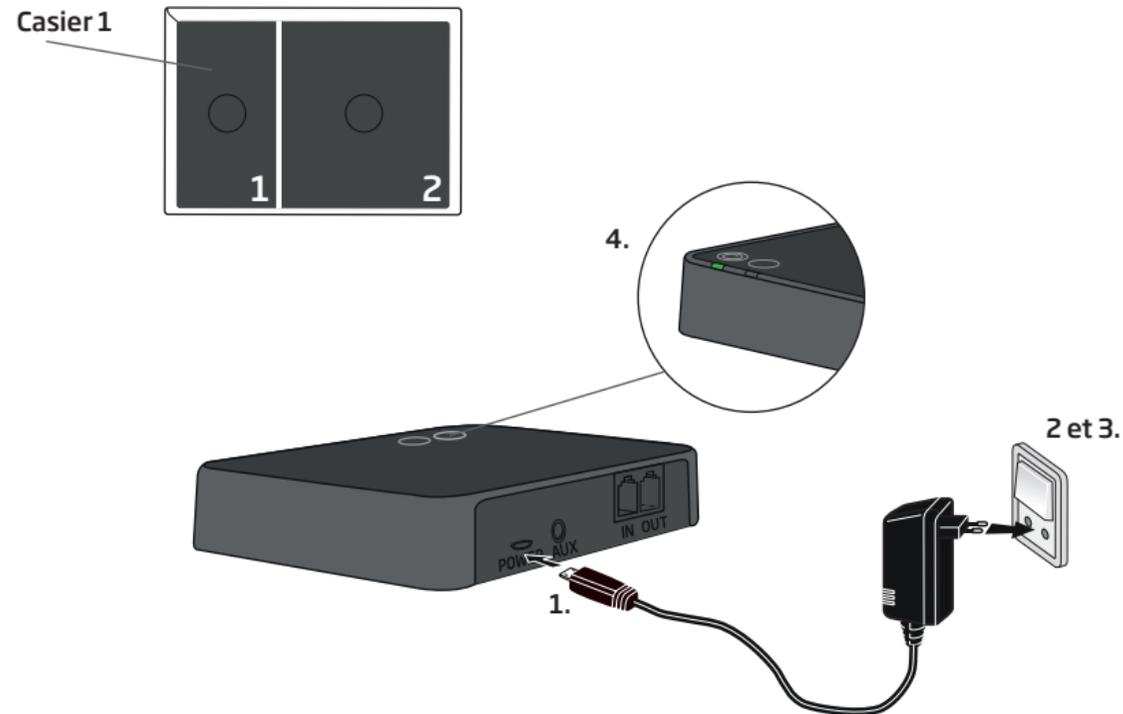


Connecter l'appareil à la ligne téléphonique et au téléphone

Placez l'Adaptateur téléphonique à l'endroit souhaité, à proximité de votre téléphone fixe ou de votre station de base.

1. Déconnectez le fil téléphonique branché sur le téléphone fixe (ou sur la base).*
2. Connectez le fil téléphonique provenant de l'adaptateur mural dans l'orifice "IN" (entrée) situé sur l'Adaptateur téléphonique.
3. Connectez le fil téléphonique qui se trouve dans le casier n° 2 dans l'orifice « OUT » (sortie) situé sur l'Adaptateur téléphonique.
4. Connectez l'autre embout de ce fil téléphonique dans le téléphone fixe (ou dans la base).*
5. Décrochez le combiné de votre téléphone fixe : vous devez entendre la tonalité.

* Si votre téléphone fixe ou votre base n'est pas muni(e) d'un orifice de raccordement de fil téléphonique détachable pour la connexion à la ligne fixe, vous devrez soit essayer d'utiliser un autre appareil ou faire appel à un technicien pour terminer l'installation.

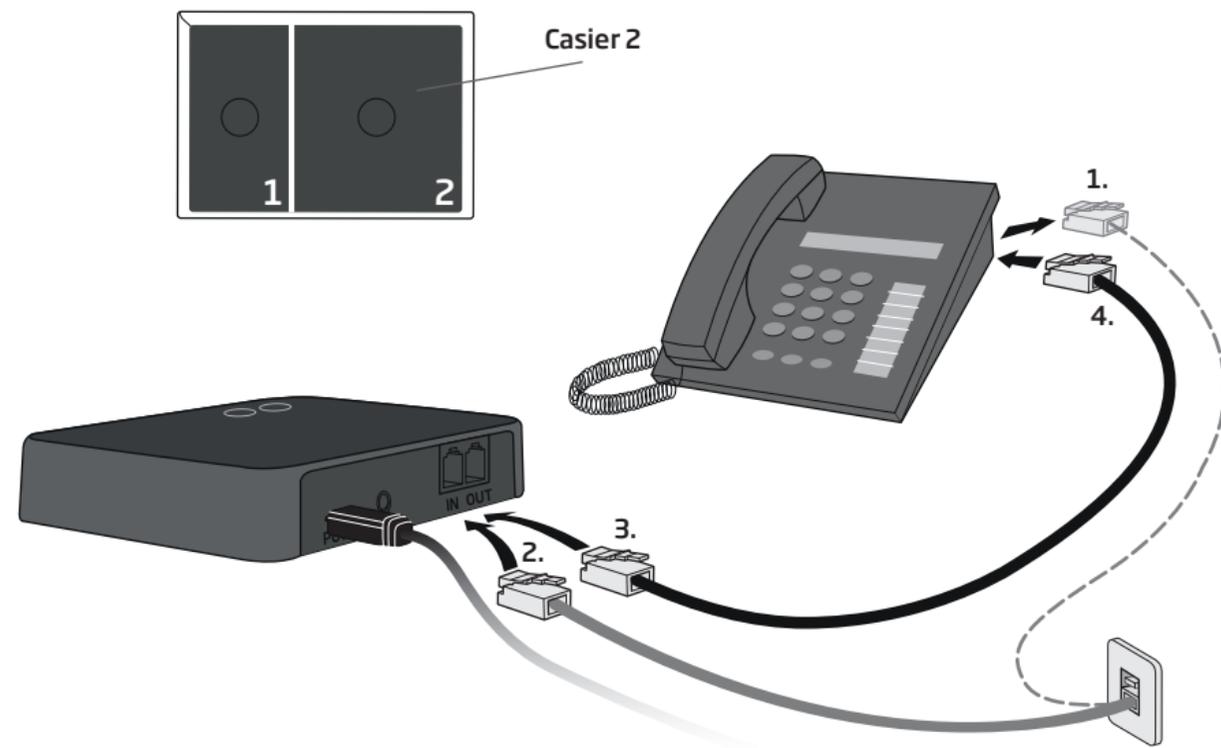

Couplage du Streamer Pro à l'adaptateur téléphonique

Il est nécessaire de coupler le Streamer Pro et l'Adaptateur téléphonique, lorsque l'on utilise l'Adaptateur pour la toute première fois.

Pour procéder au couplage :

1. Assurez-vous que l'Adaptateur téléphonique est alimenté en électricité : le voyant indicateur d'alimentation électrique doit être allumé en vert et rester fixe.
2. Appuyez sur la touche marche/arrêt située sur le Streamer Pro (A) ou sur la touche Connexion située sur le Streamer (B) pendant 5 à 6 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu commence à clignoter.
3. Posez le Streamer Pro sur le dessus de l'Adaptateur téléphonique - le couplage prend 20 à 60 secondes environ.
4. Le couplage est terminé lorsque le voyant indicateur d'alimentation électrique situé sur l'Adaptateur téléphonique et la touche marche/arrêt située sur le Streamer deviennent bleu continu. Le couplage est à faire une seule fois normalement et vous n'aurez donc pas à recommencer cette opération.



Couplage du Streamer Pro			
Streamer Pro voyant d'état supérieur	Streamer Pro avant	Adaptateur téléphonique	Description
  	-	 	Streamer et adaptateur téléphonique activés
  	-	 	Streamer en mode appairage
  	-	 	Appairage actif


 Fixe  Clignotant

Couplage du ConnectClip avec l'adaptateur téléphonique

Lors de la première utilisation du ConnectClip avec l'adaptateur téléphonique, il est nécessaire de l'appairer avec l'adaptateur téléphonique.

Pour l'appairage :

1. Assurez-vous que l'adaptateur téléphonique est en marche (autrement dit, que l'indicateur d'alimentation vert est allumé en continu).
2. Appuyez sur le bouton multifonction ET le bouton d'augmentation du volume sur le ConnectClip (B) pendant environ 6 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur d'état commence à clignoter en bleu
3. Placez le ConnectClip sur l'adaptateur téléphonique : l'appairage prend environ 20 à 60 secondes.
4. L'appairage est terminé lorsque le témoin d'alimentation de l'adaptateur téléphonique et l'indicateur d'état du ConnectClip émettent une lumière bleue fixe. L'appairage est effectué une seule fois et il n'est généralement pas nécessaire de le renouveler.

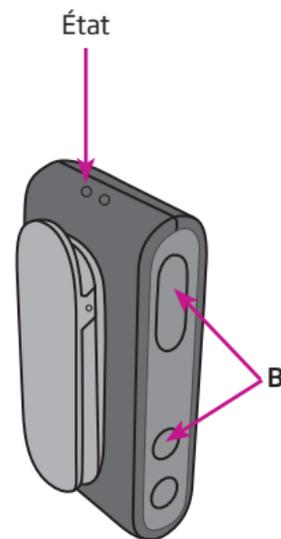

Appairage du ConnectClip			
État du ConnectClip	Alimentation du ConnectClip	Adaptateur téléphonique	Description
	●	● ☎	ConnectClip et adaptateur téléphonique allumés
●	●	● ☎	ConnectClip en mode appairage
●	●	● ☎	Appairage actif

● Fixe ● Clignotant ● Alimentation

Informations techniques

L'Adaptateur téléphonique possède un émetteur-récepteur sans fil utilisant la technologie 2.4 GHz. L'émission radio de l'Adaptateur téléphonique est de maximum 10 dBm e.i.r.p.

L'Adaptateur téléphonique 2.0 est conforme aux normes internationales relatives aux émetteurs radio, à la compatibilité électromagnétique et à l'exposition humaine.

Ce produit est destiné à une connexion au réseau téléphonique analogique public commuté et peut être utilisé dans les pays de l'UE et de l'EEE.

En raison de l'espace disponible limité sur l'Adaptateur téléphonique 2.0, tous les marquages de certification sont présents dans ce mode d'emploi.

Conditions d'utilisation

Environnement domestique

Conditions d'utilisation :

- Température : +5 °C à +40 °C
- Humidité : 15 % à 93 %, sans condensation
- Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

Conditions de stockage et de transport :

La température et l'humidité ne doivent pas excéder les limites ci-dessous pendant des périodes prolongées lors du transport et du stockage :

- Température : -25 °C à +70 °C
- Humidité : 15 % à 93 %, sans condensation

États-Unis et Canada

Cet appareil contient un module radio portant les numéros d'ID de certification suivants :

FCC ID: 2ACAHREMCTR01

IC: 11936A-REMCTR01

Avis

Cet appareil est conforme à la Partie 15 du Règlement FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence néfaste et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Les changements ou les modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

Ce dispositif numérique de Catégorie B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Remarque : Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut provoquer des interférences nocives avec les radiocommunications. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nocives avec la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger les interférences en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et l'écouteur.
- Brancher l'équipement à une prise électrique placée sur un circuit différent de celui sur lequel l'écouteur est branché.
- Consulter le fabricant ou un technicien radio/TV expérimenté pour une assistance.

Le fabricant certifie que cet adaptateur téléphonique 2.0 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité est disponible auprès du fabricant.

Définition des symboles utilisés sur l'étiquette de l'emballage réglementaire et sur l'étiquette du produit

	Fabricant Le produit est fabriqué par le fabricant dont le nom et l'adresse figurent à côté du symbole. Indique le fabricant du dispositif médical, tel que défini dans les directives de l'UE 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE.
	Marquage CE Le produit est conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE.
	Déchets électroniques (DEEE) Recyclez vos aides auditives, accessoires ou piles conformément aux réglementations locales ou retournez-les à votre audioprothésiste pour la mise au rebut. Équipements électroniques couverts par la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
	Marque réglementaire de conformité (RCM) Le produit est conforme aux exigences de sécurité électrique, CEM et spectre radio pour les produits fournis sur le marché australien ou néo-zélandais.
	Tenir à l'abri de l'humidité Indique un dispositif médical qui doit être protégé de l'humidité.
	Symbole de mise en garde Consultez le mode d'emploi pour prendre connaissance des avertissements et des mises en garde.
	Numéro de série Indique le numéro de série du produit afin d'identifier le dispositif médical spécifique.

	Étiquettes TELEC et JATE japonaises T : A12-0209005 - indique que l'appareil peut se connecter au réseau téléphonique.. R : 005-100259 - indique la marque de l'équipement radio certifié.
INPUT: 5V 0.2A	Sortie d'alimentation Indique la vitesse à laquelle la puissance est transmise de la prise à votre appareil électrique.
	Étiquette IMDA de Singapour Indique que l'appareil est conforme aux normes et aux spécifications publiées par l'IMDA (Info-Communications Media Development Authority), est compatible avec les réseaux de télécommunication publics de Singapour et ne provoque pas d'interférences en radiofréquence avec les autres réseaux de radiocommunication agréés.
	Étiquette ICASA pour l'Afrique du Sud Indique que l'appareil dispose d'une licence de commercialisation pour l'Afrique du Sud.

Définition des symboles utilisés dans cette brochure



Avertissements

Le texte portant ce symbole d'avertissements doit être lu avant d'utiliser le produit.



Fabricant

Le produit est fabriqué par le fabricant dont le nom et l'adresse figurent à côté du symbole. Indique le fabricant du dispositif médical, tel que défini dans les directives de l'UE 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE.



Marquage CE

Le produit est conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE.



Déchets électroniques (DEEE)

Recyclez vos aides auditives, accessoires ou piles conformément aux réglementations locales ou retournez-les à votre audioprothésiste pour la mise au rebut. Équipements électroniques couverts par la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



Marque réglementaire de conformité (RCM)

Le produit est conforme aux exigences de sécurité électrique, CEM et spectre radio pour les produits fournis sur le marché australien ou néo-zélandais.



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark
www.oticon.global

Le fabricant certifie que ce ConnectClip (AC1A) est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité est disponible auprès du fabricant.

Durée de disponibilité garantie des pièces détachées : 5 ans après la date d'achat.
Décret 2014-1482 / Article L111-3 du code de la consommation.

Prodition S.A.S., Parc des Barbanniers, 3 allée des Barbanniers,
92635 GENNEVILLIERS CEDEX - SIREN 301 689 790 R.C.S. NANTERRE



Les déchets électroniques
doivent être traités selon la
légalisation locale.

