

SISTEMA ACUSTICO ANCORATO ALL'OSSO

Guida alla cura di Ponto



oticon
MEDICAL



Congratulazioni

Nelle prime settimane dopo l'intervento chirurgico, è molto importante curare bene la pelle attorno all'area dell'impianto. Anche quando quest'area sarà completamente guarita, il pilastro dovrà essere pulito ogni giorno.

Questo opuscolo riporta consigli utili su come mantenere in salute l'area del pilastro e come fronteggiare varie situazioni quotidiane. Una volta abituato all'uso dell'elaboratore del suono Ponto, probabilmente svilupperai delle tue abitudini quotidiane riguardo alla cura della pelle, ma ricordati di controllare l'impianto e il pilastro ogni giorno.


Desideriamo manifestare la nostra gratitudine e ringraziare tutti gli utenti Ponto, che ci hanno aiutato a compilare questo opuscolo.

Sommario

Dopo l'intervento chirurgico	4
Il periodo di guarigione	5
Istruzioni per la pulizia	6
Cose da ricordare	8
Vivere con il tuo sistema Ponto	9
Dal parrucchiere.....	10
Esposizione ad umidità intensa	10
Vacanze e viaggi.....	11
Attività all'aperto	12
Esposizione ad ambienti polverosi	12
Per incontrare altri utenti.....	13
Sette buone abitudini da adottare	14

Dopo l'intervento chirurgico

Nel completare l'intervento, il chirurgo posizionerà una copertura di guarigione sopra al sito dell'impianto. La copertura di guarigione sarà rimossa dopo circa una settimana dall'intervento, a guarigione avvenuta del tessuto molle. Se la pelle non sarà ancora completamente cicatrizzata, la medicazione verrà mantenuta per alcuni giorni in più. Se la copertura di guarigione dovesse accidentalmente cadere, basterà premerla delicatamente di nuovo al suo posto.

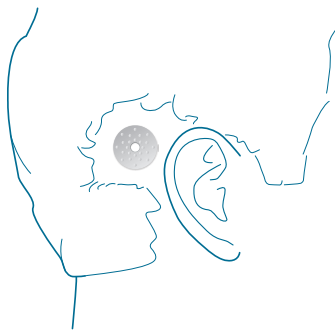



Il periodo di guarigione

Una volta rimossa la copertura di guarigione, la pelle probabilmente sarà ancora molto sensibile. Così è necessario trattarla con delicatezza. Per pulire il pilastro, lavarsi prima con cura le mani. Dopodiché ripulire con attenzione tutto intorno al pilastro, usando un panno umido con soluzione non-alcolica.


Bisogna attendere un po' di tempo prima di lavarsi i capelli, perché la cute non deve essere esposta all'acqua. Quando il dottore darà il permesso, consigliamo di usare uno shampoo delicato sulla pelle per le prime settimane.

Istruzioni per la pulizia

- Una volta che la pelle sarà completamente cicatrizzata, è importante continuare a curarla regolarmente, per evitare che si formino dei residui di pelle attorno al pilastro.
- Lavare ogni giorno l'area del pilastro con acqua calda. Lo si può fare, facendo una doccia o un bagno. Lavandosi i capelli, i residui di pelle si inumidiscono e vengono via più facilmente.
- Dopo aver pulito quest'area, usare un cotton fioc o uno spazzolino da denti a setole morbide per pulire delicatamente attorno e all'interno del pilastro. A questo scopo può essere d'aiuto usare uno specchio.

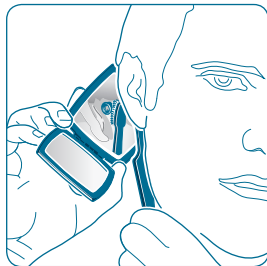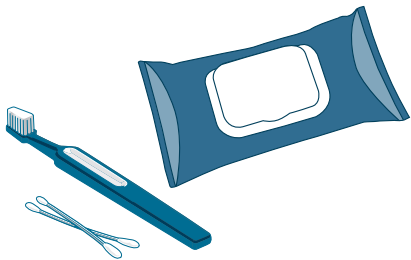

- Se non si riesce a rimuovere i residui, appoggiare un pezzo di garza imbevuta in acqua calda attorno al pilastro per 5-10 minuti. Pulire quindi il pilastro con un cotton fioc o uno spazzolino da denti a setole morbide e concludere con una salvietta umida non-alcolica. Non grattare mai la pelle attorno al pilastro con un oggetto appuntito.
- Nel caso in cui si abbiano due impianti, utilizzare due spazzolini da denti a setole morbide – uno per ogni pilastro.
- Tutti gli spazzolini da denti a setole morbide devono essere sostituiti ogni tre mesi e solo spazzolini appositi devono usati, come quello fornito.
- Se si usa un asciugacapelli ad aria calda dopo la doccia, evitare di rivolgerlo direttamente verso il pilastro per molto tempo, per evitare il surriscaldamento del pilastro e dell'impianto. Può essere usato un asciugacapelli ad aria fredda.

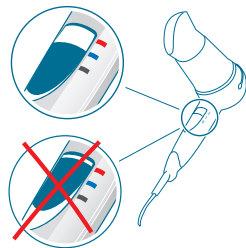


Cose da ricordare

- Controllare ogni giorno la pelle attorno al pilastro. Se compare dolore, rossore, infiammazione o gonfiore, contattare la clinica per ottenere consigli sulle possibili misure da adottare per risolvere il problema.
- Nel controllare il pilastro, accertarsi che non vi siano impigliati dei capelli.
- Se si avverte insensibilità attorno al pilastro, non ci si deve preoccupare. Non è un fenomeno raro nel periodo immediatamente successivo all'intervento chirurgico; di solito si attenua col tempo.
- Se per qualsiasi ragione, il pilastro o l'impianto si dovessero allentare, contattare subito la clinica.

Vivere con il tuo sistema Ponto

- Non posizionare mai un conduttore osseo tradizionale né un elaboratore del suono su una fascia elastica, un cerchietto rigido, un cerchietto morbido al di sopra del tuo nuovo pilastro, impianto o impianto dormiente.
- Se si toglie l'audioprocessore per un certo periodo di tempo, si può proteggere il pilastro con l'apposito copripilastro fornito, che lo protegge e lo mantiene anche pulito.
- Mantenere sempre l'audioprocessore nell'apposito astuccio, quando non lo si indossa.
- Se ci si deve sottoporre a un MRI (esame di risonanza magnetica), informare assolutamente di avere una protesi acustica a conduzione ossea, al momento della prenotazione e quando in reparto. (Per i bambini e le persone mentalmente disabili, tale responsabilità ricade sul tutore.) Una tessera informativa per MRI/controllo di sicurezza è allegata alla presente guida. Se si necessita della traduzione della tessera nella propria lingua locale, visitare il sito www.oticonmedical.com.
- Prima di un bagno o di una doccia, per controllare meglio di avere rimosso l'audioprocessore, passare le dita fra i capelli prima di tutto. Questa è una buona abitudine da adottare!

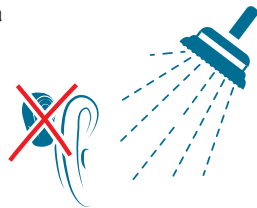

Dal parrucchiere

- Durante i trattamenti dal parrucchiere, coprire sempre il pilastro. Si può usare l'apposito copripilastro, fornito insieme all'elaboratore del suono.
- Coprire il pilastro anche quando si usa gel o spray per capelli. *(fig. 1)*
- Assicurarsi di proteggere o rimuovere l'elaboratore del suono, durante i trattamenti dal parrucchiere o quando si usano prodotti per capelli. *(fig. 2)*

Esposizione ad umidità intensa

- Se si prevede di fare una visita o se si vive in un'area dalla forte umidità, mettere ogni notte l'audioprocessore nell'apposita scatola per essiccazione. La pasticca essiccante all'interno di questo contenitore è in grado di assorbire ogni umidità residua.
- Se non si ha una scatola per essiccazione, chiedere alla propria clinica come poterne avere una.
- Se si suda eccessivamente, cercare di mantenere asciutta la pelle attorno al pilastro. Pulire regolarmente il pilastro con un panno imbevuto con soluzione non-alcologica.

Vacanze e viaggi

- Nuotare non dovrebbe essere un problema, se la cute è completamente guarita. Dopo aver nuotato, fare una doccia per lavare via lo sporco eventualmente accumulato all'interno o all'esterno del pilastro.
- Non esporre mai l'elaboratore del suono all'acqua, perché non è impermeabile.
- Non esporre mai l'elaboratore del suono al calore estremo, ad esempio direttamente alla luce del sole, come sul cruscotto dell'auto, perché il calore eccessivo lo può danneggiare.
- Viaggiando all'estero, ricordarsi di portare con sé la tessera informativa per controlli di sicurezza/MRI. Se si necessita di cure mediche, potrà essere d'aiuto a spiegare perché l'impianto e il pilastro devono essere mantenuti al loro posto. Si può mostrare questa tessera anche al controllo di sicurezza dell'aeroporto.



(fig. 1)



(fig. 2)



Attività all'aperto

- Se si svolgono attività sportive di contatto, prendere precauzioni per proteggere il pilastro dai traumi diretti.
- Se si praticano attività che potrebbero causare il distacco dell'audioprocessore Ponto, toglierlo o usare il cordino di sicurezza, fornito insieme all'audioprocessore Ponto.
- Se ci si trova all'aperto in un giorno piovoso, usare un ombrello per proteggere l'audioprocessore Ponto.



Esposizione ad ambienti polverosi

- In ambienti estremamente polverosi, togliere l'audioprocessore, perché un accumulo di particelle di polvere può danneggiarlo.
- Quando si torna a casa, ricordarsi di pulire sia la zona dell'impianto che il pilastro.

Link utili

Per ulteriori informazioni su come vivere con Ponto e conoscere le esperienze di persone che lo usano, contattaci o visita:

www.oticonmedical.com/Ponto-stories

Oppure cerca i dispositivi acustici ancorati all'osso su Facebook, dove ci sono gruppi come per esempio

www.facebook.com/baha.world

Oticon Medical è in contatto con persone che usano Ponto felici di fornire consigli e di raccontare la loro personale esperienza. Maggiori informazioni al seguente indirizzo web:

www.oticonmedical.com/Ponto-experiences

È possibile anche contattarci al seguente indirizzo:

www.facebook.com/oticonmedical

Per saperne di più sulle caratteristiche e i vantaggi di Ponto, visitare:

www.oticonmedical.com



Sette buone abitudini da adottare

1. Adottare delle abitudini quotidiane di cura della pelle per mantenere il sito del pilastro in salute.
2. Lavare il sito del pilastro ogni giorno con dell'acqua calda e poi pulire il pilastro con un bastoncino di cotone o uno spazzolino da denti con setole morbide.
3. Nel pulire il pilastro, assicurarsi che le mani siano perfettamente pulite.
4. Controllare ogni giorno la pelle attorno al pilastro e assicurarsi che non vi siano capelli impigliati, e che la pelle abbia un aspetto pulito e sano.
5. Se compare dolore, rossore, infiammazione o gonfiore intorno al pilastro, contattare la clinica per consigli.
6. Proteggere il pilastro se si applica spray/gel per capelli o se si va dal parrucchiere.
7. Proteggere il pilastro quando si praticano attività che potrebbero esporlo a traumi diretti.

Tessera informativa MRI/controllo di sicurezza

Possono verificarsi delle situazioni in cui la tessera può fornire delle informazioni utili:

- Se ci si deve sottoporre ad un esame MRI (esame di risonanza magnetica).
- Se si viaggia all'estero e bisogna sottoporsi a cure mediche.
- Per passare attraverso il controllo di sicurezza dell'aeroporto.

Se si ha bisogno di una tessera nella lingua locale, visitare il sito web www.oticonmedical.com e andare all'area “Downloads”, vedere “Materiale informativo per l'utente”.

Prendere questa tessera e portarla sempre con sé



Prodotto da:

Oticon Medical AB

Datavägen 37B

SE-436 32 Askim

Svezia

Tel.: +46 31 748 61 00

info@oticonmedical.com



M51298IT / 2018.10

oticon
MEDICAL | Because
sound matters

www.oticonmedical.com