

Kit Impermeabile per Neuro 2

Guida rapida



Il Kit impermeabile è una soluzione resistente all'acqua per l'audioprocessore Neuro 2 che consente l'immersione in acqua per due ore a profondità fino a 3 m. Questo accessorio tiene il processore asciutto durante le attività in acqua come il nuoto, la navigazione o il canottaggio.

Destinazione d'uso

Il Kit impermeabile è un accessorio che offre una estensione della protezione all'audioprocessore Neuro 2 quando questo viene utilizzato in acqua o in ambienti umidi e polverosi.

La Guaina impermeabile è progettata per essere usata per 1 anno o 50 volte, a seconda di quale evento si verifichi per primo. Ispezionare sempre con cura la Guaina impermeabile prima e dopo l'uso. Se si osserva qualche cambiamento nel materiale o nell'aderenza della guaina, smettere di utilizzare la guaina e ordinarne una nuova (Kit di guaine impermeabili).



Le informazioni in questa Guida rapida non sostituiscono le Istruzioni per l'uso del Kit impermeabile. Assicurati di familiarizzarti con il Kit impermeabile leggendo le Istruzioni per l'uso.

Come inserire l'audioprocessore nella Guaina impermeabile




Nota: Utilizzare sempre batterie ricaricabili per alimentare l'audioprocessore quando si utilizza il Kit impermeabile. Le batterie zinco-aria necessitano di contatto con l'aria per produrre alimentazione e pertanto non possono essere usate all'interno di una Guaina impermeabile.


- 1 Aprire il coperchio della Guaina impermeabile.
- 2 Ispezionare la Guaina impermeabile allo scopo di assicurarsi che sia priva di sporcizia, polvere e frammenti di capelli nell'apertura per il connettore dell'Antenna impermeabile, nonché l'apertura e il coperchio per l'inserimento del processore.
- 3 Inserire l'audioprocessore completamente nella Guaina impermeabile. Durante l'inserimento, piegare la guaina e far passare con delicatezza la curveta dell'audioprocessore finché non giunge in posizione per evitare che si incastri sui lati.

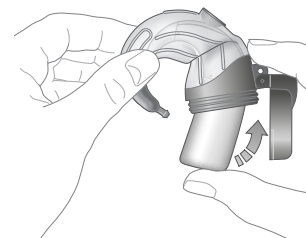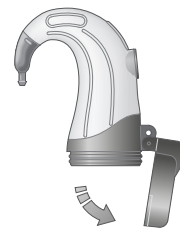


4 Assicurarsi che l'audioprocessore sia inserito completamente in modo che il suo connettore dell'antenna sia perfettamente in linea con l'apertura della Guaina impermeabile.

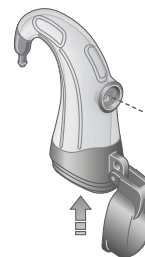

5 Tenere lo spinotto angolato con il cavetto dell'Antenna impermeabile perpendicolare alla Guaina impermeabile e inserire lo spinotto completamente nell'audio-processore e nella guaina. L'anello di guarnizione rosso deve toccare la guaina.

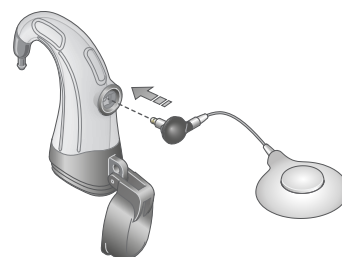


6 Ruotare lo spinotto di 90° in senso orario per bloccarlo in posizione. Il cavetto d'antenna dovrebbe alla fine risultare parallelo alla guaina.

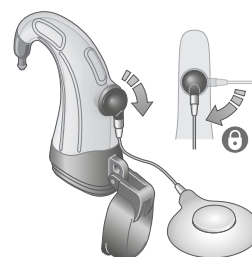

7 Chiudere il coperchio della Guaina impermeabile.

8 Posizionare il sistema sull'orecchio.

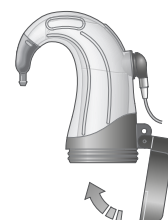

Le affermazioni presenti in questa Guida Rapida sono ritenute vere alla data di pubblicazione. Le immagini non sono contrattualmente vincolanti. La disponibilità dei prodotti dipende dalla normativa locale.

Oticon Medical (NEURELEC) si riserva il diritto di apportare modifiche al design, alle caratteristiche e ai modelli senza preavviso. L'unica garanzia che Oticon Medical (NEURELEC) rilascia è la garanzia esplicita e per iscritto estesa al momento della vendita o del noleggio dei suoi prodotti.

Oticon Medical
NEURELEC
2720 Chemin Saint-Bernard
06220 Vallauris – France
Tel: +33 (0)4 93 95 18 18
FAX: +33 (0)4 93 95 38 01
info@oticonmedical.com

CE 0459 (2020)