

PHILIPS

HearLink

귀걸이형 보청기

BTE PP



Made for

 iPhone | iPad | iPod

사용 설명서

제품 개요

이 소책자는 다음의 보청기 제품군과 모델에 유효합니다.

다음의 내용은 청각 전문가가 작성하십시오.

- ☐ HearLink 9010 BTE PP – HL 9010 BTE PP
(HEB9010)
- ☐ HearLink 7010 BTE PP – HL 7010 BTE PP
(HEB7010)
- ☐ HearLink 5010 BTE PP – HL 5010 BTE PP
(HEB5010)
- ☐ HearLink 3000 BTE PP – HL 3000 BTE PP
(HEB3000)
- ☐ HearLink 2000 BTE PP – HL 2000 BTE PP
(HEB2000)

근거리 자기 유도(NFMI)와 2.4 GHz 블루투스 기능 포함.

보청기 설정 안내

귀하의 보청기 설정 개요

왼쪽			오른쪽	
☐ 예	☐ 아니요	볼륨 조절기	☐ 예	☐ 아니요
☐ 예	☐ 아니요	프로그램 버튼	☐ 예	☐ 아니요
☐ 예	☐ 아니요	음소거	☐ 예	☐ 아니요

볼륨 조절 관련 안내사항

☐ 활성화 ☐ 비활성화	최소/최대 볼륨에서의 비프음	☐ 활성화 ☐ 비활성화
☐ 활성화 ☐ 비활성화	볼륨이 변경될 때 딸깍거리는 소리	☐ 활성화 ☐ 비활성화
☐ 활성화 ☐ 비활성화	선호 볼륨에서의 비프음	☐ 활성화 ☐ 비활성화

배터리 관련 안내사항

☐ 활성화 ☐ 비활성화	배터리 부족 안내음	☐ 활성화 ☐ 비활성화
--	------------	--

품질 보증서

보청기 사용자 이름:

보청기 사용자 이름:

청력 관리 전문가 주소:

청력 관리 전문가 연락처:

구매 날짜:

품질 보증 기간:

개월:

오른쪽 모델:

시리얼 번호:

왼쪽 모델:

시리얼 번호:

배터리 크기:

국제 보증

보청기는 제조업체에 의해 배송된 날로부터 24 개월 동안 국제 보증이 적용됩니다. 보증은 보청기 자체의 기계적인 결함에 대해서만 적용되며 배터리, 튜빙, 스피커, 이어피스 및 필터 등과 같은 액세서리에는 적용되지 않습니다. 부적절한 취급 또는 관리, 과도한 사용, 사고, 공인되지 않은 업체에 의한 수리, 부식될 수 있는 환경의 노출, 귀의 신체적 변화, 보청기에 들어간 이물질로 인한 손상 또는 잘못된 조정으로 인해 발생한 문제는 보증에 적용되지 않습니다. 상기의 품질 보증은 소비재를 관리하는 국가 규정 하에 있을 수 있는 사용자의 법적 권한에 영향을 미치지 않습니다. 귀하의 청력 관리 전문가가 제한된 보증의 조항을 초과하는 품질 보증을 발급할 수도 있습니다. 보다 자세한 정보는 전문가에게 문의하십시오.

수리가 필요할 경우

보청기의 단순한 문제의 처리가 가능하고 즉시 조절할 수 있는 청력 관리 전문가에게 가져가십시오.

소책자 소개

이 소책자는 귀하의 새로운 필립스 보청기를 사용하고 유지 관리하는 방법을 보여줍니다. 주의사항을 포함하여 소책자를 주의 깊게 읽으십시오. 소책자를 통해 귀하의 새로운 보청기의 모든 이점을 알 수 있습니다.

청력 관리 전문가는 귀하의 필요에 맞게 보청기를 조정합니다. 궁금한 사항이 있는 경우에는 청력 관리 전문가에게 문의하십시오.

자세한 정보는 www.hearingsolutions.philips.com에서 확인할 수 있습니다.

사용 목적

보청기는 귀에 소리를 증폭하고 전달하여 가벼운 경도 난청부터 심도 난청까지 손실된 청력을 보상합니다. 이 보청기는 성인과 36개월 이상의 어린이가 사용하도록 합니다.

중요 사항

보청기 증폭은 피팅 과정에서 청력 관리 전문가에 의해 보청기 사용자의 청력 상태에 맞춰 조정되고 최적화됩니다.


목차

보청기와 이어피스 안내	12
이어후크와 몰드를 사용하는 보청기 외형	13
보청기 기능	14
왼쪽과 오른쪽 보청기 구별	15
배터리 (사이즈 13)	16
배터리를 다루고 청소를 돕는 멀티툴	17
보청기 전원 켜고 끄기	18
배터리 교체 시기	19
배터리 교체	20
이어후크와 몰드를 사용하는 보청기 착용	22
보청기 관리	23
비행기 모드	27
추가적인 기능 및 액세서리	28
볼륨 변경(옵션사항)	29
프로그램 변경(옵션사항)	30
보청기 음소거(옵션사항)	32
설정 초기화	33


아이폰, 아이패드, 아이팟 터치와 보청기 사용	34
아이폰과 보청기 페어링	35
아이폰, 아이패드, 아이팟 터치와 보청기 재연결	38
필립스 HearLink 앱	39
무선 액세서리(옵션사항)	41
기타 옵션 사항	42
열림 방지 배터리 도어(옵션사항)	43
일반적인 주의사항	45
문제해결법	50
방습 & 방진 등급	52
사용 조건	53
기술적 정보	54

보청기와 이어피스 안내


□ 몰드가 부착된 이어후크

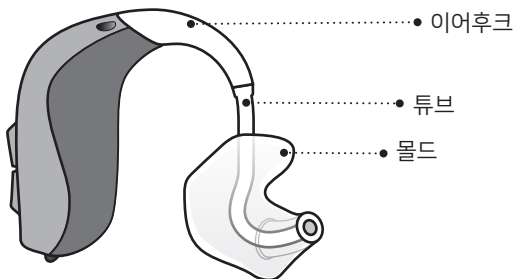

이어후크와 몰드를 사용하는 보청기 외형

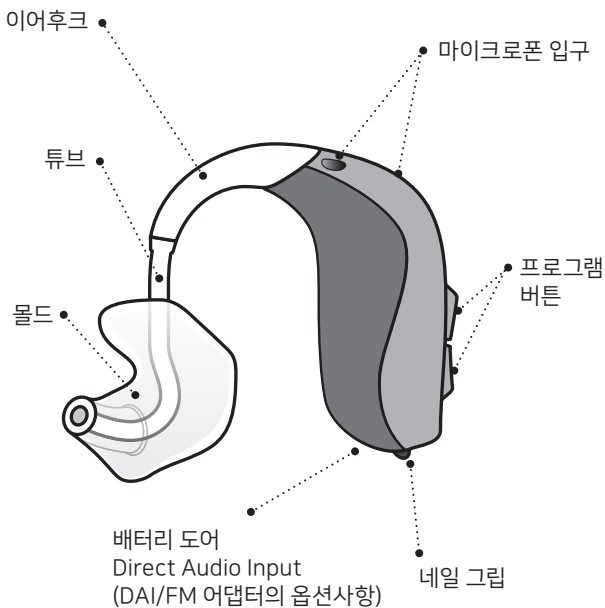


보청기 기능

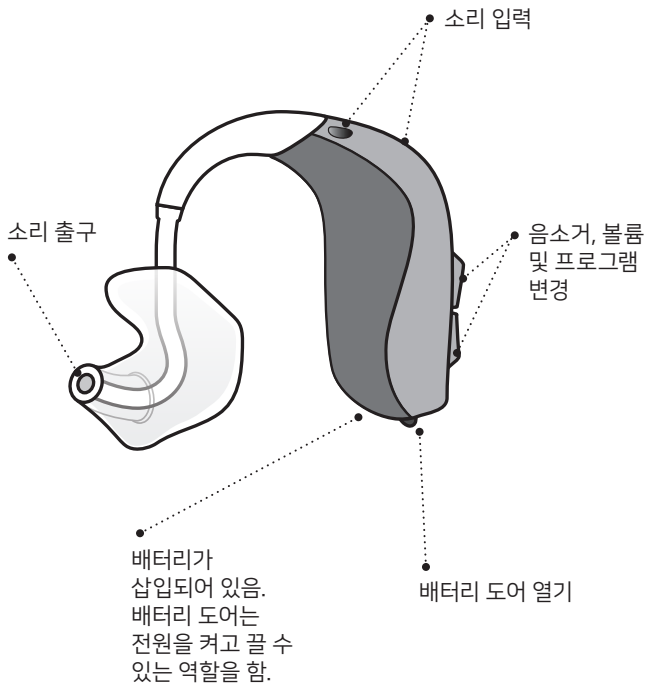

왼쪽과 오른쪽 보청기 구별

왼쪽 보청기와 오른쪽 보청기의 형태와 프로그램된 정보가 서로 다를 수 있기 때문에 구별하여 사용하는 것이 중요합니다. 배터리 도어와 몰드에서 왼쪽/오른쪽 색상 표시기를 찾을 수 있습니다.

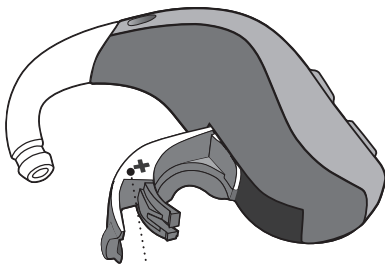


- 빨강 표시기는 오른쪽 보청기를 의미합니다.

파랑 표시기는 왼쪽 보청기를 의미합니다.

배터리(13 사이즈)

보청기는 전용 배터리로 작동하는 작은 크기의 소형 전자기기입니다. 보청기를 활성화하려면 배터리 도어에 새 배터리를 삽입해야 합니다. “배터리 교체”섹션을 참조하십시오.

+ 표시가 보이도록 확인

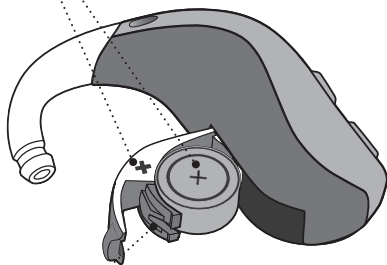


당겨서 열기

배터리 도어

배터리를 다루고 청소를 돕는 멀티툴

멀티툴에는 자석이 포함되어 있어 보청기의 배터리를 쉽게 교체할 수 있습니다. 또한 이어피스를 청소하고 제거하기 위한 청소솔과 와이어 루프가 포함되어 있습니다. 새로운 멀티툴이 필요한 경우에는 청력 관리 전문가에게 문의하십시오.

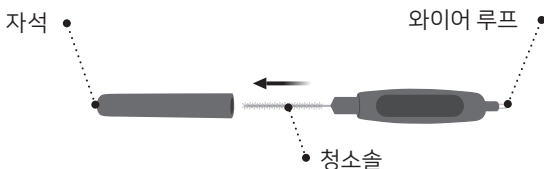

중요 사항


멀티툴에는 자석이 포함되어 있습니다. 멀티툴을 신용카드 및 기타 자성이 있는 기기들로부터 30cm 이상 거리를 두고 보관하십시오.

보청기 전원 켜고 끄기

배터리 도어는 보청기를 켜고 끌 때도 사용됩니다. 배터리의 수명을 오래 보존하려면 착용하지 않을 때는 배터리 도어를 열어 보청기의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.

전원 켜기

배터리를 삽입하고 배터리 도어 닫기

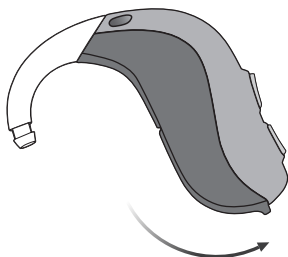

전원 끄기

배터리 도어 열기



배터리 교체 시기

보청기 배터리의 교체가 필요한 경우, 배터리가 완전히 방전 될 때까지 사용자는 일정한 간격으로 세 번의 비프(경고)음을 들을 수 있습니다.



세 번의 비프음*
배터리 전력 낮음



네 번의 비프음
배터리 완전 방전(소모)

배터리 사용팁(Tip)

보청기가 항상 작동될 수 있도록 여분의 배터리를 가지고 다니거나 집에서 나가기 전에 배터리를 교체합니다.

* Bluetooth® 기능이 종료되고 무선 액세스리 사용이 불가능 해 집니다.


Bluetooth® 단어 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며 William Demant Holding A / S가 허가하에 사용하는 상표입니다. 기타 상표 및 상호는 해당 소유자의 상표입니다.

오디오 또는 음악을 보청기로 스트리밍하는 경우 배터리를 더 자주 교체해야 합니다.

배터리 교체


1. 제거

배터리 도어를 완전히 열어
기존의 배터리를 꺼내줍니다.

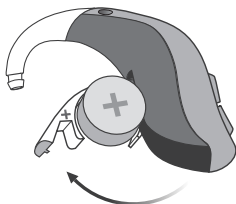

2. 스티커 제거

새 배터리의 양극(+)에 붙어있는
스티커 라벨을 제거합니다.

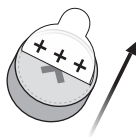


팁(Tip):

최적의 사용 상태를 위해
배터리를 공기 중에 2분 정도
꺼내놓고 기다리십시오.


3. 삽입

배터리 도어 안으로 새 배터리를
넣어줍니다.
이 때 양극(+)이 위로 향하는지
확인합니다.

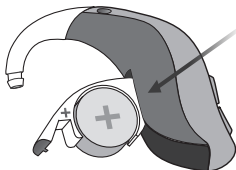


4. 닫음

배터리 도어를 닫고 신호음이
들리는지 확인합니다.
신호음을 듣기 위해서는
보청기를 손에 쥐고 귀에 가까이
하십시오.

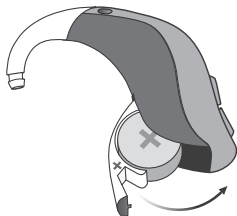

팁(Tip):

멀티툴은 배터리를 교체할 때 사용할 수 있습니다. 멀티툴
끝에 부착되어있는 자석을 이용하여 배터리를 제거하거나
삽입하십시오. 멀티툴은 청력 관리 전문가에게 문의하여
제공받도록 합니다.

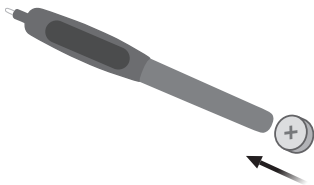

이어후크와 몰드를 사용하는 보청기 착용

이어후크와 몰드가 부착된 보청기를 사용한다면 아래 사항들을 숙지하십시오.

몰드는 개인 맞춤형으로 제작됩니다. 오른쪽과 왼쪽 몰드는 각각의 고유한 특징을 가집니다.

1단계

귀를 바깥 쪽으로 잡아당긴 상태에서
외이도 방향으로 몰드를 부드럽게
밀어 넣습니다.



2단계

귀 뒤에 보청기를 착용합니다.




보청기 관리

보청기를 다룰 때, 떨어짐으로 인한 손상을 방지하기 위해 부드러운 천 위에서 보청기를 다루십시오.

마이크로폰 입구 청소

깨끗한 청소솔로 마이크 입구의 이물질を 조심스럽게 털어냅니다. 부드럽게 표면을 닦아내고 청소솔이 마이크 입구를 강하게 누르지 않도록 주의하십시오.

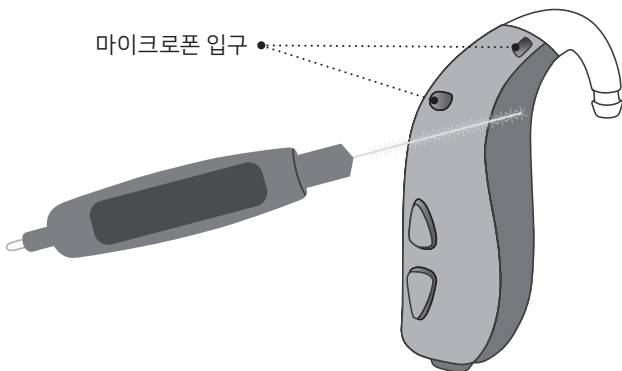


중요 사항

보청기를 청소하기 위해선 부드럽고, 마른 천을
사용하십시오. 물이나 다른 액체에 보청기를 세척하거나
담그지 않아야 합니다.

몰드 청소

몰드는 정기적으로 청소해야 합니다. 부드러운 천을 사용하여 몰드 표면을 닦아줍니다. 멀티툴의 와이어 루프를 사용하여 몰드 입구를 청소합니다.

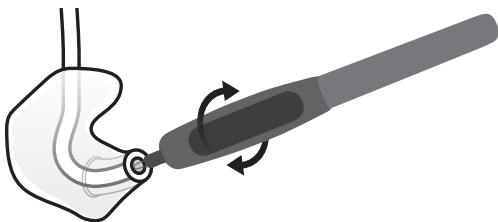

튜브 교체

몰드와 보청기 사이의 튜브는 노랗게 변색되거나 딱딱해졌을 때 교체가 필요합니다. 튜브 교체에 대해서는 청력 관리 전문가와 상의하십시오.

몰드 세척


1단계

보청기에서 몰드를 분리하기 전에 몰드의 방향을 구분할 수 있어야 합니다.




2단계

이어후크에서 튜브와 몰드를 분리합니다. 튜브를 잡아당길 때 후크를 단단히 잡습니다. 그렇지 않으면 보청기에 손상이 갈 수 있습니다.

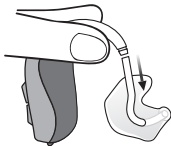


3단계

순한 비누를 사용하여 몰드를 세척합니다. 보청기에 다시 연결하기 전에 깨끗이 헹구어 건조시킵니다.

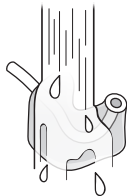

비행기 모드

비행기 탑승 시 또는 무선 신호 방사가 금지된 곳(예를 들어, 비행 중)에 있을 때는 비행기 모드가 활성화되어야 합니다. 양이를 사용하고 있더라도 하나의 보청기에서만 비행기 모드를 실행하면 됩니다.

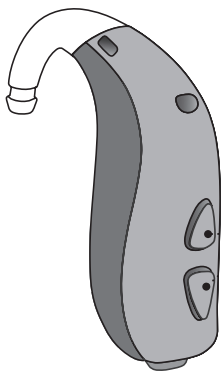

비행기 모드를 켜거나 끄기
위해서는
두 개의 프로그램 버튼 중 하나를
적어도 7초 이상 길게 눌러줍니다.
시작음이 들리면 활성화됩니다.

배터리 도어를 열고 닫으면 비행기 모드가 비활성화됩니다. “
설정 초기화” 섹션을 참조하십시오.



추가적인 기능 및 액세서리

다음 페이지부터 안내되는 기능 및 액세서리는 옵션(추가) 사항입니다. 보청기가 어떻게 설정됐는지에 대해 알고자 할 경우, 청력 관리 전문가에게 연락하여 문의하십시오. 청취가 어려운 환경에서 보청기를 사용해야 하는 경우 특정 프로그램이 도움이 될 수 있습니다. 이러한 프로그램은 청력 관리 전문가를 통해 설정하실 수 있습니다.

도움이 필요할 수도 있는 청취 상황들에 대해 작성 해 보십시오.

□ 볼륨 변경(옵션사항)

프로그램 버튼을 사용하여 보청기의 볼륨을 조절할 수 있습니다.
볼륨을 높이거나 낮출 때는 딸깍하는 클릭음 소리를 들을 수 있습니다.

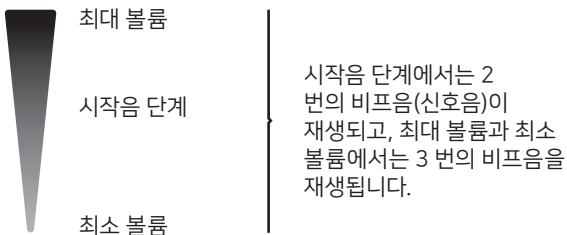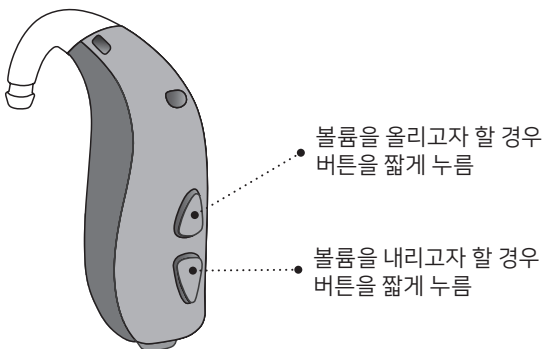

볼륨 변경


☐ 왼쪽

☐ 오른쪽

아래는 청력 관리 전문가에 의해 작성됩니다.

□ 프로그램 변경(옵션사항)

보청기에는 최대 4개의 프로그램을 설정할 수 있습니다. 이러한 설정은 청력 관리 전문가가 프로그래밍 할 수 있습니다.

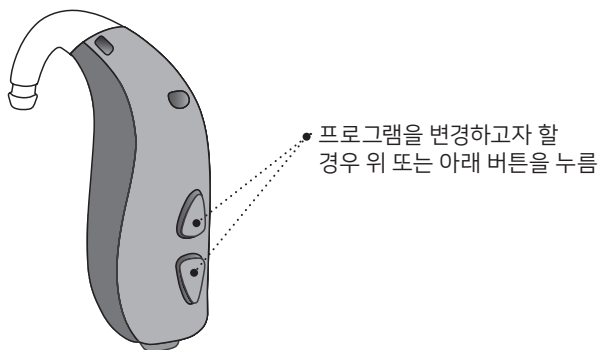

프로그램을 위 혹은 아래 순서로 연속해서 변경할 수 있습니다. 예를 들어 프로그램 1번에서 프로그램 4번으로 바로 변경하고 싶을 경우 상단 부분의 프로그램 버튼을 3번 누르지 않아도 하단의 프로그램 버튼을 한번만 눌러 변경할 수 있습니다.

아래 내용은 청력 관리 전문가가 작성합니다.


프로그램	활성화 됐을 경우의 신호음	사용해야 하는 상황
1		"비프음 1번"
2		"비프음 2번"
3		"비프음 3번"
4		"비프음 4번"

프로그램 변경:

☐ 왼쪽	☐ 오른쪽	☐ 짧게 누름	☐ 보통 길이의 누름
-----------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

□ 보청기 음소거(음션사항)

보청기의 소리 증폭을 잠시 끄고 싶은 경우, 음소거 기능을 사용하십시오.

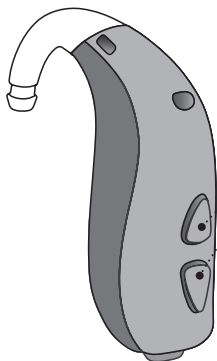

보청기를 음소거하려면 프로그램 버튼을 약 4초간 매우 길게 누르십시오.

보청기의 소리 증폭을 다시 활성화하려면, 프로그램 버튼을 짧게 누르세요.

중요 사항

음소거 기능을 전원 버튼으로 사용하지 마십시오. 음소거 모드에서도 보청기의 배터리 전력은 계속 소모됩니다.


설정 초기화

보청기 전문가에 의해 입력된 보청기의 표준 설정으로 돌아가려면 배터리 도어를 열었다 닫으십시오. 보청기를 재시작되면 시작음이 재생됩니다.

열기



닫기

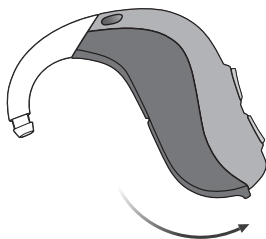

아이폰, 아이패드, 아이팟 터치와 보청기 사용

귀하의 보청기는 Made for iPhone® 이고 아이폰®, 아이패드® 또는 아이팟 터치® 와 직접 연결하여 사용하고 조정하실 수 있습니다.


보청기와 이러한 Apple 제품을 연결(페어링)하는데 도움이 필요한 경우 보청기 전문가에 연락하거나 www.hearingsolutions.philips.com 홈페이지에서 관련 안내에 대해 확인하십시오.

호환성에 대한 정보는 www.hearingsolutions.philips.com/compatibility에서 확인하실 수 있습니다.

안드로이드™ 기기와의 오디오 스트리밍의 경우 필립스 오디오클립(AudioClip)를 이용해야 합니다.


아이폰과 보청기 페어링

1. 설정

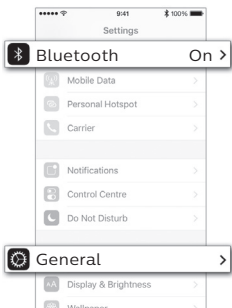


아이폰의 “설정”에서 블루투스®가 켜져 있는지 확인한 후, “일반”을 선택하십시오.

2. 일반

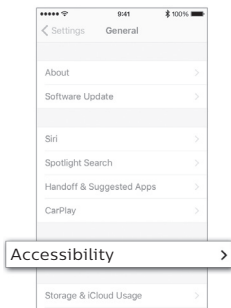


“일반” 화면에서 “손쉬운 사용”을 선택하십시오.

3. 손쉬운 사용

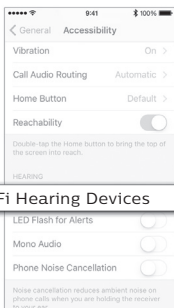


“손쉬운 사용” 화면에서
“Mfi 보청 기기”를
선택하십시오.

4. 연결 준비

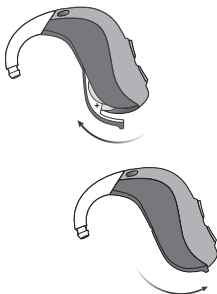


배터리 도어를 열고 닫은
후, 아이폰과 가까운
위치에 두고 페어링이
될 때까지 약 3분간
기다립니다.

5. 선택

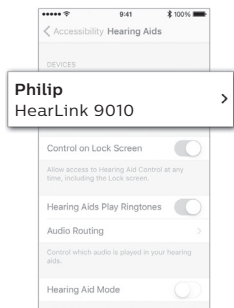

아이폰이 보청기를 인식했는지를 확인하십시오. 연결된 보청기는 아이폰 목록에 보여집니다. 귀하의 보청기를 선택하십시오.

6. 페어링 허용

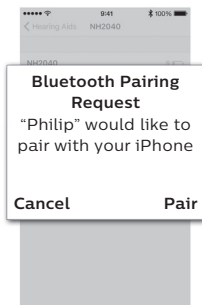

페어링을 허용하십시오. 양 쪽으로 보청기를 사용하고 있다면, 각각의 보청기에 대해 쌍으로 연결될 수 있도록 페어링 허용이 필요합니다.

아이폰, 아이패드, 아이팟 터치와 보청기 재연결

보청기 또는 아이폰, 아이패드 또는 아이팟 터치의 전원을 끄면 연결이 끊어지게 됩니다. 배터리 도어를 열고 닫아 보청기의 전원을 활성화 시키면 보청기가 자동으로 장치에 다시 연결됩니다.

“Made for iPod”, “Made for iPhone” 및 “Made for iPad”는 전자 액세서리들이 아이팟, 아이폰 또는 아이패드에 각각 연결되도록 설계되었으며 개발자에 의해 Apple 성능 규격에 충족하다는 것을 보증합니다. Apple은 이 장치의 작동 또는 안전 및 규제 표준 준수 사항에 대해 책임을 지지 않습니다. 아이팟, 아이폰 또는 아이패드와 함께 이 액세서리를 사용하면 무선 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

필립스 HearLink 앱

아이폰, 아이패드, 아이팟 터치 및 안드로이드 기기를 위한 필립스 HearLink 앱은 간편하고 손쉬운 방법으로 보청기를 제어합니다. 필립스 HearLink 앱을 사용하면 인터넷을 통해 IFTTT에 연결하여 다른 장치들과 넓은 범위로 연결하고 제어할 수 있습니다.

호환성에 대한 자세한 내용과 정보는 www.hearingsolutions.philips.com을 참조하십시오. 필립스 HearLink 앱은 Apple 앱스토어® 및 구글 플레이™에서 사용할 수 있습니다. 아이패드에서 필립스 HearLink 응용 프로그램을 다운로드 할 때는 Apple 앱스토어®에서 아이폰 응용 프로그램을 검색하십시오.

안드로이드 기기와의 오디오 스트리밍의 경우 필립스 오디오클립(AudioClip)를 이용해야 합니다.



자세한 정보를 확인하세요:

www.hearingsolutions.philips.com

Apple, Apple 로고, iPhone, iPad, iPod touch 및 Apple Watch는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. App Store는 Apple Inc.의 서비스 상표입니다. Android, Google Play 및 Google Play 로고는 Google LLC의 상표입니다.

무선 액세스리(옵션사항)

보청기의 무선 기능 향상을 위하여 다양한 무선 액세스리를 사용할 수 있습니다. 이러한 무선 액세스리는 일상 생활에서 더 잘 듣고 의사소통 할 수 있도록 도와줍니다.

☐ 오디오클립(AudioClip)

오디오클립이 사용자의 휴대폰과 페어링(연결)되었을 때 사용자는 보청기를 핸드프리 헤드셋처럼 사용할 수 있습니다. 또한 원거리 마이크 모드와 리모컨의 역할도 가능합니다.

☐ TV 어댑터

TV 어댑터는 TV와 전자 오디오 장비로부터 발생된 소리를 전달하는 무선 송신기 역할을 합니다. TV 어댑터는 귀하의 보청기에 소리를 직접 전송합니다.

☐ 리모컨

리모컨은 보청기의 프로그램 변경, 볼륨 조절 또는 음소거 기능을 조정할 수 있습니다.

☐ 필립스 HearLink 앱

이 앱은 아이폰, 아이패드, 아이팟 터치 및 안드로이드 기기로 보청기 제어를 위해 간단하고 이해하기 쉬운 방법을 제공합니다.

추가적인 정보가 필요할 경우, 청력 관리 전문가에게 문의하거나 www.hearingsolutions.philips.com에서 확인하실 수 있습니다.

기타 옵션 사항

☐ 자동 전화

전화기에 자동 전화 자석이 부착되어 있는 경우 자동으로 보청기의 전화 프로그램을 활성화 할 수 있습니다. 자석은 전화기의 수화기 부분 옆에 부착시켜야 합니다.



☐ 텔레코일

텔레코일은 루프가 내장된 전화기를 사용하거나 극장, 교회 또는 강의실과 같은 텔레 루프 시스템이 있는 건물에 있을 때 더 잘 듣도록 도와줍니다. 텔레루프가 설치된 곳이면 이 기호 또는 이와 유사한 기호가 표시됩니다.



☐ Direct Audio Input (DAI) 어댑터

보청기가 TV, 개인별 스테레오 장비 등과 같은 외부 소스로부터 직접 신호를 수신 받을 수 있게 도와줍니다.

☐ FM 어댑터

보청기가 외부 FM 수신기에 연결될 수 있게 도와줍니다.

자세한 정보는 귀하의 청력 관리 전문가에게 문의하십시오.

□ 열림 방지 배터리 도어(옵션 사항)


신생아, 아동, 학습이 어려운 사용자가 배터리 도어를 열지 못하도록 열림 방지 배터리 도어를 사용하십시오.

중요 사항


잠금 위치에 있을 때 배터리 도어를 억지로 열지 마십시오.
배터리 도어를 완전히 열었을 때의 최대로 열릴 수 있는 위치를 넘어 서지 않도록 주의 하십시오. 배터리를 올바르게 삽입하십시오. 열림 방지 배터리 도어의 잠금 기능의 손상이 의심되는 경우 청력 관리 전문가에게 문의하십시오.

배터리 도어를 잠그기 위해

배터리 도어를 닫고 완전히 닫혔는지
확인하십시오.

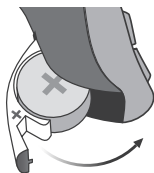


배터리 도어의 잠금을 해제하기 위해선
청력 관리 전문가로부터 제공받을 수
있는 작은 도구를 사용하십시오.

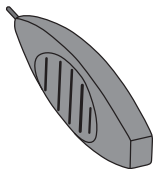

배터리 도어 잠금 해제 방법

도구의 끝 부분을 배터리 도어의 뒷면에
있는 작은 구멍에 넣습니다.

1. 오른쪽 방향으로 밀어줍니다.
2. 배터리 도어를 열어줍니다.

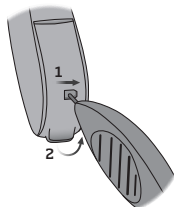

⚠ 일반적 주의사항

보청기를 사용하기 전에 안전하고 정확한 사용을 위해
사용자는 다음의 일반적 주의사항들을 숙지해야 합니다.

보청기 사용으로 정상 청력이 회복되거나 사용자의 본래
신체기관에서 비롯될 수 있는 청력 손실이 예방되거나
개선되지는 않습니다. 뿐만 아니라, 보청기를 반복적으로
사용하지 않으면 보청기로부터 얻을 수 있는 최상의 효과를
얻을 수 없습니다.

만약 보청기 사용 중 예상치 못한 동작이나 상황을 겪은 경우
청력 관리 전문가와 상의하십시오.

보청기 사용

- 청력 관리 전문가에 의해 안내 받고 조절된 보청기만
사용하십시오. 잘못된 사용은 일시적 또는 영구적 청력
손실을 초래할 수 있습니다.
- 영구적인 청력 손실이 발생할 수 있으므로 절대 다른 사람이
자신의 보청기를 착용해서는 안 됩니다.

질식 위험 & 배터리와 작은 부품을 삼킬 수 있는 위험

- 보청기, 기타 부품들과 배터리는 어린이와 해당 부품을 삼킬 수 있는 사람의 손에 닿지 않아야 하고 자칫 삼킬 경우 신체적 손상을 일으킬 수 있습니다.
- 배터리는 종종 알약으로 오인되기도 합니다. 알약을 섭취하기 전에 다시 한번 확인하십시오.
- 대부분의 보청기는 열림 방지 배터리 도어(tamper-resistant battery drawer)를 장착할 수 있습니다. 사용자가 유소아 및 어린이, 학습 장애가 있는 경우에는 사용을 강력히 권장합니다.
- 36개월 미만의 영유아는 항상 열림 방지 배터리 도어를 사용해야 합니다. 해당 옵션이 가능한 지에 대해 보청기 전문가와 상의하십시오.

배터리 혹은 보청기를 삼켰을 경우, 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.

배터리 사용

- 청력 관리 전문가가 권장하는 배터리를 항상 사용하십시오. 품질이 낮은 배터리는 액체 누수가 발생되어 신체에 상해를 일으킬 수 있습니다.
- 배터리를 재충전하여 사용하지 마시고, 배터리를 태워서 폐기하지 마십시오. 배터리가 폭발할 위험이 있습니다.

기능 장애

- 보청기가 사전에 어떠한 알람이나 안내음 없이 동작이 멈출 수 있음을 유의하십시오. 일상에서 경고음을 주의 깊게 들어야 하는 경우(교통 상황에서의 청취) 이를 반드시 명심해야 합니다. 보청기는 배터리가 다 된 경우나 튜브가 수분이나 귀지로 막힌 경우에도 동작이 멈출 수 있음에 유의하세요.

⚠ 일반적 주의사항

능동 삽입형 의료기기(Active Implant)

- 능동 삽입형 의료기기와 함께 사용 시 주의하시기 바랍니다.
일반적으로 휴대 전화 및 자석과 함께 사용하기 위해선
이식형 제세동기 및 심박 박동/조율기 제조업체에서
권장하는 지침을 따르십시오.
- 자동 전화 자석과 멀티툴(자석이 부착되어 있음)은
임플란트에서 30cm 이상 떨어져 있어야 합니다. 가슴 포켓(
주머니)에는 넣지 마십시오.
- 사용 중인 뇌 임플란트가 있을 경우, 사용의 위험성에 대한
정보를 확인하기 위해 제조 업체에 문의하십시오.

X-ray, CT, MR, PET 스캐닝 및 전기치료

- X-Ray, CT/MR/PET 스캐닝 전기요법 또는 수술을 진행할
경우 이러한 전자기장 검사장비로부터 발생된 강한
전자기장에 보청기가 노출되어 물리적 손상이 발생할 수
있으니 반드시 검사 전 착용한 보청기를 제거하십시오.

고열 및 화학제품

- 보청기는 과도한 열에 노출되어서는 안됩니다. 예를 들어,
햇빛 아래 주차 된 차 안에 보청기를 방치한 경우.
- 보청기의 습기를 말리기 위해서 전자 레인지나 다른 오븐
등을 사용해서는 안됩니다.
- 화장품, 헤어 스프레이, 향수, 면도 크림, 선텐 로션, 벌레
퇴치약과 같은 화학 물질들은 보청기를 손상시킬 수
있습니다. 이러한 제품들을 사용하기 전에는 항상 보청기를
제거하고 완전히 건조 시킨 뒤 보청기를 사용하십시오.

⚠ 일반적 주의사항

고출력 기기

- 보청기의 과도한 소리 증폭으로 인해 보청기 사용자의 남아있는 잔존 청력을 손상시킬 위험이 있으므로 최대 음압 용량이 132 dB SPL (IEC 711)을 초과하는 보청기를 선택하여 사용하는 경우 특별한 주의를 기울여야 합니다.

귀하의 보청기가 고출력 기기 인지 아닌지 대한 정보는 보청기 전문가에게 문의하십시오.

발생할 수 있는 부작용

- 보청기 및 이어피스 착용으로 인해 귀지가 더 빨리 쌓이게 될 수 있습니다.
- 비 알레르기성 재질이 사용된 보청기라도 매우 드물게 피부 가려움증이나 다른 부작용이 간혹 발생할 수도 있습니다.

부작용이 발생한 경우 의료진과 상의하십시오.

전파 방해

- 이 보청기는 전파 방해에 대해 국제 규격에 따라 완벽히 테스트 되었으나 보청기와 다른 기기(예를 들어 일부 휴대폰, 생활무선장비(CB)와 상점 도난 방지 알림 시스템)간의 전파 방해가 발생할 수 있습니다. 만약 이러한 전파 장애가 발생되면 보청기를 이러한 기기들로부터 멀리 해 주십시오.

비행기에서의 사용

- 보청기에는 Bluetooth가 포함되어 있습니다. 비행 중 기내에서는 비행기 모드를 활성화하여 사용해야 합니다.

외부 기기와의 연결

- 보조 입력 케이블 또는 직접적으로 외부 장비에 연결된 경우의 보청기의 안전 여부는 외부 기기 소스에 의해 결정됩니다. 벽면 콘센트에 연결된 외부 장비에 연결될 때 이 기기는 IEC-62368 (또는 2019 년 6 월 20 일까지는 IEC-60065, IEC-60950) 또는 동등한 안전 표준을 준수해야 합니다.

중요 사항

DAI가 벽면 콘센트에 꽂혀있는 오디오 소스에 연결되면 오디오 소스는 IEC-60065, IEC-60950 또는 동등한 안전 표준을 준수해야 합니다.

문제해결법

증상	가능한 원인들
소리가 나지 않음	배터리 방전
	이어 피스 막힘 (돔, 그립팁, 마이크로 몰드)
소리 끊어짐 또는 소리 작아짐	소리 출구의 막힘
	습기에 노출
	배터리 방전
잡음 (Squealing noise)	보청기의 이어피스가 올바르게 착용되지 않음
	귀 속에 귀지가 쌓임
비프음(알림)	마이크 고장을 예방하기 위한 사전 알림
	8개의 비프음(신호음)이 연속하여 4번 울림
Apple 기기와 페어링 문제	블루투스® 연결 실패
	한 쪽 보청기만 연결

해결법

배터리 교체

몰드 청소

왁스 필터, 돔, 또는 그립팁의 교체 고려

몰드 청소 또는 왁스 필터, 돔, 그립팁의 교체

마른 천으로 배터리 닦기

배터리 교체

이어피스를 올바르게 다시 착용

의료진 상담 필요

청력 관리 전문가에게 문의

1. 보청기 연결 해제(설정->일반->손쉬운 사용->MFi 보청 기기-> 기기-> 기기 삭제)
 2. 블루투스를 끄고 다시 켜기
 3. 보청기의 배터리 도어를 열고 닫기
 4. 보청기와 재연결("아이폰과 보청기 페어링" 섹션 참조)
-

위의 방법들로 문제가 해결되지 않을 경우, 귀하의 청력 관리 전문가에게 문의하십시오.

방습 & 방진 등급

보청기는 일상의 모든 상황에서 사용할 수 있도록 고안되었기 때문에 먼지와 물의 침투로부터 보호됩니다 (IP68). 따라서 땀을 흘리거나 비가 오는 날의 보청기 사용 가능 여부에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 보청기가 물에 닿아 작동을 멈추는 경우 아래의 지침을 따르십시오:

1. 물기를 부드럽게 닦아내십시오.
2. 배터리 도어를 열고 배터리를 제거한 다음 배터리 도어 내의 물기를 부드럽게 닦아냅니다.
3. 배터리 도어를 열어둔 채로 약 30분간 건조시켜줍니다.
4. 새로운 배터리를 삽입하십시오.

중요 사항

목욕을 하거나 물 속에서의 활동 시에는 보청기를 착용하지 마십시오. 보청기를 물이나 다른 액체에 절대 넣어서는 안됩니다.

사용 조건

작동 조건

온도:
1~40℃
상대 습도:
5~93%, 비응축(Non-condensing)

저장 및 운송 조건

온도 및 습도는 저장 및 운송 중 장기간
동안 하기의 범위를 넘어서는 안
됩니다:
온도:
-25~60℃
상대 습도:
5~93%, 비응축(Non-condensing)

기술적 정보

보청기는 하기에 기술 된 두 가지 무선 기술을 포함하고 있습니다.

보청기는 3.84 MHz에서 작동하는 근거리 자기 유도 기술을 사용하는 라디오 송수신기를 포함합니다. 송신기의 자기장 세기는 매우 약하고 항상 15nW (10m 거리에서 -40dBuA / m) 이하입니다.

또한 보청기에는 저전력 블루투스(BLE) 및 2.4GHz ISM 대역에서 작동하는 단거리 무선 기술을 사용하는 송수신기가 포함되어 있습니다. 무선 송신기는 약하며 방사되는 총 전력은 항상 4.8 dBm e.r.p.와 같거나 3.0 mW 미만입니다.

보청기는 전자파 적합성 및 인체 노출에 관한 국제 표준을 준수합니다.

작은 형태의 보청기는 대부분 제한된 규격을 가지고 있어 보청기와 관련된 승인 표시는 본 사용 설명서에서 찾을 수 있습니다.

추가적인 정보는 “사양 안내서(Specification Guide)”에서 확인할 수 있습니다.

www.hearingsolutions.philips.com

USA 및 캐나다

보청기는 하기와 같이 인증 ID 번호가 있는 무선 모듈을 포함하고 있습니다:

FCC ID: 2ACAH-AUBTEP

IC: 11936A-AUBTEP

제조업체는 해당 보청기가 필수 요구 사항 및 2014/53/EU 지침의 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다.

적합성 선언(DoC)은 제조사를 통해 확인할 수 있습니다.



SBO Hearing A/S

Kongebakken 9

DK-2765 Smørum

Denmark

www.hearingsolutions.philips.com

CE 0543



Waste from electronic equipment must be handled according to local regulations.

Bluetooth®



IP68

사용 설명서 또는 포장 라벨에 사용된 기호에 대한 설명

	경고 장치를 사용하기 전에 경고 기호가 표시된 텍스트를 읽어야 합니다.
	제조업체 이 제품은 기호 옆에 이름과 주소가 명시된 제조업체가 생산합니다. EU 지침 90/385/EEC, 93/42/EEC, 98/79/EC에 정의된 의료 기기 제조업체를 나타냅니다.
	CE 마크 본 제품은 의료 기기 지침 93/42/EEC를 준수합니다. 옆의 네 자리 숫자는 인증 기관을 식별합니다.
	전자 폐기물 (WEEE) 지역 규정에 따라 보청기, 액세서리 또는 배터리를 재활용하거나 처분하기 위해서는 보청기 전문가에게 해당 제품을 보내십시오. 전자 기기는 폐기물 및 전기 장비(WEEE)에 관한 지침 2012/19/EU가 적용됩니다.
	규정 준수 마크 (RCM) 이 제품은 호주 또는 뉴질랜드 시장에 공급되는 제품에 대한 전기 안전, EMC 및 무선 스펙트럼 요구 사항을 준수합니다.
	Made for iPod, iPhone, and iPad 장치가 아이팟, 아이폰, 아이패드와 호환됨을 나타냅니다.

IP68	IP 코드 EN 60529:1991/A1:2002에 따라 유해한 침수 및 미립자 물질의 유입에 대한 보호 등급을 나타냅니다. IP6X는 먼지로부터 보호 기능을 나타냅니다. IPX8은 물에 지속적으로 견딜 수 있는 효과에 대한 보호 정도를 나타냅니다.
	Bluetooth® 로고 Bluetooth SIG, Inc.의 등록 상표이며 이를 사용하려면 라이선스가 필요합니다.
	건조 상태 유지 습기로부터 보호되어야 하는 의료 기기를 나타냅니다.
	주의 기호 경고 및 주의 사항에 대한 사용 설명서를 참조하십시오.
REF	카탈로그 번호 의료 기기를 식별할 수 있도록 제조업체의 카탈로그 번호를 나타냅니다.
SN	일련 번호 특정 의료 기기를 식별할 수 있도록 제조업체의 일련 번호를 나타냅니다.

REACH 선언:

REACH는 필립스 히어링 솔루션의 완제품 중량에서 고위험성 우려 후보물질(SVHC)이 0.1 % 이상 초과하는 경우를 확인하기 위해 화학 성분 함량 정보를 제공하도록 요구합니다. 제조 시점을 기준으로 REACH SVHC 목록에는 히어링크(HearLink)는 현재 포함되지 않습니다. 더 많은 최신 정보는 다음의 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. www.hearingsolutions.philips.com/REACH



Philips 및 Philips Shield Emblem은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표이며 사용을 위해선 라이선스가 필요합니다. 이 제품은 SBO Hearing A / S의 책임 하에 제조 및 판매되며, SBO Hearing A / S는 이 제품을 보증합니다.