

PHILIPS

HearLink

Remote Control

Gebruiks- aanwijzing



HEA6001

Garantiebewijs

Datum:

Model:

Garantieperiode:

Serienr.:

Hoorzorg professional

Internationale garantie

De afstandsbediening valt onder een internationale beperkte garantie die door de fabrikant is afgegeven voor een periode van 24 maanden na de leverdatum.

Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten van het apparaat zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals batterijen, kabels, netadapters, enz. Problemen die voortvloeien uit oneigenlijk/onjuist gebruik of verzorging, overmatig gebruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosieve omstandigheden, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het apparaat of

onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte garantie en kunnen de garantie ongeldig maken.

De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende verkoop van consumentengoederen. Uw hoorzorg professional kan een garantie hebben afgegeven die verder gaat dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw hoorzorg professional voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig heeft

Bij problemen met uw afstandsbediening kunt u het beste naar uw hoorzorg professional gaan. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen daar vaak ter plekke worden verricht.

Inleiding



In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe afstandsbediening. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk Waarschuwingen niet. Dit helpt u het maximale uit uw nieuwe afstandsbediening te halen.

Als u verdere vragen over het gebruik van uw afstandsbediening heeft, neem dan contact op met uw hoorzorg professional.

Beoogd gebruik

De afstandsbediening is bedoeld om gebruikers van draadloze hoortoestellen te helpen bij het bedienen van de functies van hun hooroplossing.

De afstandsbediening is bedoeld voor gebruik door kinderen (> 36 maanden) en volwassenen samen met hun hooroplossing.


Inhoudsopgave

Inhoud van de verpakking	10
Productoverzicht	11
Plaatsen en verwijderen van batterijen	12
Koppelen van de afstandsbediening met uw hoortoestellen	17
Koppeling tussen de afstandsbediening en de hoortoestellen verwijderen	23
Bedieningsafstand	25
Bevestigingen	27


Programma veranderen	29
Volume wijzigen	31
Dempen	33
Vergrendelen/ontgrendelen van de afstandsbediening	35
Opening voor koord	37
Onderhoud van uw afstandsbediening	38
Waarschuwingen	39
Technische informatie	50

Inhoud van de verpakking

Remote Control

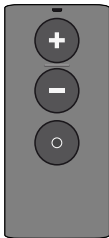

2x AAAA-
batterijen

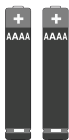


Dit boekje



Productoverzicht

1. Volume omhoog
2. Volume omlaag
3. Programma veranderen
4. Statuslampje
5. Batterijklep
6. Vingergreep
7. Opening voor koord



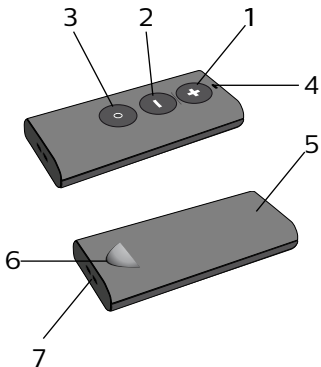


Plaatsen en verwijderen van batterijen

De afstandsbediening gebruikt twee AAAA-alkalinebatterijen. Volg deze instructies voor het plaatsen van nieuwe batterijen. De levensduur van een batterij hangt af van de gebruiksomstandigheden. Bij normaal gebruik moeten de batterijen ongeveer eenmaal per jaar worden vervangen. Verwijder de gebruikte batterijen en gooi ze weg volgens de lokale regelgeving.


Verwijder de batterijklep

1. Duw de vingergreep met uw duim naar beneden.
2. Duw de batterijklep vanaf de andere kant met uw andere duim in de richting van de vingergreep.
3. Haal de batterijklep er helemaal af.
4. Plaats de batterijen in het batterijcompartiment waarbij u ervoor moet zorgen dat het + teken op de batterij overeenkomt met het + teken in het batterijcompartiment.

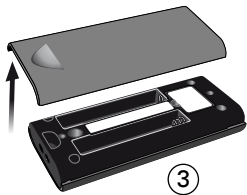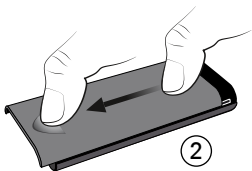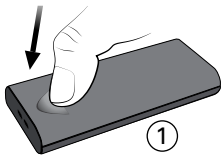

Plaats de batterijklep terug

1. Plaats de batterijklep terug op ongeveer 6 mm vanaf de bovenkant van de afstandsbediening.
2. Schuif de batterijklep tot deze klikt zoals is aangegeven.

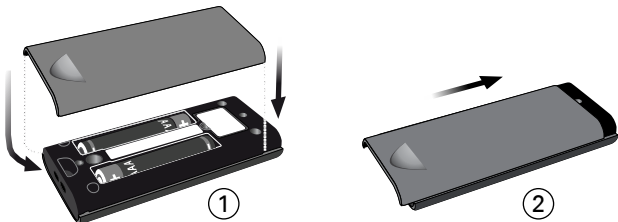

Belangrijke opmerking

Forceer de batterijklep niet. Als u kracht nodig heeft om de klep terug te plaatsen, controleer dan eerst of deze wel goed zit. Plaats de batterijklep opnieuw zodat deze zonder moeite dichtgemaakt kan worden.

Koppelen van de afstandsbediening met uw hoortoestellen


De afstandsbediening is een persoonlijk hulpmiddel voor gebruik met één paar hoortoestellen. De afstandsbediening kan na het koppelen maximaal twee hoortoestellen tegelijkertijd bedienen.

Voordat de afstandsbediening met uw hoortoestellen kan worden gebruikt, moeten de apparaten worden gekoppeld.

U kunt ervoor kiezen om de afstandsbediening met twee hoortoestellen tegelijk te koppelen of één voor één. U moet de koppelingsprocedure herhalen als u ervoor kiest uw hoortoestellen één voor één te koppelen. De volgende instructies zijn voor het koppelen van één paar hoortoestellen met de afstandsbediening.


Afstandsbediening gereed

1. Controleer of de afstandsbediening werkende batterijen heeft door op een willekeurige toets te drukken. Als de batterijen werken, gaat het statuslampje van de afstandsbediening branden als de toets wordt ingedrukt.

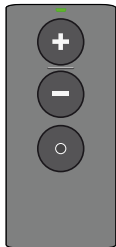


Hoortoestellen gereed

- Schakel de hoortoestellen uit en weer in om de koppelingsmodus te starten. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor uw specifieke hoortoestelmodel.

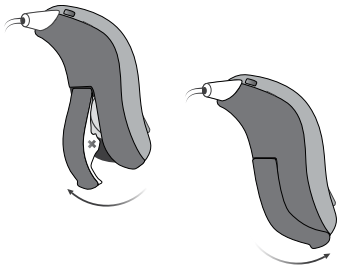


Binnen bereik

3. Plaats beide hoortoestellen binnen bereik van de afstandsbediening (d.w.z. binnen 20 cm).

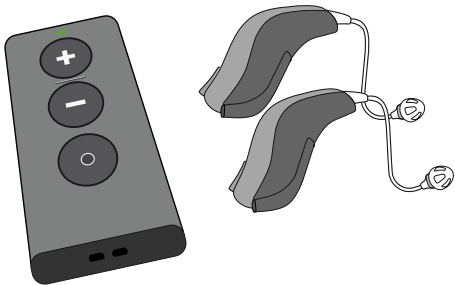

Koppelen

4. Druk op een willekeurige toets op de afstandsbediening, waarna deze automatisch koppelt met de hoortoestellen binnen bereik.

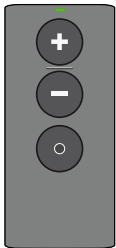

Als het statuslampje op de afstandsbediening 10 seconden continu groen brandt, zijn de apparaten succesvol gekoppeld.

Koppeling tussen de afstandsbediening en de hoortoestellen verwijderen

De afstandsbediening kan direct worden gekoppeld met één paar hoortoestellen. Als u de afstandsbediening met een ander paar hoortoestellen wilt koppelen, dan moet u eerst de huidige koppeling succesvol verwijderen.

Om de huidige koppeling te wissen, houdt u de drie toetsen tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt.




Ongeveer 5 seconden ingedrukt houden om de huidige koppeling te verwijderen

Als het statuslampje op de afstandsbediening 10 seconden continu groen brandt, is de koppeling gewist. Uw afstandsbediening is gereed om weer met uw hoortoestellen te worden gekoppeld (zie pagina 14).

Bedieningsafstand

U kunt uw hoortoestellen bedienen met de afstandsbediening op een afstand van maximaal 1,8 meter. Er is geen directe zichtlijn tussen de afstandsbediening en de hoortoestellen nodig.

Als u twee hoortoestellen met de afstandsbediening heeft gekoppeld, dan worden beide toestellen tegelijkertijd gewijzigd.

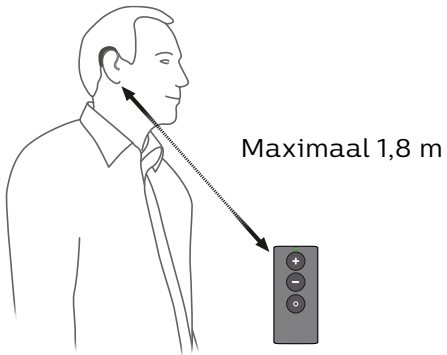

Bevestigingen

Visuele indicatie

Het statuslampje op de afstandsbediening gaat branden als er een toets wordt ingedrukt.



Hoorbare indicatie

U hoort een geluid in uw hoortoestellen ter bevestiging dat de handeling is uitgevoerd.

Batterij bijna leeg

Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert het statuslampje snel wanneer er een toets wordt ingedrukt. In dat geval dient u de batterijen zo spoedig mogelijk te vervangen.



Programma veranderen

De afstandsbediening kan worden gebruikt voor het veranderen van programma als uw hoorzorg professional meer dan één programma in uw hoortoestel heeft ingesteld.

Druk op de programmatoets op de afstandsbediening om door de programma's van het hoortoestel te gaan. Bij elke druk gaan de hoortoestellen verder naar het volgende programma.



Druk om het programma te wijzigen

Belangrijke opmerking

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen voor details over de functionaliteit van uw specifieke hooroplossing.

Volume wijzigen

U kunt de geluidsterkte van uw hoortoestellen aanpassen met behulp van de volumetoetsen op de afstandsbediening.

U hoort een korte bevestiging in uw hoortoestellen als u het volume verhoogt of verlaagt.

Om het volume van uw hoortoestellen harder te zetten, drukt u op de volume omhoog toets.

Om het volume van uw hoortoestellen zachter te zetten, drukt u op de volume omlaag toets.



Druk op “+”
om het volume
te verhogen
(harder geluid)



Druk op “-”
om het volume
te verlagen
(zachter
geluid)

Dempen

Gebruik de dempfunctie om de hoortoestellen te dempen terwijl u ze draagt. Houd de volume omlaag toets ongeveer 2 seconden ingedrukt tot het statuslampje uit gaat om de hoortoestellen te dempen.

Dempen opheffen

Druk kort op een willekeurige toets op de afstandsbediening om de demping van uw hoortoestellen op te heffen.



Ongeveer 2 seconden
indrukken om te
dempen

Belangrijke opmerking


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen voor details over de functionaliteit van uw specifieke hooroplossing.

Vergrendelen/ontgrendelen van de afstandsbediening

Om per ongeluk indrukken van de toetsen te voorkomen als u de afstandsbediening in uw zak heeft, kunt u ervoor kiezen om de toetsen te vergrendelen.

Vergrendelen van de toetsen op de afstandsbediening

1. Houd de volume omlaag toets en de programmatoets 3-4 seconden tegelijk ingedrukt.
2. Het statuslampje knippert twee keer als de toetsen zijn vergrendeld.

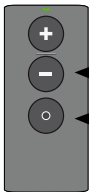

Ongeveer 3-4 seconden indrukken om te vergrendelen

Om te controleren dat de toetsen zijn vergrendeld, drukt u op een willekeurige toets. Het statuslampje knippert drie keer ter bevestiging.

Ontgrendelen van de toetsen van de afstandsbediening

1. Houd de volume omlaagtoets en de programma-toets opnieuw 3-4 seconden tegelijk ingedrukt.
2. Het statuslampje brandt continu tot de toetsen zijn ontgrendeld.

Opening voor koord

Voor uw gemak heeft de afstandsbediening een opening waaraan een dun koord kan worden vastgemaakt, zodat u uw afstandsbediening gemakkelijker kunt dragen en bij u kunt houden.

1. Verwijder de batterijklep (zie pagina 10 en 11).
2. Steek een dun koordje door de opening.



Onderhoud van uw afstandsbediening

Als u de batterijen vervangt of de afstandsbediening schoonmaakt, doe dat dan boven een zacht oppervlak, om beschadiging te voorkomen als u de afstandsbediening laat vallen.

Belangrijke opmerking

Gebruik een zachte, droge doek om de afstandsbediening schoon te maken. De afstandsbediening mag nooit worden ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.

Waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen en de inhoud van dit boekje voordat u uw afstandsbediening gebruikt. Raadpleeg uw hoorzorg professional als uw afstandsbediening niet naar verwachting werkt of als u er problemen mee ervaart.

Waarschuwingen

Verstikkingsgevaar en risico op inslikken van batterijen of andere kleine onderdelen

Uw afstandsbediening, de onderdelen daarvan en de batterijen dienen buiten bereik van kinderen te worden gehouden en eenieder die ze zouden kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel mee zouden kunnen toebrengen.

Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer een batterij of ander klein onderdeel is ingeslikt.

Onbevoegd gebruik

- In verband met uw persoonlijke veiligheid en om onjuist gebruik te voorkomen, dient uw afstandsbediening buiten bereik van kinderen te worden gehouden of eenieder die de bediening ervan zou kunnen overnemen.

Gebruik van een koord

- Als u een handkoord gebruikt, zorg er dan voor dat deze ontworpen en geschikt is voor dit doeleinde. Gebruik nooit een halskoord vanwege het risico op verwurging.

Waarschuwingen

Batterijgebruik

- Gebruik altijd batterijen die worden aanbevolen door uw hoorzorg professional. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen gaan lekken en lichamelijk letsel veroorzaken.
- Probeer uw batterijen nooit opnieuw op te laden en verbrand de batterijen nooit. De batterijen zouden kunnen exploderen.

Actieve implantaten

- De afstandsbediening is grondig getest en gekenmerkt voor de menselijke gezondheid volgens internationale normen voor menselijke blootstelling (Specific Absorption Ratio – SAR), opgewekt elektromagnetisch vermogen en voltages in het menselijk lichaam.
- De blootstellingswaarden bevinden zich ver onder de internationaal aanvaarde veiligheidslimieten voor SAR, opgewekt elektromagnetisch vermogen en voltages in het menselijk lichaam gedefinieerd in de normen voor menselijke gezondheid en co-existentie met actieve medische implantaten zoals pacemakers en hartdefibrillatoren.

Waarschuwingen

- Als u een actief hersenimplantaat heeft, neem dan contact op met de fabrikant van uw implantaat voor informatie over het storingsrisico.

Röntgenfoto's, CT-/MRI-/PET-scans, elektrotherapie en operaties

- Verwijder uw afstandsbediening voorafgaand aan het maken van een röntgenfoto, bij CT-/MRI-/PET-scans, elektrotherapie, operaties etc. De afstandsbediening kan beschadigen bij blootstelling aan sterke elektromagnetische velden.

Mogelijke bijwerkingen

- De non-allergene materialen in uw afstandsbediening kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken.

Raadpleeg een arts als deze bijwerkingen optreden.

Waarschuwingen

Hitte en chemicaliën

- Stel uw afstandsbediening nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door het te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto.
- Uw afstandsbediening mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven.
- Chemicaliën in cosmetica, haarspray, parfum, aftershave, zonnebrandcrème of insectenwerende middelen kunnen uw afstandsbediening beschadigen. Verwijder daarom altijd uw afstandsbediening voordat u deze producten aanbrengt en laat ze drogen, voordat u uw afstandsbediening weer gebruikt.

Gebruik in het verkeer

- Het gebruik van de afstandsbediening tijdens het autorijden kan afleiden. Raadpleeg de nationale verkeerswetgeving met betrekking tot het gebruik van communicatieapparatuur terwijl u zich in het verkeer bevindt.

Gebruik in vliegtuigen

- Uw afstandsbediening is voorzien van Bluetooth®. De afstandsbediening mag niet aan boord van een vliegtuig worden gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door het cabinepersoneel.

Waarschuwingen

Storing

Uw afstandsbediening is grondig getest op storing, volgens de strengste internationale normen. Er kan echter onvoorziene storing optreden tussen uw afstandsbediening en andere apparaten (bijvoorbeeld sommige mobiele telefoons, zendapparatuur, alarmsystemen in winkels en andere draadloze apparaten). Probeer in dat geval de afstand tussen de afstandsbediening en de storende apparatuur te vergroten.

Explosieven

De batterijen van uw afstandsbediening hebben onvoldoende energie om onder normale gebruiksomstandigheden brand te veroorzaken. De afstandsbediening is niet getest op naleving van de internationale eisen met betrekking tot explosieve omgevingen. We raden aan dat u uw afstandsbediening niet gebruikt op plaatsen met explosiegevaar.

Technische informatie

Model	RC-3B
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: +5°C tot +40°C Luchtvochtigheid: 15% – 93%, niet-condenserend Atmosferische druk tijdens gebruik: 700 hPa tot 1060 hPa
Opslag- en transportomstandigheden	Temperatuur: -25 °C tot +70 °C Luchtvochtigheid: 15% – 93%, niet-condenserend
Mechanische afmetingen	75,3 x 35 x 11,8 mm; gewicht 32,7 g (incl. batterijen)

Compatibiliteit	Philips hoortoestellen met 2,4 GHz radiotechnologie
Batterijtype	2 x AAAA
Levensduur batterij bij normaal gebruik	12 maanden
Gemiddeld transmissiebereik	Maximaal 1,8 m
Statusindicator	Groene LED

Zendontvanger:

Bedrijfs-frequentie	2,402 GHz - 2,480 GHz (ISM-band)
Aantal kanalen	39
Zendvermogen	< 10 mW, gelijk aan < 10 dBm EIRP
Bandbreedte kanaal	1 MHz
Modulatietype	GFSK
ITU-indicator	F7D

De afstandsbediening bevat een radiozendentvanger die gebruikmaakt van Bluetooth® Low Energy (BLE) en een propriëtaire radiotechnologie voor kort bereik die beide werken op 2,4 GHz. De 2,4 GHz radiozender is zwak en altijd onder 10 mW of 10 dBm EIRP aan totaal uitgestraald vermogen. De afstandsbediening voldoet aan de internationale normen betreffende elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

In verband met de beperkte ruimte op de afstandsbediening zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit boekje.

VS en Canada

Dit apparaat is gecertificeerd onder:

FCC ID: 2ACAHREMCTR03

IC: 11936A-REMCTR03

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en aan de RSS-normen voor licentievrijstelling van Industry Canada.

Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
2. Dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, waaronder storing die een mogelijk ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking:

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de voor naleving verantwoordelijke partij kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen doen vervallen.

De fabrikant verklaart dat deze afstandsbediening voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

De conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant:



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.hearingsolutions.philips.com

Beschrijving van symbolen die in dit boekje of op de verpakking gebruikt worden

	<p>Waarschuwingen Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het product wordt gebruikt.</p>
	<p>Fabrikant Het product is geproduceerd door de fabrikant waarvan de naam en het adres naast het symbool vermeld staan. Dit geeft aan wie de fabrikant van een medisch apparaat is, zoals vastgelegd in EU-voorschriften 90/385/EEC, 93/42/EEC en 98/79/EC.</p>
	<p>CE-markering Dit product voldoet aan de Medical Device Directive 93/42/EEC.</p>
	<p>Waarschuwingssymbool Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor waarschuwingen en adviezen.</p>



Elektronisch afval (WEEE)

Recycle uw hoortoestellen, accessoires of batterijen volgens lokale regelgeving of lever ze als afval in bij uw hoorzorg professional. Elektronische apparatuur valt onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afval en elektronische apparatuur (waste and electrical equipment, WEEE).



Regulatory Compliance Mark (RCM)

Dit product voldoet aan de eisen voor elektrische veiligheid, EMC en radiospectrum voor producten bestemd voor de Australische of Nieuw-Zeelandse markt.



Bluetooth®-logo

Geregistreerd handelsmerk van Bluetooth® SIG, Inc. Gebruik daarvan vereist een licentie.

**Droog houden**

Geeft aan dat het een medisch apparaat betreft dat vrij van vocht moet blijven.

Voldoet aan
de IMDA-
normen
DA103820

IMDA-label Singapore

Geeft aan dat het apparaat voldoet aan de normen en specificaties gepubliceerd door de Info-Communications Media Development Authority (IMDA) en compatibel is met de openbare telecommunicatienetwerken in Singapore en geen radiofrequente storing veroorzaakt bij andere bevoegde radiocommunicatienetwerken.



[R] 201-160123

TELEC-label Japan

“R” geeft een certificeringsmarkering voor radioapparatuur aan.

 <p>ICASA TA-2016/1771</p>	<p>ICASA-label Zuid-Afrika Geeft aan dat er een vergunning is voor het apparaat om te worden verkocht in Zuid-Afrika.</p>
<p>REF</p>	<p>Catalogusnummer Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan zodat het medisch apparaat geïdentificeerd kan worden.</p>
<p>SN</p>	<p>Serienummer Geeft het serienummer van de fabrikant aan zodat een specifiek medisch apparaat geïdentificeerd kan worden.</p>
<p>CTN</p>	<p>CTN CTN is een uniek onderdeelnummer voor verkopers en klanten om elk product met de Philips-merknaam te identificeren.</p>



Afval van elektronische
apparatuur moet volgens de
lokale regelgeving worden
verwijderd.



REACH Verklaring:

REACH vereist Philips Hearing Solutions om informatie te verstrekken over de chemische inhoud voor zeer risicovolle stoffen (SVHC, Substances of Very High Concern) indien deze in meer dan 0,1% van het productgewicht aanwezig zijn. In dit HearLink product zijn geen stoffen aanwezig van de REACH SVHC-lijst die op het moment van productie van toepassing is.

Recentere informatie is te vinden op de website www.hearingsolutions.philips.com/REACH.

< >
8,15 mm

Plaatshouder
voor FSC-logo



^
19 mm
v

^
v 9,0 mm

< 15 mm >

>

www.hearingsolutions.philips.com



Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door of voor en wordt verkocht onder verantwoordelijkheid van SBO Hearing A/S, en SBO Hearing A/S is de garantiegiver met betrekking tot dit product.



0000203604000001

2018-12-19 | 203604 | NL