

PHILIPS

HearLink

TV Adapter



DOLBY
DIGITAL

Gebruiks- aanwijzing

HEA6002

Garantiebewijs

Datum: _____ Model: _____

Garantieperiode: _____

Serienr.: _____

Hoorzorgprofessional

Internationale garantie

Uw TV Adapter valt onder een internationale beperkte garantie die door de fabrikant is afgegeven voor 24 maanden vanaf de leverdatum. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten in het apparaat zelf, maar niet in accessoires zoals batterijen, kabels, netadapters etc. Problemen als gevolg van onjuist gebruik of onderhoud, overmatig gebruik, ongelukken, reparaties uitgevoerd door onbevoegden, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, schade door vreemde objecten in het toestel of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte garantie en kunnen deze laten vervallen. De bovenstaande garantie heeft geen invloed op de juridische rechten die u kunt hebben onder de geldende nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen. Uw hoorzorgprofessional kan een garantie hebben afgegeven die verder gaat dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig heeft

Breng uw TV Adapter naar uw hoorzorgprofessional die mogelijk kleine problemen direct kan verhelpen en aanpassingen kan verrichten.

Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe TV Adapter. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij de paragraaf Waarschuwingen niet. Dit helpt u het maximale uit uw nieuwe TV Adapter te halen.

Als u verdere vragen over het gebruik van uw TV Adapter heeft, neem dan contact op met uw hoorzorgprofessional.

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories.

Beoogd gebruik

De TV Adapter is bedoeld als een draadloze zender van geluid van een televisie, of van andere elektronische audioapparaten, naar hoortoestellen.

De TV Adapter is bedoeld voor gebruik door kinderen (> 36 maanden) en volwassenen in combinatie met hun hooroplossing.

Inhoudsopgave

Inhoud van de verpakking	09
Overzicht TV Adapter	10
Installatie	12
Plaatsing van de TV Adapter	13
De TV Adapter aansluiten op het elektriciteitsnet	14
De TV Adapter aansluiten op de televisie	16
Aansluiten met TOSLINK	18
Aansluiten met RCA	20
Aansluiten met de mini-jack adapter	22
Aansluiten met SCART	24
Koppelen van de TV Adapter met uw hoortoestellen	26
Het geluid van de televisie aanzetten met uw hoortoestellen	28
Het geluid van de televisie uitzetten met uw hoortoestellen	29
Volumebediening met uw hoortoestellen	30

Het geluid van de televisie aanzetten met de Remote Control van de hoortoestellen 32

Het geluid van de televisie uitschakelen met uw Remote Control 33

Volumebediening met uw Remote Control 34

Dempen met de Remote Control 35

Meer dan één gebruiker 36

Een gebruiker verwijderen/koppelingen wissen 37

Reiniging en onderhoud 38

Waarschuwingen 39

Technische informatie 42

Inhoud van de verpakking

De verpakking van de TV Adapter bevat de volgende onderdelen:



TV Adapter



Netvoeding



Mini-jack adapter



RCA-kabel



TOSLINK-kabel



Dit boekje

Overzicht TV Adapter

Stand	Stroom- indicatie	TV- indicatie
Adapter staat aan, niet gekoppeld met hoortoe- stellen		
Koppeling voltooid (brandt continu, 30 sec.)		
Adapter staat aan, ontvangt geen geluid		
RCA aangesloten en ontvangt geluid		
Geen RCA/audio-input		
TOSLINK aangesloten en ontvangt geluid (digitaal)		
TOSLINK aangesloten en ontvangt geluid (ongeldig signaal)*		
Storing**		


Geen lampje

 Knipperend
 Vervagend
 Brandend


* Probeer andere inputverbinding

** Neem contact op met uw hoorzorgprofessional

Vorkant

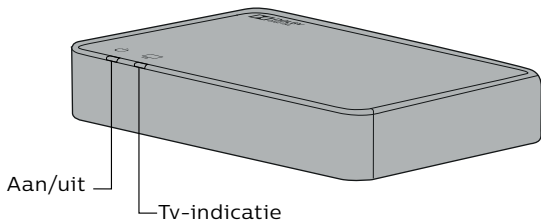

Achterkant

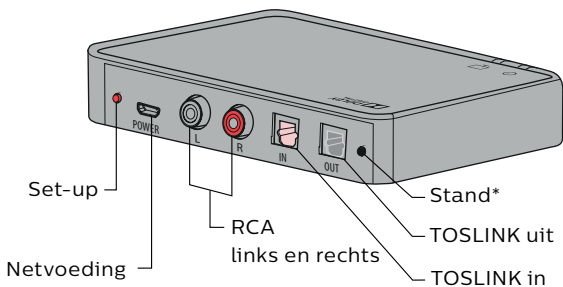

* Gereserveerd voor toekomstig gebruik

Installatie


Eerste gebruik van de TV Adapter

Voordat u uw hoortoestellen met uw televisie kunt gebruiken, dient de TV Adapter aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet en de televisie en gekoppeld te zijn met uw hoortoestellen.

Dit boekje begeleidt u stap voor stap bij de installatie van de TV Adapter.

Plaatsing van de TV Adapter

Plaats de TV Adapter vlakbij de televisie, horizontaal en met een vrije zichtlijn naar de hoortoestellen.

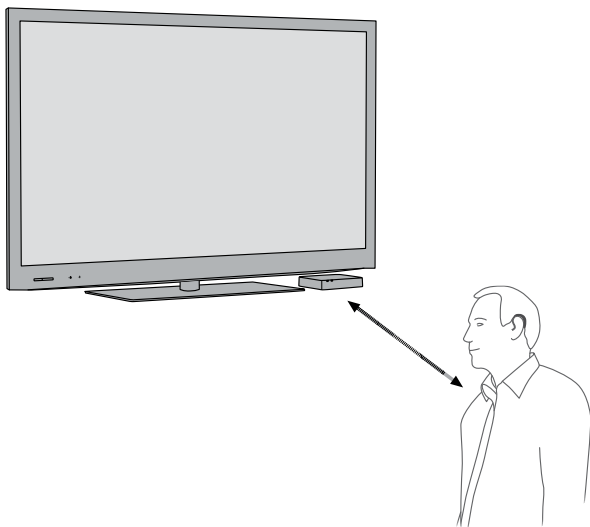


De TV Adapter aansluiten op het elektriciteitsnet

Steek de stekker van de TV Adapter in een stopcontact.

Gebruik de netadapter uit doos nummer 1

1. Steek het snoer in de "power"-aansluiting van de TV Adapter (A).
2. Steek de netadapter in het stopcontact (B).
3. Controleer of het apparaat van stroom wordt voorzien (C); beide indicaties gaan na enkele seconden blauw vervagen om aan te geven dat koppeling met uw hoortoestellen nodig is. Zie pagina 26.

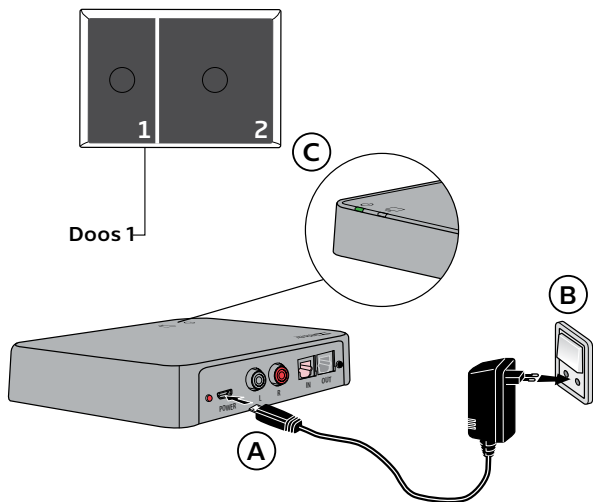

De TV Adapter aansluiten op de televisie

U kunt de TV Adapter op vier verschillende manieren op de televisie aansluiten.


Aansluiting	Pagina
TOSLINK (digitaal stereo PCM of Dolby® Digital*)	18
RCA audio-output (L+R)	20
Mini-jack audio-output (meestal hoofdtelefoonoutput)	22
SCART audio-output (L+R)	24

* Dolby en het dubbele D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories.


Wij raden aan TOSLINK te gebruiken.

Raadpleeg de volgende bladzijden voor een oplossing die bij uw televisie past.


TOSLINK (p. 18)

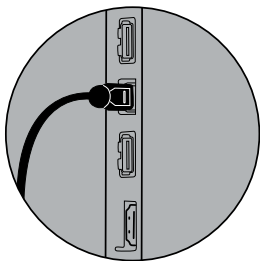


RCA (p. 20)

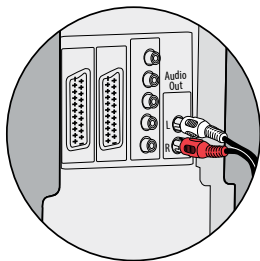

Mini-jack (p. 22)

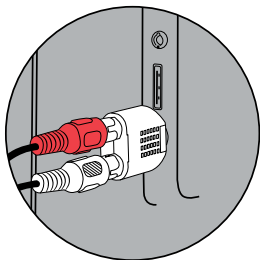


SCART (p. 24)

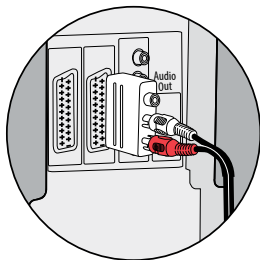

Aansluiten met TOSLINK

1. Gebruik de TOSLINK-kabel uit doos 3 (A).
2. Verwijder het plastic kapje van de TOSLINK-kabel (B).
3. Sluit de TOSLINK-kabel aan op de TOSLINK-output op uw televisie/home cinema-systeem (C).
4. Sluit de TOSLINK-kabel aan op de roze TOSLINK-input (D) op de TV Adapter.
5. De TOSLINK-output (E) kan gebruikt worden om andere TOSLINK-apparaten aan te sluiten zoals externe Dolby Decoders en surround geluidssystemen.
6. Zie pagina 26 voor het koppelen van de TV Adapter met uw hoortoestel.


Het kan nodig zijn dat u uw televisie, dvd-speler of home cinema-systeem moet configureren zodat de juiste audio-output beschikbaar is op de output van de TOSLINK.

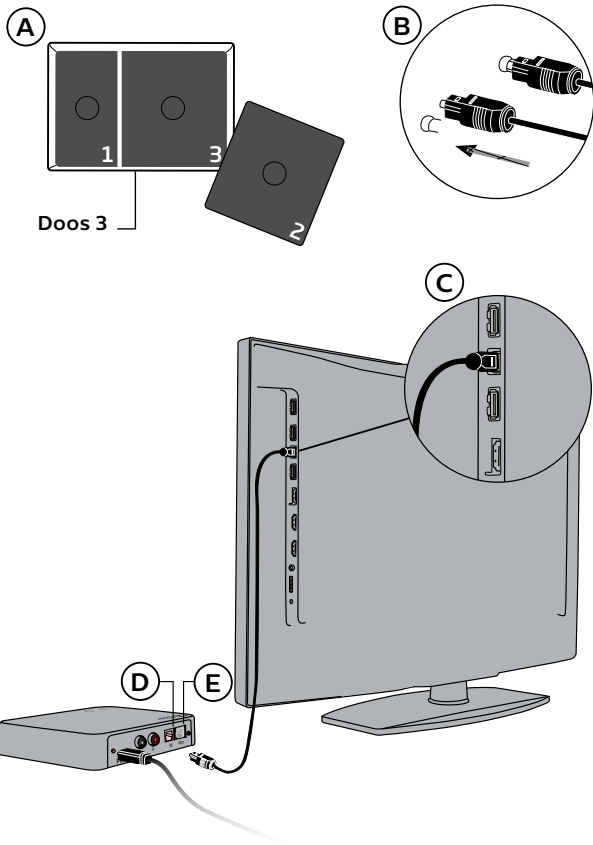


Aansluiten met RCA

1. Gebruik de RCA-kabel uit doos 2 (A).
2. Sluit de RCA-kabel aan op de RCA-output op uw televisie (B) of home cinema-systeem. (Meestal gemarkeerd "L – R AUDIO OUT" en te vinden aan de achterkant van de televisie of het onderste paneel).
3. Sluit de RCA-kabel aan op de RCA-connectors (C) op de achterkant van de TV Adapter.
4. Zie pagina 26 voor het koppelen van de hoortoestellen met de TV Adapter.

Het kan nodig zijn dat u uw televisie moet configureren zodat de juiste audio-output beschikbaar is op de output van de RCA.

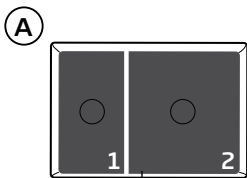


Doos 2

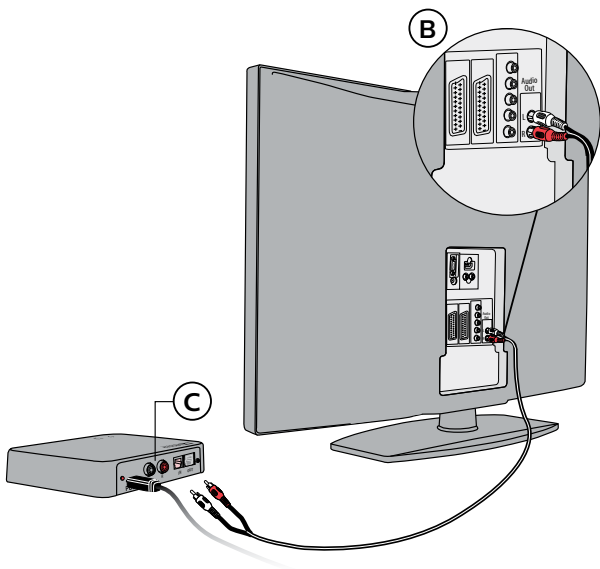


Aansluiten met de mini-jack adapter

1. Gebruik de mini-jack adapter uit doos 2 (A).
2. Sluit de RCA-kabel aan op de mini-jack adapter (B1).
3. Sluit de mini-jack aan op de televisie, dit is meestal de hoofdtelefoonoutput (B2).
4. Sluit de RCA-connectors aan op de RCA-input van de TV Adapter (C).
5. Zie pagina 26 voor het koppelen van de TV Adapter met uw hoortoestellen.

De luidsprekers van de televisie kunnen worden gedempt wanneer u aansluit op de hoofdtelefoonoutput. U kunt dan alleen geluid via de hoortoestellen/TV Adapter horen.

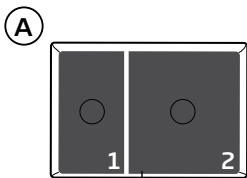

Doos 2

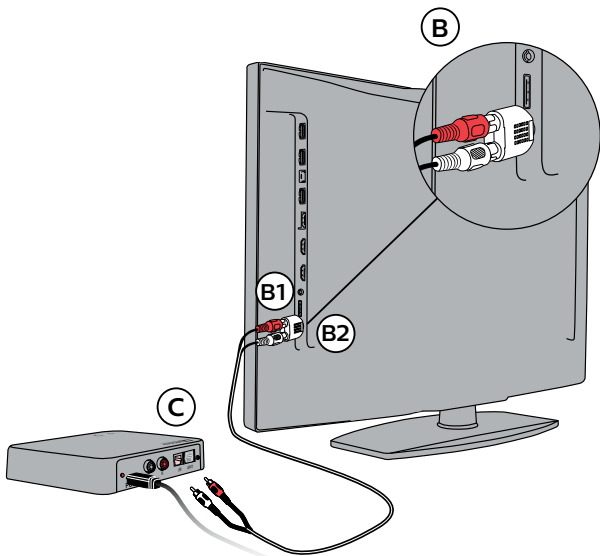

C


Aansluiten met SCART

1. Gebruik een SCART-adapter* (A).
2. Sluit de RCA-kabel aan op de rode en witte eindpunten op de SCART-adapter (B).
3. Sluit de SCART-adapter aan op de SCART-output op uw televisie (C).
4. Sluit de RCA-connectors aan op de RCA-input van de TV Adapter (D).
5. Zie pagina 26 voor het koppelen van de TV Adapter met uw hoortoestellen.


* De SCART-adapter is een accessoire die niet wordt meegeleverd. Als u een SCART-adapter nodig heeft, neem dan contact op met uw hoorzorgprofessional.

De audio-output op de SCART-connector kan afhankelijk zijn van de bron die op de televisie is geselecteerd. Sommige televisies laten bijvoorbeeld alleen televisiegeluid horen op de SCART-output (d.w.z. geen geluid van bijvoorbeeld een aangesloten dvd-speler).

SCART-adapter (accessoire)

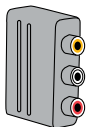

A

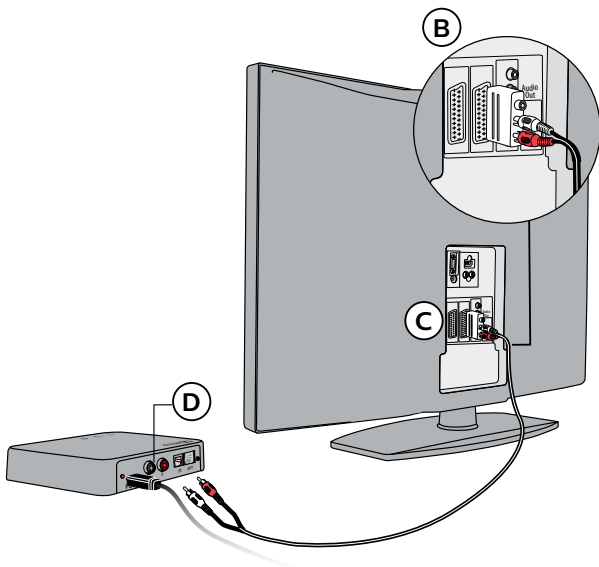

B

C

D

Koppelen van de TV Adapter met uw hoortoestellen

Voordat u de TV Adapter kunt gebruiken, moet deze worden gekoppeld met uw hoortoestellen.

Koppelen hoeft maar eenmalig te gebeuren en duurt ongeveer 20 - 60 seconden.


Deze TV Adapter kan gekoppeld worden met zoveel hoortoestellen als u maar wilt. Alle gebruikers zullen hetzelfde geluid horen. Zie pagina 36 voor meer details.

Belangrijke opmerking

Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen voor details over de functionaliteit van uw specifieke hooroplossing.


Zorg ervoor dat de TV Adapter aan staat.

Open en sluit de batterijlade op beide hoortoestellen. Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing van uw specifieke hoortoestelmodel.

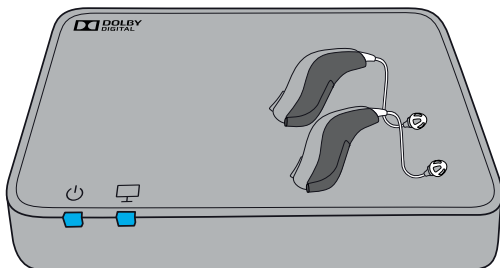

Plaats beide hoortoestellen in de buurt van of bovenop de TV Adapter.

Het koppelen is voltooid wanneer de stroom- en TV-indicatie gedurende 30 seconden blauw branden.

TV Adapter	Beschrijving
	Koppeling voltooid

Het geluid van de televisie aanzetten met uw hoortoestellen

Als de TV Adapter eenmaal met uw hoortoestellen gekoppeld is, is deze beschikbaar als programma op uw hoortoestellen. Om naar de televisie te luisteren, houdt u simpelweg de programmaschakelaar op uw hoortoestellen ingedrukt om van programma te veranderen.

De programmacyclus is afhankelijk van de programma's die al op uw hoortoestellen zijn geïnstalleerd.



De indicatie voor het tv-programma – die verschilt van de indicaties voor hoortoestelprogramma's – kan worden gehoord wanneer het tv-programma is geselecteerd.

Belangrijke opmerking

Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen voor details over de functionaliteit van uw specifieke hooroplossing.


Het geluid van de televisie uitzetten met uw hoortoestellen

Om het geluid van de televisie te stoppen, verandert u gewoon het gewenste programma in uw hoortoestellen.

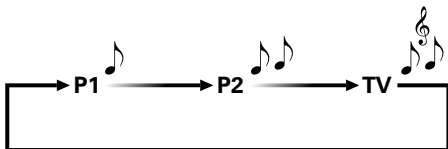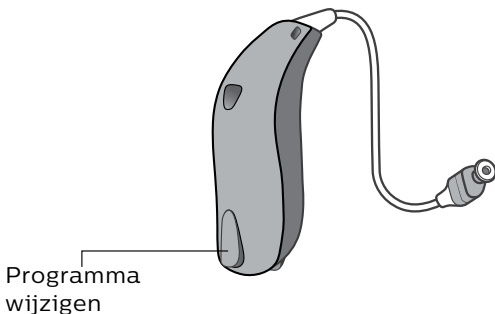

Volumebediening met uw hoortoestellen

Gebruik de volumetoets op uw hoortoestellen om het tv-volume in beide hoortoestellen te regelen. Stel het volume bij door kort omhoog of omlaag te drukken. Druk herhaaldelijk kort op de toets voor verdere bijstellingen.

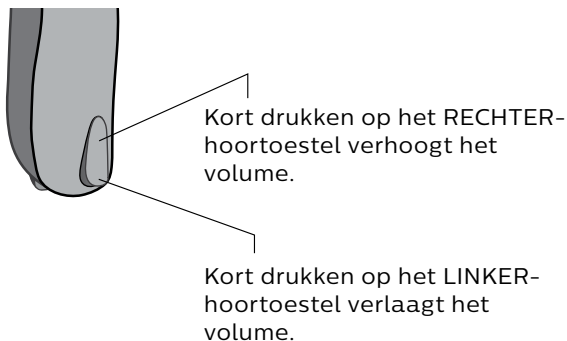

Het tv-volume in de hoortoestellen wordt niet beïnvloed door volumebijstellingen met de afstandsbediening van de televisie.

Belangrijke opmerking

Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen voor details over de functionaliteit van uw specifieke hooroplossing.

Het geluid van de televisie aanzetten met de Remote Control van de hoortoestellen

De Remote Control is een optionele accessoire bij uw draadloze hoortoestellen.



Als de TV Adapter eenmaal met uw hoortoestellen gekoppeld is, is deze beschikbaar als programma. Om naar de televisie te luisteren, drukt u gewoon op de programmatoets om het programma te wijzigen (A).

De programmacyclus is afhankelijk van de programma's die al op uw hoortoestellen zijn geïnstalleerd.

De tv-programma-indicatie – die verschilt van de programma-indicaties – kunt u horen zodra het tv-programma geselecteerd is.

Het geluid van de televisie uitschakelen met uw Remote Control


Om het geluid van de televisie te stoppen, verandert u gewoon het gewenste programma in uw hoortoestellen.

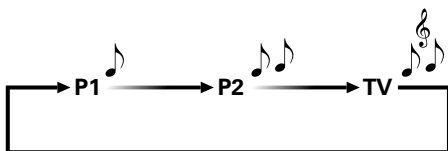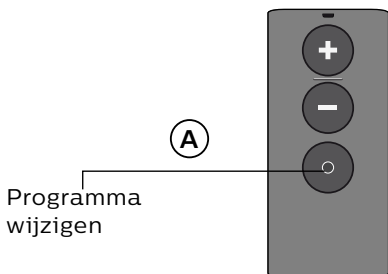

Volumebediening met uw Remote Control

Gebruik de volumetoetsen op uw Remote Control om het tv-volume in beide hoortoestellen te regelen.

Stel het volume bij door kort omhoog of omlaag te drukken. Herhaal het kort indrukken voor verdere bijstelling.

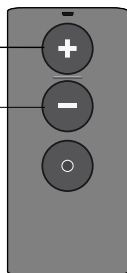


Het tv-volume in de hoortoestellen wordt niet beïnvloed door volumebijstellingen met de afstandsbediening van de televisie.

Dempen met de Remote Control

Tijdens het televisiekijken kunt u de microfoons in uw hoortoestellen uitschakelen, zodat u alleen het geluid van de televisie kunt horen.

Houd de toets volume lager ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat het omgevingsgeluid is gedempt.
Om de demping op te heffen drukt u de toets volume hoger of lager kort in.

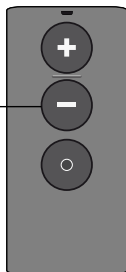

De dempings- en volumefuncties zijn optioneel en kunnen naar wens worden ingesteld door uw hoorzorgprofessional.


Meer dan één gebruiker


Een onbeperkt aantal hoortoestelgebruikers kunnen naar het geluid van één TV Adapter luisteren. Koppel ieder hoortoestel met de TV Adapter zoals beschreven op pagina 26.

Een gebruiker verwijderen/ koppelingen wissen

Om een gebruiker van de TV Adapter te verwijderen, voert u een reset van het systeem uit en koppelt u de gewenste hoortoestellen opnieuw.

1. Reset het systeem: houd de setuptoets langer dan 5 seconden ingedrukt.
2. De indicators vervagen naar blauw om aan te geven dat er geen koppelingen zijn.
3. Koppel de gewenste toestellen opnieuw (zie pagina 26).

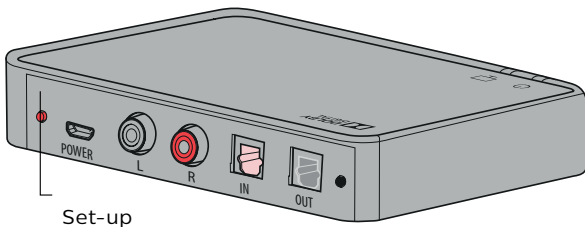

TV Adapter	Beschrijving
	Geen koppelingen

Reiniging en onderhoud

Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van de TV Adapter.

Belangrijke opmerking

De TV Adapter mag nooit ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.

Waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen en de inhoud van dit boekje voordat u uw TV Adapter gaat gebruiken. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional indien u een onverwachte werking of ongewenst voorval van uw TV Adapter ervaart.

Waarschuwingen

Brandrisico

- De stroombron van uw TV Adapter heeft onvoldoende energie om onder normale gebruiksomstandigheden brand te veroorzaken.

Storing

- Uw TV Adapter is grondig getest op storing, volgens de strengste internationale normen. Er kan echter onvoorziene storing optreden tussen uw TV Adapter en andere apparaten (bijv. sommige mobiele telefoons, zendapparatuur en andere draadloze apparatuur). Probeer in dat geval de afstand tussen de TV Adapter en de storende apparatuur te vergroten.

Aansluiting op externe apparatuur

- De veiligheid van het gebruik van de TV Adapter met de AUX-inputkabel is afhankelijk van de externe geluidsbron. Als het toestel aangesloten is op externe apparatuur met netvoeding, dan moet deze apparatuur voldoen aan IEC-62368 (of IEC-60065, IEC-60950 tot 20 juni 2019) of gelijkwaardige veiligheidsnormen.

Technische informatie

Modelnaam	TVA3
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: +5 °C tot +40 °C Vochtigheid: 15% tot 93%, niet-condenserend Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa
Opslag- en transportomstandigheden	De temperatuur en luchtvochtigheid mogen onderstaande limieten niet langere tijd overschrijden tijdens transport en opslag: Temperatuur: -25 °C tot +70 °C Vochtigheid: 15% tot 93%, niet-condenserend
Afmetingen	124x80x21 mm; gewicht 107g

Systeemfuncties	<ul style="list-style-type: none"> • Automatische koppeling: De TV Adapter koppelt automatisch met hoortoestellen in de koppelmodus • AutoStream: De TV Adapter begint automatisch met het streamen van geluid wanneer een voldoende sterk audiosignaal gedetecteerd wordt • MultiConnect: De TV Adapter kan gekoppeld worden met een onbeperkt aantal hoortoestellen
Compatibiliteit	De TV Adapter werkt samen met alle versies van Philips-hoortoestellen met 2,4 GHz radiotechnologie
Inputaansluitingen/ formaat	<ul style="list-style-type: none"> • Mini-jack 3,5 mm (L+R) (gebruik bijgesloten kabel en adapter) • RCA (L+R) • TOSLINK Digital Stereo (PCM) / Dolby Digital®
Output	TOSLINK (gebufferde output van TOSLINK-input)
Bereik	Tot 15 meter (vrije zichtlijn tussen TV Adapter en hoortoestellen)

Audio-input (formaten)	<ul style="list-style-type: none"> • Stereo analoge input (RCA) • Stereo/PCM (TOSLINK) • Dolby Digital® (TOSLINK)
Vertraging (TV Adapter-input naar hoortoestel-luidspreker)	<p>Analoog: 25 ms Digitaal: 28 ms Dolby Digital®: 45 ms</p>
Gevoeligheid lijningang	6 dB Vrms (analoog), impedantie: 10 kΩ
Audio-bandbreedte	10 kHz / stereo van input naar hoortoestellen
Dynamische zelfaanpassing	AGC (analoge input) (lijningang benadering tot 0 dB 5 sec)
Statusindicator	Netvoeding- en modus-LED aan voorzijde
Kleuren	Donkergrijs
Stroomverbruik	Ruststand, geen streamen van geluid: 0,8 W Streamen van geluid: 1,5 W
Ontvanger:	
Bedieningsfrequentie	2,402 GHz - 2,480 GHz (ISM-band)
Aantal kanalen	39

Zendvermogen	Max. 50 mW gelijk aan 17 dBm EIRP. In overeenstemming met alle relevante standaarden.
Kanaalbandbreedte	1 MHz / 2 MHz
Type modulatie	GFSK / 2GFSK
ITU-aanduiding	F7E

VS en Canada

Dit apparaat is gecertificeerd volgens:

FCC ID: 2ACAHTVA3

IC: 11936A-TVA3

Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de RSS-normen voor licentievrijstelling van Industry Canada.

Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. dit toestel moet alle ontvangen storing accepteren, waaronder storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking: wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de voor naleving verantwoordelijke partij kunnen het recht doen vervallen om dit toestel te gebruiken.

Dit klasse B digitaal apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.


Opmerking: Uit tests is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de grenzen voor een digitaal apparaat Klasse B, conform deel 15 van het FCC-reglement. Deze grenzen zijn bedoeld om bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie. Ook kan het radiofrequente energie uitstralen. Indien het apparaat niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als het apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of tv-ontvangst, hetgeen kan worden gecontroleerd door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:



- Stel de ontvangende antenne opnieuw in of verplaats deze
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander stroomcircuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp

Radiofrequente straling blootstellingsinformatie

Deze apparatuur voldoet aan de limieten voor FCC en IC stralingsblootstelling die door de FCC voor een ongecontroleerde omgeving zijn vastgesteld. Deze apparatuur dient geïnstalleerd en bediend te worden op een afstand van minimaal 20 cm tussen de zender en uw lichaam. Deze zender mag niet worden gebruikt in combinatie met enige andere antenne of zender.

Beschrijving van symbolen die in dit boekje of op de verpakking gebruikt worden

	<p>Waarschuwingen Tekst aangeduid met een markeringsymbool moet worden gelezen voordat het product wordt gebruikt.</p>
	<p>Fabrikant Het product is geproduceerd door de fabrikant waarvan de naam en het adres naast het symbool vermeld staan. Dit geeft aan wie de fabrikant van een medisch apparaat is, zoals vastgelegd in EU-voorschriften 90/385/EEC, 93/42/EEC en 98/79/EC.</p>
	<p>CE-markering Dit product voldoet aan de Medical Device Directive 93/42/EEC.</p>
	<p>Elektronisch afval (WEEE) Recycle uw hoortoestellen, accessoires of batterijen volgens lokale regelgeving of lever ze als afval in bij uw hoorzorgprofessional. Elektronische apparatuur valt onder voorschrift 2012/19/EU betreffende afval en elektronische apparatuur (waste and electrical equipment, WEEE).</p>
	<p>Regulatory Compliance Mark (RCM) Dit product voldoet aan de eisen voor elektrische veiligheid, EMC en radiospectrum die gesteld worden aan producten bestemd voor de Australische of Nieuw-Zeelandse markt.</p>

 TA-2016/1772	Zuid-Afrika ICASA-label Geeft aan dat het apparaat in Zuid-Afrika is gecertificeerd en gehomologeerd.
 2016DJ3206	China CMIIT ID Geeft aan dat het apparaat in China is gecertificeerd.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Voldoet aan IMDA- normen DA103820 </div>	IMDA-label Singapore Geeft aan dat het apparaat voldoet aan de normen en specificaties gepubliceerd door de Info-Communications Media Development Authority (IMDA) en compatibel is met de openbare telecommunicatienetwerken in Singapore en geen radiofrequente storing veroorzaakt bij andere bevoegde radiocommunicatienetwerken.
Nominale ingang: 5,0 V 0,4 A	Stopcontact
 [R] 201-160125	TELEC-label Japan en JATE-label Japan “R” geeft een certificeringsmarkering voor radioapparatuur aan.
 03564-17-05812	ANATEL-label Brazilië Geeft aan dat het apparaat geclassificeerd en goedgekeurd is in Brazilië.
	Droog houden Geeft aan dat het een medisch apparaat betreft dat vrij van vocht moet blijven.

	<p>Waarschuwingssymbool Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor waarschuwingen en adviezen.</p>
<p>REF</p>	<p>Catalogusnummer Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan zodat het medisch apparaat geïdentificeerd kan worden.</p>
<p>SN</p>	<p>Serienummer Geeft het serienummer van de fabrikant aan zodat een specifiek medisch apparaat geïdentificeerd kan worden.</p>
<p>CTN</p>	<p>CTN CTN is een uniek onderdeelnummer voor verkopers en klanten om elk product met de Philips-merknaam te identificeren.</p>

REACH Verklaring:

REACH vereist Philips Hearing Solutions om informatie te verstrekken over de chemische inhoud voor zeer risicovolle stoffen (SVHC, Substances of Very High Concern) indien deze in meer dan 0,1% van het productgewicht aanwezig zijn. In dit HearLink product zijn geen stoffen aanwezig van de REACH SVHC-lijst die op het moment van productie van toepassing is. Recentere informatie is te vinden op de website www.hearingsolutions.philips.com/REACH.

De fabrikant verklaart dat deze TV Adapter voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

De conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.hearingsolutions.philips.com



Afval van elektronische apparatuur dient te worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.

203616/NL

< 8,15 mm >

Tijdelijke
aanduiding
voor
FSC-logo
MIX
Paper

FSC® C043870

^
19 mm
v

< 15 mm >

^
9,0 mm
v

www.hearingsolutions.philips.com



Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door of voor en wordt verkocht onder verantwoordelijkheid van SBO Hearing A/S, en SBO Hearing A/S is de garantiegever met betrekking tot dit product.



0000203616000001