

PHILIPS

HearLink

AudioClip



Gebruiks- aanwijzing

HEA6000

Garantiebewijs

Datum: _____ Model: _____

Garantieperiode: _____

Serienr.: _____

Hoorzorgprofessional

Internationale garantie

Uw hoortoestel valt onder een internationale beperkte garantie die door de fabrikant is afgegeven voor de eerste 24 maanden. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten in het apparaat zelf, maar niet in accessoires zoals batterijen, kabels, netadapters enz. Problemen als gevolg van onjuist gebruik of onderhoud, overmatig gebruik, ongelukken, reparaties uitgevoerd door onbevoegden, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, schade door vreemde objecten in het toestel of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte garantie en kunnen deze laten vervallen. De bovenstaande garantie heeft geen invloed op de juridische rechten die u kunt hebben onder de geldende nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen. Uw hoorzorgprofessional kan een garantie hebben afgegeven die verder gaat dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig heeft

Breng uw AudioClip naar uw hoorzorgprofessional die mogelijk kleine problemen direct kan verhelpen en aanpassingen kan verrichten.

Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe AudioClip. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk Waarschuwingen niet. Dit helpt u het maximale uit uw nieuwe AudioClip te halen.

Als u verdere vragen over het gebruik van uw AudioClip heeft, neem dan contact op met uw hoorzorgprofessional.

Beoogd gebruik

De AudioClip is bedoeld als een draadloze ontvanger en zender van geluid tussen hoortoestellen en de omgeving, waaronder spraak en draadloze elektronische audioapparatuur. De AudioClip ondersteunt gebruikers van draadloze hoortoestellen bovendien bij het bedienen van de functies van hun hooroplossing.

De AudioClip is bedoeld voor gebruik door kinderen (> 36 maanden) en volwassenen, in combinatie met hun hooroplossing.

Belangrijke opmerking


Lees de gehele inhoud van dit boekje zorgvuldig door voordat u uw AudioClip gaat gebruiken. Hierin staan aanwijzingen en belangrijke informatie over het gebruik en de behandeling van uw AudioClip.

Inleiding

De AudioClip kan als een draadloze headset voor mobiele telefoons en als een externe microfoon/partnermicrofoon worden gebruikt.


1. Headset met mobiele telefoon

Geluiden van uw telefoon worden via de AudioClip (A) naar uw hoortoestellen gestreamd. Uw stem wordt opgevangen door de AudioClip en naar de mobiele telefoon (B) gestuurd.

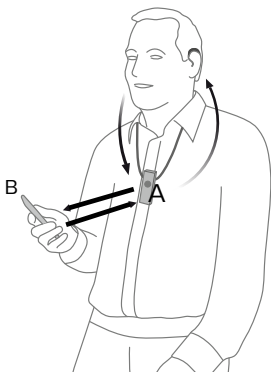


2. Externe microfoon/partnermicrofoon

De stem van een gekozen spreker wordt draadloos van de AudioClip naar uw hoortoestellen gestuurd.

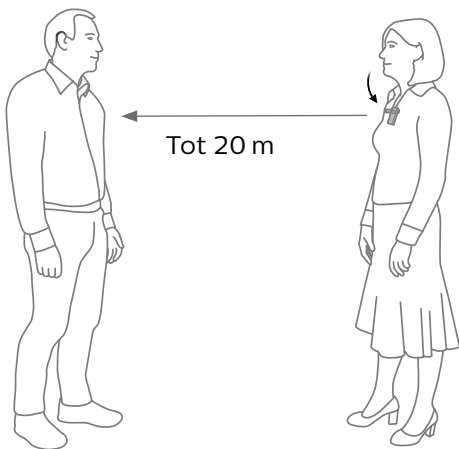

Inhoudsopgave

Inhoud van de verpakking	11
Overzicht – belangrijkste functies	12
Overzicht – productindicatoren	14
Aan de slag	16
Dagelijks gebruik: AAN/UIT	22
Dagelijks gebruik: Opladen	23
Gebruik van de AudioClip met een mobiele telefoon	25
Zorgen dat de AudioClip is verbonden met de telefoon	26
Telefoongesprekken ontvangen	27
Bellen	29
Geavanceerde headsetfuncties	30
Naar muziek luisteren	31
AudioClip als externe microfoon gebruiken	33
Microfoonmodus selecteren	34
Geluid starten/stoppen vanaf externe microfoon	35

Niveau vanaf externe microfoon regelen	36
Geluid starten/stoppen vanaf externe microfoon via uw hoortoestellen	37
AudioClip gebruiken als afstandsbediening voor hoortoestellen	38
Overige kenmerken en functies	39
De AudioClip schoonmaken	40
 Waarschuwingen	41
Technische gegevens	47
Technische informatie	49

Inhoud van de verpakking

De AudioClip verpakking bestaat uit de volgende elementen:



AudioClip



USB-
opladekabel



Wandoplader
(verschilt per
land)



Draagkoord – lang



Draagkoord –
normaal





Etui




Dit boekje
(gebruiksaanwijzing)


Overzicht – belangrijkste functies

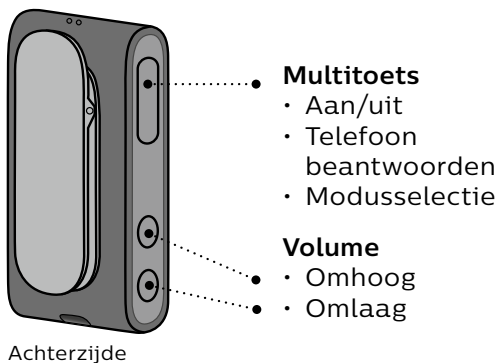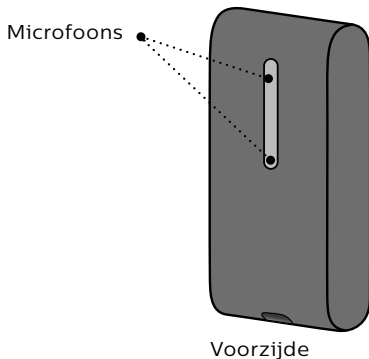

Statusindicator Powerindicator

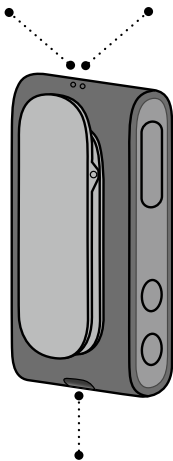



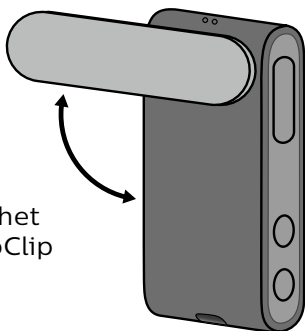



Oplaadaansluiting
(Micro-USB)



Clip (draaiend) voor het
dragen van de AudioClip

Overzicht – productindicatoren


Status	Omschrijving	
	Knipperend geel	Zoeken naar hoortoestellen
	Stabiel geel	Inactief. Hoortoestellen verbonden, niet verbonden met een telefoon.
	Knipperend blauw	Zoeken naar een mobiele telefoon (koppelen)
	Stabiel blauw	Verbonden met een mobiele telefoon
	Stabiel groen	In een gesprek
	Knipperend groen	Inkomend gesprek
	Stabiel oranje	Streamen van muziek
	Stabiel magenta	Externe microfoon modus
	Knipperend magenta	Opnieuw verbinden met externe microfoon

Power	Omschrijving	
	Stabiel rood	Batterij bijna leeg
	Stabiel groen	Ingeschakeld – niet opladen
	Knipperend groen	Ingeschakeld – opladen
	Vervagend groen	Ingeschakeld – opladen voltooid
	Knipperend oranje	Uitgeschakeld – opladen
	Stabiel oranje	Uitgeschakeld – opladen voltooid

Aan de slag


Voordat u de AudioClip met uw hoortoestellen kunt gebruiken, moeten zowel de hoortoestellen als de AudioClip worden gekoppeld/verbonden. Voor het gebruik van de AudioClip met een mobiele telefoon moet de AudioClip ook met uw mobiele telefoon worden gekoppeld/verbonden.

A. Hoortoestellen en AudioClip koppelen

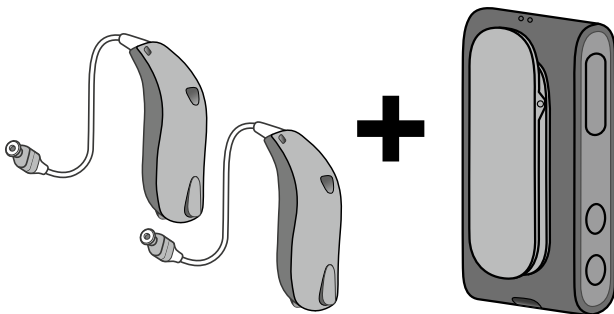

Zie pagina 18 voor uitgebreide instructies over het koppelen van een AudioClip met uw hoortoestellen.

B. AudioClip en mobiele telefoon koppelen

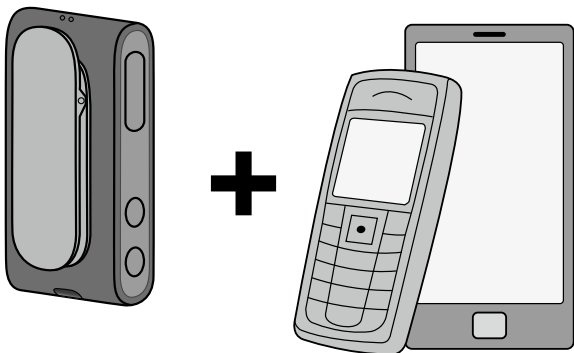


Zie pagina 20 voor uitgebreide instructies over het koppelen van een AudioClip met uw mobiele telefoon.


A. Hoortoestellen met de AudioClip koppelen

1. **Let op dat AudioClip uitgeschakeld is**

Houd de multitoets ca. 6 seconden ingedrukt totdat de powerindicator op **UIT** ● staat.

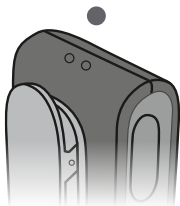


2. **Zet beide hoortoestellen UIT**
(open de batterijlade)

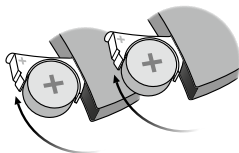


3. **Zet beide hoortoestellen AAN**
(sluit de batterijlade)

De hoortoestellen zijn nu klaar voor de eerste keer verbinden met de AudioClip. U heeft nu 3 minuten de tijd om de koppeling te voltooien.

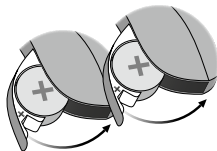


4. **Zet AudioClip AAN**


Houd de multitoets ca. 3 seconden ingedrukt totdat de powerindicator **STABIEL GROEN** ● is.

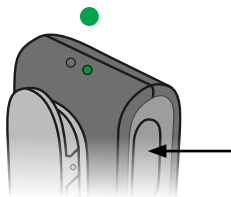

5. **AudioClip zoekt nu uw hoortoestellen**
Statusindicator
KNIPPERT GEEL ●

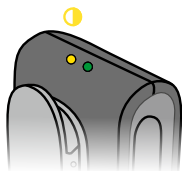


6. **Plaats AudioClip en beide hoortoestellen dicht bij elkaar**
(max. afstand 20 cm)

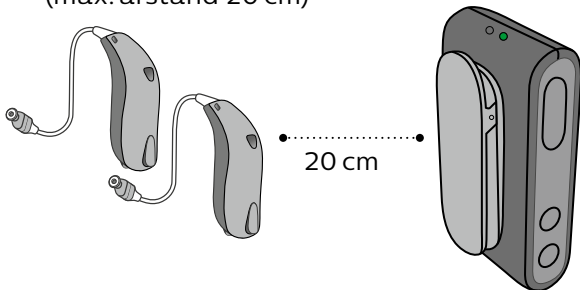


7. **Verbinding gemaakt met hoortoestel(len)**
Dit wordt aangegeven doordat de statusindicator **STABIEL GEEL** ● is.



B. Mobiele telefoon met de AudioClip koppelen

1. **Zet AudioClip in de koppelingsmodus**
Houd de multitoets EN de volume-omhoogtoets ca. 6 seconden (A) ingedrukt totdat de statusindicator **BLAUW KNIPPERT** .
2. **De AudioClip blijft ongeveer 3 minuten in de koppelingsmodus**

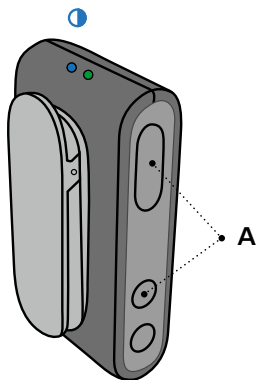


3. Koppeling op mobiele telefoon mogelijk maken

Zet Bluetooth® aan. Zoeken en verbinden/koppelen met AudioClip.

Dit vindt u normaal gesproken in het gedeelte instellingen → Bluetooth® van uw telefoon.


4. Pincode invoeren

Als uw telefoon naar een pincode vraagt, voert u 0000 in (vier nullen).

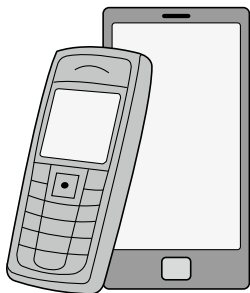


5. Koppeling voltooid

Koppeling voltooid met mobiele telefoon wordt aangegeven doordat de statusindicator **STABIEL BLAUW** ● is.

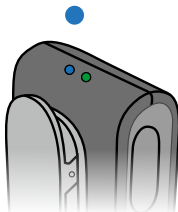


Dagelijks gebruik: Aan/Uit

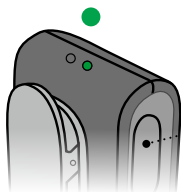

- **AAN**


Houd de multitoets ca. 3 seconden ingedrukt totdat de powerindicator **STABIEL GROEN** ● is.

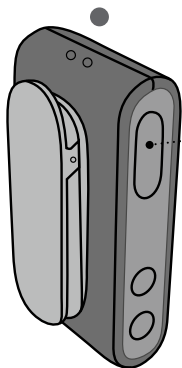


- **UIT**

Houd de multitoets ca. 6 seconden ingedrukt totdat de powerindicator **UIT** ● is.


Dagelijks gebruik: Opladen

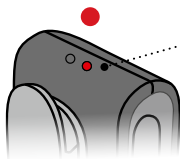



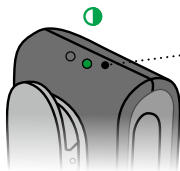

- **Batterij bijna leeg**
Wanneer er nog ongeveer 30 minuten streamingtijd over is, wordt de powerindicator **ROOD** ●.

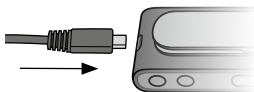

- **Opladen**
Verbind de meegeleverde oplader via de micro-USB-connector onderaan de AudioClip. De powerindicator **KNIPPERT GROEN** ● of **ORANJE** ●.



Laadindicatoren			Status
	Knipperend	Opladen	AudioClip AAN
	Vervagend	Opladen voltooid	
	Knipperend	Opladen	AudioClip UIT
	Stabiel	Opladen voltooid	

Belangrijke opmerking



Als geen van de laadindicatoren brandt, haal het apparaat van de oplader en raadpleeg uw hoorzorgprofessional.

Belangrijke opmerking

Gebruik bij het opladen van uw AudioClip de meegeleverde originele voeding type met 5.0V/1A, CE en veiligheidsmerk:




Gebruik van de AudioClip met een mobiele telefoon

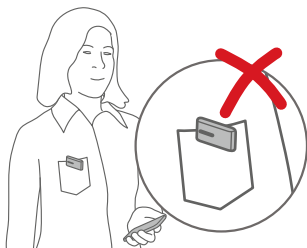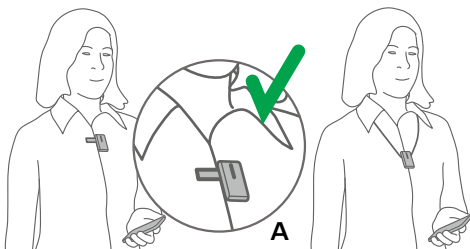

Belangrijke opmerking

Voor de best mogelijke prestaties dient de AudioClip gedragen te worden zoals afgebeeld. Het is belangrijk dat de microfoon in de AudioClip naar uw mond is gericht (A) en dat de AudioClip niet door kleding etc. wordt bedekt. De maximale afstand tussen AudioClip en de mobiele telefoon is 10 meter.

Zorgen dat de AudioClip is verbonden met de telefoon

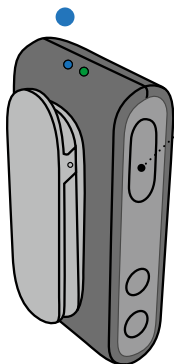


• Telefoonmodus selecteren

Houd de multitoets ca. 3 seconden ingedrukt om van modus te veranderen. De moduswijziging wordt bevestigd door een hoorbare indicatie in uw hoortoestellen. De statusindicator is **STABIEL BLAUW** ●.



Status	Omschrijving
●	De AudioClip staat in inactieve modus, d.w.z. niet verbonden met de mobiele telefoon. Verbonden met hoortoestellen.
●	Verbonden met mobiele telefoon
●	De AudioClip staat in de modus externe microfoon/partnermicrofoon

Telefoongesprekken ontvangen

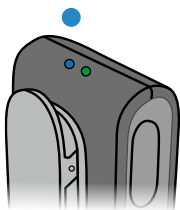

Telefoon verbonden


Als de AudioClip wordt aangezet binnen het bereik van uw mobiele telefoon, dan maakt deze automatisch verbinding met de mobiele telefoon.

De statusindicator is **STABIEL BLAUW** ●.




Telefoon gaat over

Als de telefoon overgaat, hoort u een oproepindicatie (en de ringtone van uw telefoon als deze beschikbaar is) in uw hoortoestellen.

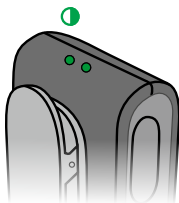


De statusindicator **KNIPPERT GROEN** ◐.

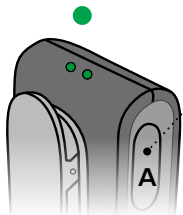

- **Gesprek aannemen**

Druk kort op de multitoets (A) – of beantwoord het gesprek met uw mobiele telefoon. Wanneer het gesprek is verbonden, verandert de statusindicator naar **STABIEL GROEN** ●.

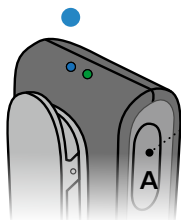


- **Gesprek beëindigen**

Druk kort op de multitoets (A) – of beëindig het gesprek met uw mobiele telefoon. De statusindicator is **STABIEL BLAUW** ●.

Bellen

Om te bellen hoeft u alleen maar de mobiele telefoon te gebruiken. Het gesprek wordt automatisch met de AudioClip verbonden.

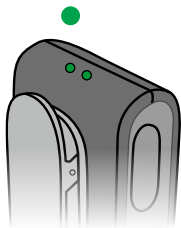

Wanneer het gesprek is verbonden, verandert de statusindicator naar **STABIEL GROEN** ●.

Geavanceerde headsetfuncties

Bellen/bedienen via de stem

Als u met een mobiele telefoon verbonden bent, drukt u de multitoets snel tweemaal in om bellen met de stem te activeren, voor zover dit door de telefoon ondersteund wordt.

Gesprek weigeren

Door lang op de volume-omlaagtoets te drukken terwijl de telefoon overgaat, weigert u het gesprek.

Hoortoestelmicrofoons dempen

Houd de volume-omlaagtoets ongeveer 3 seconden ingedrukt om de hoortoestelmicrofoons te dempen.

Druk kort op volume omhoog of omlaag om de demping van de hoortoestellen op te heffen.


Naar muziek luisteren

Draadloze audio (A2DP)

Indien via Bluetooth® verbonden met een mobiele telefoon of ander apparaat, wordt de muziek die op de telefoon/het apparaat wordt afgespeeld automatisch in uw hoortoestellen afgespeeld.

De statusindicator is **STABIEL ORANJE** ●.


U hoeft geen handelingen op de AudioClip te verrichten.

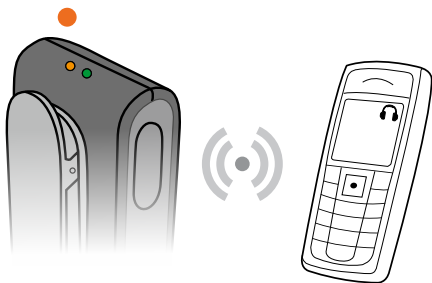

Status	Omschrijving
●	De AudioClip streamt muziek van de telefoon

Volume wijzigen

Als u naar muziek luistert kunt u het niveau van het gestreamde signaal wijzigen via de toetsen volume omhoog/omlaag.

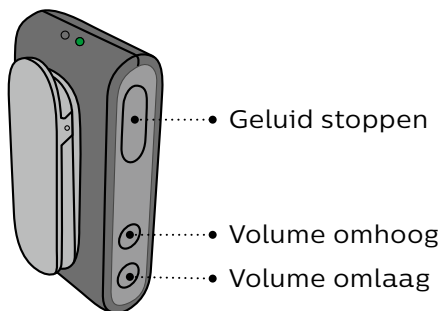


Geluid van de telefoon stoppen

Druk kort op de multitoets om het geluid te stoppen. Gebruik de bediening op de telefoon om het geluid te starten.

AudioClip als externe microfoon gebruiken

Externe microfoon


In deze modus wordt de spraak van de persoon die de AudioClip draagt direct naar uw hoortoestellen gestreamd.

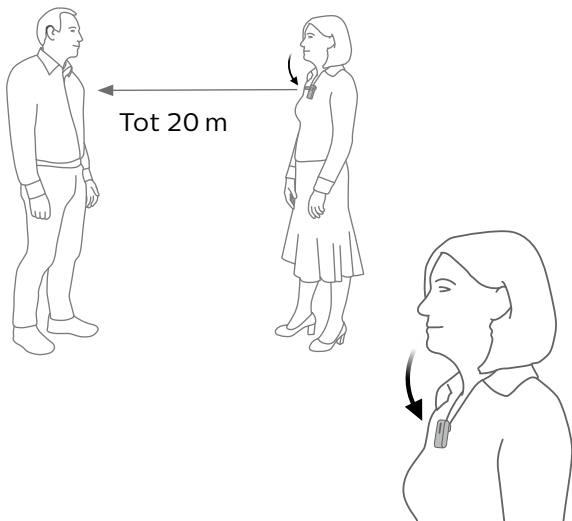

Belangrijke opmerking

Let erop dat de microfoon op de mond van de spreker is gericht en dat deze niet door kleding etc. wordt bedekt.

Microfoonmodus selecteren

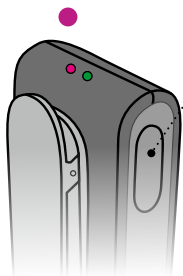

- **Selecteer de microfoonmodus**
Houd de multitoets ca. 3 seconden ingedrukt om de modus te wijzigen.


De moduswijziging wordt bevestigd door een hoorbare indicatie in uw hoortoestellen.



De statusindicator is **STABIEL MAGENTA** ●.

Status	Omschrijving
●	De AudioClip staat in inactieve modus, d.w.z. niet verbonden met de mobiele telefoon. Verbonden met hoortoestellen.
●	Verbonden met mobiele telefoon
●	De AudioClip staat in de modus externe microfoon/partnermicrofoon

Geluid starten/stoppen vanaf externe microfoon

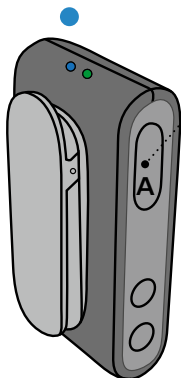


- **Geluid van de microfoon stoppen**
Houd de multitoets (A) ca. 3 seconden ingedrukt om het signaal van de microfoon naar de hoortoestellen te stoppen en schakel de hoortoestellen terug naar hun normale programma.

De statusindicator verandert naar **STABIEL GEEL** ● of **STABIEL BLAUW** ●.

Niveau vanaf externe microfoon regelen

Volume omhoog of omlaag

Het gestreamde signaal kan worden gewijzigd met de toetsen volume omhoog/omlaag.

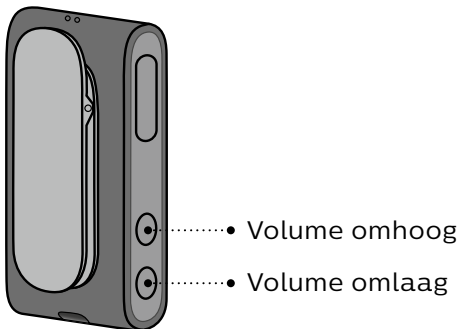

Hoortoestelmicrofoons dempen (alleen geluid van de externe microfoon)

Houd de volume-omlaagtoets ca.
3 seconden ingedrukt om het hoortoestel
en de microfoons te dempen.


Door kort op volume omhoog of omlaag te drukken, wordt de demping opgeheven.

Geluid starten/stoppen vanaf externe microfoon via uw hoortoestellen

P1 → P2 → Tv →

Microfoon

Door één keer op de hoortoestelknop te drukken, schakelt u door naar het volgende programma in de hoortoestellen.

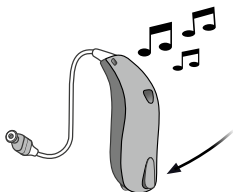


Wanneer u het programma van de externe microfoon heeft bereikt, hoort u de indicator voor het externe microfoon programma.

Om het geluid van de externe microfoon te stoppen, schakelt u gewoon terug naar het gewenste hoortoestelprogramma.

Belangrijke opmerking

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestel voor informatie over de functionaliteit van uw specifieke hooroplossing.


AudioClip gebruiken als afstandsbediening voor hoortoestellen

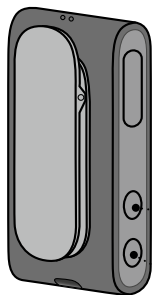

Als de AudioClip geen geluid streamt, fungeert deze als afstandsbediening voor uw hoortoestellen.

• **Volume omhoog**
Kort drukken

• **Volume omlaag**
Kort drukken

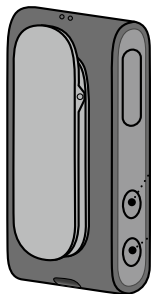

• **Volgende programma**
Houd gedurende 3 seconden ingedrukt voor het volgende programma

• **Hoortoestelmicrofoons dempen – lang drukken**
Dempen wordt opgeheven door kort op volume omhoog of omlaag te drukken

Belangrijke opmerking

De maximale afstand tussen de AudioClip en hoortoestellen is 2 meter.

Overige kenmerken en functies

Eén verbinding per keer

Bij koppeling met meerdere apparaten (maximaal acht), maakt de AudioClip alleen verbinding met de eerste telefoon die beschikbaar/binnen bereik is.

Geen gesprekken bij gebruik als microfoon

Als u de AudioClip als partnermicrofoon/ externe microfoon gebruikt, is er geen verbinding met de mobiele telefoon.

Time-out (buiten bereik) in microfoonmodus

Als de AudioClip buiten bereik van de hoortoestellen is, keren deze na 90 seconden terug naar hun oorspronkelijke programma.

Bluetooth® koppelingen verwijderen

Houd de multitoets, de volume-omhoogtoets en de volume-omlaagtoets 10 seconden ingedrukt om alle Bluetooth® koppelingen te verwijderen. Het verwijderen is voltooid als de statusindicator **ROOD KNIPPERT** 🚫.

De AudioClip schoonmaken

Gebruik een zachte, droge doek om de AudioClip schoon te maken. Het mag nooit ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.

Waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen en de inhoud van dit boekje voordat u uw AudioClip gebruikt. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional indien u een onverwachte werking van uw AudioClip of een ongewenst voorval ervaart.

Verstikkingsgevaar en risico op inslikken van kleine onderdelen

De AudioClip en de onderdelen daarvan dienen buiten bereik van kinderen te worden gehouden en eenieder die ze zouden kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel mee zouden kunnen toebrengen. Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer een klein onderdeel is ingeslikt.

Explosieven

De voedingsbron van uw AudioClip heeft onvoldoende energie om onder normale gebruiksomstandigheden brand te veroorzaken. De AudioClip is niet getest op naleving van de internationale normen met betrekking tot explosieve omgevingen. Wij raden u aan om de AudioClip niet te gebruiken op plaatsen met explosiegevaar.

⚠ Waarschuwingen

Röntgenfoto's, CT-/MRI-/PET-scans, elektrotherapie en operaties

Verwijder uw AudioClip voorafgaand aan het maken van een röntgenfoto, bij CT-/MRI-/PET-scans, elektrotherapie, operaties etc. De AudioClip kan beschadigen bij blootstelling aan sterke elektromagnetische velden.

Hitte en chemicaliën

Stel uw AudioClip nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door hem te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto. De AudioClip mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven. De chemicaliën in cosmetica, hairspray, parfum, aftershave lotion, zonnebrandlotion en insectenwerende middelen kunnen de AudioClip beschadigen. Verwijder daarom altijd uw AudioClip voordat u deze producten aanbrengt en laat ze drogen, voordat u uw AudioClip weer gebruikt.

Storing

De AudioClip is grondig getest op storing, volgens de strengste internationale normen. Er kan echter onvoorziene storing optreden tussen de AudioClip en andere apparaten (bijvoorbeeld sommige mobiele telefoons, zendapparatuur, alarmsystemen

in winkels en andere draadloze apparaten). Probeer in dat geval de afstand tussen de AudioClip en de storende apparatuur te vergroten.

Gebruik in het verkeer

Het gebruik van de AudioClip kan u afleiden. Let op uw omgeving wanneer u de AudioClip in gebruik hebt. Raadpleeg ter plaatse geldende verkeersregels betreffende het gebruik van communicatie-apparatuur in het verkeer.

Gebruik in vliegtuigen

Uw AudioClip is voorzien van Bluetooth®. De AudioClip mag niet aan boord van een vliegtuig worden gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door het cabinepersoneel.

Actieve implantaten

De AudioClip is grondig getest en gekenmerkt voor de menselijke gezondheid volgens internationale normen voor menselijke blootstelling (Specific Absorption Ratio – SAR), opgewekt elektromagnetisch vermogen en voltages in het menselijk lichaam.

De blootstellingswaarden bevinden zich ver onder de internationaal aanvaarde veiligheidslimieten voor SAR, opgewekt elektromagnetisch vermogen en voltages in het menselijk lichaam gedefinieerd in

Waarschuwingen

de normen voor menselijke gezondheid en co-existentie met actieve medische implantaten zoals pacemakers en hartdefibrillatoren.

Oplaadbare batterij

Probeer niet om de AudioClip te openen omdat u daarmee de batterij kunt beschadigen.

Probeer nooit zelf de batterij te vervangen. Wanneer de batterij aan vervanging toe is, lever uw apparaat dan in bij uw leverancier. De servicegarantie vervalt wanneer er tekenen zijn dat u zelf met het apparaat aan de slag bent gegaan.

De veiligheid met betrekking tot het opnieuw opladen van batterijen met behulp van een USB-connector wordt bepaald door de externe apparatuur. Indien de USB-connector wordt aangesloten op apparatuur die aan een wandcontactdoos zit, dan dient deze apparatuur te voldoen aan IEC-62368 (of IEC-60065, IEC-60950 tot 20 juni 2019) of andere vergelijkbare veiligheidsnormen.

Verbinding met externe apparatuur

De veiligheid van het gebruik van de AudioClip wanneer deze is verbonden met externe apparatuur wordt bepaald door die externe apparatuur. Indien de USB-connector wordt aangesloten op apparatuur die aan een wandcontactdoos zit, dan dient deze apparatuur te voldoen aan IEC-62368 (of IEC-60065, IEC-60950 tot 20 juni 2019) of andere vergelijkbare veiligheidsnormen.

Onbevoegd gebruik

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient uw AudioClip buiten bereik van kinderen te blijven of ieder ander die de bediening ervan over zou kunnen nemen.

Gebruik van het halskoord

Het halskoord is zo geconstrueerd dat het automatisch zal breken wanneer het tijdens het dragen per ongeluk ergens achter blijft haken. Probeer daarom nooit om het draagkoord op onbevoegde wijze in te korten of anderszins aan te passen. Het draagkoord mag niet gebruikt worden door kinderen jonger dan 36 maanden.

Mogelijke bijwerkingen

De non-allergene materialen in uw AudioClip kunnen in zeldzame gevallen

Waarschuwingen

huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken. Raadpleeg een arts als deze bijwerkingen optreden.

Compatibiliteit met mobiele telefoons

Op www.hearingsolutions.philips.com vindt u een lijst met mobiele telefoons die door Philips uitgebreid zijn getest en waarvan is vastgesteld dat ze op het moment van testen voldeden aan de minimum eisen voor compatibiliteit. Philips kan er echter geen verantwoordelijkheid voor nemen dat in het algemeen sprake is van dergelijke compatibiliteit. Heel specifiek kan Philips niet verantwoordelijk worden gesteld voor incompatibiliteit die het gevolg is van toekomstige updates van de mobiele telefoons, noch voor gevallen van incompatibiliteit waarvoor niet getest is of die niet uit de testresultaten zijn gebleken. Philips neemt geen financiële verantwoordelijkheid in de vorm van vergoedingen voor mobiele telefoons die niet naar verwachting functioneren. Voordat u een nieuwe mobiele telefoon aanschaft, adviseren wij u bovengenoemde lijst te raadplegen.

Technische gegevens

Naam/Model	AudioClip/AC1A
FCC/IC	FCC ID: 2ACAHAC01 IC: 11936A-AC01
Compatibiliteit	Philips 2,4 GHz draadloze hoortoestellen
Afmetingen	53 x 27 x 18 mm; gewicht 27 g
Gebruiksomstandigheden	Vochtigheid: 15% tot 93% relatieve vochtigheid, niet-condenserend Temperatuur: +5 °C tot +40 °C Opslag en transport: -20 °C tot +60 °C
Systeemfuncties	Headset mobiele telefoon (handsfree/headsetprofiel) & stereomuziek (A2DP) Externe microfoon/partnermicrofoon
Afstandsbediening van hoortoestel	Volume, programmaverandering en dempen van microfoons in hoortoestellen
Batterij ²	Doorsnee dagelijks gebruik 16 uur: 2 uur audio streaming + 2 uur telefoon + 12 uur stand-by 36 uur stand-by (ingeschakeld, zonder streaming) Laadtijd: 2 uur Totale batterijlevensduur: 80% capaciteit over na 720 laad-/oplacycli
Audiokwaliteit ³	Stereo/20 kHz samplefreq.
Audiobandbreedte ³	80 Hz – 10 kHz
Koppelinginformatie	Tot 8 gekoppelde Bluetooth [®] apparaten

Bluetooth® compatibel	Versie 4.2 + EDR
Bluetooth® profielondersteuning	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.3 Headsetprofiel (HSP) 1.2 Handsfreeprofiel (HFP) 1.6 inclusief ondersteuning voor Wideband Speech
Draadloos bereik ⁴	10 meter met Bluetooth® Klasse 2 apparatuur (bijv. mobiele telefoons) tot 20 meter tussen AudioClip en hoortoestellen
Streamingfrequentie	2,4 GHz (Bluetooth® band)
Emissie	Max 50 mW wat gelijk staat aan 17 dBm e.i.r.p. in naleving van alle relevante standaarden
Statusindicaties	LED's op de AudioClip. Akoestische signalen in hoortoestellen
HearSuite 2019.1 (of later)	Aanpassing van streamingprogramma's

² Bij gebruik van de meegeleverde oplader

³ Werkelijke audioprestatie afhankelijk van de hoortoestellen van de cliënt

⁴ Onbelemmerde gezichtslijn tussen de AudioClip en andere apparaten. Andere apparaten die in de 2,4GHz-band werken kunnen storing veroorzaken en het bereik beperken.

Technische informatie

Gebruiksomstandigheden

Vochtigheid: 15% tot 93% relatieve vochtigheid, niet-condenserend.

Temperatuur: +5°C tot +40°C

Opslag en transport: -20°C tot +60°C

De AudioClip bevat een radiozender ontvanger die gebruik maakt van Bluetooth® EDR, Bluetooth® Low Energy (BLE) en een gepatenteerde kortegolf-radiotechniek; alles opereert op 2,4 GHz. De 2,4 GHz radiozender is zwak en altijd onder de 50mW wat gelijk staat aan 17 dBm e.i.r.p in totale zendkracht.

De AudioClip voldoet aan internationale standaarden betreffende radiozenders, elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

In verband met de beperkte ruimte op de AudioClip zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit boekje.

VS en Canada

Dit apparaat bevat een radiomodule met de volgende certificerings-ID-nummers:

FCC ID: 2ACAHAC01

IC: 11936A-AC01

Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de RSS-normen voor licentievrijstelling van Industry Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en
2. dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, waaronder storing die een mogelijk ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking:







Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de voor naleving verantwoordelijke partij kunnen het recht doen vervallen om dit toestel te gebruiken.

Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

Opmerking: Uit tests is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de grenzen voor een digitaal apparaat Klasse B, conform deel 15 van het FCC-reglement. Deze grenzen zijn bedoeld om bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie. Ook kan het radiofrequente energie uitstralen. Indien het apparaat niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als het apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of tv-ontvangst, hetgeen kan worden gecontroleerd door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Stel de ontvangende antenne opnieuw in of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander stroomcircuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Beschrijving van symbolen die in dit boekje of op de verpakking gebruikt worden

	<p>Waarschuwingen Tekst aangeduid met een waarschuwingsymbool moet worden gelezen voordat het product wordt gebruikt.</p>
	<p>Fabrikant Het product is geproduceerd door de fabrikant waarvan de naam en het adres naast het symbool vermeld staan. Dit geeft aan wie de fabrikant van een medisch apparaat is, zoals vastgelegd in EU-voorschriften 90/385/EEC, 93/42/EEC en 98/79/EC.</p>
	<p>CE-markering Dit product voldoet aan de Medical Device Directive 93/42/EEC.</p>
	<p>Elektronisch afval (WEEE) Recycle uw hoortoestellen, accessoires of batterijen volgens lokale regelgeving of lever ze als afval in bij uw hoorzorgprofessional. Elektronische apparatuur valt onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afval en elektronischeapparatuur (waste and electrical equipment, WEEE).</p>
	<p>Regulatory Compliance Mark (RCM) Dit product voldoet aan de eisen voor elektrische veiligheid, EMC en radiospectrum voor producten bestemd voor de Australische of Nieuw-Zeelandse markt.</p>
	<p>Bluetooth® logo Geregistreerd handelsmerk van Bluetooth® SIG, Inc. Gebruik daarvan vereist een licentie.</p>

<p>Voldoet aan IMDA- normen DA103820</p>	<p>IMDA-label Singapore Geeft aan dat het apparaat voldoet aan de normen en specificaties gepubliceerd door de Info-Communications Media Development Authority (IMDA) en compatibel is met de openbare telecommunicatienetwerken in Singapore en geen radiofrequente storing veroorzaakt bij andere bevoegde radiocommunicatienetwerken.</p>
<p>Nominale ingang: 5,0 V 0,4 A</p>	<p>Stopcontact</p>
<p> 201-171023</p>	<p>Japan TELEC-label “R” geeft een certificeringsmarkering voor radioapparatuur aan.</p>
<p> TA-2017/2336</p>	<p>Zuid-Afrika ICASA-label Geeft aan dat het apparaat in Zuid-Afrika is gecertificeerd en gehomologeerd.</p>
<p></p>	<p>Droog houden Geeft aan dat het een medisch apparaat betreft dat vrij van vocht moet blijven.</p>
<p></p>	<p>Waarschuwingssymbool Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor waarschuwingen en adviezen.</p>
<p></p>	<p>Catalogusnummer Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan zodat het medisch apparaat geïdentificeerd kan worden.</p>
<p></p>	<p>Serienummer Geeft het serienummer van de fabrikant aan zodat een specifiek medisch apparaat geïdentificeerd kan worden.</p>

	<p>CTN CTN is een uniek onderdeelnummer voor verkopers en klanten om elk product met de Philips-merknaam te identificeren.</p>
	<p>FW In het product gebruikte firmwareversie.</p>
	<p>China CMIIT ID Geeft aan dat het apparaat in China is gecertificeerd.</p>
	<p>Dubbele isolering Geeft aan dat de voeding van het product dubbel geïsoleerd is. Dit betekent een zeer laag risico op storingen door één enkel defect, d.w.z. deze storingen kunnen niet optreden.</p>
	<p>Gebruik binnenshuis Geeft aan dat het product geschikt is voor gebruik binnenshuis.</p>

REACH Verklaring:

REACH vereist Philips Hearing Solutions om informatie te verstrekken over de chemische inhoud voor zeer risicovolle stoffen (SVHC, Substances of Very High Concern) indien deze in meer dan 0,1% van het productgewicht aanwezig zijn. In dit HearLink product zijn geen stoffen aanwezig van de REACH SVHC-lijst die op het moment van productie van toepassing is. Recentere informatie is te vinden op de website www.hearingsolutions.philips.com/REACH.

De fabrikant verklaart dat deze AudioClip (AC1A) voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.hearingsolutions.philips.com

CE



Afval van elektronische
apparatuur dient te
worden weggegooid
volgens de lokale
voorschriften.



Bluetooth®

< >
8,15 mm

< >
19 mm >
Tijdelijke
aanduiding
voor
FSC-logo
Paper
FSC® C043871

< >
9,0 mm >
< 15 mm >

www.hearingsolutions.philips.com



Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door of voor en wordt verkocht onder verantwoordelijkheid van SBO Hearing A/S, en SBO Hearing A/S is de garantiegever met betrekking tot dit product.



0000203636000001