




## Koppelen van uw ConnectClip met uw processor(s)


---

1. Zorg dat ConnectClip uit staat.

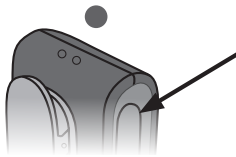


Houd de multitoets ongeveer 6 seconden ingedrukt tot stroomindicator **UIT** ●

2. Zet de processor(s) **UIT**.

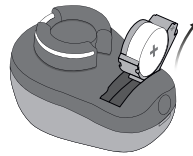

(open de batterijlade)

3. Zet de processor(s) **AAN**.

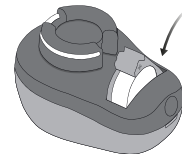

(sluit de batterijlade)

4. De processor(s) is/ zijn nu **gereed** voor een eerste verbinding met de ConnectClip voor ongeveer 3 minuten

5. Zet ConnectClip **AAN**.




Houd de multi-toets ongeveer 3 seconden ingedrukt tot stroomindicator **CONTINU** groen ●

6. ConnectClip zoekt nu naar uw processor(s).



Statusindicator **GEEL** KNIPPEREN ●

7. Plaats ConnectClip en processor(s) dicht bij elkaar

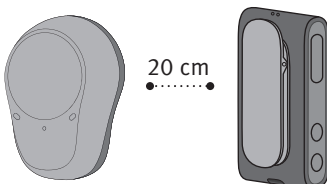

(max. afstand 20 cm)

8. Verbinding tot stand gebracht met processor(s)




wordt aangegeven door statusindicator **CONTINU** GEEL ●




## Koppelen van uw iPhone met uw processor(s)

### 1. Instellingen

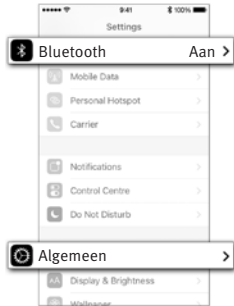


Ga naar de instellingen van uw iPhone. Controleer of Bluetooth aan staat. Selecteer vervolgens “Algemeen”.

### 2. Algemeen

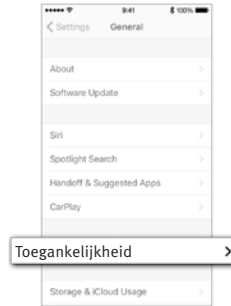


Selecteer “Toegankelijkheid” in het scherm “Algemeen”.

### 3. Toegankelijkheid

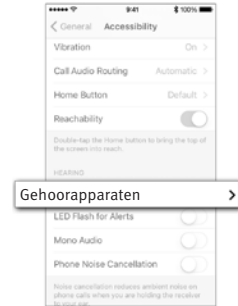


Kies “Gehoorapparaten” op het scherm “Toegankelijkheid”.

### 4. Voorbereiden

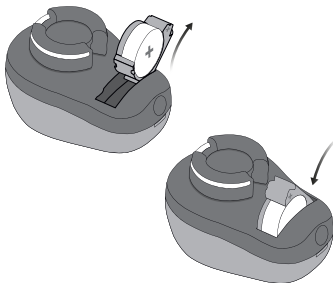


Open en sluit de batterijlade van de processor(s) en plaats ze dicht bij uw iPhone. De processor(s) blijft/blijven 3 minuten in de koppelingsmodus.

### 5. Selecteren

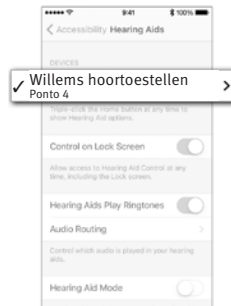

Uw iPhone detecteert de te koppelen processor(s). De gedetecteerde apparaten verschijnen in uw iPhone-lijst. Kies uw processor(s).

### 6. Koppeling bevestigen

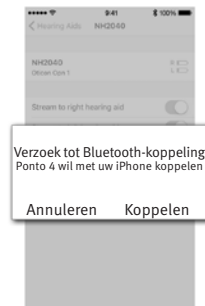


Bevestig de koppeling. Als u twee processors heeft, is koppelingsbevestiging voor beide toestellen nodig.

## Koppelen van uw afstandsbediening met uw processor(s)

---

### 1. Oticon afstandsbediening voorbereiden

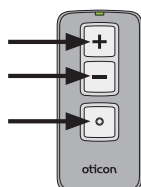


Houd alle toetsen 5 seconden ingedrukt. De status-LED gaat twee keer groen knipperen.

### 2. Bevestigst gereed voor koppelen




De status-LED gaat vervolgens 10 seconden continu groen branden om te bevestigen dat de afstandsbediening gereed is voor koppelen.

### 3. Zet de processor(s) UIT.

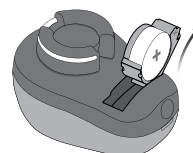


(open de batterijlade)

### 4. Zet de processor(s) AAN.

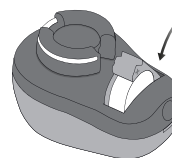

(sluit de batterijlade)

### 5. Plaats de afstandsbediening en de processor(s) dicht bij elkaar (maximale afstand 20 cm)

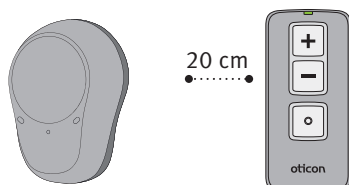

De processor(s) is/zijn gereed voor een eerste verbinding met de afstandsbediening voor ongeveer 3 minuten.

### 6. Koppel de afstandsbediening met de processor(s)



Druk kort op een willekeurige toets op de afstandsbediening om deze automatisch te laten koppelen met de processor(s).

### 7. Verbinding tot stand gebracht met processor(s)




Als het koppelen voltooid is, brandt het statuslampje groen voor ongeveer 10 seconden.


## Koppelen van uw TV Adapter met uw processor(s)

---

1. Zorg ervoor dat de TV Adapter aan staat.

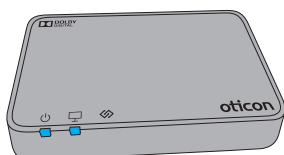


2. Zet de processor(s) UIT.

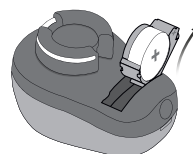

(open de batterijlade)


3. Zet de processor(s) AAN.

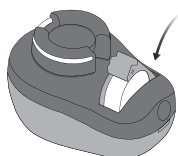

(sluit de batterijlade)

4. De processor(s) is/zijn nu gereed voor een eerste verbinding met de TV Adapter voor ongeveer 3 minuten

5. Plaats beide processors in de buurt van of bovenop de TV adapter.

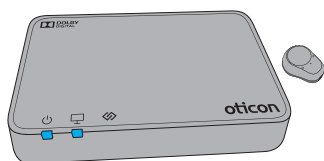

6. Verbinding tot stand gebracht met processor(s)

TV Adapter	Beschrijving
	Koppeling voltooid

Het koppelen is voltooid wanneer de stroomindicator en de TV-indicator gedurende 30 seconden blauw worden.