


Informacje i wsparcie

Więcej informacji o aplikacji RemoteCare znajdziesz na stronie www.oticon.pl/support/remote-care

- Co zrobić, aby sesja się udała
- Filmy instruktażowe
- Najczęściej zadawane pytania
- Rozwiązywanie problemów
- Instrukcje krok po kroku

...i wiele więcej

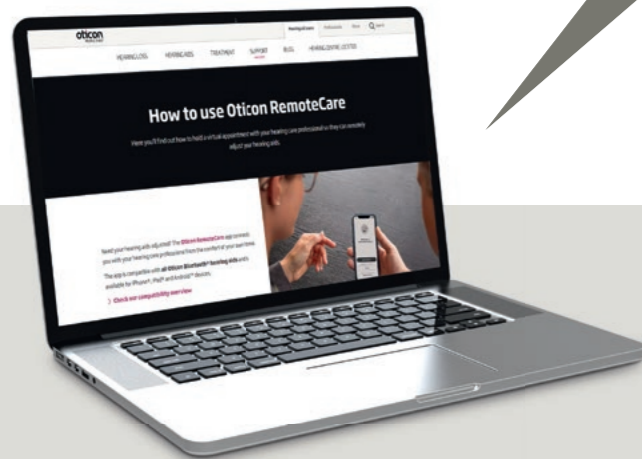

Skontaktuj się z najbliższym protetykiem słuchu:

 **Oticon Medical AB**
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Sweden
Tel: +46 31 748 61 00

Oticon RemoteCare



Wizyta kontrolna na wyciągnięcie ręki

239589PL / 2021.08

Zdalna komunikacja z Twoim protetykiem słuchu – w czasie rzeczywistym!

Aplikacja RemoteCare pozwala pacjentom:

- Uczestniczyć w profesjonalnych konsultacjach dotyczących ich procesora dźwięku z zacisza własnego domu - lub dowolnego innego miejsca
- Widzieć, słyszeć, wysyłać wiadomości i rozmawiać ze swoim protetykiem słuchu w trakcie zdalnej wizyty
- Uzyskać zdalne dostrojenie procesora dźwięku, które zapewni najlepsze wrażenia słuchowe
- Testować nowe ustawienia procesora dźwięku w trakcie rozmowy z protetykiem słuchu
- Uzyskać od protetyka słuchu porady i wskazówki dotyczące procesorów dźwięku

Pobierz RemoteCare ze sklepu App Store lub Google Play



Apple, logo Apple, iPhone, iPad oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Android, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Krótki przewodnik

Po sparowaniu procesora dźwięku Ponto 5 z iPhone® lub innym smartfonem i pobraniu aplikacji RemoteCare od pierwszej zdalnej wizyty kontrolnej dzielą Cię już tylko trzy kroki.



Zarejestruj się i zaloguj

Połącz się z procesorami dźwięku

Połącz się z protetykiem słuchu

Wymagania techniczne: stabilne łącze internetowe, Ponto 5, umówiona wizyta u protetyka słuchu, telefon z Androidem i systemem operacyjnym 8.0 lub nowszym LUB iPhone 5s lub nowszy z wersją iOS co najmniej 12.0 oraz Apple ID i hasłem. Szczegółowe informacje znajdziesz w Instrukcji obsługi.

Intuicyjna, łatwa w obsłudze aplikacja

Aplikacja RemoteCare to bezpieczne, łatwe w obsłudze narzędzie z instrukcją krok po kroku oraz następującymi funkcjami:



Zdalne dostrajanie
Protetyk słuchu będzie mógł wyregulować ustawienia procesorów dźwięku na odległość.



Rozmowy wideo
Pozwalają protetykowi słuchu i pacjentowi widzieć i słyszeć się nawzajem, dzięki czemu wizyty są bardziej osobiste.



Rozmowy telefoniczne
Jeśli wolisz, możesz rozmawiać z protetykiem słuchu przy wyłączonej kamerce.



Wiadomości tekstowe
Za pomocą czatu można wysłać szybką wiadomość do protetyka słuchu w czasie wizyty.