

Instrukcja przygotowania do procedury MONO

Części implantu i narzędzia jednorazowego użytku

		
<p>220701 Zestaw chirurgiczny MONO A: Kaniuła B: Wiertło MONO C: Miękki krążek na czas gojenia D: Wskaźnik wprowadzenia</p>	<p>Sztanca biopsyjna Ø 4 mm lub Ø 5 mm Nie jest dostarczana przez Oticon Medical</p>	<p>M52169 Implant Ponto BHX, 4 mm, z zaczepem, 9 mm</p>

Przyrządy wielorazowego użytku

				
<p>M50428 Wskaźnik procesora dźwięku</p>	<p>M52143 Miarka</p>	<p>M52196 Dwustronny disektor</p>	<p>M51695 Prowadnica zaczepu, maszynowa</p>	<p>M51690 Klucz kontrolujący</p>

Części zapasowe

	
<p>M52170 Implant Ponto BHX, 4 mm, z zaczepem, 12 mm</p>	<p>M52171 Implant Ponto BHX, 4 mm, z zaczepem, 14 mm</p>

Przygotowanie zabiegu powinno zawsze obejmować przyszykowanie pomocniczych części implantu z zaczepami różnej długości, aby odpowiadały grubości tkanki miękkiej. Należy rozważyć, czy istnieje zapotrzebowanie na części i narzędzia zapasowe wykorzystywane w alternatywnej technice.*



Uwaga

Wiertła MONO należy zawsze używać razem z kaniulą. Kaniuła zatrzymuje wiertło i zapobiega wierceniu głębszemu niż planowane.

Instrukcja przygotowania do chirurgii nie zastępuje Poradnika chirurgicznego dla systemu Ponto ani dodatku opisującego zabieg w technice MONO. Należy przeczytać Poradnik chirurgiczny oraz Dodatek i zapoznać się ze wskazaniami dla pacjentów, przeciwwskazaniami i zalecanymi procedurami włącznie z ostrzeżeniami i uwagami. *Pełną gamę produktów można znaleźć w Katalogu produktów systemu Ponto™. Dostępność produktów może się różnić w zależności od rynku.