





Visão geral

AVISO IMPORTANTE: Familiarize-se com essas informações e as instruções de utilização antes de usar o(s) aparelho(s).

Frente

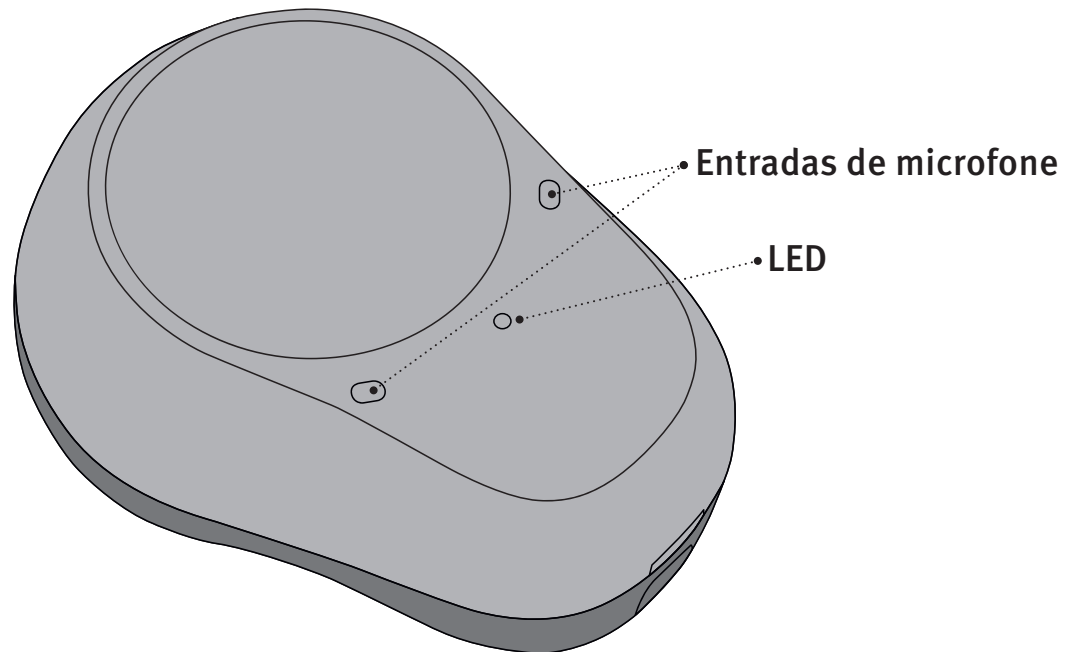

Parte de trás

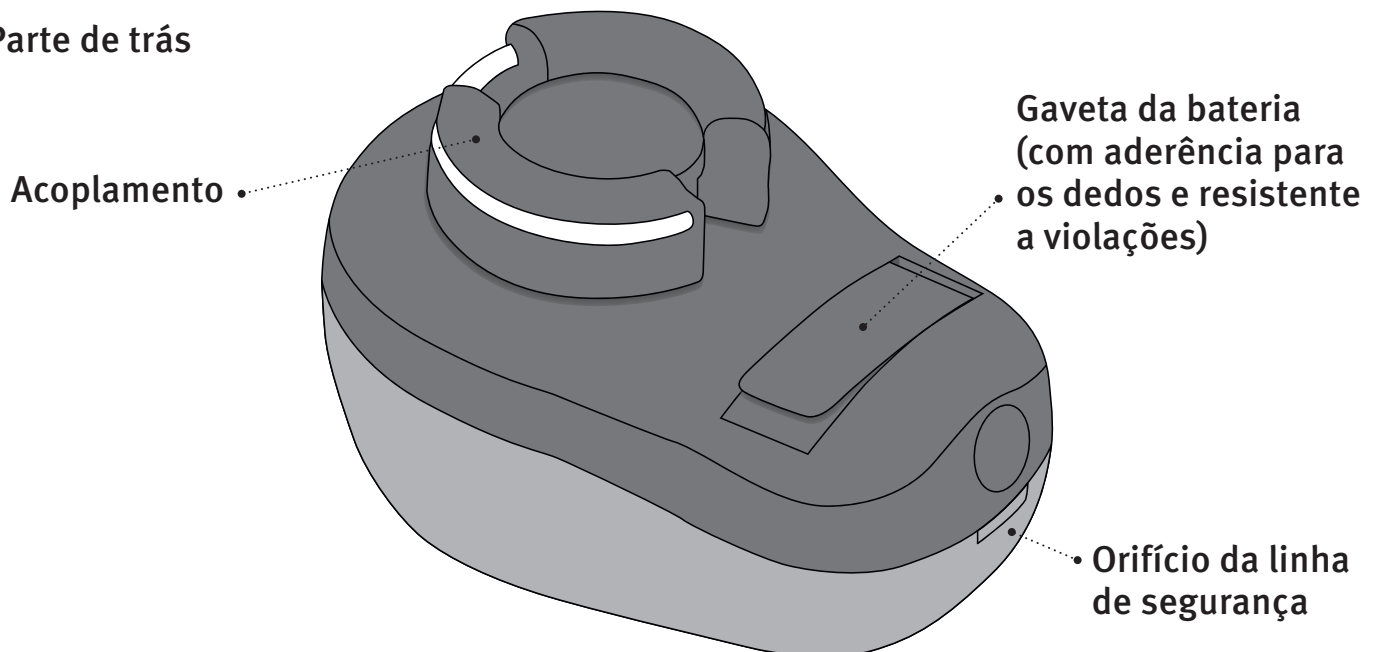


Ligar e desligar o aparelho

A gaveta da bateria também é usada para ligar e desligar o aparelho. Para economizar a bateria, certifique-se de que o aparelho esteja desligado quando você não o estiver usando.


Ligar

Feche a gaveta da bateria com a bateria no local.

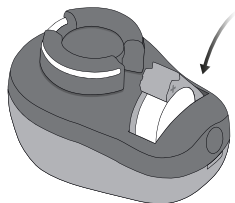





Desligar

Abra a gaveta da bateria.

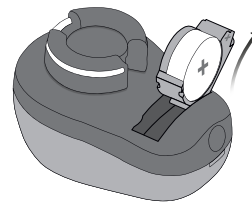

AVISO IMPORTANTE: Não use a função silenciar como forma de desligá-lo, pois o aparelho ainda usa corrente da bateria neste modo.

Conectar e desconectar o aparelho

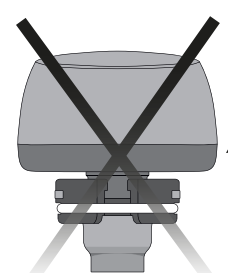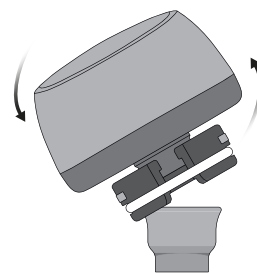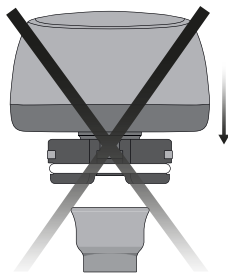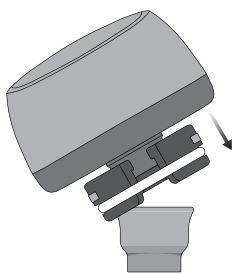

Conexão

Para conectar o processador sonoro de forma segura e confortável, incline-o levemente e empurre-o cuidadosamente no abutment. Observe que é importante para manter o cabelo afastado quando o processador sonoro for conectado ao abutment.

Desconexão


O processador sonoro é desconectado com segurança e conforto, inclinándolo com cuidado para afastá-lo do abutment.



Substituição da bateria


Quando é hora de trocar a bateria, você ouvirá três bipes, repetidos em intervalos moderados até que a bateria acabe.

1. Remover

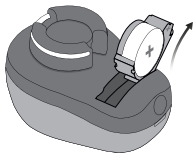

Abra completamente a gaveta de bateria. Remova a bateria.


2. Prepare

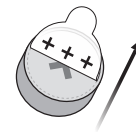

Remova a etiqueta adesiva do lado + da bateria nova.


DICA: Espere 2 minutos para que a bateria possa ventilar; assim, ela funcionará melhor.

3. Inserir

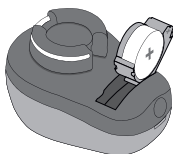

Insira a bateria nova na gaveta de bateria. Certifique-se de que o lado + fique para cima.


4. Fechar

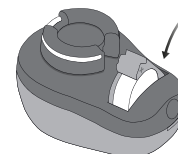

Feche a gaveta de bateria. O aparelho auditivo reproduzirá um jingle pelo adaptador.

DICA: A ferramenta Multiuso pode ser usada para trocar a bateria. Use a extremidade magnética para remover e inserir a bateria. A ferramenta Multiuso é fornecida pelo seu fonoaudiólogo.

AVISO IMPORTANTE: A sua ferramenta Multiuso tem um ímã embutido. Mantenha a ferramenta Multiuso a, no mínimo, 30 cm de distância de cartões de crédito e outros dispositivos magneticamente sensíveis.

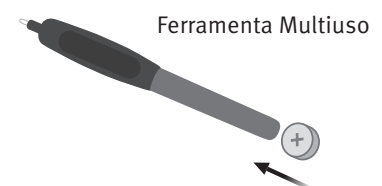

Manutenção do processador sonoro

Um pano seco ou um papel toalha pode ser usado para limpar o exterior do processador sonoro. Deve-se prestar uma atenção especial ao acoplamento, para remover qualquer sujeira ou cabelo emaranhado.

Observe que água ou líquidos não devem ser usados ao limpar o seu processador sonoro – ele não é à prova d'água. Se o processador sonoro se molhar acidentalmente, abra a gaveta da bateria e deixe o processador sonoro secar.

É importante proteger ou remover o processador sonoro durante as visitas ao cabeleireiro e ao aplicar produtos para os cabelos. Você pode usar a tampa de suporte especial fornecida com o seu processador sonoro para proteger o seu abutment.

O processador sonoro é programado para se adaptar a você pessoalmente e não deve ser usado por terceiros.



Guia de resolução de problemas

Problemas comuns e suas possíveis soluções		
Sintoma	Causas possíveis	Soluções
Nenhum som	Bateria gasta	Trocar a bateria
	O processador sonoro está em espera (mudo)	Pressione no controle remoto ou consulte o Oticon ON App
Som intermitente ou reduzido	Sujeira no acoplamento ou na entrada de som	Limpar o processador sonoro
	Umidade	Abrir a gaveta da bateria e deixar o processador sonoro secar na sua caixa
	Bateria gasta	Trocar a bateria
Zunido	O processador sonoro está tocando algo	Verificar se o processador sonoro está corretamente conectado e não está tocando em nada
Problemas no pareamento com um dispositivo Apple	Falha de conexão Bluetooth	1) Desparear seu(s) dispositivo(s) (Configurações→Geral→Acessibilidade→Dispositivos auditivos→Dispositivos→Esquecer este dispositivo). 2) Desligue e religue o Bluetooth. 3) Abra e feche a gaveta da bateria no(s) dispositivo(s). 4) Pareie novamente o(s) dispositivo(s) (ver capítulo: “Parear instrumentos com o iPhone”).
	Apenas um aparelho auditivo pareado	

Se nenhuma das soluções acima funcionar, peça assistência à sua clínica.