





Pareando o seu ConnectClip com seu(s) aparelho(s)

1. Certifique-se de que o ConnectClip esteja desligado.

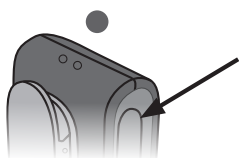


Pressione e segure o botão multifuncional por aprox. 6 segundos até que o **indicador de energia** fique **DESLIGADO** ●

2. **DESLIGUE** o(s) aparelho(s).

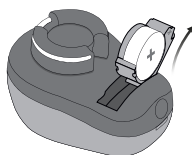

(abra o compartimento de bateria)


3. **LIGUE** o(s) aparelho(s).

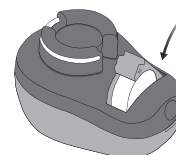

(feche o compartimento de bateria)

4. Agora, o aparelho estará pronto para uma primeira conexão com o ConnectClip por cerca de 3 minutos

5. **LIGUE** o ConnectClip.

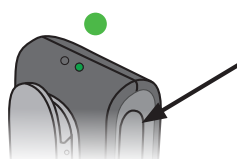


Pressione e segure o botão multifuncional por aprox. 3 segundos até que o **indicador de energia** fique **VERDE CONTÍNUO** ●

6. Agora, o ConnectClip irá buscar seus aparelhos auditivos.




Indicador de status **AMARELO PISCANDO** ●

7. Posicione o ConnectClip e o(s) aparelho(s) próximos uns dos outros

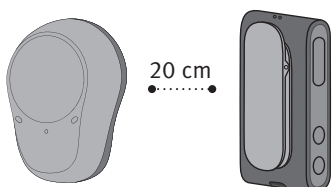

(distância máxima de 20 cm)


8. Conexão estabelecida com o(s) aparelho(s)

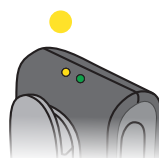

indicada pelo indicador de status **AMARELO CONTÍNUO** ●


Pareando o seu iPhone com o(s) seu(s) aparelho(s)

1. Configurações

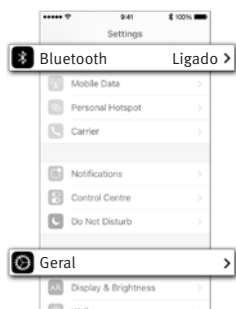


Acesse as configurações do seu iPhone. Verifique e certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado. Depois, selecione “Geral”.

2. Geral

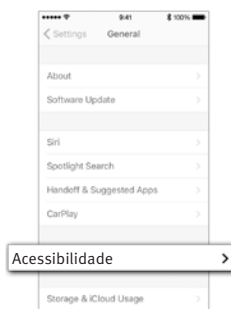


Na tela “Geral”, escolha “Acessibilidade”.

3. Acessibilidade

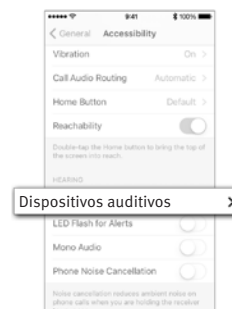


Na tela “Acessibilidade”, escolha “Dispositivos auditivos”.

4. Preparar

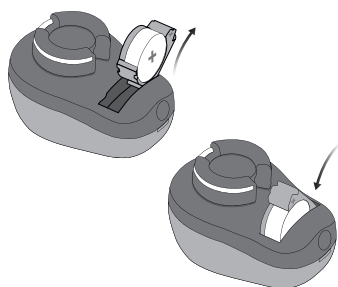


Abra e feche o compartimento da bateria do(s) aparelho(s), e posicione-os próximo ao seu iPhone. O(s) aparelho(s) permanecem no modo de pareamento durante 3 minutos.

5. Selecionar

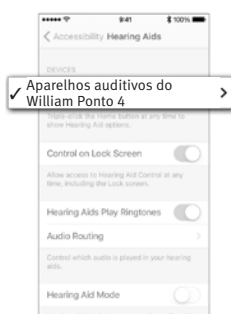

O seu iPhone irá detectar o(s) aparelho(s) para pareamento. Os dispositivos detectados aparecerão na lista do seu iPhone. Escolha o(s) aparelho(s).


6. Confirmar pareamento

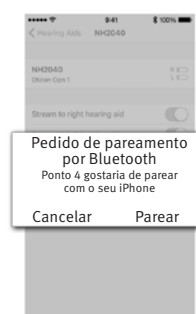

Confirmar pareamento. Se possuir dois aparelhos, uma confirmação de pareamento é necessária para cada aparelho.

Pareando o seu controle remoto com seu(s) aparelho(s)

1. Prepare o controle remoto

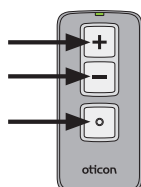

Pressione e segure o todos os botões por 5 segundos. O LED de status piscará na cor verde duas vezes.


2. Pronto para pareamento

Então, o LED de status se




acenderá na cor verde durante cerca de 10 segundos para confirmar que o controle remoto está pronto para o pareamento.

3. DESLIGUE o(s) aparelho(s).

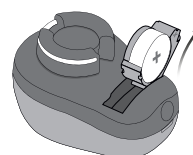


(abra o compartimento de bateria)

4. LIGUE o(s) aparelho(s).

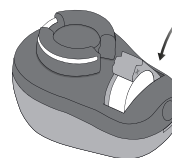


(feche o compartimento de bateria)

5. Posicione o Controle Remoto e o(s) aparelho(s) próximos um do outro (distância máx. 20 cm)

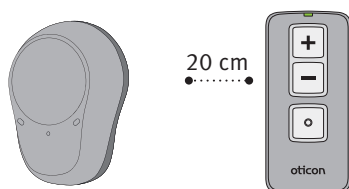

O(s) aparelho(s) estarão prontos para uma primeira conexão com o Controle Remoto por cerca de 3 minutos.

6. Pareie o controle remoto com o(s) aparelho(s)

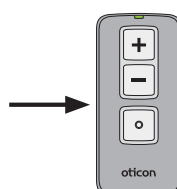

Pressione brevemente qualquer tecla no controle remoto para pareá-lo automaticamente com o(s) aparelho(s).

7. Conexão estabelecida com o(s) aparelho(s)




Quando o pareamento for concluído, a luz de status acende na cor verde por cerca de 10 segundos.




Pareando o seu Adaptador de TV com seu(s) aparelho(s)


1. Confirme se o Adaptador de TV está ligado.

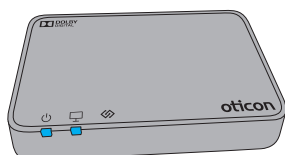

2. DESLIGUE o(s) aparelho(s).
(abra o compartimento de bateria)

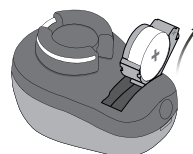


3. LIGUE o(s) aparelho(s).

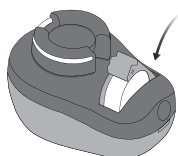

4. Agora, o aparelho estará pronto para uma primeira conexão com o Adaptador de TV por cerca de 3 minutos

(feche o compartimento de bateria)

5. Posicione o(s) aparelho(s) perto ou na parte superior do Adaptador de TV.

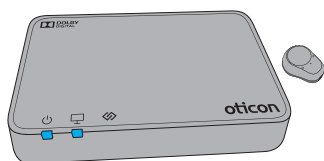

6. Conexão estabelecida com o(s) aparelho(s)

Adaptador de TV	Descrição
	Pareamento concluído

O pareamento estará concluído quando o indicador de energia e o indicador de TV mudarem para a cor azul por cerca de 30 segundos.