

22.^a april 2020

Covid-19 och rengöring av ljudprocessorn Neuro 2: Information för alla Neuro 2-användare och vårdare

Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är coronaviruset ett respiratoriskt virus som kan överföras från en infekterad person, huvudsakligen genom droppar från hosta eller nysningar, eller droppar från näsan och munnen. Det kan också överföras av personer som inte har några symptom. Riktlinjer och råd om hygien och skydd mot spridning av Covid-19 finns på WHO:s webbplats "[Coronavirus disease \(Covid-19\) – advice for the public](#)".

Under coronaviruspandemin (Covid-19) har användare och vårdare undrat hur man bäst rengör ljudprocessorn. Informationen nedan svarar på dessa frågor. Kontakta din CI-klinik om du behöver mer information.

Följande instruktioner för "Rengöring av din ljudprocessor" räcker för att säkerställa optimal, daglig skötsel. Om du tror att din ljudprocessor är kontaminerad av Covid-19, läs det andra avsnittet, "**Desinficera din ljudprocessor**".

1. Rengöring av din ljudprocessor

- Tvätta alltid händerna innan du hanterar din ljudprocessor och dess tillbehör. Dessa instruktioner från WHO [visar hur man tvättar händerna på bästa sätt](#).
- Rengör och torka din ljudprocessor enligt anvisningarna i bruksanvisningen (skötsel och underhåll / rengöring). Vi rekommenderar att du rengör din ljudprocessor och dess komponenter varje dag:
 - Håll ljudprocessorn över en mjuk/torr yta för att undvika skador om du råkar tappa den.
 - Rengör ljudprocessorn och dess spole med en mjuk, torr trasa.
 - Borsta försiktigt bort allt damm och död hud från mikrofonöppningarna med en mjuk borste.*Viktigt:* Använd inte frätande eller slipande substanser för att rengöra din ljudprocessor.
 - Audiologiska rengöringsdukar kan användas för att lösa upp öronvax och ta bort svett..
- Ytterligare information och praktiska tips om rengöring av din ljudprocessor finns på [dessa korta filmer](#) från Oticon Medical.

Inga ytterligare rengöringsinstruktioner krävs under den nuvarande pandemin.

2. Desinficering av din ljudprocessor

Information

Genom att följa riktlinjerna för desinficering behöver du normalt sett inte desinficera din ljudprocessor ofta. Om du tror att din ljudprocessor behöver desinficeras, följ instruktionerna i detta avsnitt. Det är bara en rekommendation baserad på nuvarande kunskaper. Effektiviteten av detta förfarande har inte testats på Covid-19. Långsiktig användning av desinfektionsmedel på ljudprocessorn har inte testats.

- Oticon Medical rekommenderar bruksfärdiga rengöringsdukar med en lösning av 70% isopropylalkohol och 30% avjoniserat vatten. Om dessa våtservetter inte finns att tillgå i ditt område kan du använda torra våtservetter och doppa dem i ett liknande desinfektionsmedel.



- The Environmental Protection Agency (EPA) i USA har givit ut en [lista på lämpliga desinfektionsmedel som kan användas mot SARS-CoV-2](#) (coronavirus). Denna information är bara avsedd som en riktlinje.
- Andra blandningar än 70% isopropyl-alkohol och 30% avjoniserat vatten har inte testats av Oticon Medical och kan leda till materialnedbrytning, missfärgning och sprickor i höljet efter en enda användning. Om du upptäcker missfärgning under rengöring ska du omedelbart sluta applicera desinfektionsmedlet och låta all resterande vätska på enhetens yta torka. Användning av någon annan lösning än 70% isopropanol anses som missbruk och kan upphäva ljudprocessorns garanti.

Desinficeringsförfarande

Instruktionerna nedan är baserade på EPA-listan och är endast avsedda som en riktlinje. Läs alltid desinfektionsmedlets bruksanvisning och förvara det utom räckhåll för barn.

Tvätta händerna noga före och efter desinficeringen eller använd rena engångshandskar. Arbeta på en ren yta.

Material

- Använd torkduk, en mjuk trasa, bomullspinnar eller en bomullstuss för att applicera desinfektionsmedlet.
- Skrubba kontakten med en ren tandborste eller annan mjuk borste.
- Torka enheten med en mjuk, torr trasa.

Instruktioner

1. Tvätta händerna och rengör ljudprocessorn enligt beskrivningen i avsnitt "1. Rengöring av din ljudprocessor".
2. Ta bort alla tillbehör från ljudprocessorn.
3. Använd fuktiga våtservetter / en mjuk duk / bomullstussar för att desinficera enhetens yta och tillbehören med 70% alkohollösning i ca 20–30 sekunder. Sänk inte ned eller doppa ljudprocessorn i någon vätska.
4. Låt vätskan torka på enhetens yta. Torka inte av ytan omedelbart eftersom desinfektionsmedlet behöver tid på sig att verka för bättre resultat:
 - Applicera inte för mycket vätska på ytan då detta kan skada ljudprocessorn
 - Var särskilt försiktig när du applicerar desinfektionsmedlet nära öppningarna
5. Om ett rekommenderat desinfektionsmedel används och inte i för stor mängd torkar det av sig självt. Vid behov kan en mjuk och torr duk användas för att torka bort eventuell resterande vätska
6. Ta bort alla tillbehör från ljudprocessorn.
7. Desinficeringen är nu klar. Tvätta alltid händerna efter desinficeringen.

Kontakta din CI-klinik om du har några frågor eller behöver mer information.

