





Översikt

VIKTIG INFORMATION: Läs igenom denna information samt bruksanvisningen innan du börjar använda apparaten(erna).

Framsida

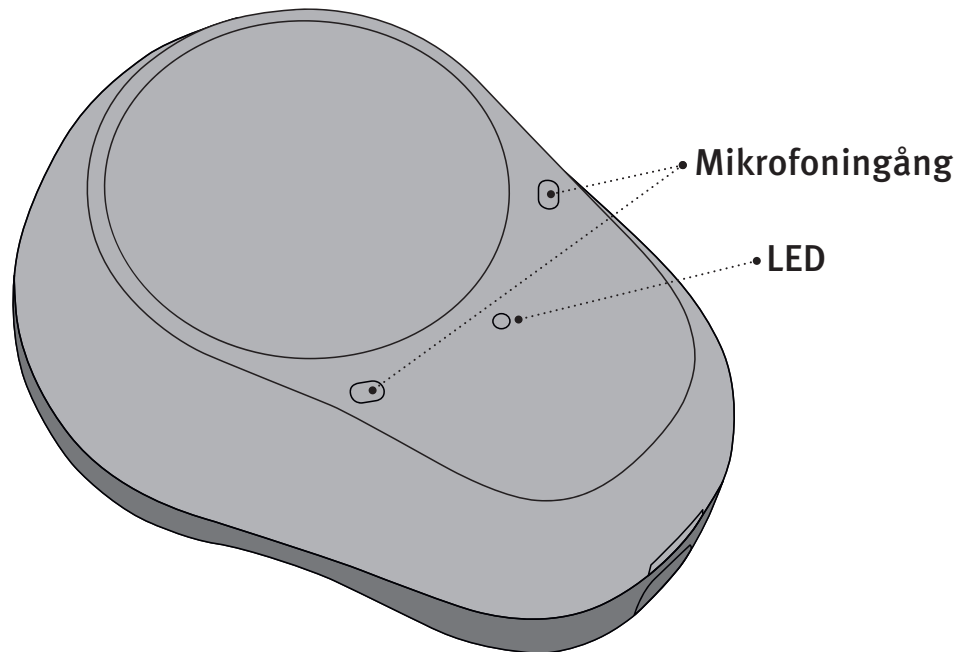

Baksida

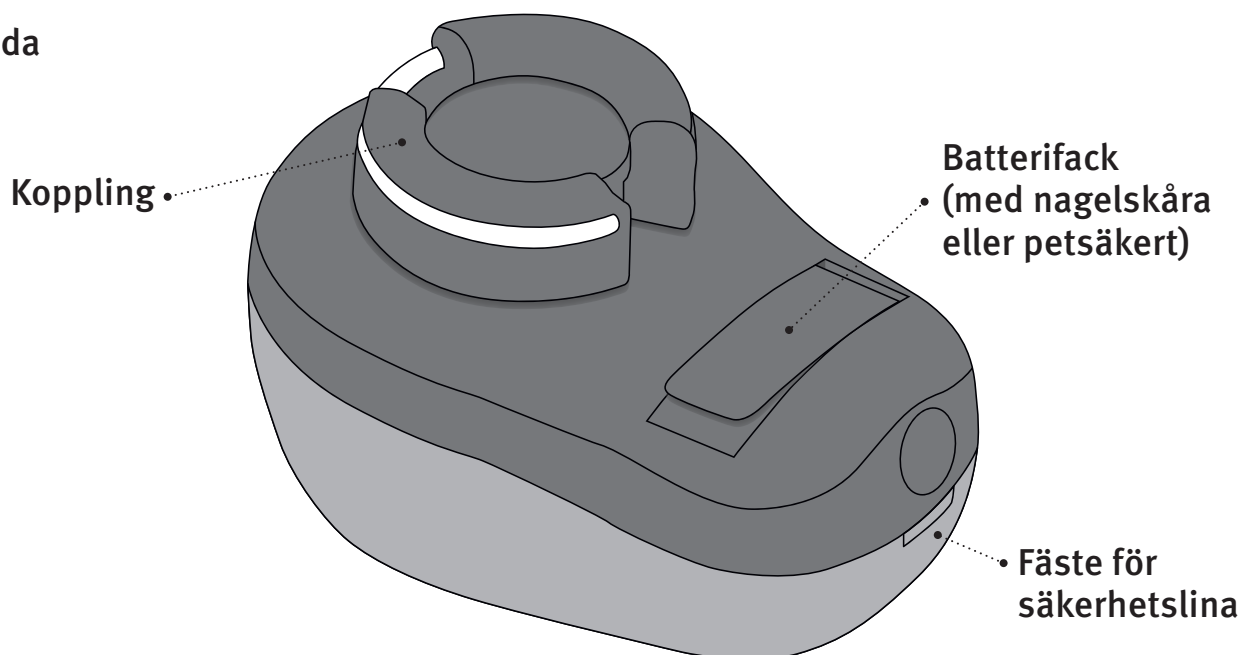




Sätta på och stänga av hörapparaten

Batterifacket används även för att starta och stänga av apparaten. Säkerställ att apparaten är avstängd när den inte används för att spara på batteriet.


Starta

Stäng batterifacket med batteriet på plats.

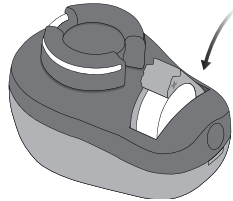





Stäng av

Öppna batterifacket.

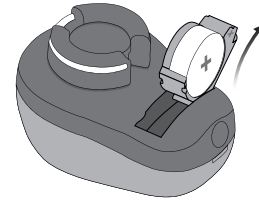

VIKTIG INFORMATION: Använd inte tyst läge för att stänga av apparaten då den inte är helt avstängd i detta läge utan drar fortfarande ström.

Anslut och koppla loss apparaten

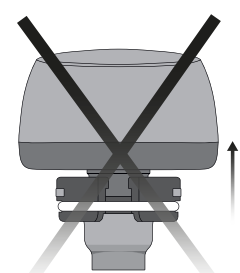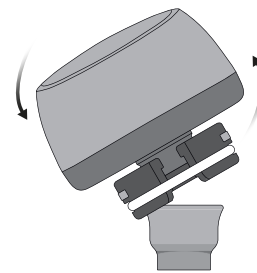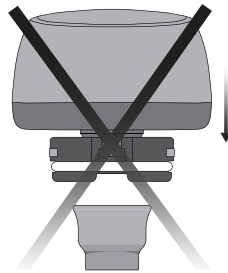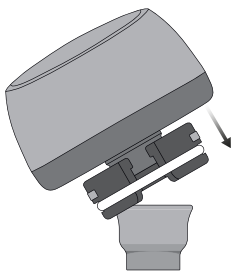

Anslut

Ljudprocessorn ansluts tryggt och bekvämt genom att man vinklar den en aning och sedan försiktigt trycker fast den på distansen. Det är viktigt att hålla undan håret när du trycker fast ljudprocessorn på distansen.


Koppla loss

Ljudprocessorn frångkopplas tryggt och bekvämt genom att man försiktigt vinklar den bort från distansen.

Byta batteri


När det börjar bli dags att byta batteriet hörs tre indikationssignaler med jämna mellanrum tills batteriet är helt slut.

1. Ta ut

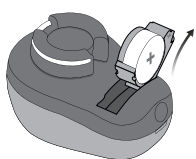

Öppna batterifacket helt.
Ta ut batteriet.


2. Aktivera

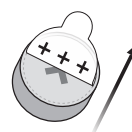

Ta bort klisterlappen från batteriets pluspol.


TIPS: Vänta 2 minuter för att lufta batteriet för bästa resultat.

3. Sätta i

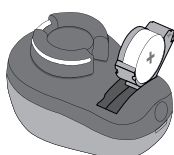

Sätt i det nya batteriet i batterifacket.
Se till att batteriets +pol är korrekt.


4. Stäng

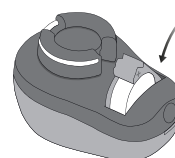

Stäng batterifacket. Hörapparaten spelar en startmelodi då den startar.

TIPS: Du kan använda Multi-verktyget för att byta batteri.
Ta ut och sätt i batterier med hjälp av magneten i änden.
Fråga din audionom om Multi-verktyget.

VIKTIG INFORMATION: Multi-verktyget har en inbyggd magnet.
Förvara Multi-verktyget på minst 30 cm avstånd från kreditkort och andra magnetiskt känsliga enheter.

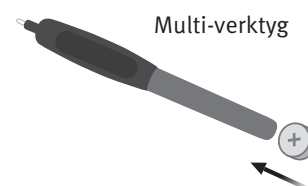

Underhåll av ljudprocessorn

Ljudprocessorn rengörs utvändigt med en torr rengöringsduk eller en våtservett. Det är extra viktigt att avlägsna smuts och intrasslade hårstrån från kopplingen.

Ljudprocessorn är inte vattentät och får inte rengöras med vatten eller andra vätskor. Öppna batterifacket och låt ljudprocessorn torka om den utsätts för fukt eller blir blöt.

Skydda eller avlägsna alltid ljudprocessorn när du besöker en frisersalong och när du använder hårvårdsprodukter. Använd den speciella skyddshättan för distansen som följde med ljudprocessorn.

Ljudprocessorn är programmerad efter dina individuella behov och bör av denna anledning inte användas av andra personer.

Felsökning

Vanliga problem och möjliga lösningar		
Problem	Möjlig orsak	Lösning
Inget ljud	Batteriet är urladdat	Byt batteri
	Ljudprocessorn är i standby-läge (mute)	Tryck på fjärrkontroll eller Oticon ON App
Intermittent eller svagt ljud	Smuts i kopplingen eller ljudingången	Rengör hörapparaten
	Fukt	Öppna batterifacket och låt hörapparaten torka i sin ask
	Batteriet är urladdat	Byt batteri
Visslande ljud	Ljudprocessorn vidrör något	Kontrollera att hörapparaten är rätt ansluten och inte vidrör något
Parkopplingsproblem med Apple-enhet	Bluetooth-anslutning misslyckades	1) Koppla ifrån enheterna (Inställningar→Allmänt→Hjälpmedel→MFi-hörapparater→Enheter→Glöm bort denna enhet). 2) Stäng av och sätt på Bluetooth igen. 3) Öppna och stäng enheternas batterifack. 4) Parkoppla apparaterna igen (se avsnitt: "Parkoppla med iPhone").
	Endast en hörapparat är parkopplad	

Kontakta din klinik om problemen kvarstår efter ovanstående åtgärder.