





KIRURGISK PROCEDUR, ENSTEGSKIRURGI

1. Förbered operationsområdet med hörapparatsindikatorn
2. Incision och första hudreduktion
3. Incision i periostet
4. Borra med pilotborren
5. Borra med försänkaren
6. Vävnadsreduktion
7. Sätt in implantatet
8. Förslut och suturera
9. Sätt på läkhättan och lägg på förband

Kirurgiska komponenter och instrument för engångsbruk

			
M50287 Pilotborr, 3-4 mm	M51122 Försänkare, wide 4 mm	M51136 Wide implantat, 4 mm, med distans, 6 mm	M50821 Läkhätta

Instrument för återanvändning

		
M50428 Hörapparatsindikator	M50535 Ampullhållare	M50532 Distansadapter, maskin

BACK-UP, ENSTEGSKIRURGI

Säkerställ tillgång till back-up komponenter och instrument för insättning av implantat på 3 mm om bendjupet inte är tillräckligt för implantat på 4 mm.

Back-up komponenter och instrument

				
M51144 Försänkare, wide 3 mm	M51140 Wide implantat, 3 mm, med distans, 6 mm	M51137 Wide implantat, 4 mm, med distans, 9 mm	M50627 Dermatomblad 25 mm för användning med en dermatome	M50532 Mothållsnyckel





Den här guiden ersätter inte kirurgihandboken för Ponto-systemet. Kirurgihandboken innehåller mer information om den kirurgiska proceduren.

KIRURGISK PROCEDUR, STEG 1

1. Förbered operationsområdet med hörapparatsindikatorn
2. Gör ett snitt ner till periostet och använd manuell incisionsteknik
3. Incision i periostet
4. Borra med pilotborren
5. Borra med försänkaren
6. Sätt in implantatet
7. Skruva i täckskraven
8. Förslut och suturera

STEG 1

Kirurgiska komponenter och instrument för engångsbruk

			
M50287 Pilotborr, 3-4 mm	M51122 Försänkare, wide 4 mm	M51139 Wide implantat, 4 mm	M50098 Täckskruv

BACK-UP, STEG 1

Säkerställ tillgång till back-up komponenter och instrument för insättning av implantat på 3 mm om bendjupet inte är tillräckligt för implantat på 4 mm.

M51144 Försänkare, wide, 3 mm
M51144 Wide implantat, 3 mm

Instrument för återanvändning

					
M50428 Hörapparatsindikator	M50535 Ampullhållare	M50386 Instrument med fyrkantsfattning, maskin	M50532 Mothållsnyckel	M50534 Sextantsmejsel	M50437 Skruvmejsel med handtag

KIRURGISK PROCEDUR, STEG 2

1. Incision och inledande hudreduktion, med manuell incisionsteknik
2. Vävnadsreduktion
3. Avlägsna täckskraven
4. Montera distansen
5. Förslut och suturera
6. Sätt på läkhättan och lägg på förband

STEG 2

Kirurgiska komponenter och instrument för engångsbruk

	
M50349 Distans, 6 mm	M50821 Läkhätta

Instrument för återanvändning

					
M50535 Ampullhållare	M50534 Sextantsmejsel	M50437 Skruvmejsel med handtag	M50384 Maskinskruvmejsel, 35 mm	M50532 Mothållsnyckel	M50230 Momentnyckel

Den här guiden ersätter inte kirurgihandboken för Ponto-systemet. Kirurgihandboken innehåller mer information om den kirurgiska proceduren.